

MI Paste Plus®

Avant tute utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.

FR

DENTIFRICE CRÈME CONTENANT DU CALCIUM, DU PHOSPHATE ET DU FLUORURE BIODISPONIBLES

Pour utilisation par un dentiste ou un médecin, conformément aux indications recommandées.

DESCRIPTION

MI Paste Plus est un dentifrice crème à base d'eau contenant du fluorure de sodium et du RECALDENT™* (CPP-ACP: phosphopeptides caséines-phosphate de calcium amorphe). Le niveau de fluorure est de 0,20% en poids (900 ppm). Lorsque le CPP-ACP est appliqué en environnement buccal, il adhère au biofilm, à la plaque, aux bactéries, à l'hydroxyapatite et aux tissus mous pour distribuer du calcium, du phosphate et du fluorure biodisponibles.

IMPORTANT

La salive augmentera l'efficacité du CPP-ACP et le parfum contribuera à stimuler le débit salivaire. Plus longtemps le CPP-ACP et la salive seront maintenus en bouche, meilleurs seront les résultats.

INDICATIONS RECOMMANDÉES

À utiliser dans le cadre des procédures de nettoyage et de polissage faisant partie d'un traitement de prophylaxie administré par un professionnel. Accessoirement, le MI Paste Plus peut être utilisé pour le soulagement de la sensibilité dentaire suivant le détartrage, le curetage du ciment radiculaire et le blanchiment.

CONTRE-INDICATIONS

Le RECALDENT™* (CPP-ACP) est un dérivé de la caséine du lait. Ne pas utiliser ce produit chez des patients présentant une allergie à la protéine du lait ou à l'hydroxybenzoate.

MODE D'EMPLOI

Pour les enfants de 12 ans et moins, consulter un dentiste ou un médecin.

Adultes et enfants de plus de 12 ans:

Application en Clinique

I. Application à l'aide de gouttières sur mesure

- Avant utilisation, bien rincer les gouttières sur mesure sous l'eau courante.
- Appliquer une généreuse couche de MI Paste Plus dans la gouttière et la mettre en place sur les dents supérieures ou inférieures.
- Laisser la gouttière en bouche durant au moins 3 minutes.
- Retirer la gouttière.
- Demander au patient d'utiliser sa langue pour étendre les restes de MI Paste Plus partout dans sa bouche. Lui demander de garder le produit en bouche aussi longtemps que possible (1 ou 2 minutes additionnelles) en évitant de recracher et en retardant la déglutition. Plus longtemps le MI Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, meilleurs seront les résultats.
- Demander au patient de cracher et, si possible, d'éviter de se rincer la bouche. La quantité restante de MI Paste Plus sur la surface des dents se dissipera progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes suivant l'application.
- Les résidus de MI Paste Plus sur les gouttières doivent être rincés ou brossés sous l'eau courante immédiatement suivant l'utilisation.

II. Application sans gouttières

- Au besoin, retirer l'excédent de salive sur les surfaces dentaires à l'aide d'un rouleau ou d'une boulette de coton. Il n'est toutefois PAS nécessaire de sécher les dents à l'air comprimé.
- Appliquer le MI Paste Plus sur les surfaces dentaires en utilisant un tampon, un doigt ganté ou, dans les zones difficiles d'accès, une brosse interproximale.
- Demander ensuite au patient d'utiliser sa langue pour étendre le MI Paste Plus partout dans sa bouche et de garder le produit en bouche aussi longtemps que possible (au moins 3 minutes) en évitant de recracher et en retardant la déglutition.
- Demander au patient de cracher et d'éviter de se rincer la bouche. La quantité restante de MI Paste Plus sur la surface des dents se dissipera progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes suivant l'application.

Application à domicile:

II. Application de jour suivant le brossage des dents, selon les recommandations d'un dentiste ou d'un médecin:

- Appliquer une quantité suffisante de MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimale de la taille d'un pois doit être appliquée sur chacune des arcades. Étendre le produit sur les surfaces dentaires à propre et sec ou d'un coton-tige. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents), utiliser une brosse interproximale ou de la soie dentaire enduite de MI Paste Plus.
- Utiliser ensuite la langue pour étendre les restes de MI Paste Plus partout dans la bouche. Maintenir en bouche aussi longtemps que possible (au moins 3 minutes) en évitant de cracher et en retardant la déglutition. Plus longtemps le MI Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, meilleurs seront les résultats.
- Recracher soigneusement et, si possible, éviter de rincer. La quantité restante de MI Paste Plus sur la surface des dents se dissipera progressivement. Ne pas manger, boire ni rincer la bouche dans les 30 minutes suivant l'application.

III. Application de nuit suivant le brossage des dents, selon les recommandations d'un dentiste ou d'un dentiste ou d'un médecin:

Note:

- L'application de nuit est particulièrement recommandée pour les patients adultes présentant un risque élevé de carie.
- Appliquer une quantité suffisante de MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimale de la taille d'un pois doit être appliquée sur chacune des arcades. Étendre le produit sur les surfaces dentaires à l'aide d'un doigt propre et sec ou d'un coton-tige. Pour les zones difficiles d'accès (entre les dents), utiliser une brosse interproximale ou de la soie dentaire enduite de MI Paste Plus.
- Utiliser ensuite la langue pour étendre les restes de MI Paste Plus partout dans la bouche. Maintenir en bouche aussi longtemps que possible (au moins 3 minutes) en évitant de cracher et en retardant la déglutition.
- Recracher soigneusement et, si possible, éviter de rincer. La quantité restante de MI Paste Plus sur la surface des dents se dissipera progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes suivant l'application.

PARFUMS

Fraise (S), Melon (M), Vanille (V), Menthe (I), et Fruits (T)

ENTREPOSAGE

Pour un rendement optimal, entreposer dans un endroit sec et frais, à l'abri des rayons du soleil (8-25°C) (46,4-77,0°F).

CONDITIONNEMENT

Tube contenant 40g (35mL)

NOTE

Le MI Paste Plus avec sa formule unique de CPP-ACP a été développé à l'École des sciences dentaires de l'Université de Melbourne, à Victoria en Australie. "RECALDENT™" est une marque de commerce déposée de RECALDENT Pty Itée. La technologie de CPP-ACP relève de brevets d'invention en cours d'homologation en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, au Canada et aux États-Unis.

MISE EN GARDE

- Toujours remplacer le capuchon après utilisation et et nettoyer les résidus de pâte et les traces d'humidité autour du col du tube ainsi qu'à l'intérieur du capuchon.
- Garder hors de la portée des enfants de moins de 6 ans.
- En cas d'ingestion accidentelle d'une quantité supérieure à celle utilisée pour un brossage, consulter un médecin ou communiquer avec un centre antipoison sans tarder.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau e consulter un médecin.
- En cas de déversement sur les vêtements, nettoyer à l'eau.
- MISE EN GARDE: Le RECALDENT™ (CPP-ACP) est un dérivé de la caséine du lait. Ne pas utiliser ce produit chez des patients présentant une allergie à la protéine du lait ou à l'hydroxybenzoate.
- En cas de réaction allergique, cesser l'utilisation, rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

Dernière révision : 04/2018

MI Paste Plus®

Leia atentamente estas instruções antes de usar.

PT

CREME DENTAL COM FOSFATO DE CALCIO E FLUOR BIODISPONIVEL

Para uso sob a supervisão de médicos ou dentistas utilizando as indicações recomendadas.

DESCRIPCIÓN

MI Paste Plus é uma creme dental com base água contendo fluoreto de sódio e RECALDENT™* (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate). A quantidade de fluoreto é de 0,20% w/w, (900ppm). Quando CPP-ACP é aplicada na cavidade oral, se liga ao biofilme, placa, bactérias, hidroxipatita e tecidos moles localmente liberando cálcio, fóstato e fluoreto biodisponível.

IMPORTANTE

Saliva aumenta o efeito do CPP-ACP eo sabor ajuda a estimular o fluxo do mesmo. Quanto mais tempo você manter o CPP-ACP e saliva na boca, o resultado será mais eficaz.

RECOMENDAÇÕES

Para utilização em processos de limpeza e de polimento, como parte de tratamentos dentários realizados por profissionais em profilaxia. MI Paste Plus também pode ser usado em dentes sensíveis, pós-scaling, alisamento radicular e branqueamento.

CONTRA-INDICAÇÕES

RECALDENT™ (CPP-ACP) é um derivado do caseína do leite. Não utilizar em pacientes com alergias ou sensibilidade à proteína do leite ou conservantes com benzoato.

INSTRUÇÕES

Consulte o seu dentista ou médico para uso em crianças menores de 12 anos.

Adultos e crianças acima de 12 anos:

Aplicação em clínica ou consultório:

- Aplicação com "moldeira" descartável**
- Antes de aplicar lave a moldeira cuidadosamente com água em abundância.
- Coloque o MI Paste Plus na moldeira de forma uniforme e abundante e posicione a moldeira sobre dentes superiores ou inferiores.
- Deixe a moldeira fixa na boca do paciente por pelo menos três minutos.
- Após este tempo, remova a moldeira.
- Instrua o paciente espalhar a MI Paste Plus remanescente em sua boca com a língua. O paciente deve manter o MI Paste Plus em sua boca (1-2 minutos ou mais) sem cuspir ou engolir o produto. Quanto mais tempo o paciente manter o MI Paste Plus em contato com a boca e saliva, mais eficaz será o resultado.
- Peça ao paciente para cuspir e o restante pode deixar na boca sem enxaguar. O restante de MI Paste Plus na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após tratamento.
- Descartar a moldeira, após o uso.

II. Aplicação sem "moldeira" descartável

- Se necessário, remover o excesso de saliva da superfície do dente com um rolo de algodão ou com um cotonete. NÃO PRECISA secar os dentes com ar comprimido.
- Aplicar MI Paste Plus em abundância na superfície dos dentes com um cotonete ou dedo com luva. Nas áreas de difícil acesso interproximal, use escova de dente inter-proximal.
- Pedir que o paciente use a sua língua para distribuir o MI Paste Plus ao redor da boca e dos dentes. Deixe o MI Paste Plus funcionar por no mínimo de 3 minutos. Não permita ao paciente cuspir, tossir ou engolir durante este tempo.
- Pedir que o paciente para cuspir qualquer restante que possa ter e deixar a boca sem enxaguar. O restante de MI Paste Plus na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após o tratamento.

Aplicação em Casa:

III. Aplicação de dia, depois de escovar os dentes, como recomendado pelo seu dentista ou médico:

- Aplicar uma quantidade generosa de MI Paste Plus em os dentes superiores e inferiores. Uma porção de uma ervilha deve ser suficiente para cada arcada dentária. MI Paste Plus deve ser aplicado com a ponta de um dedo limpo e seco ou um cotonete. Em áreas de difícil acesso (entre os dentes) use uma escova de dentes para uso em áreas interproximal ou com fio dental coberto com MI Paste Plus.
- Use sua língua para distribuir MI Paste Plus por toda a boca e os dentes. Deixe o MI Paste Plus funcionar por no mínimo de 3 minutos. Não permita ao paciente cuspir, tossir ou engolir durante este tempo.
- Pedir que o paciente para cuspir qualquer restante que possa ter e deixar a boca sem enxaguar. O restante de MI Paste Plus na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após o tratamento.

IV. Aplicação da noite, depois de escovar os dentes, como recomendado pelo seu dentista ou médico:

Nota:

O uso durante a noite é recomendado em pacientes com alto risco de cárie dentária.

- Aplicar uma quantidade generosa de MI Paste Plus em os dentes superiores e inferiores. Uma porção de uma ervilha deve ser suficiente para cada arcada dentária. MI Paste Plus deve ser aplicado com a ponta de um dedo limpo e seco ou um cotonete. Em áreas de difícil acesso (entre os dentes) use uma escova de dentes para uso em áreas interproximal ou com fio dental coberto com MI Paste Plus.
- Use sua língua para distribuir MI Paste Plus por toda a boca e os dentes. Deixe o MI Paste Plus funcionar por no mínimo de 3 minutos. Não permita ao paciente cuspir, tossir ou engolir durante este tempo.
- Pedir que o paciente para cuspir qualquer restante que possa ter e deixar a boca sem enxaguar. O restante de MI Paste Plus na boca será dissipado gradualmente. O paciente não deve comer ou beber nada dentro de 30 minutos após o tratamento.

SABORES

Morango (S), Melão (M), Baunilha (V), Menta (I), Tutti-Frutti (T)

ARMAZENAMENTO

Para um melhor desempenho, recomenda-se o produto ser armazenado em uma área de baixa umidade, longe do sol e da luz e entre 8-25°C (46,4-77,0°F).

CONTAINER

Tubo de 40g (35mL)

NOTA

MI Paste Plus com sua fórmula exclusiva CPP-ACP foi desenvolvido na Faculdade de Odontologia na The School of Dental Science, de la Universidad de Melbourne, Victoria, Australia. "RECALDENT™" é uma marca comercial da Recaldent Pty Ltd. Da tecnologia CPP-ACP tem patentes pendentes na Austrália, Nova Zelândia, Europa, Canadá e EUA.

CUIDADO

- Retire o excesso de pasta ou de umidade no interior da tampa e tubo, e sempre feche o produto com a tampa após o uso.
- Manter fora do alcance das crianças. O uso de MI Paste Plus não é recomendado para crianças menores de 6 anos.
- Se você acidentalmente consumir mais do que o recomendado para o produto, consulte o seu médico imediatamente ou em contato com o centro de controle de intoxicações local.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e procurar um médico.
- Se derramado na roupa, lave com água.
- CUIDADO: RECALDENT™ (CPP-ACP) é um derivado da caseína do leite. Não utilizar em pacientes com alergias ou sensibilidade à proteína do leite ou conservantes benzoato.
- Se você tiver um reação alérgica descontinuar uso imediatamente, lave a boca com água, não engolir e cuspir o conteúdo imediatamente e procure um médico ou contacte o seu médico.

Última revisão: 04/2018