



TOP NEWS & HIGHLIGHTS

**GC AUSTRIA
SWISS OFFICE
LABOR**

Angebote gültig bis 30. Juni 2023



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Initial™ IQ ONE SQIN

Malbares Farb- und
Micro-Layering-Keramiksysteem**90% aller Restaurationen werden
in einer Farbschlüsselfarbe bestellt ...**

Seit einiger Zeit ist es möglich, Seitenzahnrestaurationen aus einem einzigen keramischen Material herzustellen, z. B. aus Lithium-Disilikat oder Zirkonoxid. Diese Werkstoffe können ohne arbeitsaufwendige Schichttechniken ausreichend ästhetisch sein. Diese Art der monolithischen Restaurationen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Mit GC Initial IQ ONE SQIN – dem malbaren Farb- und MicroLayering-Keramik-system – lassen sich auf einfache Weise ästhetisch ansprechende Restaurationen für den Frontzahnbereich herstellen. Das System basiert auf der GC Initial „IQ-Philosophie“ und besteht aus verschiedenen perfekt aufeinander abgestimmten Keramikmaterialien. Wer sie gezielt kombiniert, kann monolithische und vestibulär reduzierte Verblendgerüste effizient sowie ästhetisch überzeugend vollenden.




3D

**ONE SQIN-Technik –
für alle Restaurationen aus Zirkonoxid
und Lithium-Disilikat**

- Erarbeiten der Form sowie feinsten Texturdetails im nassen Zustand – keine Veränderung durch den Brennvorgang.
- Selbstglasierende Eigenschaften – für ein schönes, glänzendes Finish nach nur einem Brand.
- Optimal eingestellte Fluoreszenz – für einen natürlichen Look in jedem Licht.
- Maximale Ästhetik in einer minimalen Schicht.

**Wie funktioniert es? Sie haben die Wahl.**


Micro-Layering-Technik (vestibulär minimal reduzierte Verblendgerüste)

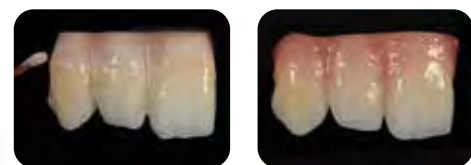

© ZTM Stefan M. Roosen

What you paint is what you get!


Maltechnik (monolithische Restaurationen)

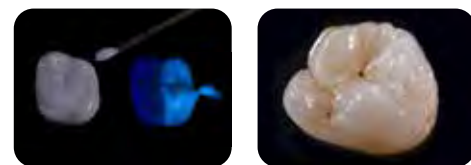

© ZTM Michael Brüsch



Ausgangssituation

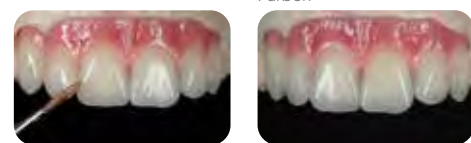

Charakterisierung mit V-Farben

Auftragen der verschiedenen Initial Lustre Pastes NF Gum Farben

Endergebnis

Initial™ IQ Lustre Pastes NF GUM

Universell einsetzbare dreidimensionale Keramikfarben für die Zahnfleisch-Reproduktion

initial™
IQ ONE SQIN

NEU

**RISK-FREE
EINFÜHRUNGS-AKTION**1118,90 CHF 1552,30 CHF
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006991

Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g
1 x SPS Glaze Liquid, 25ml
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g;
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g;
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
1 x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Plastic Cover
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

**PREIS
VORTEIL**

3 + 1

AB 73,40 CHF
Preis pro Packung

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GET THE APP

Holen Sie sich noch heute unser GC Get Connected Smile Program als App auf Ihr Handy und bleiben Sie up-to-date!

**INITIAL IQ SQIN
SHADES SET**

635,- CHF


Art.-Nr. 10006990

Initial IQ SQIN SHADES SET

5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
1 x IQ SQIN Technical Manual

Weitere Verpackungseinheit

Art.-Nr. 10003186 **Initial IQ ONE Body LP NF GUM Shades Set**
5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4g); 4 x Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3g); 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8ml); 1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP NF Brush B; 1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP NF, Color Chart; 1 x IQ LP NF; Technical Manual; 441,60 CHF

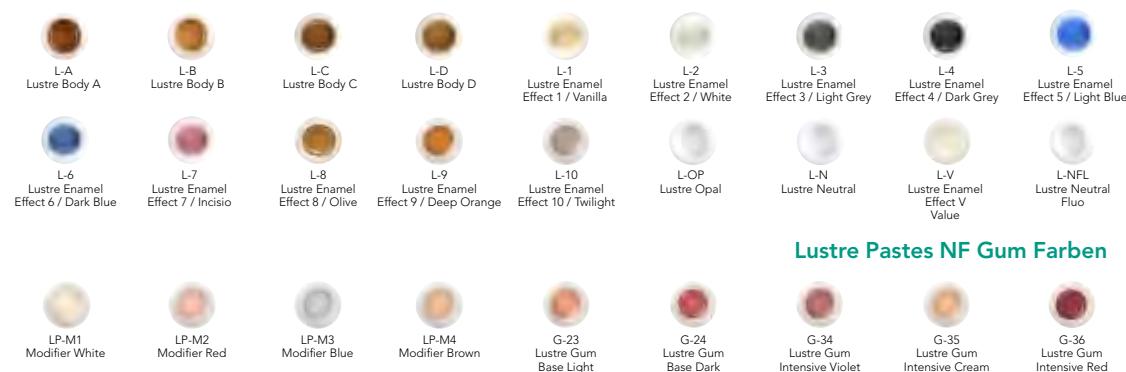**Lustre Pastes ONE V-Farben****Lustre Pastes NF Gum Farben****PREISVORTEIL**INITIAL IQ
LUSTRE PASTES
ONE

10 %

804,80 CHF

~~894,20 CHF~~
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10007017

**Initial IQ Lustre Pastes ONE –
V-Shades Set**

2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g; 4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g; 10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml; 1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8ml; 1 x IQ LP ONE Mixing dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Colour Chart



Initial™ LiSi

Verblendkeramik für Lithium-Disilikat
Ein Farbsystem – ein Schichtungssystem



Hier geht's zu
den Videos

AKTION

JETZT

AB 894,10 CHF
Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003184 Initial LiSi Basic Set 808,40 CHF
Art.-Nr. 10003185 Initial LiSi Advanced Set 979,80 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

- Hervorragende natürliche Ästhetik
- Niedrige Brenntemperatur und exakt aufeinander abgestimmter WAK-Wert mit sehr hoher Brennstabilität
- Umfassendes Farb- und Schichtungssystem – Initial-Konzept
- Einfache Handhabung und effiziente Verarbeitung
- Schnelle, ästhetische und wirtschaftliche Ergebnisse

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Umsteigerpaket an!

GC LiSi PressVest

Das Geheimnis von LiSi PressVest:
Geringere Bildung der Reaktionsschicht sowie einfachere Entfernung

Einbetten und Pressen

Durch die Verwendung eines Trennmittels im Einbettmassenpulver und des LiSi PressVest SR Liquids wird eine „Trennschicht“ erzeugt, so dass eine leicht mit Glanzstrahlperlen abzu-strahlende Reaktionsschicht gebildet wird.

Art.-Nr. 10003661
LiSi PressVest Powder
60 x 100g, EU/US; 232,50 CHF

Art.-Nr. 10003662
LiSi PressVest SR Liquid
900 ml, EU/US; 46,90 CHF

Zubehör:
Art.-Nr. 10003663
LiSi PressVest SR Liquid
100 ml; 71,00 CHF

Einbetten leicht gemacht!

- Hohe Fließfähigkeit
- Flexible Verarbeitungszeit
- Zeitersparnis
- Mehr Platz beim Fixieren auf dem Sockelformer

Initial™ LiSi Press

Die innovative Press-Keramik kombiniert beeindruckende Stärke mit hervorragender Ästhetik



PREISVORTEIL

4 + 1 103,40 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 5 Initial LiSi Press Ingots Packungen (à 5 x 3 g) zum Preis von 4!

Farbmix möglich. Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Hier geht's zu
den Videos

Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen GC-Fachberater über die einzigartige revolutionäre Initial LiSi Press Keramik beraten und holen Sie sich Ihre speziellen Angebote bei Ihrem GC-Fachberater ab.


Das werden Sie an Initial LiSi Press lieben:

- Sehr hohe Biegefestigkeit
- Hervorragende Ästhetik
- Deutliche Zeitersparnis
- Nahezu keine Reaktionsschicht beim Ausbetten
- Schont die Antagonisten und ist abrasionsstabil




Color-Charts


High Translucency (HT)

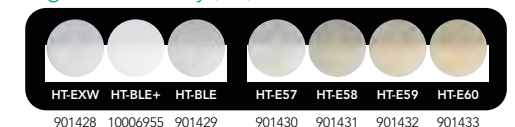

Medium Translucency (MT)

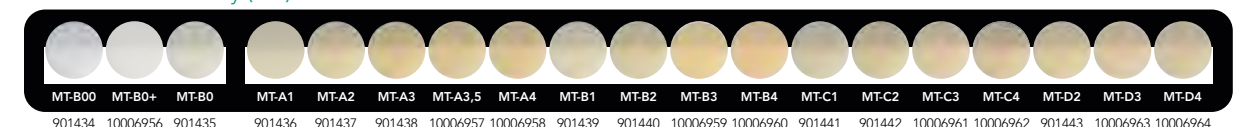

Low Translucency (LT)

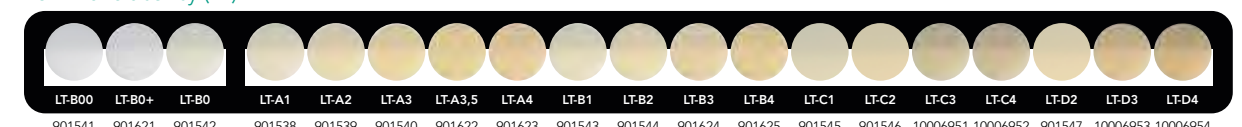

Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Diese Tabelle ist nur als Orientierungshilfe gedacht.


Medium Opacity (MO)



Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Kalibrierset an!

InitialTM Spectrum Stains

Ästhetik durch Farbe mit InitialTM von GC –
2D- und 3D-Lösungen für malbare Keramik

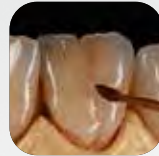

Charakterisierung
außen



Lassen Sie sich durch Ihren persönlichen
GC-Fachberater über die **einzigartige
revolutionäre InitialTM Spectrum Stains** beraten und
sichern Sie sich Ihre speziellen Angebote!

INITIAL SPECTRUM STAIN SET

1016,50 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003190 **Initial Spectrum Stain Set**

Alle Farben sind auch einzeln als
Nachfüllpackung erhältlich.

Ein breites Anwendungsspektrum

- Malfarben zur Charakterisierung
- Individualisierung der Schichtkeramik
- Breiter WAK-Bereich
- Kompatibel mit allen Arten
der Dentalkeramik
- 1 Set für alle Initial Systeme
- 20 Pulverfarben

SPS-17
SPS-18
SPS-19
SPS-20



Hier geht es
zum Technischen
Handbuch:



Hier gehts zur
Painting Solution
Broschüre:



OPTIGLAZE[®] color

Lichthärtende Oberflächenversiegelung zur Individualisierung
indirekter Composite-Restaurationen

Zur Charakterisierung aller
Composites und PMMA-Kunststoffe

- Direkte & indirekte
Composite-Restaurationen
- Prothesen und Konfektionszähne
- Provisorien
- Gefräste Restaurationen
mit Composite-Blocken
- Gefräste PMMA-Ronden und -Blöcke



PREISVORTEIL

3 + 1 AB 68,30 CHF

Preis pro Packung

Erhalte 4 x Optiglaze Color zum Preis von 3!

Aktion gültig für alle Einzelpackungen und nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10001150 **OPTIGLAZE color Set**; 828,80 CHF
Inhalt: 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus, 1 x C plus,
1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x pink
orange, 1 x red brown, 1 x olive, 1 x grey, 1 x blue,
1 x lavender, 1 x pink, 1 x red (pro Farbe 2,6 ml);
1 x OPTIGLAZE color clear, 1 x clear HV, (pro Farbe 5 ml);
5 x disposable pallet, 1 x protective cover, 1 x brush
round 5 Stk. (N°1B), 1 x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2 x brush
holder (1 each ivory, white), 1 x OPTIGLAZE color IFU,
1 x OPTIGLAZE color Technique Card

Auch als Einzelpackungen erhältlich:
OPTIGLAZE[®] color Nachfüllpackung
Art.-Nr. 10001151 **OPTIGLAZE color, A plus**
Art.-Nr. 10001152 **OPTIGLAZE color, B plus**
Art.-Nr. 10001153 **OPTIGLAZE color, C plus**
Art.-Nr. 10001154 **OPTIGLAZE color, White**
Art.-Nr. 10001155 **OPTIGLAZE color, Ivory White**
Art.-Nr. 10001156 **OPTIGLAZE color, Yellow**
Art.-Nr. 10001157 **OPTIGLAZE color, Orange**
Art.-Nr. 10001158 **OPTIGLAZE color, Pink Orange**
Art.-Nr. 10001159 **OPTIGLAZE color, Red Brown**
Art.-Nr. 10001160 **OPTIGLAZE color, Olive**
Art.-Nr. 10001161 **OPTIGLAZE color, Grey**
Art.-Nr. 10001162 **OPTIGLAZE color, Blue**
Art.-Nr. 10001163 **OPTIGLAZE color, Lavender**
Art.-Nr. 10001164 **OPTIGLAZE color, Pink**
Art.-Nr. 10001165 **OPTIGLAZE color, Red**
Preis pro Einzelpackung 68,30 CHF à 2,6 ml

Art.-Nr. 10001166 **OPTIGLAZE color, Clear**
Art.-Nr. 10001167 **OPTIGLAZE color, Clear HV**
Preis pro Einzelpackung 68,30 CHF à 5 ml

InitialTM Zr-FS Multiindikatives Vollkeramik-System

AKTION

JETZT

AB 2095,30 CHF

Alle Farben sind auch einzeln
als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.



Initial Zr-FS Basic + Advanced Set

Art.-Nr. 10003119 **Basic Set**; 2095,30 CHF
Art.-Nr. 10003120 **Advanced Set**; 2095,30 CHF

Art.-Nr. 10003168 **Bleach Set**; 387,20 CHF
Art.-Nr. 10003172 **Gum Shades Set**; 350,30 CHF

Fordern Sie jetzt
Ihr persönliches
Umsteigerpaket an!



InitialTM MC Metall-Keramik

AKTION

JETZT

AB 2250,60 CHF

Initial MC Basic + Basic Plus + Advanced Set

Art.-Nr. 10003150 **Basic Set mit Pulver-Opaquer**; 1839,90 CHF
Art.-Nr. 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; 1664,40 CHF
Art.-Nr. 10003151 **Basic Plus Set mit Pulver-Opaquer**; 1830,40 CHF
Art.-Nr. 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; 1712,00 CHF
Art.-Nr. 10003113 **Advanced Set**; 1124,80 CHF

Art.-Nr. 10003170 **Gum Shade Set (Pulver-Opaquer)**; 308,60 CHF
Art.-Nr. 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; 274,80 CHF
Art.-Nr. 10003165 **Bleach Set**; 378,70 CHF
Art.-Nr. 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaque Set**; 634,60 CHF

Alle Farben sind auch einzeln als Nachfüllpackung erhältlich.
Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

GC FUJIROCK[®] EP

Eine bewährte Produktlinie
in verschiedenen Versionen für alle
Ansprüche und Anwendungen



20 %
PREIS
VORTEIL

Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.
Angeführte Preise gelten pro
Packung.

FUJIROCK EP, Classic Line

85,40 CHF für 12 kg anstatt 106,70 CHF
Art.-Nr. 10003220 **Golden Brown**

44,40 CHF für 5 kg anstatt 55,50 CHF
Art.-Nr. 10003218 **Golden Brown**

48,90 CHF für 5 kg anstatt 61,10 CHF
Art.-Nr. 10003219 **Topaz Beige**

FUJIROCK EP, Premium Line

87,20 CHF für 11 kg anstatt 108,90 CHF
Art.-Nr. 10003243 **Pastel Yellow**

40,10 CHF für 4 kg anstatt 50,10 CHF
Art.-Nr. 10003242 **Pastel Yellow**
Art.-Nr. 10003244 **Polar White**
Art.-Nr. 10003245 **Inca Brown**
Art.-Nr. 10003246 **Titanium Grey**



GC FUJIROCK EP Premium

Die FUJIROCK EP Premium Line wurde für eine Vielzahl von
High-End-Techniken wie zum Beispiel Implantatsuprakonstruktionen
und Vollkeramik Indikationen entwickelt.

Ein für anspruchsvolle Fälle aus Fujirock EP Premium Line gefertigtes
Gips/Meistermodell erfüllt alle Anforderungen des Workflows und
bewerkstelligt eine perfekte Basis für die Modellation, Zahnfleisch-
maske, digitales Scannen, Auf- und Anpassen Ihrer zahntechnischen
Arbeit sowie das Individualisieren und Polieren.

GC FUJIROCK EP Classic

Einer der weltweit beliebtesten Typ 4
Stumpfgipse mit höchster Qualität



Fujirock EP Classic, der „Klassiker“ eignet sich ideal für alle Arten von
prothetischen Arbeiten. Er vereint höchste Präzision, hervorragende
Kanten- und Druckfestigkeit. Fujirock EP Classic ist dünnflüssig und
dennoch thixotrop und erlaubt somit beste Handlungseigenschaften
und einfaches, luftblasenfreies Ausgießen. Ein wirklich perfekter
Allround-Gips.

Fordern Sie ein Demo-Set

zum Testen an!

GRADIA® PLUS

Modulares Composite-System
für indirekte Restaurationen

Ein neuer Standard für natürliche Mischungen
und die Reproduktion von Farben

- Innovation trifft Indikation
- Keramikpolymer-Technologie
- Rot & Weiß-Ästhetik
- Indikationsspezifische Konsistenz
- Effizient, modular und ökonomisch
- Lichthärtung: LED-Technologie

35 % PREISVORTEIL

A

1679,00 CHF ~~2583,10 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set A
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1174,10 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 741,50 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 667,40 CHF

35 % PREISVORTEIL

B

2369,80 CHF ~~3645,80 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set B
Art.-Nr. 10003559 **Layer Set** 1174,10 CHF
Art.-Nr. 10003652 **Layer Pro Set** 1062,80 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 741,50 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 667,40 CHF

Jetzt mit neuer
Küvette für die
Injectionstechnik.




Kontaktieren Sie
Ihren persönlichen
GC Fachberater für
weitere Informationen!



PREIS
VORTEIL

4 + 1

Erhalte 5 Pkg. GRADIA PLUS Nachfüllpackungen (Refill) zum Preis von 4!
Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

35 % PREISVORTEIL

C

1341,60 CHF ~~2064,- CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set C
Art.-Nr. 10003562 **One Body Set** 655,10 CHF
Art.-Nr. 10003560 **Paint Set** 741,50 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 667,40 CHF

35 % PREISVORTEIL

D

931,80 CHF ~~1433,60 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set D
Art.-Nr. 10003561 **GUM Set** 766,20 CHF
Art.-Nr. 10003563 **Accessory Set** 667,40 CHF

Die Farben sind auch als Einzelnachfüllpackungen erhältlich.
Aktionen gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Labolight DUO

Mit der Entwicklung der Labolight DUO bietet GC
jetzt ein multifunktionelles Lichthärtegerät für
den Techniker, das zwei Härtingsmodi kombiniert.

Vorhärtung – Step Modus | Endhärtung – Vollmodus

Mit der neuesten LED-Technologie
Das Labolight DUO ist mit einer zwei-
welligen LED-Technologie ausgestattet,
die jedes GC Composite sicher und
dauerhaft härtet.
Es verfügt über einen Wellenlängenbereich
von 380 nm – 510 nm mit maximalen
Spektralbereichen von:
• 465 nm - 485 nm (12 blaue LEDs)
• 390 nm - 400 nm (3 lilafarbene LEDs)
Diese Technologie gewährleistet
einerseits eine optimale Härtung von
allen lichtgehärteten Dentalwerkstoffen
und verkürzt andererseits die Licht-
härtungszyklen durch die höhere Leistung.



Automatisches Drehsystem
Die Reflektionsplatte streut das Licht
effektiv und belichtet Ihre Werkstoffe
von allen Seiten. Auf der Halterung der
Härtungslampe werden die Objekte
während sämtlicher Lichthärtungszyklen
sicher positioniert.

SONDERPREIS

DUO-
AKTION

AB 2520,- CHF

Art.-Nr. 10001246 **Labolight DUO**
Normalpreis 3434,90 CHF
Aktion gültig nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.



Kompaktes, ergonomisches Design
Die Labolight DUO von GC kann nicht
nur den Großteil Ihrer Arbeiten
fertigstellen. Es sieht dabei auch noch
gut aus. Das preisgekrönte, schlanke,
moderne Design mit den glatten
Oberflächen lässt sich ganz einfach
reinigen und in Ihrem Labor platzsparend
aufstellen. Das Design ist zudem auch
noch anwenderfreundlich: Die
Benutzeroberfläche ist sehr einfach und
intuitiv. Die inneren Komponenten sind
dank der breiten Öffnung leicht
zugänglich.



Zwischenhärtungs-Modus




Endhärtungs-Modus

Aadva™ Lab Scanner 2

Aadva-Lab-Scanner
mit intuitivem Scanflow

Einfach. Präzise. Produktiv.

Einführung einfacher und einzigartiger Workflows mit dem Aadva Lab Scan 2 von GC. Die Kombination aus einzigartigen Scan-Funktionen und robuster Scan-Hardware erleichtert Ihre Arbeitsabläufe.

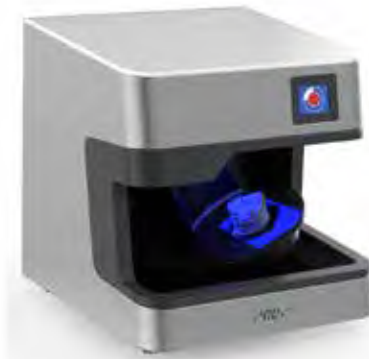

Hier geht's zu den Videos

Vollfarbe

Texturscannen
Hoher Kontrast
und hohe Auflösung



Geschwindigkeit und Qualität

Automatisierte Z-Achse
und Touchscreen



Full HD 5 MP Kamera

Streifenlicht-Triangulation,
Blaulicht-LED



Konstante Genauigkeit


4-µm-Genauigkeit nach
ISO 12836



Volle Exocad-Integration

und offener STL-Export

exocad

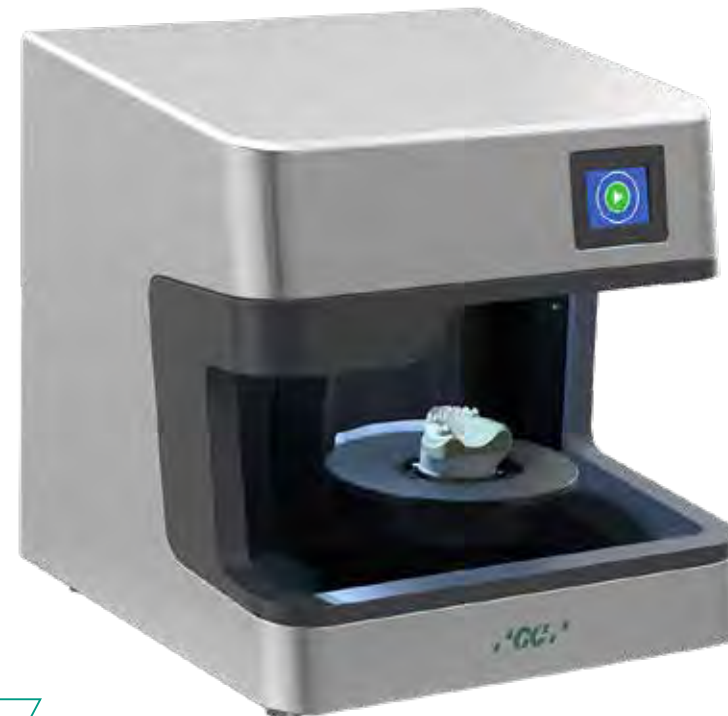


Sie haben Interesse
unseren ALS 2 zu testen?

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche
Teststellung unter info.switzerland@gc.dental
oder Ihren persönlichen GC Fachberater!

Hybrid-Scan

Dieser ermöglicht, die gesamte Modellvorbereitung zu überspringen. Scannen Sie einfach den Abdruck sowie das Gipsmodell ohne Sägeschnitt und Stumpfpräparation und die Software kombiniert beides miteinander, um Ihnen ein detailliertes, digitales Arbeitsmodell zu liefern.

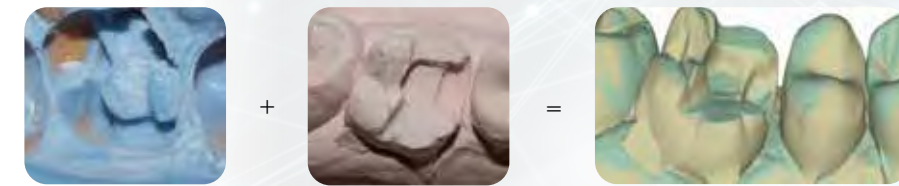

Hybrid-Scan

Smart-Scan

Diese Funktion erstellt eine genaue Scanstrategie, um die Notwendigkeit von Neuscans zu reduzieren oder sogar auszuschließen.



Smart-Scan

Okklusions-Scan

Dank dieser Funktion erübrigt sich die Notwendigkeit eines kompletten Biss-Scans, indem einfach eine Reihe von Referenzpunkten auf den Gipsmodellen gescannt werden.



3-Punkt Okklusions-Scan

Aadva ALS 2

AB 9.700,- CHF

18.480,- CHF

Gültig für ALS 2 so lange Vorrat reicht.



Hier geht's zu den Videos

Aadva™

TECHNISCHE DATEN

Messfeld (X × Y × Z) mm

80 × 60 × 85

5-MP-Kamera

4-µm-Genauigkeit

nach ISO 12836

Sensortechnologie

Streifenlicht-Triangulation

Blaulicht-LED

Monochromer Textur-Scan

Farbtextur-Scan

Touchscreen

Vollautomatische Z-Achse

Artikulator-Scan

Multi-die-Scan

TripleTray-Scan

Abdruck-Scan

Empfohlene Computerspezifikationen ALS 2 und Aadva Scan:

Windows 10 64-Bit

i7 mit 6 × 4,7 GHz

32 GB RAM

USB-3.0-Anschluss

100–250 GB SSD

Grafikkarte mit 6 GB RAM

ALS 2 Scanflow vs. konventioneller Scanflow

Durch die Reduzierung der Anzahl der Scans erhöht sich Ihre Produktivität.

Aadva Scanflow

Abdruck-Scan

Modell-Scan

Antagonisten-Scan

Konventioneller Scanflow

Modell-Scan

Stumpf-Scan

Antagonisten-Scan

Biss-Scan

TEMPSMART® DC

Schnell und effizient zur provisorischen Restauration

Dualhärtendes Composite für provisorische Kronen und Brücken

Provisorische Restaurationen spielen in der restaurativen Zahnheilkunde eine wichtige Rolle. Mit TEMPSMART DC hat GC eine neue Technologie für ein smartes Provisorienmaterial eingeführt. TEMPSMART DC ist das erste frei von Weichmachern und dualhärtende Provisorienmaterial, das entwickelt wurde, um Ihnen die tägliche Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten.

SICHERE HALTBARKEIT

- Hohe Bruchstabilität
- Ideal für Seitenzahnbrücken

INTELLIGENTES KONZEPT

- Kurze Verarbeitungszeit durch Lichthärtung

ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE

- Fluoreszenz und langanhaltender Glanz

BEQUEME VERARBEITUNG

- Nicht-klebrig
- Hochglanz in wenigen Schritten

PREISVORTEIL

3 + 1 122,30 CHF
Preis pro Packung

TEMPSMART DC 48 ml Kartusche

Erhalte 4 Packungen TEMPSMART DC 48 ml Kartusche zum Preis von 3!

Aktion gültig für alle Farben innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Zubehör: Art.-Nr. 10003754
Mischkanülen II Größe SSS
(60 Stk.) 71,50 CHF

Art.-Nr. 10003335
GC Automix Tip Regular
(10 Stk.) 13,20 CHF

48 ml Kartusche, 16 Mischkanülen; 122,30 CHF

Art.-Nr.	10001463	10001464	10001465	10001466
Farbe	A1	A2	A3	A3,5
Art.-Nr.	10001467	10001468		
Farbe	B1	BW		

10 ml Kartusche, 10 Mischkanülen; 72,90 CHF

Art.-Nr.	10001469	10001470	10001471	10001472
Farbe	A1	A2	A3	B3

FREEGENOL

Zement für temporäre Befestigungen

FREEGENOL ist ein eugenolfreier Befestigungszement für die temporäre Zementierung indirekter Restaurationen. Er ist vollständig kompatibel mit Acrylkunststoffmaterialien und kann gefahrlos mit diesen verwendet werden. FREEGENOL ist biokompatibel mit Zahnstruktur und Gewebe, einfach zu verarbeiten und hat nach der Anmischung eine glatte, cremige Konsistenz.

PREISVORTEIL

3 + 1

64,50 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 4 x FREEGENOL zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10000009
FREEGENOL TEMPORARY 1-1 Pack
Inhalt: 55 g Basis; 20 g Akzelerator; 2,5 ml Reiniger; Anmischblock



- Eugenolfrei, keine Beeinträchtigung der Polymerisation von Kunststoffmaterialien
- Allzweck-Zement für Provisorien
- Einstellbare Konsistenz und Polymerisationszeit
- Einfaches Entfernen von Kronen und Stümpfen
- Spezialreiniger enthalten
- Temporäre Zementierung indirekter Restaurationen. Die Abbindezeit kann nach Bedarf angepasst werden:
 - mehr Basis, schnelleres Abbinden
 - weniger Basis, langsames Abbinden



GC Fachberater

Für Ihre persönliche Beratung stehen Ihnen unsere Produktspezialisten gerne zur Verfügung.




RUI BARREIROS
Zahntechniker;
Produktspezialist Praxis/Labor/Digital
Zürich, Ostschweiz und Tessin
M: 079 889 39 74
rui.barreiros@gc.dental

Postleitzahlen: 6, 8

CLAUDIA HELDT
Produktspezialistin Praxis
Ostschweiz
M: 079 326 23 30
claudia.heldt@gc.dental

Postleitzahlen: 7, 8, 9

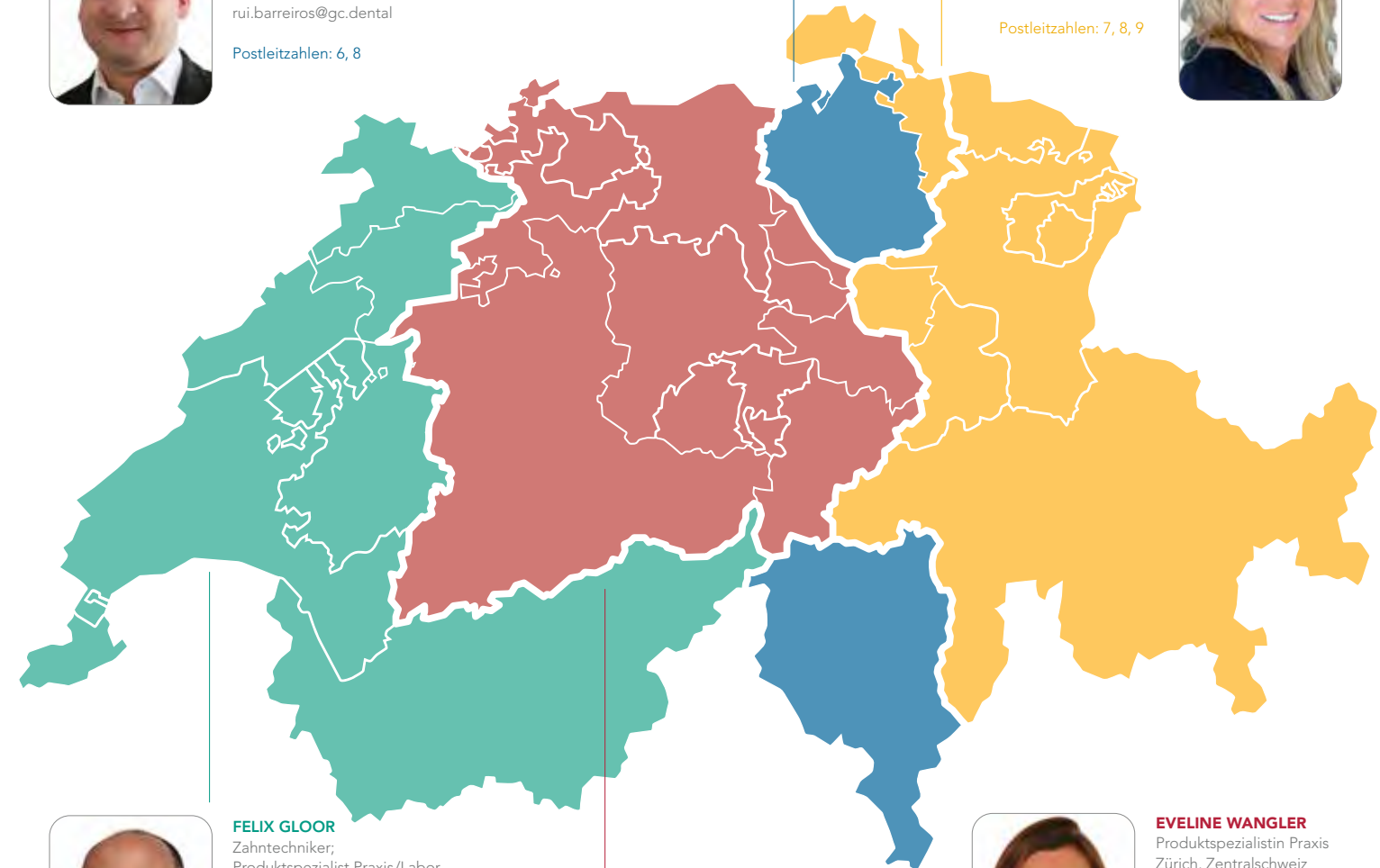

FELIX GLOOR
Zahntechniker;
Produktspezialist Praxis/Labor
Westschweiz
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental

Postleitzahlen: 1, 2



EVELINE WANGLER
Produktspezialistin Praxis
Zürich, Zentralschweiz und Mittelland
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental

Postleitzahlen: 3, 4, 5, 6



Besuchen Sie unsere Homepage
<https://europe.gc.dental/de-CH>



Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/gcswitzerland



Besuchen Sie uns auf Youtube:
www.youtube.com/user/GceuropeProducts



Besuchen Sie uns auf Instagram:
[gc_switzerland](https://www.instagram.com/gc_switzerland)

GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

Einen Schritt voraus

FujiCEM Evolve ist eine vielseitige Befestigungslösung für Ihre tägliche Arbeit, die ein einfaches Protokoll mit den herausragenden Eigenschaften der Glasionomere von GC kombiniert. Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgen-opazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.

Ideal für Metall- und Zirkonrestorationen

- Handmischvariante oder Automix
- Keine Vorbehandlung
- Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
- Hervorragende Randdichtigkeit
- Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
- Optimale Viskosität
- Geringe Filmstärke
- Optionale Lichthärtung
- Optimierter Haftverbund an Zirkonoxid

PREISVORTEIL

JETZT EINSTEIGEN

3 + 1 **109,20 CHF**
Preis pro Packung

Kaufe 3 x FujiCEM Evolve Single Pack und erhalte 1 x FujiCEM Evolve Single Pack gratis!

Art.-Nr. 10004926 **FujiCEM Evolve Single Pack**
Inhalt: 1 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mischkanülen Regular

Aktion nach Rücksprache mit einem GC Fachberater und nur für FujiCEM Evolve Single pack gültig.

Weitere Verpackungseinheiten:

Art.-Nr. 10004916
FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix
Inhalt pro Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritzen (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; 237,80 CHF

Art.-Nr. 10004928
FujiCEM Evolve Triple Pack Automix
Inhalt pro Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Spritze (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mischkanülen Regular; 278,50 CHF

Art.-Nr. 10006621
FujiCEM Evolve Clinic Pack
Inhalt: 8 x GC FujiCEM Evolve syringe (9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 563,40 CHF

Zubehör:
Art.-Nr. 10004917 Push and Click Mixing Tips Regular (15 Stk.); 21,20 CHF

Art.-Nr. 10004929
Push and Click Mixing Tips Endo (15 Stk.); 31,80 CHF

NEU



Hier geht's zu den Videos

CERASMART®270


Kraftabsorbierende Hybridkeramik CAD/CAM-Block



Natürliche Passform und Flexibilität – Präzision, Stärke und Flexibilität kombiniert mit einer leicht anzuwendenden, lichthärtenden Oberflächenversiegelung



Farben

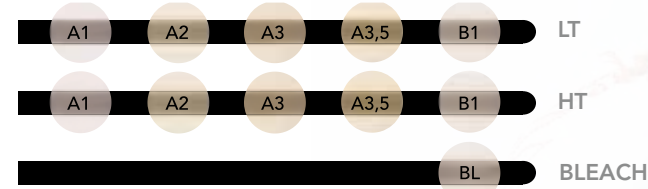

- Flexibilität für die Absorption von Stoßbelastungen
- Abrasionsstabilität für langlebige Restaurationen
- Extrem passgenaue Ränder für nahtlose Übergänge
- Hervorragende Polierbarkeit und Glanzbeständigkeit
- Optimale Fluoreszenz und Transluzenz
- Implantatgestützte Krone
- Ersatz einer großen Composite-Restauration mit parapulpären Stiften
- Restauration eines zweiten Molaren
- Restauration eines Quadranten

PREISVORTEIL

4 + 1 **139,70 CHF**
10 + 3
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen CERASMART270 CAD/CAM Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen CERASMART270 CAD/CAM Blöcke (à 5 Stk.) zum Preis von 10!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb der selben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Farben: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Größe 12: 139,70 CHF pro Packung
Größe 14: 152,50 CHF pro Packung
Größe 14L: 165,40 CHF pro Packung
Packungseinheit: 5 Blöcke pro Packung

CERASMART270 Blöcke sind CEREC-kompatibel und im aktuellen CEREC Software-Update gelistet. Verfügbar für Bestellungen durch autorisierte CEREC Händler.

GC FujiCEM® 2 Slide & Lock

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement in Kombination mit der innovativen Force & Fusion Technologie

Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10003463 **FujiCEM 2 starter kits – Paste Pak Dispenser**
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips, 1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 249,92 CHF

Art.-Nr. 10003462 **FujiCEM 2 starter kits – Kunststoffdispenser**
15 Mixing tips, 5 Intra oral Tips, 1 Kartusche (13 g/7,2 ml); 176,50 CHF

Art.-Nr. 10003460 **FujiCEM 2 SL, Automix Package**
+ 44 x Mixing Tip SL FujiCEM 2 SL Automix Package (13 g/7,2 ml); 329,30 CHF

Art.-Nr. 10003459 **FujiCEM 2 SL, Refill + mixing pad N° 22**
FujiCEM 2 SL Refill (13 g/7,2 ml); 246,10 CHF



Zubehör:
Art.-Nr. 10003465 **FujiCEM 2 Mixing Tips SL für Endo**, Nachfüllpackung (10 Stk.) (nur für FujiCEM 2 SL Kartusche geeignet); 32,60 CHF

Art.-Nr. 10003464 **FujiCEM 2 Mixing Tips SL**, Nachfüllpackung (20 Stk.), (nur für FujiCEM 2 SL Kartusche geeignet); 58,90 CHF

PREISVORTEIL

FUJICEM 2 SL ECO PACK

413,30 CHF
Preis pro Packung

anstatt 551,30 CHF

Art.-Nr. 10003468
FujiCEM 2 SL Eco pack
Inhalt: 4 FujiCEM 2 SL Kartuschen (à 13,3 g/7,2 ml)

G-CEM LinkForce®

Dualhärtendes, adhäsives Befestigungs-Composite für alle indirekten Restaurationen

Die leistungsstarke Universallösung für alle adhäsiven Herausforderungen



Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,12. Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschließlich über Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in der Schweiz bis 30.06.2023. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

G-CEM ONE™

Selbstadhasives Befestigungs-Composite

EINER für alle Indikationen

Nähere Details zu G-CEM ONE siehe Seite 6 und 7.





Für jeden Ihrer Workflows die passende Lösung von GC!



Hier geht's zu den Videos

1 x EQUIA FORTE HT
KLINIKPACKUNG

+ KAPSELMISCHER
CM-II GRATIS!

Kaufe 1 Packung EQUIA Forte HT
Klinikpackung und erhalte
1 Capsule Mixer CM-II gratis!
(im Gesamtwert von 742,30 CHF)

EQUIA Forte HT **Klinikpackung**: 638,60 CHF
(200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml)
Farben: A2, A3, B2

Farbmix möglich. Gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater. Aktion für alle
verfügbaren Klinikpackungen gültig.



200 Kapseln
+ 50 Kapseln
gratis

2 x EQUIA FORTE HT
Promopackungen

1 x EQUIA FORTE HT
NACHFÜLLPACKUNG
GRATIS

Kaufe 2 x EQUIA Forte HT Promopackungen
(à 100 Kapseln, 1 EQUIA Forte Coat 4ml) und
erhalte 1 x EQUIA Forte HT Nachfüllpackung
(50 Kapseln) gratis!

Aktion nur gültig für die Promopackungen
und nach Rücksprache mit einem GC
Fachberater.

Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:

EQUIA Forte HT, Nachfüllpackung: 193,40 CHF
Inhalt: 1 Packung beinhaltet 50 Kapseln EQUIA
Forte HT, 0,40g Pulver und 0,13g (0,10 ml) Liquid;
gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml
Farben: sortiert, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Intropackung: 108,90 CHF;
Inhalt: 20 Kapseln, 20 Equia Forte Coat Unitdose
Farben: A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Promopackung: 377,30 CHF
Inhalt: 100 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
Farben: A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Klinikpackung: 638,60 CHF
Inhalt: 200 Kapseln, 1 x Equia Forte Coat 4 ml)
Farben: A2, A3, B2

Art.-Nr. 10004885
EQUIA Forte Coat FlipCap
4 ml Flasche, Zubehör, 94,70 CHF

Art.-Nr. 10003513
EQUIA Forte Coat, Unitdose-Packung
50 Unitdose (à 0,1 ml) 125,30 CHF

GC GLASIONOMER/
GLASHYBRID-
MATERIAL
(5 PACKUNGEN)

KAPSELMISCHER
CM-II GRATIS!

Kaufe 5 Packungen GC Glasionomer/GC
Glashybrid + 1 Capsule Mixer CM-II gratis!
(im Gesamtwert von 742,30 CHF)

Aktion für alle erhältlichen GC Glasionomer /
Glashybrid Kapselpackungen gültig. Farbmix
möglich.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.

EQUIA Forte™ HT

Das neueste Glas-Hybrid-Bulk-Fill-
Restaurationssystem – Ihr verlässlicher Partner
für Seitenzahnrestaurationen



EQUIA Forte HT – Hybrid Technologie

- verbesserter Transluzenz
- noch einfachere Verarbeitung

INDIKATIONEN

- **Klasse-I-Restaurationen / permanent**
- **Kaudruckbelastete Klasse-II-Restaurationen / permanent**
- Interimsfüllungen
- Klasse-V- und Wurzel-oberflächenrestaurationen
- Stumpfaufbau

- **Stärkeres** und nicht klebriges Material, perfekt für die Bulk-Fill-Platzierung
- **Erhöhte** Transluzenz
- Kofferdam-Platzierung und das Auftragen des Adhäsivs fallen weg
- Hervorragende Biokompatibilität
- **Einfache Seitenzahn-restaurationen in wenigen Schritten – ohne absolute Isolation**
- Restauration empfindlicher, hypomineralisierter MIH-Zähne bei jungen Patienten

D-Light® Pro

Mehr sehen, als das Auge wahrnimmt
LED-Polymerisationslampe mit dualer Wellenlänge,
autoklavierbar & Detection Mode

Aushärten

- HP Modus (High Power) 1400 mW/cm²
- Blaue LED (Wellenlänge: 460 – 465 nm)
- Violette LED (Wellenlänge: 400 – 405 nm)
- Effiziente Härtung alternativer am Markt befindlichen Licht-Initiatoren

Schützen

- LP Modus (Low Power) mit reduzierter Leistungsabgabe von 700 mW/cm² z. B. bei tiefen Kavitäten, wenn die Präparation nahe an der Pulpa liegt

Erkennen

- DT Modus (Detection Mode) verwendet ausschließlich UV-nahes Licht
- Visualisierung von Plaque
- Visualisierung von infiziertem Dentin
- Visualisierung von Mikro-Rand-Undichtheiten
- Bewertung von Bakterienaktivität z. B. in den Fissuren
- Visualisierung von fluoreszierenden Materialien
- Bewertung der Risttiefe

Autoklavieren



**GC PRODUKT-
AKTION**

D-LIGHT PRO GRATIS!

Kaufe GC-Produkte (G-ænial, Essentia, EverX Flow, CERASMART270 oder EQUIA Forte HT) im Wert von 3248,- CHF und erhalte die D-Light Pro gratis!

Produktmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

AKTIONSPREIS


1108,80 CHF ~~1492,- CHF~~

Art.-Nr. 70000008 D-Light Pro

Inhalt: Handstückhülle und Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm; Akkus (2 Stk.), Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, Lichtschutzschild, weicher Augenschutz (3 Stk.)

Jetzt mit:

- **neuem hochstabilem Lichtleiter**
- **gesteigerter Akkuleistung**

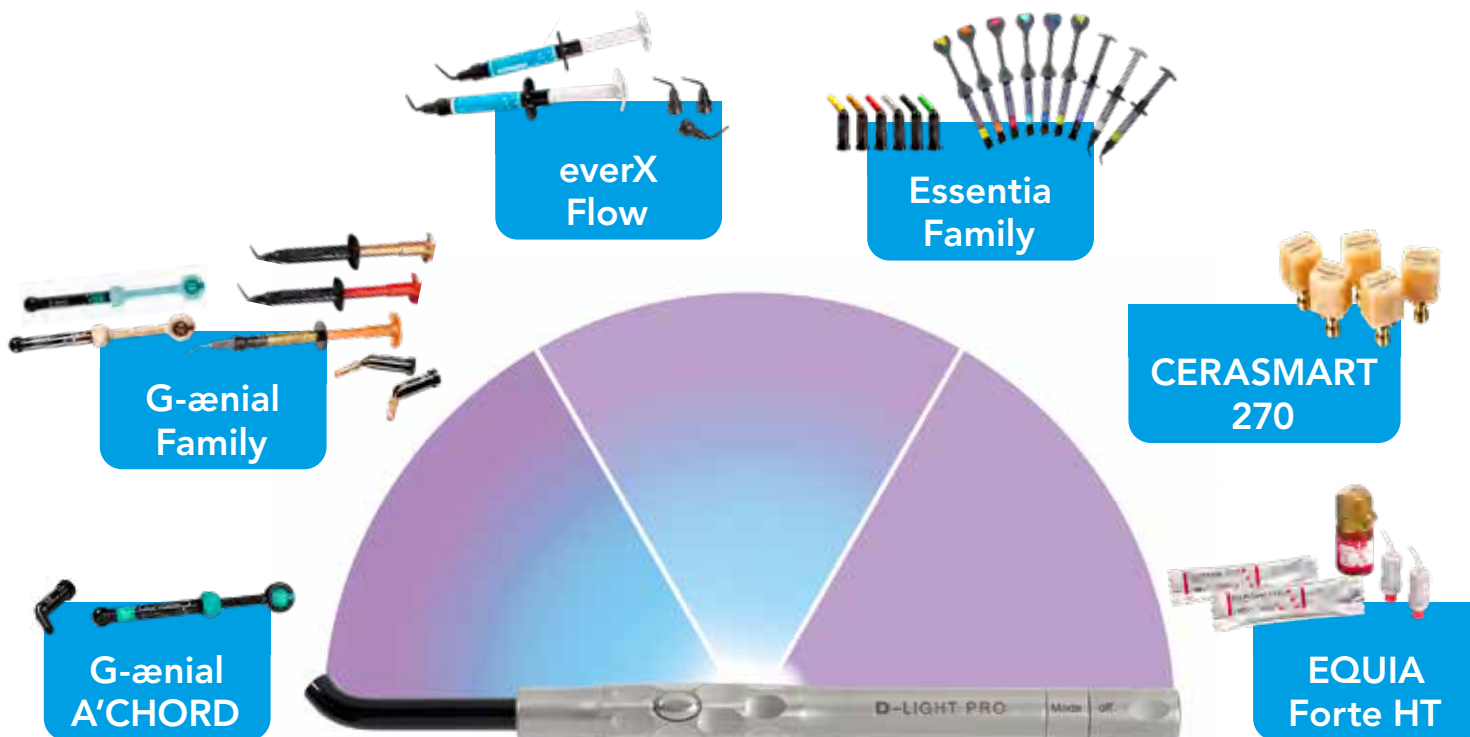

GC Fuji® II LC

Lichthärtendes, kunststoffmodifiziertes
Glasionomer-Restaurationsmaterial

Besonders geeignet zur Verwendung bei Klasse III- und bei Klasse V-Fällen, bei denen hohe Anforderungen an die Ästhetik gestellt werden und Wurzelkaries, Sandwich-Technik, Restaurationen bei Kindern und für Stumpfaufbauten, Unterfüllungen oder als Liner.

- Kontrollierter Lichteinsatz für ein direktes und einfaches Verfahren
- Ausgezeichnete Ästhetik & Transluzenz
- Ideal für zervikale Erosion, Ausbrechungen, Restaurationen der Wurzeloberfläche und die Behandlung von Kindern
- Optimal auch bei der geschlossenen und offenen Sandwich-Technik
- Hohe chemische Haftung für eine perfekte Randintegrität
- Hervorragende praxiserprobte, klinische Leistung



**MUST!
HAVE!**
JETZT TESTEN!



PREISVORTEIL

3 + 1! **204,90 CHF**
Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen Fuji II LC Kapseln zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10000035 **Fuji II LC Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000036 **Fuji II LC Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0,33 g Pulver und 0,10 g (0,085 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,10 ml)

Aktion für alle Farben gültig.

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Fragen Sie zusätzlich Ihren GC Fachberater nach Ihren individuellen Angeboten zu unseren Glasionomer-Restaurationsmaterialien!

GC Fuji® IX GP FAST

Selbsthärtendes, hochviskoses, stopfbares
Glasionomer-Restaurationsmaterial

Die stopfbare, nicht klebende Konsistenz von Fuji IX GP Fast macht ihn zu einem idealen Glasionomer für Restaurationen der Klassen V, I & II, als Basis- oder Stumpfaufbaumaterial. Die charakteristischen Glasionomereigenschaften in Kombination mit leichter Handhabung stellen die Anforderungen der heutigen Füllungsmaterialien sicher.

- Breites Indikationsspektrum
- Sehr guter chemischer Verbund
- Schnelle Bulkapplikation
- Keine Mikrosplattbildung
- Hervorragende Druckfestigkeit und Oberflächenhärte
- Schutz durch Fluoride
- Biokompatibel



PREISVORTEIL

3 + 1! **175,- CHF**
Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen Fuji IX GP Fast Kapseln zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10000078 **Fuji IX GP FAST Kapseln A2**
Art.-Nr. 10000079 **Fuji IX GP FAST Kapseln A3**
Inhalt: à 50 Kapseln (0,40 g Pulver und 0,11 g (0,09 ml) Liquid. Gemischter Inhalt pro Kapsel 0,14 ml)

Aktion für alle Farben gültig.


Farben: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.

Aktion gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



GC MI Paste Plus® & GC Tooth Mousse®

Remineralisierende Zahnschutzcremes mit Dreifachwirkung: Stärken, Schützen, Regenerieren.

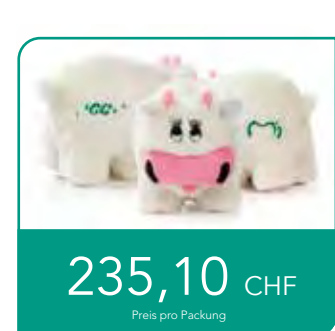

235,10 CHF
Preis pro Packung

Kaufe 2 MI Paste Plus (10er Packung) und fordere kostenlos eine GC MI Plüschkuh an!

Gültig für alle verfügbaren 10er-Packungen. Aktion gültig nach Absprache mit einem GC Fachberater und nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit.

MI Paste Plus Tube 40 g (35 ml)
MI Paste Plus Packung mit 10 Tuben; verschiedene Geschmacksrichtungen (2 Tuben je Geschmacksrichtung, Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille); MI Paste Plus Packung mit 10 Tuben auch in einer Geschmacksrichtung erhältlich.

GC MI BEHANDLUNGS-LÖSUNGEN

Tooth Mousse oder MI Paste Plus?
Tooth Mousse und MI Paste Plus können für dieselben Indikationen verwendet werden. Tooth Mousse wird bei Kindern unter 6 Jahren empfohlen, um das Fluoroserisiko zu vermeiden. Außerdem eignet sich das Produkt für Fälle, in denen keine Fluorid-Ergänzung erforderlich oder erwünscht ist. Für die Anwendung über Nacht wird Tooth Mousse bis zum Alter von 12 Jahren empfohlen. MI Paste Plus kann ab diesem Alter verwendet werden.

RECALDENT und das RECALDENT-Logo sind Marken der Mondelez international group und werden unter Lizenz verwendet. RECALDENT™ wird aus Milchkeisein gewonnen. Nicht bei Personen mit einer Milchallergie anwenden. Im Falle einer allergischen Reaktion: Anwendung abbrechen, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.



210,20 CHF
Preis pro Packung

Kaufe 2 Tooth Mousse (10er Packung) und fordere kostenlos eine GC MI Plüschkuh an!

Gültig für alle verfügbaren 10er-Packungen. Aktion gültig nach Absprache mit einem GC Fachberater und nur innerhalb gleicher Verpackungseinheit.

Tooth Mousse Tube 40 g (35 ml)
Tooth Mousse Packung mit 10 Tuben verschiedene Geschmacksrichtungen (2 Tuben je Geschmacksrichtung, Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille); Tooth Mousse Packung mit 10 Tuben auch in einer Geschmacksrichtung erhältlich.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

- Die erste und millionenfach bewährte Zahnschutzcreme mit dem patentierten Wirkstoff Recaldent™
- Versorgt die Zähne mit der nötigen Menge an Kalzium, Phosphat und Fluorid
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Wirkt schnell und effektiv
- Zuckerfreier Zahnschutz

MI Paste Plus enthält zusätzlich 900 ppm Fluorid

Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH)

Ein globales Problem, von dem jedes siebte Kind betroffen ist

MIH Kit


Vereint alle notwendigen Werkzeuge zur Behandlung von Patienten, die von MIH betroffen sind.

Erstbehandlung zu Hause und in der Praxis


- Stabilisieren und desensibilisieren mit GC MI Paste Plus (desensibilisierende und stabilisierende Creme mit Recaldent Technologie) und MI Varnish (22.600 ppm Fluoridlack mit Recaldent).
- Stabilisieren und schützen Sie Oberflächen gegen Karies und Überempfindlichkeiten mit GC Fuji TRIAGE, dem flüssigen Glasionomer.

Restaurative Behandlung


- Moderat große Läsionen können mit dem lighthärtenden, kunststoffmodifizierten Glasionomer FUJI II LC restauriert werden
- Das Glas-Hybrid EQUIA Forte HT eignet sich als dauerhaftes, minimalinvasives Restaurationsmaterial.
- G-ænial Universal Injectable zeigt aufgrund der FSC-Technologie eine sehr hohe Verschleißfestigkeit.
- Für eine schnelle Composite-Platzierung verwenden Sie das Universaladhäsiv G-Premio BOND.

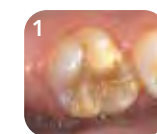

1 Milde Form von MIH

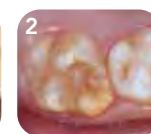

2 Moderate MIH

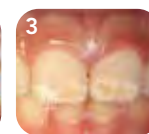

3 Betroffene Inzisiven



4 Schwere MIH

1 © Prof. van Amerongen, Niederlande; 2 – 4 © Prof. Baroni, Italien



Art.-Nr. 10004924 **MIH Kit**
Inhalt: MI Varnish™ Mint 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3, MI Varnish™ Erdbeere 0,44 g (0,4 ml) Unit-Dose x 3, GC MI Paste Plus Mint 40 g (35 ml) x 1, GC MI Paste Plus Erdbeere 40 g (35 ml) x 1, G-ænial Universal Injectable A1 Spritze, 1,7 g (1,0 ml) x 1, G-Premio BOND Unit-Dose (0,1 ml) x 5, EQUIA FORTE HT Fil A2 Kapsel (0,10 ml) x 5, EQUIA Forte Coat 0,1 ml pro Unit-Dose x 5, Fuji II LC A2 Kapsel (0,085 ml) x 5, Fuji TRIAGE Pink Kapsel (0,12 ml) x 5, Dispensing Tip lange Nadel x 10, Lichtschutzkappe x 2, Flowchart x 1

EPITEX

Kunststoff-Finier- und Polierstreifen

Leichtes Finieren und Polieren von interdentalen Räumen, geeignet für Glasionomer- und Composite-Füllungen.



Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,12. Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschließlich über Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in der Schweiz bis 30.06.2023. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

PREISVORTEIL


4 + 1! AB 45,90 CHF
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen EPITEX zum Preis von 4!

Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000117 **EPITEX Starter Kit**; 227,40 CHF
Inhalt: Ständer mit Spender für alle erhältlichen Körnungen je 10 m (grob-blau, mittel-grün, fein-grau, X-fein-rot)

Einzelpackungen (Inhalt: 10 m); 45,90 CHF
Art.-Nr. 10000122 **EPITEX Refill, Translucent Matrix**
Art.-Nr. 10000118 **EPITEX Refill, Coarse (grob-blau)**
Art.-Nr. 10000120 **EPITEX Refill, Medium (mittel-grün)**
Art.-Nr. 10000119 **EPITEX Refill, Fine (fein-grau)**
Art.-Nr. 10000121 **EPITEX Refill, X-Fine (x-rein-rosa)**

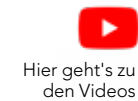

GC MI PASTE PLUS®
GC TOOTH MOUSSE®
MIH KIT
EPITEX



Für jeden Ihrer Workflows die passende Lösung von GC!



AKTION

162,40 CHF 306,90 CHF



- Extrem dünn und flexibel, besonders reißfest
- Für sehr geringe interproximale Abstände geeignet
- Sehr langlebig
- Schleifpartikel mit dem Trägermaterial verschleißt
- Vier Körnungen
- Praktischer Streifenspender
- Auch als Matrizenband erhältlich



G-ænial® A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Composite mit der Einfachheit des Unishade-Systems

Einfachheit, Ästhetik und Funktionalität in Ihren Händen

Natürliche Fluoreszenz

G-ænial A'CHORD schafft ein wunderschönes, unsichtbares und natürlich fluoreszierendes Endergebnis unter allen Lichtverhältnissen, einschließlich UV- oder UV-nahen Licht, und schenkt den Patienten ein selbstbewusstes Lächeln.

Einfache Handhabung

G-ænial A'CHORD erlaubt eine konsequent einfache Handhabung, ob mit einem Handinstrument oder mit einem Pinsel geformt. Dies wird durch die nicht-klebrigen Bis-MEPP – Monomere und optimierte Füllstoff-Monomer-Kombination aus patentierten FSC- und HPC-Technologien ermöglicht (Daten auf Anfrage).

Langanhaltender Glanz

Unsichtbare Ästhetik auch für extreme Herausforderungen. Zusätzlich zu den fünf Core-Farben erweitert G-ænial A'CHORD sein Portfolio um zwei Zahnhalsfarben für ältere Patienten, drei Opaker-Farben zum Abdecken von Verfärbungen, zwei Schmelzfarben für lebensechte Transluzenz und zwei Bleach-Farben für ein strahlenderes Lächeln. So ist es möglich, selbst unter extremen Herausforderungen, unsichtbare Füllungen zu schaffen.

Zeitsparende Ergebnisse

Bemerkenswerter Hochglanz mit minimaler Politur



Vor Politur Nach Politur

© Dr. J. Tapia Guadix, Spanien



Hier geht's zu den Videos



Hier gehts zur G-ænial A'CHORD Webpage
<http://gaenialachord.com>



4 x G-ænial A'CHORD
UNITIPS oder SPRITZEN

1 x G-PREMIO BOND
GRATIS

Kaufe 4 x G-ænial A'CHORD Unitips
(à 15 x 0,16 ml) oder Spritzen (à 2,1 ml/4 g)
und erhalte 1 x G-Premio BOND Flasche
(5 ml) im Wert von 115,70 CHF gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb
gleicher Verpackungseinheit und nach
Rücksprache mit einem GC Fachberater.

4 x G-ænial A'CHORD
UNITIPS oder SPRITZEN

1 x G2-BOND
UNIVERSAL GRATIS



Kaufe 4 x G-ænial A'CHORD Unitips
(à 15 x 0,16 ml) oder Spritzen (à 2,1 ml/4 g)
und erhalte 1 x G2-BOND Universal Kit im
Wert von 178,60 CHF gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher
Verpackungseinheit und nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal

A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

A'CHORD revolutionäre Technologie

- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und Verschleißfestigkeit
- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB 67,90 CHF
Preis pro Spritzenpackung

Erhalte 5 Packungen G-ænial A'CHORD zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-ænial A'CHORD zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.



5 x G-ænial A'CHORD
UNITIPS oder SPRITZEN

HANDINSTRUMENT
GRATIS

Kaufe 5 x G-ænial A'CHORD Unitips
(à 15 x 0,16 ml) oder Spritzen (à 2,1 ml/4 g)
und erhalte 1 x American Eagle M5 SCULPT
Instrument (im Wert von 56,- CHF) gratis!


Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher
Verpackungseinheit und nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

3 x G-ænial A'CHORD
SPRITZEN

COMPOSITE
MODELING KIT GRATIS

Kaufe 3 x G-ænial A'CHORD Spritzen
(à 2,1 ml/4 g) und erhalte 1 x Composite
Modeling Kit im Wert von 113,20 CHF gratis!

Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher
Verpackungseinheit und nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

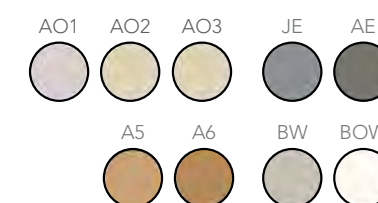

G-ÆNIAL® A'CHORD



Für jeden Ihrer Workflows die
passende Lösung von GC!

AKTUELLES

SPRITZEN

Art.-Nr. 10006767

G-ænial A'CHORD Layering Kit

1 Spritze / Farbe: A2; A3; AO2; AE; JE
(à 2,1 ml/4 g); 305,10 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006768

G-ænial A'CHORD Core Kit

1 Spritze / Farbe: A1; A2; A3; A3.5; A4
(à 2,1 ml/4 g); 305,10 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006769

Trial KIT A

3 Spritzen, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)

184,00 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006771

G-ænial A'CHORD Bleach Kit

1 Spritze/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4 g)

184,00 CHF (Preis pro Packung)

G-ænial A'CHORD Bleach KIT nur in
Spritzenform erhältlich. Bleachfarben
für Unitips als Refill verfügbar.

Spritzen Refill

Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
(à 2,1 ml/4 g)

Opaque AO1, O1, AO2, AO3; (à 2,1 ml/4 g)

Enamel JE (Junior Enamel),

AE (Adult Enamel); (à 2,1 ml/4 g)

Bleach BW (Bleach),

BOW (Opaque Bleach); (à 2,1 ml/4 g)

67,90 CHF (Preis pro Packung)

UNITIPS

Art.-Nr. 10006772

G-ænial A'CHORD Layering Kit Unitips

15 Unitips / Farbe: A2, A3, AO2, AE, JE
(à 15 x 0,16 ml); 327,30 CHF (Preis pro Packung)

Art.-Nr. 10006773

G-ænial A'CHORD Core Kit Unitips

15 Unitips / Farbe: A1, A2, A3, A3.5, A4
(à 15 x 0,16 ml); 327,30 CHF (Preis pro Packung)

Unitips Refill

Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6;
(à 15 x 0,16 ml)

Opaque AO1, AO2, AO3; (à 15 x 0,16 ml)

Enamel JE (Junior Enamel),

AE (Adult Enamel); (à 15 x 0,16 ml)

Bleach BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);

(à 15 x 0,16 ml);

72,80 CHF (Preis pro Packung)



Für jeden Ihrer Workflows die passende Lösung von GC!

Wir von GC konzentrieren uns darauf, Ihnen Lösungen für Ihre täglichen Herausforderungen anzubieten. Für effiziente Workflows mit vorhersagbaren, zuverlässigen Ergebnissen, um Sie noch erfolgreicher zu machen. Unsere Produkte ermöglichen Ihnen eine vereinfachte Anwendung, wodurch Sie sich Arbeitszeit einsparen und qualitativ hochwertige Ergebnisse sicherstellen können. Und das Beste: Alle unsere Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt. Profitieren Sie jetzt von den Lösungen von GC!



Möchten Sie, dass **Ausbesserungen und Wiederholungen der Vergangenheit angehören?** Entkommen Sie diesem Kreislauf, indem Sie unsere MI-Lösungen verwenden



Identifizieren

Vorbeugen

Restaurieren



Direkt oder indirekt? Das ist die Frage. Die Antwort sind unsere direkten Lösungen für den Seitenzahnbereich



Bonden

Stabilisieren

Abdecken



Sie möchten Ihre Patienten strahlen lassen? Nutzen Sie unsere direkten, höchstetischen Lösungen für den Frontzahnbereich



Bonden

Restaurieren

Polieren



Sie haben umfangreiche Patientenfälle, aber zu wenig Zeit? Gewinnen Sie Zeit mit unseren prothetischen Produktlösungen



Schleifen

Polieren

Befestigen



Sie wünschen sich effiziente Produkte? Reduzieren Sie Ihren Materialbedarf und nutzen Sie unsere universellen, adhäsiven Produktlösungen



Direkte Composites



Stumpfaufbauten

Befestigungen

Reparaturen



PREISVORTEIL

G-aenial A'CHORD Core Kit UNITIPS + Handinstrument gratis

327,30 CHF

Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10007330 **G-aenial A'CHORD Core Kit Unitip + Handinstrument Bundlepack**
Inhalt Bundlepack: G-aenial A'CHORD CORE KIT Unitips (15 Unitips à A1, A2, A3, A3.5, A4; à 0,16 ml) + American Eagle M5 SCULPT Instrument (im Wert von 56,- CHF) gratis



PREISVORTEIL

G-aenial A'CHORD Core Kit SPRITZEN + Handinstrument gratis

305,10 CHF

Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10007328 **G-aenial A'CHORD Core Kit Spritzen + Handinstrument Bundlepack**
Inhalt Bundlepack: G-aenial A'CHORD CORE KIT Spritzen (je 1 Spritze A1, A2, A3, A3.5, A4; à 2,1 ml/4 g) + American Eagle M5 SCULPT Instrument (im Wert von 56,- CHF) gratis



PREISVORTEIL

G-aenial Universal Injectable SPRITZEN + G-Premio BOND

224,- CHF

252,10 CHF

Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10003741 **G-aenial Universal Injectable Spritzen + G-Premio BOND Bundlepack**
Inhalt Bundlepack: G-aenial Universal Injectable Spritzen à 1 ml in 1 x A1, 1 x A2, 1 x A3 + 1 x G-Premio BOND 5 ml Flasche

GC's Special Bundlepacks

Hier geht es zur Verarbeitung von G-aenial A'CHORD und einem American Eagle Instrument:



PREISVORTEIL

everX Flow + G-aenial A'CHORD Starter Kit SPRITZEN

222,90 CHF

277,30 CHF

Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10006949 **everX Flow + G-aenial A'CHORD Starter Kit Spritzen Bundlepack**
Inhalt Bundlepack: everX Flow 1 x Bulk (2 ml/3,7 g), 1 x Dentin (2 ml/3,7 g) + G-aenial A'CHORD Spritzen 1 x A2, 1 x A3 (à 2,1 ml/4 g)



PREISVORTEIL

everX Flow + G-aenial Universal Injectable Starter Kit SPRITZEN

190,40 CHF

221,50 CHF

Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10004834 **everX Flow + G-aenial Universal Injectable Starter Kit Spritzen Bundlepack**
Inhalt Bundlepack: everX Flow Spritzen; 1 x Bulk (2 ml/3,7 g), 1 x Dentin (2 ml/3,7 g) + G-aenial Universal Injectable Spritzen; 1 x A2, 1 x A3 (à 1 ml/1,7 g), Zubehör



PREISVORTEIL

Initial LiSi Block + G-CEM ONE

389,80 CHF

473,10 CHF

Preis pro Packung

Zusatzware im Bundlepack bereits inkludiert

Art.-Nr. 10007571 **Initial LiSi Block + G-CEM ONE Starter Kit**
Inhalt: Initial LiSi Block (5 Blöcke A2 LT, 5 Blöcke A2 HT, 5 Blöcke A3 HT), 1 G-CEM ONE Starter Kit A2 (1 Spritze G-CEM ONE A2 (4,6 g), 8 GC Automix Tips Regular, 2 GC Automix Endo Tips, 1 G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml)

GRADIA® CORE

Dualhärtendes Composite für
Stumpfaufbauten & Stiftbefestigungen

Stabile Retention bis in die Tiefe



Stiftbefestigungen und
Stumpfaufbauten mit
einem thixotropen Material



Wirkt wie Dentin

Härte* (Hv) **66**

*Im dualhärtenden Modus
Quelle: GCC R&D – Daten liegen vor.



Haftverbund an Dentin (MPa), dualhärtend **21**



Sichere Retention
mit universellem Bonding


Quelle: GCC R&D – Daten liegen vor.



Für jeden Ihrer Workflows die
passende Lösung von GC!



Optimale Polymerisierung aller Komponenten

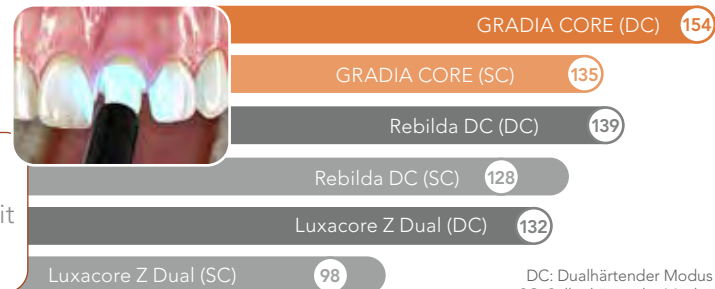

DC: Dualhärtender Modus
SC: Selbsthärtender Modus
Quelle: GCC R&D
Die Daten liegen vor.

PREISVORTEIL

3 + 1 **125,70 CHF**
Preis pro Packung

Erhalte 4 Packungen Gradia Core Nachfüllkartusche
zum Preis von 3!

Art.-Nr. 10000765 **GRADIA CORE Nachfüllkartusche**
1 x 10 ml (20 g); 1 GRADIA CORE Kartusche 10 ml (20 g);
20 x GC Automix Tips für Endo mit Verlängerungstipps;
112,20 CHF

Weitere Verpackungseinheit:

Art.-Nr. 10004896 **GRADIA CORE Einführungspackung**
Inhalt: GRADIA CORE Kit, GRADIA CORE Dispenser;
261,30 CHF

Art.-Nr. 10004816 **GRADIA CORE Kit**
GRADIA CORE Kartusche 10ml (20g), G-Premio BOND
5ml Flasche, G-Premio Bond DCA 3ml Flasche;
251,90 CHF



Zubehör:
Art.-Nr. 10001461
G-Premio BOND,
Flasche, 5 ml;
115,70 CHF

Art.-Nr. 10001349
G-Premio BOND DCA,
3 ml Nachfüllflasche;
60,50 CHF

Art.-Nr. 10003289
Automix Tip für Endo,
10 Stk.; 14,30 CHF

Art.-Nr. 70000068
GRADIA CORE
Kartuschen-Dispenser;
72,60 CHF

Art.-Nr. 10006720
Micro Tip Applicator Red,
50 Stk.; 7,50 CHF

everX Posterior®

Glasfaserverstärkte
Composite-
Unterkonstruktion
für große Kavitäten

Art.-Nr. 10001048 **everX Posterior**;
94,20 CHF pro Packung 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Art.-Nr. 10001148 **everX Posterior**;
282,60 CHF pro Packung 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit
und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



everX Flow®

Mit Glasfasern verstärktes fließfähiges
Composite für den Dentinersatz

Überzeugend stabile Struktur

everX Flow ist die neue Lösung aus dem
Hause GC für die widerstandsfähige
und unkomplizierte Verstärkung all ihrer
Restaurationen. Mit seiner einfachen
Anwendung, zwei Farbtönen und seiner
herausragenden Festigkeit wird everX
Flow schnell zu Ihrem neuen Nummer-1-
Produkt für alle Restaurationen, die
einen starken Aufbau erfordern. Die
„Bulk-Farbe“ mit einer Aushärtungstiefe
von 5,5 mm eignet sich optimal für tiefe
posteriore Kavitäten, während die
Dentin-Farbe die erste Wahl für heraus-
ragende ästhetische Ergebnisse ist.

4 x everX Flow

**1 x G-Premio BOND
GRATIS**

Kaufe 4 x everX Flow (Bulk oder Dentin
à 2 ml Spritze) und erhalte 1 x G-Premio
BOND (5 ml) im Wert von 115,70 CHF gratis!

Gültig nach Rücksprache mit
einem GC Fachberater.



3 x everX Flow

**GC FIBER POST REFILL
1,2 MM GRATIS**

Kaufe 3 x everX Flow (Bulk oder Dentin
à 2 ml Spritze) und erhalte 1 x GC FIBER POST
Refill (10 x 1,2 mm) im Wert von 174,30 CHF
gratis!

Gültig nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.



GC FIBER POST

Glasfaserstift

- Erhältlich in fünf Durchmessern, darunter sehr kleine
Stifte von 0,8 und 1 mm
- Die gleichmäßige und dichte Verteilung der
Fasern im Stift (77 % des Gewichts) sorgt für eine
hohe Belastungs- und Biegefestigkeit, ähnlich
der von Metall
- Eine einzigartige Lichtübertragung sorgt für eine
bessere Polymerisation des Befestigungscomposites
- Röntgensichtbar zur unkomplizierten Diagnostik

GC Fiber Post ist eine konventionelle Glasfaser,
die perfekten Halt bei Routine-Stumpfaufbaurestau-
rationen bietet. GC Fiber Posts sind konventionelle
Glasfaserstifte, die Stabilität, Röntgenopazität und
Lichtleitung bieten – für ein Höchstmaß an Leistung
in geraden Kanälen.



Art.-Nr. 10001734 **GC FIBER POST**
Assortment Kit (3 x 5 FIBER POST)
15 Fiber Posts: 5 x 1,0 mm; 5 x 1,2 mm;
5 x 1,4 mm; 2 Drills: 1 x 1,2 mm;
1 x 1,4 mm; 348,40 CHF

FIBER POST Drill Refill à 48,50 CHF
Art.-Nr. 10001740 **1 x 1,2 mm**
Art.-Nr. 10001741 **1 x 1,4 mm**
Art.-Nr. 10001742 **1 x 1,6 mm**

FIBER POST Refill à 174,30 CHF
Art.-Nr. 10001735 **0,8 mm**, 10 Stk.
Art.-Nr. 10001736 **1,0 mm**, 10 Stk.
Art.-Nr. 10001737 **1,2 mm**, 10 Stk.
Art.-Nr. 10001738 **1,4 mm**, 10 Stk.
Art.-Nr. 10001739 **1,6 mm**, 10 Stk.

Zubehör
Art.-Nr. 10001350 **G-Multi Primer**,
5 ml Liquid; 81,40 CHF

GRADIA® CORE
EVERX POSTERIOR®
EVERX FLOW®
GC FIBER POST



Für jeden Ihrer Workflows die
passende Lösung von GC!



Hier geht's zu
den Videos

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3 **70,80 CHF**
Preis pro Packung

Erhalte 5 Packungen everX Flow zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen everX Flow zum Preis von 10!

Art.-Nr. 10001488 **everX Flow Bulk**
Spritze 2 ml (3,7 g) Bulk, 20 Dispensing Tip III Kunststoff,
Lichtschutzkappe

Art.-Nr. 10001489 **everX Flow Dentin**
Spritze 2 ml (3,7 g) Dentin, 20 Dispensing Tip III Kunststoff,
Lichtschutzkappe

Farbmix möglich. Aktion gültig nach Rücksprache
mit einem GC Fachberater.

NEU

G2-BOND Universal

Der neue Standard der 2-Flaschen-Universal-Bondings – wegweisend für einen neuen Standard in Ihren Händen

G2-BOND Universal mit seiner patentierten Dual-H-Technologie, die für fortschrittlich optimierten Haftverbund sowohl am Zahn als auch am Composite sorgt, ist ein vielseitig einsetzbares 2-Flaschen-Universal-System, das die zahnärztlichen Anforderungen in Hinblick auf die existierenden Goldstandards für Selbstätzung (SE) und Etch-and-Rinse (ER) erfüllt und darüber hinaus folgendes bietet:

- Auswahl des bevorzugten Ätzverfahrens
- Hervorragende Haltbarkeit und erstklassiger Haftverbund
- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Randverfärbungen
- Hervorragende Dosierung und geringe Techniksensibilität
- Multiindikativ¹
- Modernes, intelligentes und ergonomisches Design: 1-PRIMER/2-BOND

Optimal geeignet für die IDS-Technik (IMMEDIATE DENTIN SEALING Technik)!



Ein neuer 2-Flaschen-Bonding-Standard für alle Ätzverfahren

Für eine rundum Zufriedenheit und den Komfort Ihrer Patienten!

JETZT EINSTEIGEN

178,60 CHF

Preis pro Flaschen Kit

Art.-Nr. 10006819
G2-BOND Universal Flasche Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml,
Zubehör; 178,60 CHF

DIE ERFOLGREICHEN 2!
Unsere starken und kompetenten Adhäsivsysteme für all Ihre täglichen restaurativen Aufgabestellungen

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Composites, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperativen Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

Gesamtleistung einer einzigartigen Zusammensetzung

- 4-MET für zuverlässige Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin
- MDP für ausgezeichnete Adhäsion an Zahnschmelz und Dentin, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Nichtedelmetallen
- MDTP zur Adhäsion an Edelmetallen
- HEMA-freies Bonding-System für klinisch nachgewiesene, herausragende Haltbarkeit²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

Weitere Aktionen entnehmen Sie bitte den Seiten 2 und 8

oder fragen Sie zusätzlich Ihren GC Fachberater nach weiteren Informationen!

G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für alle Bonding Techniken und ideal für Reparaturen und als Desensitizer einsetzbar!



Für jeden Ihrer Workflows die passende Lösung von GC!



G-PREMIO BOND BOTTLE

115,70 CHF

Preis pro Packung

Art.-Nr. 10001461
G-Premio BOND Bottle
1 Flasche à 5 ml, 115,70 CHF

G-PREMIO BOND 3-BOTTLE PACKUNG

+ COMPOSITE PACKUNG GRATIS

296,10 CHF


Preis pro Packung

Kaufe 1 x G-Premio BOND 3-Bottle Packung (3 x 5 ml Flasche) und erhalte 1 x Composite Packung gratis!

Zur Auswahl der Gratis-Composite-Packung steht: 1 x G-aenial A'CHORD Spritze oder Unitips (15 Stk.) gratis oder 1 x G-aenial Anterior oder Posterior Spritze oder Unitips (20 Stk.) gratis oder 1 x everX Flow Spritze gratis!

Art.-Nr. 10001458
G-Premio BOND 3-Bottle-Packung
3 Flaschen à 5 ml; 296,10 CHF

Weitere erhältliche Verpackungseinheiten:
Art.-Nr. 10001242 **G-Premio BOND Unitdose**
50 Stück à 0,1 ml, Zubehör; 145,50 CHF
Art.-Nr. 10001457 **G-Premio BOND Kit**
1 Flasche 5 ml, Zubehör; 146,80 CHF
Art.-Nr. 10001349 **G-Premio BOND DCA**
1 Flasche 3 ml Dual Cure Activator (DCA); 60,50 CHF

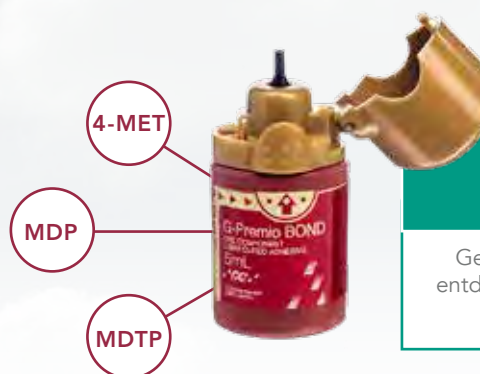


FLIP-TOP VERSCHLUSSKAPPE

Genießen Sie die gewohnte Performance und entdecken Sie gleichzeitig ein einfaches Handling
300 Applikationen pro 5 ml Flasche



Als weitere Option:
G-Premio BOND DCA = Dual-cure Aktivator

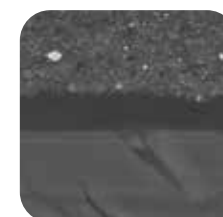

Weitere Verpackungseinheiten: Nachfüllpackungen
Art.-Nr. 10006821 **G2-BOND Universal 1-PRIMER Refill**
1 x Flasche 5 ml; 130,80 CHF
Art.-Nr. 10006822 **G2-BOND Universal 2-BOND Refill**
1 x Flasche 5 ml; 55,30 CHF

Initial™ LiSi Block und G-CEM ONE™

Die Herstellung von Restaurationen wurde durch die CAD/CAM-Zahnmedizin noch effizienter. Diese Effektivität wird mit den Lösungen von GC noch gesteigert. Initial LiSi Block und G-CEM ONE bringen Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis in Ihre Praxis, ohne dabei Kompromisse bei langlebiger Ästhetik einzugehen: einfach schleifen, polieren, einsetzen!



Der Patient litt im ersten Quadranten unter Kaubeschwerden und einer Überempfindlichkeit gegen Kälte.



Zähne 15, 16 und 17 nach Entfernung alter Restaurationen und Karies.



Die Zähne wurden mit Composite wieder aufgebaut und für minimalinvasive Lithium-Disilikat-Restaurationen vorbereitet.



Mit Initial LiSi Block werden dauerhafte Ästhetik und ausgezeichnete Kantenstabilität schnell geschliffen.



Der optionale G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer beschleunigt die Dunkelhärtung und erhöht die Haftwerte.



G-CEM ONE wird auf die Oberflächeninnenseite der gemäß Gebrauchsanweisung vorbehandelten Krone aufgetragen.

Befestigungslösungen

Der GC „Luting Guide“ Befestigungsleitfaden hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials. Er enthält darüber hinaus Informationen zu den einzelnen Befestigungsschritten.




Schnelle Überschussentfernung.



Natürlich schön.

Zum Downloaden in App-Store:

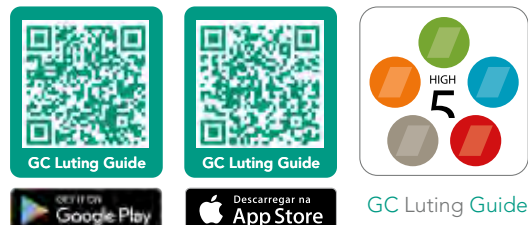

GC Luting Guide

Entdecken Sie den GC Luting Guide!

NEU

G-CEM ONE™

Selbstadhäsives Befestigungs-Composite



GC Touch Cure

Der Initiator im G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer beschleunigt die chemische Aushärtung (Dunkelhärtung) des BefestigungsComposites an der Zahnoberfläche und stellt einen stabilen Verbund her.

Optional: G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Für alle Pfeilerzähne und Kavitäten

- MDP: Verbund zur Zahnhartsubstanz, Zirkonoxid und Nichtedelmetall
- 4-MET: Verbund zur Zahnhartsubstanz
- MDTP: Verbund zu Edelmetall
- Beschleuniger → Starker Verbund an Pfeilerzahn und Kavität durch

GC Touch Cure-Funktion

Zuverlässig

Optimale Haftwerte bei retentiven und nicht-retentiven¹ Präparationen, dank der einzigartigen GC Touch Cure Technologie des optionalen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primers.

Anwenderfreundlich

Ausgeprägte Dunkelhärtung, „tack-cure“ Überschussentfernung, hohe Toleranz gegenüber Speichel und Feuchtigkeit¹, Fließfähigkeit ideal für Befestigungen, praktisch keine postoperativen Sensibilitäten³.

¹ Mit G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

² Mit G-Multi PRIMER I ³ Feldtestergebnisse, nur für G-CEM ONE. Daten auf Anfrage.

INITIAL LISI BLOCK AESTHETIC KIT

G-CEM ONE STARTER KIT GRATIS

Kaufe 1 Initial LiSi Block Aesthetic Kit und erhalte 1 G-CEM ONE Starter Kit A2 oder Transluzent im Wert von 83,30 CHF gratis!

Art.-Nr. 901601 **Initial LiSi Block Aesthetic Kit**
Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, 5 Farben à 1 Block; A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5 Farben à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml Zubehör; 516,30 CHF

Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

G-CEM ONE SYSTEM KIT

G-CEM ONE REFILLPACKUNG

Kaufe 1 G-CEM ONE System Kit und erhalte 1 G-CEM ONE Refillpackung (Single) gratis!

Art.-Nr. 10006920 **G-CEM ONE System Kit**
Inhalt: 1 x G-CEM ONE Spritze A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Spritze TR (4,6 g), 15 x Automix Tips Regular, 5 x Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml; 182,10 CHF

Gültig nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.



Für jeden Ihrer Workflows die passende Lösung von GC!



Universell

Hervorragende Haftfestigkeit zum Zahn und zu allen Substraten: Schmelz, Dentin, Zirkonoxid, Metall, Glaskeramik², Hybrid-Keramik².

Ästhetisch

Unsichtbare, abrasionsstabile Ränder für ästhetische Ergebnisse.

Art.-Nr. 10006918 **G-CEM ONE Starter Kit A2**

Art.-Nr. 10006919 **G-CEM ONE Starter Kit Transluzent**

Inhalt pro Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 83,30 CHF

Art.-Nr. 10006921 **G-CEM ONE Twin Refill A2**

Art.-Nr. 10006922 **G-CEM ONE Twin Refill Transluzent**

Inhalt pro Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung 137,20 CHF

Art.-Nr. 10006923 **G-CEM ONE Single Refill AO3**

Art.-Nr. 10006924 **G-CEM ONE Single Refill Weiß Opak**

Inhalt pro Single Refill: 1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung 71,90 CHF

Art.-Nr. 10006925 **G-CEM ONE Value Refill A2**

Art.-Nr. 10006926 **G-CEM ONE Value Refill Transluzent**

Inhalt pro Value Refill: 8 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips; Preis pro Packung 436,00 CHF

Art.-Nr. 10006833

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Inhalt: 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; Preis pro Packung 74,30 CHF


Zubehör:

Art.-Nr. 10003289 **Automix Tip for Endo**

10 Stk. mit Verlängerungstip; 14,30 CHF

Art.-Nr. 10003335 **Automix Tip Regular**

10 Stk.; 13,20 CHF

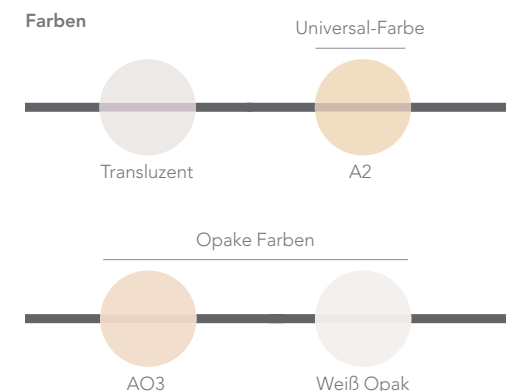

NEU

initialTM
LiSi Block



Hier gehts zur Webpage:
www.initiallisiblock.com



GC INITIALTM LISI BLOCK

Für jeden Ihrer
Workflows die passende
Lösung von GC!



GC InitialTM LiSi Block

Vollkristallisierter CAD/CAM-Block
aus Lithium-Disilikat

Die natürliche Schönheit wiederhergestellt –
natürlich schöne Restaurationen in einem Termin

Initial LiSi Block: Stärke, Präzision und Ästhetik in einem vollständig kristallisierten Block

Initial LiSi Block ist ein vollständig kristallisierter Lithium-Disilikat-Block, der ohne Brennvorgang über optimale physikalische Eigenschaften verfügt. Die von GC entwickelte HDM-Technologie (High Density Micronization) für die CAD/CAM-Zahnmedizin, sorgt für hohe Abrasionsbeständigkeit, passgenaue Ränder und ästhetische Endergebnisse. In Verbindung mit der ONE SQIN Technik – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksystem – können Sie schnell und einfach ästhetischere Ergebnisse erzielen.



- Zeitersparnis, da kein Kristallisationsbrand erforderlich
- Langlebige Ästhetik
- Feine, passgenaue Ränder
- Natürliche Opaleszenz
- Ideale Basis für die ONE SQIN Technik

Natürliche Opaleszenz


Initial LiSi Block ist in hoher Transluzenz (HT) und niedriger Transluzenz (LT) erhältlich und bietet bei allen Lichtverhältnissen eine natürliche Opaleszenz.

Einfach schleifen, polieren, einsetzen


Mit GC Initial IQ ONE SQIN – dem malbaren Farb- und Micro-Layering-Keramiksystem – können Sie schnell und einfach hochästhetische Ergebnisse, vergleichbar mit konventionell geschichteten Restaurationen, aber mit einem deutlichen Zeitgewinn, erzielen.

Kleinere Kristalle für einen
einfachen Schleifprozess und hohe
Abrasionsbeständigkeit.

Verbesserte Festigkeit
der Glasmatrix für eine hohe
mechanische Belastbarkeit.

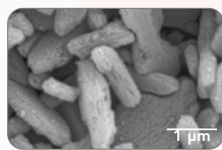


Herkömmliches
Lithium-Disilikat
(IPS e.max CAD)

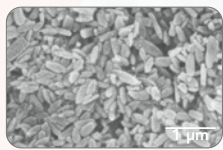


HDM-Technologie
für CAD/CAM
(Initial LiSi Block)

Quelle: GC R&D, Japan,
Daten auf Anfrage.

Kanten-Rauigkeit

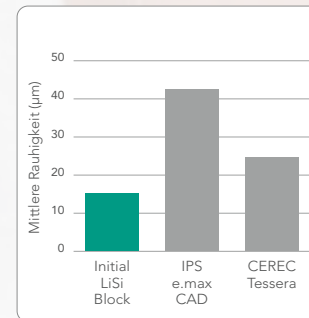

Abrasionsbeständigkeit

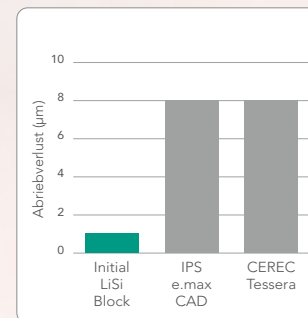

Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage.



PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
132,50 CHF
Preis pro Packung


Erhalte 5 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.)
zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen Initial LiSi Block (à 5 Stk.)
zum Preis von 10!

Gültig für alle erhältlichen Artikelnummern, allerdings nur innerhalb derselben Produktgruppe und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 012919 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A1 HT
Art.-Nr. 012920 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A2 HT
Art.-Nr. 012921 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A3 HT
Art.-Nr. 012922 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, B1 HT
Art.-Nr. 012923 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A1 LT
Art.-Nr. 012924 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A2 LT
Art.-Nr. 012925 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, A3 LT
Art.-Nr. 012926 Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, B1 LT

Preis pro Initial LiSi Block Packung (à 5 Stk.) 132,50 CHF

Politur und Fertigstellung

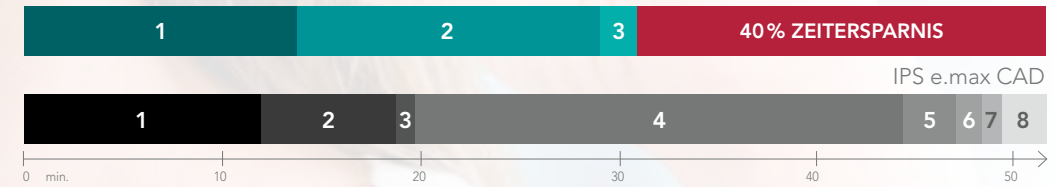

1 Schleifen 2 Vorpolitur 3 Brennwatte vorbereiten 4 Kristallisation 5 Abkühlung 6 Entfernen der Brennwatte 7 Reinigung 8 Abschließende Politur
Quelle: GC R&D, Japan, Daten auf Anfrage. Unter Testbedingungen basierend auf Gebrauchsanweisung.



INITIAL LISI BLOCK AESTHETIC KIT

G-CEM ONE STARTER KIT GRATIS

Kaufe 1 Initial LiSi Block Aesthetic Kit und
erhalte 1 G-CEM ONE Starter Kit A2 oder
Transluzent im Wert von 83,30 CHF gratis!

Art.-Nr. 901601 Initial LiSi Block Aesthetic Kit
Initial LiSi Block, CEREC, Größe 14, 5 Farben
à 1 Block; A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT;
Initial IQ Lustre Paste ONE, 5 Farben à 4 g;
L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ Lustre
Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml; Refresh
Liquid, 8 ml Zubehör; 516,30 CHF

Gültig nach Rücksprache mit einem
GC Fachberater.



© ZTM Djemal Ibrahim, Schweiz



© ZTM Stefan Roosen, Österreich

Verwandte Produkte

Initial IQ Lustre Pastes ONE
Dreidimensionale,
gebrauchsfertige Keramik-
malfarben mit erhöhter
Fluoreszenz



Initial IQ ONE SQIN
Malbares Farb-
und Micro-Layering-
Keramiksystem



G-CEM ONE
Selbstadhäsives
Befestigungs-
Composite



In Verbindung mit dem GC Initial IQ ONE SQIN System können Sie schnell und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielen, die mit konventionell geschichteten Restaurationen vergleichbar sind, jedoch mit einem deutlichen Zeitgewinn. Für alle monolithischen Arbeiten im Seitenzahnbereich sorgen die Initial IQ Lustre Pastes ONE Fluoreszenz, überragende Vitalität und einen natürlichen Glanz... einfach durch Bemalen. Für anspruchsvolle ästhetische Fälle im Frontzahnbereich werden die Lustre Pastes ONE und die SQIN-Micro-Layering-Keramik kombiniert und bieten einzigartige Anwendungs- und Modelliereigenschaften sowie einen selbstglasierenden Effekt. Dieses Material eignet sich für Veneers, Inlays/Onlays und Einzelkronen und erhöht die Effizienz Ihrer täglichen Arbeit. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, Initial LiSi Block-Restaurationen mit dem universellen Kunststoffzement G-CEM ONETM zu befestigen.

Die angeführten Preise beruhen auf den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers, exkl. MwSt. und entsprechen einem mittleren Kurswert von 1,12. Preisirrtümer vorbehalten. Die aktuellen Verkaufspreise erhalten Sie direkt von Ihrem Dental-Depot. Die Auslieferung erfolgt ausschließlich über Ihren Dental-Fachhandel. Eine Verknüpfung von verschiedenen Aktionen ist nicht möglich. Aktionen gültig in der Schweiz bis 30.06.2023. Bitte entnehmen Sie diesem Mailing die bereits neuen GC Artikelnummern. Druck- und Satzfehler vorbehalten.



G-ænial®

Das Allround-Composite für unsichtbare Restaurationen – mit altersspezifischem Farbauswahlsystem



G-ænial Anterior überzeugt durch

- Seine Ästhetik & Röntgensichtbarkeit
- Seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit
- Auf das Alter abgestimmtes Farbsystem
- Mühelose Verarbeitung

G-ænial Posterior überzeugt durch

- Ein angepasstes Farbsystem
- Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- Seine gute Stopfbarkeit
- Hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB 113,10 CHF
Preis pro 20er-Packung

Erhalte 5 Packungen G-ænial Anterior/Posterior Unitips zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænial Anterior/Posterior Unitips zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000776 Anterior Unitip A2
Art.-Nr. 10000777 Anterior Unitip A3
Art.-Nr. 10000798 Posterior Unitip PA2
Art.-Nr. 10000799 Posterior Unitip PA3

Farben: Anterior Packung mit 20 Unitips: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Anterior Packung mit 10 Unitips: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Posterior Packung mit 20 Unitips: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PJE, PIE

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB 79,50 CHF
Preis pro 20er-Packung

Erhalte 5 Packungen G-ænial Anterior/Posterior Spritzen zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænial Anterior/Posterior Spritzen zum Preis von 10!

Farbmix möglich. Aktion gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Art.-Nr. 10000805 Anterior Spritzen A2
Art.-Nr. 10000806 Anterior Spritzen A3
Art.-Nr. 10000826 Posterior Spritzen PA2
Art.-Nr. 10000827 Posterior Spritzen PA3

Farben: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE und P-IE

PREISVORTEIL


4 + 1 | 10 + 3

Wählen Sie zwischen den G-ænial Anterior und Posterior oder wählen Sie zwischen den G-ænial Flo X, G-ænial UniversalFlo und G-ænial Universal Injectable Angeboten und stellen Sie sich Ihre individuellen Wunschfarben zusammen.

Erhalte 5 Packungen G-ænial Anterior oder Posterior oder G-ænial Flo X, G-ænial Universal Flo oder G-ænial Universal Injectable zum Preis von 4!

Erhalte 13 Packungen G-ænial Anterior oder Posterior oder G-ænial Flo X, G-ænial Universal Flo oder G-ænial Universal Injectable zum Preis von 10!

Nur gültig innerhalb gleicher Packungseinheit.

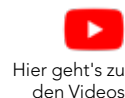

Besuchen Sie einen unserer Workshops mit unseren Top-Referenten!

Oder kontaktieren Sie Ihren persönlichen GC Fachberater.



3D-Konfigurator GC Restorative Dentistry Guide zum GRATIS-Download: www.gceurope.com



G-ænial® Universal Injectable

Injizieren Sie unser stärkstes Material für direkte Restaurationen

Fließfähige Konsistenz – dauerhafte Festigkeit

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise!

Das innovative Design sorgt für einfache Handhabung und Formstabilität. Durch mühelose Materialausgabe und der einfachen Darreichung macht es Freude unsere Spritzen und Unitips in Verwendung zu haben.

8 x G-ænial Universal Injectable UNITIPS oder SPRITZEN

1 x G-PREMIO BOND GRATIS

Kaufe 8 x G-ænial Universal Injectable Unitips (à 15 x 0,16 ml) oder Spritzen (à 2,1 ml/4 g) und erhalte 1 x G-Premio BOND Flasche (5 ml) im Wert von 115,70 CHF gratis!



Farbmix möglich. Gültig innerhalb gleicher Verpackungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

PREISVORTEIL

4 + 1
10 + 3
AB 45,50 CHF
Preis pro Spritzenpackung


Erhalte 5 Packungen G-ænial Universal Injectable zum Preis von 4!
Erhalte 13 Packungen G-ænial Universal Injectable zum Preis von 10!

Aktion nur gültig innerhalb der gleichen Packungseinheit und nach Rücksprache mit einem GC Fachberater.

Biegsame Spitze für eine optimale Applikation in die Kavität



Kein Fädenziehen, kein Wegsacken, kein Stress

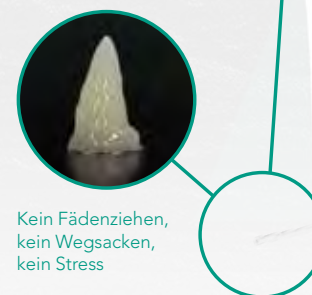

Einfache Materialausgabe für maximalen Komfort



Dünne Unitipsspitze für kontrollierte Materialausgabe



G-ænial Universal Injectable Spritze 1 ml (1,7 g); 45,50 CHF Preis pro Packung

Art.-Nr. 10003705 A1
Art.-Nr. 10003706 A2
Art.-Nr. 10003707 A3
Art.-Nr. 10003708 A3.5
Art.-Nr. 10003709 A4
Art.-Nr. 10003718 AE

Art.-Nr. 10003714 AO1
Art.-Nr. 10003715 AO2
Art.-Nr. 10003716 AO3
Art.-Nr. 10003710 B1
Art.-Nr. 10003711 B2
Art.-Nr. 10003704 BW

Art.-Nr. 10003712 CV
Art.-Nr. 10003713 CVD
Art.-Nr. 10003717 JE
Art.-Nr. 10003703 XBW

G-ænial Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 68,50 CHF Preis pro Packung

Art.-Nr. 10006896 A1
Art.-Nr. 10006897 A2
Art.-Nr. 10006898 A3
Art.-Nr. 10006899 A3.5
Art.-Nr. 10006900 A4
Art.-Nr. 10006909 AE

Art.-Nr. 10006905 AO1
Art.-Nr. 10006906 AO2
Art.-Nr. 10006907 AO3
Art.-Nr. 10006901 B1
Art.-Nr. 10006902 B2
Art.-Nr. 10006911 BW

Art.-Nr. 10006903 CV
Art.-Nr. 10006904 CVD
Art.-Nr. 10006908 JE
Art.-Nr. 10006910 XBW

MUST HAVE!
JETZT TESTEN!

Für jeden Ihrer Workflows die passende Lösung von GC!





TOP NEWS & HIGHLIGHTS

**GC AUSTRIA
SWISS OFFICE
PRAXIS**

Angebote gültig bis 30. Juni 2023



Since 1921
100 years of Quality in Dental