

ЗАЩО ИМЕДИАТНО ДЕНТИНОВО ЗАПЕЧАТВАНЕ?

Инфилтрацията на смола върху дентиновата повърхност е по-ефективно върху прясно срязан дентин, защото е незамърсен и чист.

Имедиатното дентиново запечатване защитава дентина срещу замърсяване с бактерии или остатъци от временни цименти.

Предотвратява постоперативна чувствителност, като запечатва дентиновите каналчета.

Увеличава силата на връзката на финалното възстановяване към зъбната структура.

Често елиминира нуждата за анестезия по време на процедурата по циментиране.
(когато възстановяването е изработено в следващото посещение)

2A. G-Premio BOND



1. Почистете зъбните повърхности, изплакнете обилно и подсушете.



Нанесете G-Premio BOND.

ИЛИ



Нанесете 1-PRIMER на G2-BOND Universal.

10 сек.

2B. G2-BOND Universal



5 сек.

Изсушаване.



Нанесете 2-BOND от G2-BOND Universal.



3. Продушайте, за да направите равномерен свързващ слой.



4. Светлинна полимеризация.



5. Запълнете подмолите с everX Flow и извършете повдигане на дълбоките граници ако е необходимо.*



6. Отстранете неполимеризирания слой. Разкрийте емайла, покрит с адхезив с фино зърнест диамантен борер.

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ

- Винаги се препоръчва поставянето на кофердам и изолирането на съседните зъби с тефлонова лента.
- Използвайте максимално въздушно налягане, за да изсушите 1-PRIMER, за да отстраните разтворителя и остатъците от вода.
- 1-PRIMER трябва да се пази от светлина, тъй като съдържа фотоинициатори.
- Когато правите имедиатно дентиново запечатване с G-Premio BOND, се препоръчва да добавите тънък слой G-aenial Universal Injectable или течлив композит отгоре.



ЗАЩО ПОВДИГАНЕ НА ДЪЛБОКИТЕ ГРАНИЦИ?

Повдигането на дълбоките граници ще направи отпечатъка по-лесен чрез преместване на проксималните граници на възстановяването супрагингивално, което е особено важно за интраоралното сканиране. Помага за избягване на пародонтални хирургични процедури. Улеснява изолирането на препарирания зъб и циментирането на окончателното възстановяване.



1. Почистете зъбните повърхности, изплакнете обилно и подсушете.



2. Приложете матрица, адаптирана към техниката. Гингивалния ръб на препарацията трябва да бъде добре запечатан.



3. Ецвайте емайла.



4. Нанесете свързващ агент (G-Premio BOND или G2-BOND Universal).



5. Продушване и светлинно полимеризиране.



6. Нанесете G-ænial Universal Injectable върху гингивалния ръб на проксималната кутия.



7. Светлинна полимеризация.



8. Отстранете матрицата, проверете за налични надвеси и разкрийте емайла, покрит с адхезив, с фино зърнест диамантен борер.

Сканирайте QR кода за повече информация:



СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ

- Силно се препоръчва изолация с кофердам.
- За по-добър профил на изникване използвайте тefлонова лента в пространството между матрицата и съседния зъб вместо клин. Не използвайте същата матрица, която използвате за създаване на контактна точка при директни възстановявания.
- Препоръчва се селективно ецване на емайла.
- Използвайте XBW цвят на G-ænial Universal Injectable за лесно разграничаване между зъба, композитния материал и възстановяването.
- Височината на новата граница трябва да е малко над гингивалния ръб (1 mm).