

Onlej a overlej od A do Z:

Okamžité zapečetění dentinu pomocí G-Premio BOND nebo G2-BOND Universal



PROČ OKAMŽITÉ ZAPEČETĚNÍ DENTINU?

Infiltrace pryskyřice do povrchu dentinu je účinnější u čerstvě preparovaného dentinu, protože je čistý a nekontaminovaný.

IDS chrání dentin před kontaminací bakteriemi nebo zbytky dočasných cementů.

Předchází se pooperační citlivosti utěsněním dentinových tubulů.

Zvyšuje se pevnost vazby konečné nepřímé náhrady k zubu.

Často se eliminuje potřeba anestezie během postupu cementace (když je náhrada dodána při dalším ošetření).

2A. G-Premio BOND



1. Vyčistěte, důkladně opláchněte a osušte povrchy zubu.



Aplikujte G-Premio BOND

NEBO



Aplikujte 1-PRIMER přípravku G2-BOND Universal.

10 sekund

2B. G2-BOND Universal



Osušte.

5 sekund



Aplikujte 2-BOND přípravku G2-BOND Universal.



3. Foukáním vzduchu vytvořte rovnoměrnou spojovací vrstvu.



4. Vytvřizte světlem.



5. Vyplňte podsekřiviny pomocí everX Flow a v případě potřeby proveďte deep margin elevation. *



6. Odstraňte nespolymerizovanou vrstvu. Sklovinu lze obnažit použitím diamantové frézy s jemnou zrnitostí.

TIPY A TRIKY

- Vždy se doporučuje umístit koferdam a izolovat sousední zuby teflonovou páskou.
- Pro vysušení 1-PRIMER použijte maximální tlak vzduchu, abyste odstranili rozpouštědlo a zbytky vody.
- 1-PRIMER by se měl uchovávat mimo dosah světla, protože obsahuje fotoiniciátory..
- Při okamžitém zapečetění dentinu pomocí G-Premio BOND se doporučuje přidat na vrchní část tenkou vrstvu G-aenial Universal Injectable nebo zatékavého kompozitu.

Onlej a overlej od A do Z: Deep margin elevation s G-ænial™ Universal Injectable



PROČ DEEP MARGIN ELEVATION?

Deep margin elevation (subgingivální dostavba okraje zubu kompozitem) usnadňuje snímání otisků tím, že posune proximální okraj rekonstrukce do supragingivální polohy, což je důležité zejména při intraorálním snímání. Pomáhá vyhnout se periodontálním chirurgickým zákrokům. Uspadňuje izolaci preparovaného zubu a cementování finální rekonstrukce.



1. Vyčistěte, důkladně opláchněte a osušte povrchy zubu.



2. Použijte matrici příz-působenou technice. Gingivální okraj preparovaného zubu by měl být dobře zapečetěn.



3. Leptejte sklovinu.



4. Naneste bond (G-Premio BOND nebo G2-BOND Universal).



5. Vysušte a vytvrzujte světlem.



6. Aplikujte G-ænial Universal Injectable na gingivální okraj proximálního boxu.



7. Vytvrzujte světlem.



8. Odstraňte matrici, zkontrolujte případné převisy a pomocí diamantové frézy s jemnou zrnitostí odhalte sklovinu pokrytou adhezivním přípravkem.

Další informace získáte naskenováním QR kódu:



TIPY A TRIKY

- Důrazně se doporučuje izolace koferdamem.
- K dosažení lepšího emergentního profilu použijte v prostoru mezi matricí a sousedním zubem místo klínu teflonovou pásku. Nepoužívejte stejnou matrici, jakou používáte k vytvoření kontaktního bodu při přímých rekonstrukcích.
- Doporučuje se selektivní leptání sklovinu.
- Použijte odstín XBW přípravku G-ænial Universal Injectable pro snadné rozlišení mezi zubem, kompozitním materiálem a rekonstrukcí.
- Výška nového okraje by měla být mírně nad okrajem dásně (1 mm).