

Onlay & overlay od A do Z:

Natychmiastowe uszczelnienie zębiny z zastosowaniem G2-BOND Universal lub G-Premio BOND



W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ NATYCHMIASTOWE USZCZELNIENIE ZĘBINY?

Infiltracja żywicy do powierzchni zębiny jest bardziej skuteczna w przypadku świeżej preparacji zębiny, ponieważ jest ona niezainfekowana i czysta.
IDS chroni zębinę przed zanieczyszczeniem bakteriami lub pozostałościami cementu tymczasowego.
Zapobiega nadwrażliwości pozabiegowej poprzez uszczelnienie kanalików zębinowych.
Zwiększa siłę wiązania adhezyjnego ostatecznej odbudowy pośredniej z zębem.
Często eliminuje potrzebę znieczulenia podczas procedury cementowania (gdy uzupełnienie jest cementowane na następnej wizycie).

2A. G-Premio BOND



1. Oczyszczyć powierzchnię zębów, dokładnie spłukać i osuszyć.



Nałożyć G-Premio BOND.



Nałożyć 1-PRIMER z systemu G2-BOND Universal.



Osuszyć.



Nałożyć 2-BOND z systemu G2-BOND Universal.



3. Osuszyć powietrzem, aby uzyskać jednolitą warstwę wiążącą.



4. Utwardzić światłem.



5. W razie potrzeby wykonać podniesienie powierzchni nośnej techniką *deep margin elevation*. Wypełnić podcięcie z użyciem everX Flow.



6. Usunąć niespolimerizowaną warstwę. Odśłonić pokryte systemem wiążącym szkliwo za pomocą drobnoziarnistego wiertła diamentowego.

WSKAZÓWKI I PORADY

- Zaleca się stosowanie koferdamu i odizolowanie sąsiednich zębów za pomocą taśmy teflonowej.
- Należy używać maksymalnie sprężonego powietrza do osuszenia 1-PRIMER, aby usunąć rozpuszczalnik i pozostałości wody.
- 1-PRIMER należy przechowywać z dala od światła, ponieważ zawiera fotoinicjatory.
- Przy wykonywaniu procedury natychmiastowego uszczelnienia zębiny za pomocą G-Premio BOND, zaleca się nałożenie cienkiej warstwy G-ænial Universal Injectable lub płynnego kompozytu.

Onlay & overlay od A do Z:

Podniesienie powierzchni nośnej ściany styecznej techniką *deep margin elevation* za pomocą G-ænial™ Universal Injectable



W JAKIM CELU WYKONUJE SIĘ PODNIESIENIE POWIERZCHNI NOŚNEJ ŚCIANY STYCZNEJ?

Podniesienie powierzchni nośnej ściany styecznej techniką *deep margin elevation* ułatwi wykonanie wycisku, ponieważ przesuwając granicę preparacji naddziąsłowo, co jest szczególnie ważne w przypadku skanowania wewnątrzustnego. Pomaga uniknąć chirurgicznego zabiegu periodontologicznego. Ułatwia izolację opracowanego zęba i cementowanie ostatecznej odbudowy.



1. Oczyszczyć powierzchnie zębów, dokładnie spłukać i osuszyć.



2. Nałożyć matrycę dostosowaną do techniki. Dodziąsłowy brzeg preparacji powinien być dobrze uszczelniony.



3. Wytrawić szkliwo.



4. Nałożyć system łączący (G-Premio BOND lub G2-BOND Universal).



5. Osuszyć i utwardzić światłem.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji:



6. Nałożyć G-ænial Universal Injectable na powierzchnię nośną ściany styecznej.



7. Utwardzić światłem.



8. Usunąć matrycę, sprawdzić, czy nie ma nawisów i odsłonić pokryte systemem łączącym szkliwo za pomocą drobnoziarnistego wiertła diamentowego.

WSKAZÓWKI I PORADY

- Zalecana jest izolacja za pomocą koferdamu.
- Aby uzyskać lepszy profil wylania, w przestrzeni między matrycą a sąsiednim zębem należy zastosować taśmę teflonową zamiast klina. Nie należy stosować matryc używanych do odtwarzania punktu stykowego w uzupełnieniach bezpośrednich.
- Zalecane jest selektywne wytrawianie szkliwa.
- Zastosowanie odcienia XBW z systemu G-ænial Universal Injectable, pozwoli łatwo rozróżnić tkankę zęba, materiał kompozytowy i uzupełnienie.
- Nowa granica preparacji powinna znajdować się nieznacznie powyżej granicy dziąsła (1 mm).