

Onlay és overlay A-tól Z-ig:

Azonnali dentin zárás G-Premio BOND vagy G2-BOND Universal anyaggal



MIÉRT KELL AZONNALI DENTINZÁRÁS?

A rezin beszívárogatása a dentin felületébe hatékonyabb frissen vágott dentin esetén mert ilyenkor az még nem szennyezett, tiszta.

Az IDS megvédi a dentint a baktériumoktól valamint az ideiglenes ragasztó maradványaival való szennyeződéstől.

Megakadályozza a post operatív érzékenységet a dentincsatornák lezárásával.

Növeli a végső indirekt helyreállításnak a kötési szilárdságát a foghoz.

Gyakran kiküszöböli az érzéstelenítés szükségességét a cementálási eljárás során (amikor a helyreállítást a következő időpontra szállítják).

2A. G-Premio BOND




1. Tisztítsa meg a fog felületeit, alaposan öblítse le majd szárítsa meg.



Applikáljon G-Premio BOND anyagot.

VAGY

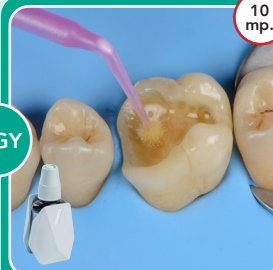

Applikálja a G2-BOND Universal 1-PRIMER-jét.

2B. G2-BOND Universal



Szárítsa meg.



Applikálja a G2-BOND Universal 2-BOND-ját.



3. Levegő fújással alakítson ki egy egyenletes bond réteget.



4. Fénypolimerizálja.



5. Az alámenős részeket töltsse fel everX Flow anyaggal. Amennyiben szükséges, végezzen ládaemelést.*



6. Távolítsa el a nem polimerizált réteget. Az adhezívvel eltakart zománcot fedje fel finom szemcséjű gyémánt fúróval.

TIPPEK és TRÜKKÖK

- Mindig ajánlott kofferdam felhelyezése és a szomszédos fogak teflonszalaggal történő elkülönítése
- Használjon maximális légnyomást az 1-PRIMER szárításához az oldat és a vízmaradványok eltávolításához
- Az 1-PRIMER-t fénytől elzárva kell tartani, mivel fotoiniciátorokat tartalmaz
- Ha azonnali dentinzárást végez a G-Premio BOND-dal, ajánlott egy vékony réteg G-aenial Universal Injectable vagy egy folyékony kompozit hozzáadása a tetejére

Onlay és overlay A-tól Z-ig: Ládaemelés G-ænial™ Universal Injectable anyaggal



MIÉRT SZÜKSÉGES A LÁDAEMELÉS?

A ládaemelés megkönnyíti a lenyomatvételt azáltal, hogy a helyreállítás proximális szélét megemeli supra-gingiválisan, ami különösen fontos az intraorális szkennelésnél. Segít elkerülni a parodontális sebészeti beavatkozásokat. Megkönnyíti az előkészített fog izolálását és a végleges fogpótlás beragasztását.



1. Tisztítsa meg a fog felületeit, alaposan öblítse le majd szárítsa meg.



2. Használjon az alkalmazott technikához igazított mátrixot. A preparáció íny felőli szélé megfelelő zárást kell hogy kapjon.



3. Savazza a zománcot.



4. Applikáljon bond anyagot (G-Premio BOND vagy G2-BOND Universal).



5. Szárítsa meg majd fénypolimerizálja.



6. Applikáljon G-ænial Universal Injectable anyagot a proximális kazetta zárólécére.



7. Fénypolimerizálja.



8. Távolítsa el a mátrixot és győződjön meg arról, hogy nincs túl erős anyag. Az adhezívvel eltakart zománcot a fog többi részén fedje fel finom szemcséjű gyémánt fúróval.

További információért skennelje be a QR kódot:



TIPPEK és TRÜKKÖK

- A kofferdammal történő izolálás erősen ajánlott
- Megfelelőbb emergencia profil eléréséért ék helyett használjon teflonszalagot a mátrix és a szomszédos fog közti helyen, ne használja ugyanazt a mátrixot, amelyet a direkt restaurációk kontaktpontjainak létrehozásához használ
- A zománc szelektív savazása ajánlott
- Használja a G-ænial Universal Injectable XBW árnyalatát a fog, a kompozit anyag és a helyreállítás könnyebb megkülönböztetéséhez
- Az új szél magasságának kissé meg kell haladnia az íny szélét (1 mm)