

GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JANVIER – JUIN 2026

CABINET



L'usure est bien réelle, nos solutions aussi

Les approches GC en restauration directe pour lutter contre l'usure dentaire

Le traitement de l'usure dentaire, par où commencer ?

L'usure dentaire est un sujet de préoccupation courant en dentisterie et un problème qui se répercute de plus en plus sur le travail quotidien. Bien que la gravité soit variable, nous nous intéressons ici à l'usure modérée, dont les signes sont clairement visibles, mais l'étendue encore limitée et sans risques pour la structure dentaire. À ce stade, une intervention précoce est essentielle pour éviter d'aggraver l'usure et de compliquer davantage le traitement. Plus le traitement est retardé, plus les conséquences sur le bien-être des patients sont néfastes, car la sensibilité, les douleurs et les problèmes esthétiques ne cessent d'augmenter.

Soyez vigilant et réactif, prévenez les désagréments en travaillant avec GC. Nous vous expliquons comment reconnaître visuellement les différents signes de l'usure, comment prévenir la survenue de l'usure ou enrayer son aggravation, et quelles sont les étapes nécessaires à une restauration efficace.

Votre plan de traitement est-il prêt ?
Nous sommes là pour vous aider à combattre l'usure modérée !



Identifier: comment reconnaître efficacement l'usure ?

Erosion

Perte caractéristique du relief des surfaces causée par les acides contenus dans les aliments, les boissons et/ou par les acides gastriques



Avec l'aimable autorisation du Dr. P. Swerts, Belgique

Abrasion

Perte de substance dentaire se présentant comme une encoche en forme de U dans la région cervicale ou autres lésions d'usure atypiques dues à des objets étrangers ou à des habitudes



Avec l'aimable autorisation du Dr. A. Salehi, France

Attrition

Surfaces aplaties résultant de l'usure de contact entre les dents causée par le grincement, le serrement et la mastication



Avec l'aimable autorisation du Dr. K. Karagiannopoulos, Royaume-Uni

Abfraction

Dépansions dans la région cervicale dues à des flexions répétées causées par le grincement et le serrement des dents



Avec l'aimable autorisation du Dr. Simone Moretto, Belgique



Approche de restauration: comment traiter l'usure modérée ?

1

Traitement orthodontique préalable à la restauration complète des arcades dentaires.

Parfaitement indiqué pour les cas de compensation dentoalvéolaire ou en présence d'une malocclusion ou d'un encombrement



Avec l'aimable autorisation du Dr. S. Döröste, Suède

2

Principe de Dahl

les patients présentant une usure limitée aux dents antérieures. La restauration de dents antérieures (représentées sous forme de wax-up blanc) en supra-occlusion permet les mouvements axiaux relatifs des dents postérieures, et par conséquent l'obtention de l'occlusion finale.



Avec l'aimable autorisation du Dr. K. Karagiannopoulos, Royaume-Uni

3

Restauration d'arcade dentaire uniquement

Parfaitement indiquée pour : l'usure dentaire généralisée sans malocclusion



Avec l'aimable autorisation du Prof. Dr. M. Peumans, Belgique



Tous les produits de notre campagne « Tooth Wear » portent cette mention



SCANNER POUR PLUS D'INFORMATIONS !



Technique de restauration: comment traiter l'usure modérée ?

Reconstruction à main levée

Parfaitement indiquée pour le patient qui a besoin d'un traitement simple, lorsque l'usure ne touche qu'une surface limitée. L'utilisation du composite G-ænial A'CHORD offre une grande maniabilité, une excellente esthétique et une résistance élevée à l'usure.



Stamp Technique (ou technique du tampon)

Parfaitement indiquée pour le patient qui a besoin d'un traitement modérément complexe, lorsque de nombreuses dents sont touchées par l'usure. Cette technique est similaire au moulage par injection, mais elle fait appel à un composite en pâte pour la reconstruction. L'utilisation du composite G-ænial A'CHORD combiné à la technique du tampon confère à la restauration un brillant magnifique et durable.



Technique de moulage par injection

Parfaitement indiquée pour le patient qui a besoin d'un traitement plus complexe, lorsque de nombreuses dents sont touchées par l'usure. Cette technique est idéale pour transférer une morphologie très précise de la dent dans la bouche du patient de manière rapide et prédictible. G-ænial Universal Injectable, notre matériau de restauration le plus résistant, doté d'une thixotropie idéale, est le choix privilégié pour obtenir les meilleurs résultats.



Nos recommandations



G-Premio BOND

- Procédure de collage rapide et économique grâce à un flacon qui contient 300 gouttes
- Idéal pour soulager instantanément l'hypersensibilité causée par l'usure



everX Flow

- Renforcement des dents en cas de contraintes occlusales élevées
- Très haute résistance à la fracture pour inhiber les effets de chocs causés par le bruxisme



G-ænial A'CHORD

- Brillant longue durée, préservant encore plus longtemps l'esthétique de votre restauration réalisée à main levée ou par la technique du tampon
- La fluorescence aussi vraie que nature garantit l'invisibilité de votre traitement de l'usure sous n'importe quelle lumière



G-ænial Universal Injectable

- Résistance supérieure à l'usure. Un composite idéal pour traiter les dents usées
- Propriétés autopolissantes pour un brillant longue durée et peu d'usure des dents antagonistes



Prévention: prévenir et enrayer la progression de l'usure

Une approche holistique est primordiale dans le traitement de l'usure. Il est nécessaire d'évaluer les facteurs de risque d'usure sous-jacents (par exemple : maladie, habitudes alimentaires...) avant d'établir toute stratégie de traitement. Une surveillance régulière de la progression de l'usure est indispensable avant toute intervention, surtout aux premiers stades de l'usure. L'utilisation d'un indice d'usure dentaire, de photos ou d'empreintes numériques en 3D peut faciliter l'analyse de la progression de l'usure au fil du temps.



Gouttières de protection nocturne
Prévenez la progression de l'usure en recommandant une gouttière de protection nocturne lorsque cela est cliniquement indiqué.



Hygiène bucco-dentaire
Veillez à ce que votre patient se brosse souvent les dents, mais pas trop agressivement, et avec les bons accessoires.



Attitude
Incitez le patient à changer son point de vue sur la façon de traiter et de protéger ses dents et ses restaurations.



Consommation
Conseillez au patient de limiter les boissons et les aliments acides, tels que les boissons énergisantes et les agrumes, qui accélèrent l'usure.

Soutien supplémentaire avec RECALDENT™ (CPP-ACP)

- Favorise la reminéralisation de l'émail et accroît la dureté des surfaces. Plus les surfaces se reminéralisent rapidement et deviennent résistantes, plus l'usure peut être inhibée.
- Désensibilise les dents dont la dentine est exposée.
- Offre une protection supplémentaire contre les attaques acides ultérieures.



RECALDENT™ et le logo de RECALDENT™ sont des marques commerciales de Mondelēz International Group utilisées sous licence. RECALDENT™ est dérivé de la caséine de lait. Ne pas utiliser chez les patients allergiques aux protéines du lait de vache, aux hydroxybenzoates ou au soja.



G-Premio BOND
Adhésif universel monocomposant



G-ænial Universal Injectable
Composite de restauration haute résistance



G-ænial™ A'CHORD
Composite universel avancé avec un système de teinte simplifié



everX Flow
Composite fluide renforcé de fibres courtes



MI Paste Plus
Calcium et phosphate biodisponibles, avec fluor



Tooth Mousse
Calcium et phosphate biodisponibles, sans fluor



MI Varnish
Vernis fluoré amélioré avec du calcium et du phosphate biodisponibles



EXACLEAR
Polyvinyle siloxane transparent



G2-BOND Universal

Adhésif universel en 2 flacons –
Le nouveau standard de l'adhésion

Grâce à sa technologie Dual H exclusive – optimisation avancée de la liaison entre la dent et le composite - G2-BOND Universal est un système universel complet en deux flacons qui combine ce que les cliniciens attendent des gold standards en matière d'automordançage (SAM & Universels) et de mordançage/rinçage (MR), et même plus :

- Le choix du mode de mordançage
- Durabilité supérieure et force d'adhésion
- Résistance supérieure à la décoloration marginale
- Application aisée et peu sensible à la technique Multiples indications¹
- Une conception mounne, intelligente et ergonomique : 1-PRIMER / 2-BOND



ESSAYEZ
MAINTENANT
174,10 CHF

N°art. 10006819
G2-BOND Universal Bottle Kit
1 x 1-PRIMER 5 ml, 1 x 2-BOND 5 ml,
accessoires;
174,10 CHF par Bottle Kit

Convient parfaitement
à la technique IDS
(IMMEDIATE DENTIN
SEALING) !

Un nouveau standard en 2 flacons
pour tous les modes de mordançage

Pour une satisfaction et un confort total
de vos patients !



Point de contact réduit
entre la protection
et le flacon

Nervure conçue pour
presser efficacement la
bouteille

Performance globale d'une composition exclusive

- 4-MET pour une adhésion fiable à l'émail et à la dentine
- MDP pour une adhésion excellente à l'émail et à la dentine, à la zircone, à l'alumine et aux métaux non précieux
- MDTP se lie aux métaux précieux
- Système sans HEMA pour une durabilité exceptionnelle cliniquement prouvée²

² Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

¹ Indications : Composites directs | Réparation intra orale | Technique de scellement immédiat de la dentine (IDS) | Traitement des dents hypersensibles | Traitement des surfaces radiculaires exposées | Collage des restaurations indirectes (avec G-CEM LinkForce) | Reconstitution corono radulaire (avec GRADIA CORE & GPB DCA).



Capuchon
flip-top !



G-Premio
BOND DCA

pour une
polymérisation duale
avec GRADIA CORE
& le collage des
tenons

G-PREMIO BOND
BOTTLE

111,60 CHF

N°art. 10001461
G-Premio BOND Bottle
1 flacon à 5 ml,
111,60 CHF par paquet

Autres unités valables :

N°art. 10001242
G-Premio BOND Unitdose
50 pcs. à 0,1 ml, accessoires;
140,40 CHF

N°art. 10001457
G-Premio BOND Kit
1 flacon 5 ml, accessoires;
141,60 CHF

N°art. 10001349
G-Premio BOND DCA
1 flacon 3 ml Dual
Cure Activator (DCA);
58,30 CHF

G-Premio BOND

Adhésif mono composant photopolymérisable pour

Collage direct


Réparation

Collage indirect

Reconstitution
corono-radulaire

Traitement de
l'hypersensibilité


Compatible
avec tous les modes
de mordançage

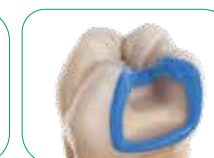

Zéro compromis sur les performances – Zéro compromis sur la manipulation




Embout
fin
qui minimise
le gaspillage
jusqu'à 300
gouttes par
flacon

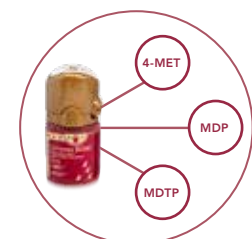

3 monomères
fonctionnels :
adhésion élevée
sur dentine, émail
& différents
substrats



Faible épaisseur
de film : diminution
du risque de
coloration et
ajustage marginal
parfait

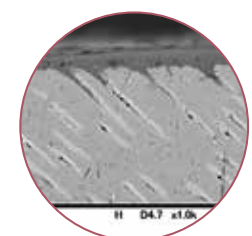

Excellente
pénétration :
faible sensibilité
postopératoire

OFFRE 10%
3+1 256,95 CHF
~~285,50 CHF~~
+ **ON TOP** ZEROFLOX X
MICRO APPLICATEUR
GRATUIT

Prix par paquet

N°art. 10001458
G-Premio BOND 3-Bottle-Pack
3 Flacon à 5 ml

256,95 CHF au lieu de 285,50 CHF

Achetez 1 x G-Premio BOND 3-Bottle Pack
avec un avantage de 10% et recevez
en plus 1 x G-Premio BOND 5 ml Flacon
+ ON TOP 1 x Zeroflox X Micro applicateur
(30 pcs.) gratuitement !



G-PREMIO BOND 3-BOTTLE PACK

G-ÆNIAL ACHORD
SERINGUE ou UNITIPS
GRATUITS

OFFRE

BUNDLEPACK G-æniel Universal
Injectable + G-Premio BOND

~~273,30 CHF~~ **225,- CHF**

N°art. 10003741
**G-æniel Universal Injectable
+ G-Premio BOND Bundlepack**
Contenu : G-æniel Universal Injectable
je 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml),
1 x A3 (1 ml), G-Premio BOND
5 ml flacon, accessoires
225,- CHF (prix par Bundlepack)



G-PREMIO BOND
PAQUET

G-ÆNIAL UNIVERSAL
INJECTABLE GRATUIT

Achetez 1 x G-Premio BOND
(valable pour tous paquets
G-Premio BOND) et recevez en plus
2 x G-æniel Universal Injectable
seringues ou unitips packs
gratuitement !

Valable pour tous paquets
G-Premio BOND et par l'intermédiaire
de votre consultant GC.
Mélange de teintes possible.



G-ænial A'CHORD

Le composite universel premium simplifié

La simplicité, l'esthétique et la performance entre vos mains

La technologie révolutionnaire selon A'CHORD

- haute résistance dans le temps et à l'usure
- radio-opacité excellente

La simplification selon A'CHORD


- système simplifié de teinte unique
- manipulation simplifiée
- système universel, tout simplement

L'esthétique selon A'CHORD


- fluorescence naturelle
- brillance longue durée
- cas les plus complexes



Avant le polissage Après le polissage

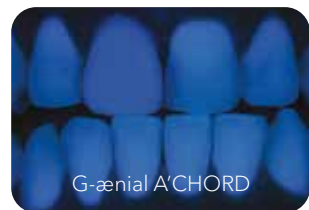

G-ænial A'CHORD

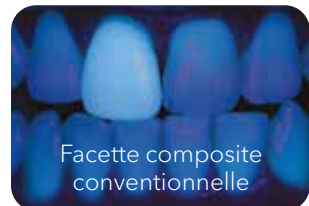

Facette composite conventionnelle

© Dr. J. Tapia Guadix, Espagne

GC Restorative Guide

Le guide vous fournit des représentations en 3D de tous les types de cavités et vous conseille parmi les verres ionomères à haute densité ou hybrides ou des composites de restauration.



Plus d'information au restorative guide ou à l'app :



Au webpage : <http://gaenialachord.com>



G-ÆNIAL A'CHORD
DIAPOLISHER PASTE
GC COMPOSITE
MODELING LIQUID



Correspondance pour la technique de stratification

VITA® Classic	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opak	AO1	AO2	AO3	AO3	AO3	AO1	AO2	AO3	AO3	AO2	AO3	AO3	AO3	AO1	AO2	AO3
CORE	A1	A2	A3	A3.5	A4	A1	A2	A3	A3.5	A2	A3	A3	A3.5	A1	A2	A3
Enamel	JE	JE	AE	AE	AE	JE	JE	AE	AE	JE	AE	AE	AE	JE	JE	AE



SERINGUES

N°art. 10006767

G-ænial A'CHORD Layering Kit

1 Seringue / teintes : A2; A3; AO2; AE; JE (à 2,1 ml/4 g);
294,20 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006768

G-ænial A'CHORD Core Kit

1 Seringue / teintes : A1; A2; A3; A3.5; A4 (à 2,1 ml/4 g);
294,20 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006769 Trial Kit A

3 Seringues, (2 x A2, 1 x A3) à 2,1 ml (4 g)
177,40 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006771

G-ænial A'CHORD Bleach Kit

1 Seringue/Farbe: BW, BOW, JE (à 2,1 ml/4 g)
177,40 CHF (Prix par paquet)
G-ænial A'CHORD Bleach KIT uniquement disponible sous forme de seringue. Teintes Bleach pour Unitips disponibles en recharge.

Seringues Refill

à 2,1 ml /4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; AO1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);
65,50 CHF (Prix par paquet)

UNITIPS

N°art. 10006772

G-ænial A'CHORD Layering Kit Unitips

15 Unitips / teintes : A2, A3, AO2, AE, JE (à 15 x 0,16 ml);
315,60 CHF (Prix par paquet)

N°art. 10006773

G-ænial A'CHORD Core Kit Unitips

15 Unitips / teintes: A1, A2, A3, A3.5, A4 (à 15 x 0,16 ml);
315,60 CHF (Prix par paquet)

Unitips Refill

à 15 x 0,16 ml: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6; AO1, AO2, AO3; JE, AE; BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach);
70,20 CHF (Prix par paquet)

OFFRE










4 + 1
10 + 3
À PARTIR DE
65,50
CHF

Prix par paquet de seringues

Recevez 5 Paquets G-ænial A'CHORD au prix de 4!
Recevez 13 Paquets G-ænial A'CHORD au prix de 10!

Mélange de teintes possible.
Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.



<div>Syringe (1 x 2.1ml/4.0g) Unitip (15 x 0.16ml/0.33g)</div>	10006779	10006780	10006781	10006782	10006783										
	10006753	10006754	10006755	10006756	10006757										
<div>CORE Shades VITA® Classic</div>	A1	A2	A3	A3.5	A4										
	A1 B1 D2	A2 B2 C1 D3	A3 B3 C2 C3 D4	A3.5 B4 C4	A4 A4										
						<div>Syringe (1 x 2.1ml/4.0g) Unitip (15 x 0.16ml/0.33g)</div>	<div>Opaque Shades</div>	<div>Standard Shades</div>	<div>Enamel Shades</div>						
							BOW	AO1	AO2	AO3	BW	A5	A6	JE	AE
															
							10006790	10006787	10006788	10006789	10006786	10006784	10006785	10006791	10006792
							10006764	10006761	10006762	10006763	10006760	10006758	10006759	10006765	10006766

DIAPOLISHER PASTE

Pâte à polir diamantée



N°art. 10000892

DIAPOLISHER PASTE

Contenu :
DIAPOLISHER PASTE
Seringue 2 g,
1 x Dispensing Tip (needle type)
& 1 x Protective cover;
53,40 CHF par paquet

GC Composite Modeling Liquid

Kit de modelage des restaurations composites



N°art. 10003387

GC Composite Modeling Kit

Contenu :
1 x GC Modeling Liquid 6 ml,
2 x Gradia Brush Holder,
5 x Gradia Brush Flat,
5 x Gradia Brush Round,
1 x Mixing pad; 109,20 CHF par paquet

Injection-Moulding-Technique

Nouvelle technique de moulage par injection pour le traitement pour les patients ayant des exigences esthétiques élevées



Regardez ici
les techniques
Injection-
Moulding



OFFRE

10% **140,40 CHF**
~~156,- CHF~~

N°art. 10003753
Injection Moulding Kit
Contenu : à 1 Seringue G-æniat Universal
Injectable (1 ml/1,7 g) A1, A2, A3;
1 Exaclear Cartouche 48 ml;

140,40 CHF au lieu de 156,00 CHF

G-æniat Universal Injectable

Injecter, former
et contourner –
tout à la fois

- Charges de baryum ultra-fines (150 µm)
- taux de charge élevée
- Technologie de recouvrement total au silane (FSC) améliorant la dispersion et l'adhérence des charges dans la matrice
- Propriétés exceptionnelles non collant
- Faible pression d'extrusion
- Radio-opacité élevée

Informations complémentaires
du produit en page 9.



G-Premio BOND

Objectif : Zéro
compromis sur les
performances !
Objectif : Zéro
décollement !

- Excellente adhésion sur l'émail et la dentine, quel que soit la technique de mordantage choisie
- Manipulation simple et précise
- Consistance et mouillabilité excellentes
- Utilisable pour composites, zircone, oxyde d'alumine et métaux (précieux & non précieux) et pour toutes les céramiques vitreuses (feldspathiques, renforcées à la leucite et au disilicate de lithium) et les céramique hybrides combinées p. ex., avec le G-Multi Primer la polymérisation duale (en mélange avec l'activateur G-Premio BOND DCA)
- Objectif zéro coloration !
- Objectif zéro sensibilité post-opératoire !

Informations complémentaires
du produit en page 5.



INFORMEZ-VOUS
MAINTENANT !



Technique Injection-
Moulding avec EXACLEAR et
G-æniat Universal Injectable
avec Dr. Serhat Köken



EXACLEAR

Vinyl Polysiloxane
transparent

- Technique de modelage par injection : contrôle facile de l'injection et photopolymérisation parfaite
- Couronnes et bridges temporaires : photopolymérisation efficace de matériaux à double polymérisation tels que TEMPSMART DC
- Couches composites : photopolymérisation aisée de la face palatine
- Placement des fibres ou des brackets : transfert facile du modèle en bouche

82,70 CHF

Prix par paquet

N°art. 10001483 **Exaclear**
2 x cartouches à 48 ml (51 g),
6 x Mixing Tips II L (blue);
82,70 CHF par paquet



G-æniat Universal Injectable

Composite de restauration haute résistance

Transformez votre façon de travailler !

La conception innovante, permet une utilisation facile et sans affaissement. Grâce à l'extrusion sans effort, notre seringue et nos unitips sont agréables à utiliser – la distribution est facile.




PREISVORTEIL

BUNDLEPACK G-æniat Universal
Injectable + G-Premio BOND

~~273,30 CHF~~ **225,- CHF**

- Charges de Baryum ultra-fines (150 µm)
- taux de charge élevée
- Technologie de recouvrement total au silane (FSC) améliorant la dispersion et l'adhérence des charges dans la matrice
- Propriétés exceptionnelles non collant
- Faible pression d'extrusion
- Radio-opacité élevée

N°art. 10003741
**G-æniat Universal Injectable
+ G-Premio BOND Bundlepack**
Contenu : G-æniat Universal Injectable
à 1 x A1 (1 ml), 1 x A2 (1 ml), 1 x A3 (1 ml),
G-Premio BOND 5 ml Flaçon, Accessoires
225,- CHF (Prix par Bundlepack)

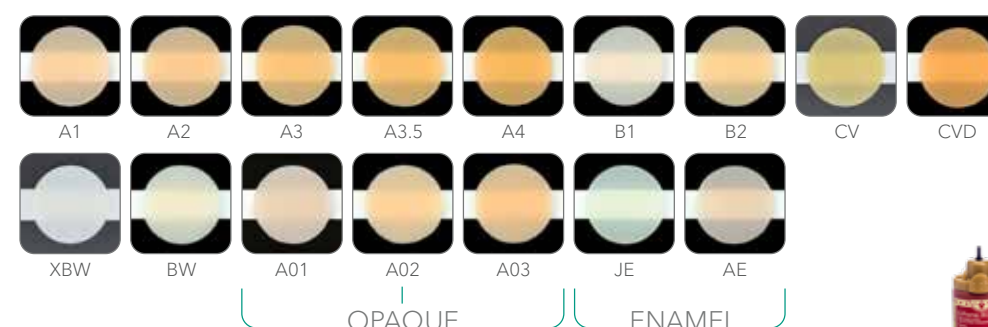

G-æniat Universal Injectable Seringue 1 ml (1,7 g); 43,90 CHF par paquet

N°art. 10003705 **A1**
N°art. 10003706 **A2**
N°art. 10003707 **A3**
N°art. 10003708 **A3.5**
N°art. 10003709 **A4**
N°art. 10003718 **AE**

N°art. 10003714 **A01**
N°art. 10003715 **A02**
N°art. 10003716 **A03**
N°art. 10003710 **B1**
N°art. 10003711 **B2**
N°art. 10003704 **BW**

N°art. 10003712 **CV**
N°art. 10003713 **CVD**
N°art. 10003717 **JE**
N°art. 10003703 **XBW**

G-æniat Universal Injectable Unitip 15 x 0,16 ml (0,27 g); 66,10 CHF par paquet

N°art. 10006896 **A1**
N°art. 10006897 **A2**
N°art. 10006898 **A3**
N°art. 10006899 **A3.5**
N°art. 10006900 **A4**
N°art. 10006909 **AE**

N°art. 10006905 **A01**
N°art. 10006906 **A02**
N°art. 10006907 **A03**
N°art. 10006901 **B1**
N°art. 10006902 **B2**
N°art. 10006911 **BW**

N°art. 10006903 **CV**
N°art. 10006904 **CVD**
N°art. 10006908 **JE**
N°art. 10006910 **XBW**

OFFRE

4 + 1
10 + 3 À PARTIR DE
43,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-æniat Universal
Injectable au prix de 4 !
Recevez 13 paquets G-æniat Universal
Injectable au prix de 10 !

Seulement valable pour une même unité
d'emballage. Offre valide par l'intermédiaire
de votre consultant GC.

8 x G-æniat Universal Injectable
(Seringue ou Unitips)

+ 2 x G-PREMIO BOND 5 ML
FLACON GRATUIT

Achetez 8 x G-æniat Universal Injectable
(seringue ou unitips) et recevez 2 x G-Premio
BOND 5 ml flacons gratuitement!

Seulement valable pour une même unité
d'emballage. Offre valide par l'intermédiaire
de votre consultant GC.





everX Flow®

Composite fluide fibro-renforcé pour le remplacement dentinaire

Fort de l'intérieur

Découvrez everX Flow, un composite fluide renforcé de fibres courtes conçu pour remplacer la dentine et renforcer les restaurations. Suivant le même principe que les barres de fer dans la construction, les fibres de verre dans everX Flow renforcent les restaurations et les empêchent de se fissurer. Facile à manipuler, avec deux teintes et une résistance à la fracture très élevée, everX Flow est sur le point de devenir votre nouveau produit de choix pour toutes les restaurations nécessitant un noyau fort, et pour vos préparations de reconstitutions de moignon.

NOUVEAU !




everX Flow peut désormais être placé directement dans les larges cavités ou les classes II, comblant le fossé entre la technique directe et indirecte. Cette nouvelle application est idéale pour les élévations de marges avec onlay ou composite. Bien évidemment, la procédure actuelle reste un choix possible.

Ancienne procédure




● everX Flow

Nouvelle procédure

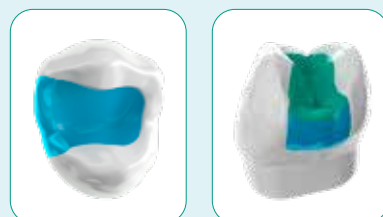

Composite conventionnel : Prolifération des fissures par l'obturation ET la structure de la dent

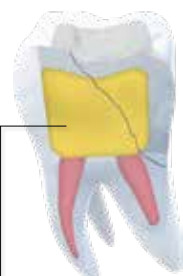

Structure composite

Aussi en couleur bulk en cas de profondes cavités avec profondeur de durcissement jusqu'à 5,5 mm optimal applicable !

everX Flow : La propagation des fissures est stoppée



Sous-structure

everX Posterior®

Renforcement, longévité et esthétique pour les grandes cavités

N°art. 10001048 **everX Posterior**;
90,90 CHF par paquet; 15 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips

N°art. 10001148 **everX Posterior**;
272,80 CHF par paquet; 50 x 0,13 ml (0,25 g) Unitips



D-Light® Pro

Voir plus loin que ce qui est visible à l'oeil nu ...
Lampe à photopolymériser à large spectre avec un mode détection en plus



EVERX FLOW
EVERX POSTERIOR
D-LIGHT PRO



Photopolymériser

- HP Mode - High Power 1400mW/cm²
- La LED bleue permet une activation optimale de la camphorqui-none avec une longueur d'onde de 460 à 465 nm
- Les LED violettes émettant à 400 - 405 nm permettent une photopolymérisation efficace avec des autres photo-initiateurs

Protéger

- LP Mode - Low Power une puissance réduite de 700 mW/cm² par exemple dans les cavités profondes lorsque la préparation est proche de la pulpe

Détecter

- DT Mode - Detection Mode qui utilise seulement les UV
- Visualisation de la plaque active
- Visualiser la dentine infectée
- Evaluer l'activité bactérienne dans les fissures
- les restaurations et les excès de ciment
- Evaluer la profondeur des fissures

Autoclavable
Nouvelle fibre optique en verre de sécurité
Augmentation de la puissance de la batterie

OFFRE
PRODUITS GC
D-LIGHT PRO GRATUIT

Achetez des produits GC
(G-aenial, Essentia, EverX Flow,
CERASMART270 ou EQUIA Forte HT)
d'une valeur de 2900,- CHF
et recevez la D-Light Pro gratuitement !


Mélange de produits possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

OFFRE

~~1447,- CHF~~ 999,- CHF

N°art. 70000008 **D-Light Pro**
Contenu : D-Light Pro pièce à main & module électronique, embout lumineux 8 mm, packs de batterie (x 2), station de charge, chargeurs, adaptateur EU/UK, dispositif pour la protec

Voir l'invisible

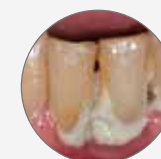

Visualisation de la plaque active






Visualiser le hiatus marginal



Visualiser les restaurations et les excès de ciment



Evaluer la profondeur des fissures

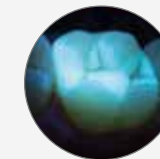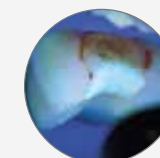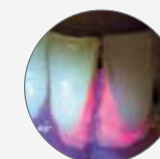

Hypominéralisation des molaires et incisives (MIH)

Une situation alarmante au niveau mondial qui concerne 1 enfant sur 7



MIH légère

Avec l'aimable autorisation du Prof. van Amerongen, Pays-Bas



MIH modérée

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie



MIH sévère

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie



MIH sur incisives

Avec l'aimable autorisation du Prof. Baroni, Italie

Renforcer et désensibiliser

avec GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus et MI Varnish

Les traitements topiques sont utiles pour renforcer les dents et diminuer la sensibilité en cas de MIH. L'application de Recaldent (CPP-ACP), contenant des niveaux élevés de calcium et de phosphate biodisponibles, se révèle efficace dans ce cas, et a été démontré.

Tooth Mousse (Sans fluorure)

MI Paste Plus (900 de fluorure)

- Crème topique avec Recaldent (CPP-ACP) pour une application quotidienne à domicile
- Appliquer après le brossage et avant de se coucher ; ne pas rincer
- Apporte une protection supplémentaire aux dents
- Neutralise les attaques acides

Protéger les surfaces avec GC Fuji TRIAGE

Fuji TRIAGE, un verre ionomère fluide qui protège la surface contre la formation de caries et l'hypersensibilité

- Fuji TRIAGE peut se lier chimiquement dans un environnement humide.
 - Les dents peuvent être protégées avant même leur éruption complète.
 - Le temps de prise de la teinte rose Fuji TRIAGE peut être accélérée de manière importante avec une lampe à photo-polymériser.
- Une protection au plus tôt est importante pour éviter les complications



MI Varnish (22600 ppm de fluorure)

- Vernis avec Recaldent (CPP-ACP) pour application trimestrielle au cabinet
- Appliquer après le nettoyage prophylactique
- Scelle les tubuli dentinaires ; désensibilise les dents et laisse un film en surface

Traitement de restauration Restaurations peu invasives avec EQUIA Forte HT

Restaurations à long terme

- Le verre hybride haute densité EQUIA Forte HT reste une solution de restauration long terme peu invasive. En outre, son placement rapide en bloc constitue un avantage considérable pour les jeunes patients anxieux.
- L'adhésion chimique et la tolérance à l'humidité d'EQUIA Forte HT offrent un avantage important, car l'adhésion à l'émail hypominéralisé est difficile.
- Dans le cas où les dents sont difficiles à anesthésier, on peut utiliser l'approche Atraumatic Restorative Treatment (ART) ; les caries sont excavées manuellement avant l'application d'EQUIA Forte HT.
- Un composite peut être placé lorsque les lésions sont bien délimitées et ne nécessitent pas une élimination supplémentaire trop importante du tissu dentaire.

Restaurations thérapeutiques provisoires

Informations complémentaires du produit en page 16

En savoir plus sur la MIH
Pour plus d'informations, l'aspect clinique, les symptômes et le plan de traitement GC, cliquez ici :



OFFRE

MI Varnish Refill Pack
+ MI Varnish Intro Pack

109,80 CHF

Prix par paquet

Achetez 2 x MI Varnish Refill Pack et recevez 1 x MI Varnish Intro Pack (d'une valeur de 36,20 CHF) gratuitement !

Art-Nr. 10003390

MI Varnish Refill Pack Fraise

Art-Nr. 10003391

MI Varnish Refill Pack Menthe

Contenu par Refill Pack :
35 doses uniques MI Varnish ;
0,40 ml par dose unique ; 50 brosses ;
109,80 CHF par paquet

1 enfant sur 7 est atteint d'une hypominéralisation des molaires et des incisives (MIH) GC a des solutions pour traiter le MIH.



GC MI Paste Plus™ & GC Tooth Mousse™

Pâtes protectrices reminéralisantes à triple action : Renforce. Protège. Recharge.



Tooth Mousse ou MI Paste Plus?

Tooth Mousse et MI Paste Plus peuvent être utilisés pour les mêmes indications. Tooth Mousse est recommandé avant l'âge de 6 ans pour éviter le risque de fluorose et de sur-fluoruration. Pour l'application nocturne, Tooth Mousse est recommandé jusqu'à l'âge de 12 ans. MI Paste Plus peut être utilisé au-delà de cet âge.

MI Paste Plus & Tooth Mousse

- La première crème dentaire protectrice avec la substance active brevetée Recaldent™, éprouvée des millions de fois
- Apporte aux dents la quantité nécessaire de calcium, phosphate et fluor*
- Élimine les hypersensibilités

- Santé dentaire parfaite - protège, renforce et soigne durablement
- Agit rapidement et avec efficacité
- Protection dentaire sans sucre
- MI Paste Plus contient en plus 900 ppm de fluor

OFFRE

10-PACK

5 + 1 203,90 CHF

Achetez 5 x paquets à 10 tubes Tooth Mousse (parfum célibataire ou assorti) et recevez 1 x paquets à 10 tubes Tooth Mousse (parfum célibataire ou assorti) gratuitement !

Flavour-Mix possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable achetant les paquets à 10 tubes de Tooth Mousse.

Unités valables :

GC Tooth Mousse 10-Pack
199,90 CHF par paquet

Art-Nr. 10001743

GC Tooth Mousse, assorti

(2 tubes à chaque parfum)

Art-Nr. 10001746

GC Tooth Mousse, Melone

Art-Nr. 10001747

GC Tooth Mousse, Menthe

Art-Nr. 10001745

GC Tooth Mousse, Fraise

Art-Nr. 10001748

GC Tooth Mousse, Tutti-Frutti

Art-Nr. 10001744

GC Tooth Mousse, Vanille

Art-Nr. 10003205

GC Tooth Mousse,

Promotional 5-Paquet

(1 tube à chaque parfum)

110,80 CHF par paquet



OFFRE

10-PACK

5 + 1 228,- CHF

Achetez 5 x paquets à 10 tubes MI Paste Plus (parfum célibataire ou assorti) et recevez 1 x paquets à 10 tubes (parfum célibataire ou assorti) gratuitement !

Flavour-Mix possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable achetant les paquets à 10 tubes de MI Paste Plus.

Unités valables :

GC MI Paste 10-Pack
223,50 CHF par paquet

Art-Nr. 10001749

GC MI Paste Plus, assorti

(2 tubes à chaque parfum)

Art-Nr. 10001752

GC MI Paste Plus, Melone

Art-Nr. 10001750

GC MI Paste Plus, Menthe

Art-Nr. 10001751

GC MI Paste Plus, Fraise

Art-Nr. 10001754

GC MI Paste Plus, Tutti Frutti

Art-Nr. 10001753

GC MI Paste Plus, Vanille

Art-Nr. 10003270

GC MI Paste Plus,

Promotional 5-Paquet

(1 tube à chaque parfum)

119,90 CHF par paquet



OFFRE

PROMO PACK

5 + 1 110,80 CHF

Prix par paquet

N°art. 10003210 **Tooth Mousse Bundlepack**
Contenu : 5 tubes Tooth Mousse (chaque parfum à 1 tube de menthe, melon, Vanille, Tutti-Frutti, fraise)
+ 1 Tube Tooth Mousse gratuit !
Les marchandises gratuites sont déjà incluses dans le Bundlepack.

Seulement valable pour Tooth Mousse Promo Pack.



OFFRE

PROMO PACK

5 + 1 119,90 CHF

Prix par paquet

N°art. 10003271 **MI Paste Plus Bundlepack**
Contenu : 5 tubes MI Paste Plus (chaque parfum à 1 tube de menthe, melon, Vanille, Tutti-Frutti, fraise)
+ 1 Tube MI Paste Plus gratuit !
Les marchandises gratuites sont déjà incluses dans le Bundlepack.

Seulement valable pour MI Paste Plus Promo Pack



RECALDENT et le logo RECALDENT sont des marques de commerce du groupe Mondelez International, et sont utilisés sous licence. RECALDENT™ est dérivé de la caséine du lait. Ne pas utiliser chez les personnes allergiques au lait. En cas de réaction allergique : Cesser l'utilisation, rincer la bouche avec de l'eau et consulter un médecin.

G-æniat

Un composite universel pour des restaurations invisibles et exceptionnelles.



G-æniat Anterior convaincant par :

- son esthétique & sa radio-opacité
- ses nombreuses applications possibles
- son système de teintes adapté à l'âge
- sa manipulation facile

G-æniat Posterior convaincant par :

- son système de teintes adapté
- une très bonne radioopacité
- sa très bonne consistance
- sa résistance et sa durabilité exceptionnelles

OFFRE

4 + 1 | **10 + 3**

À PARTIR DE 77,30 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-æniat Anterior / Posterior Seringues au prix de 4 !

Recevez 13 paquets G-æniat Anterior / Posterior Seringues au prix de 10 !

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000805 **Anterior Seringues A2**
N°art. 10000806 **Anterior Seringues A3**
N°art. 10000826 **Posterior Seringues PA2**
N°art. 10000827 **Posterior Seringues PA3**
à partir de 77,30 CHF par paquet

Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, SE, IE, TE, CVE, XBW, BW, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE et P-IE

OFFRE

4 + 1 | **10 + 3**

À PARTIR DE 109,80 CHF

Prix par paquet (20 unitips)

Recevez 5 paquets G-æniat Anterior / Posterior Unitips au prix de 4 !

Recevez 13 paquets G-æniat Anterior / Posterior Unitips au prix de 10 !

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.

N°art. 10000776 **Anterior Unitip A2**
N°art. 10000777 **Anterior Unitip A3**
N°art. 10000798 **Posterior Unitip PA2**
N°art. 10000799 **Posterior Unitip PA3**
à partir de 109,80 CHF par paquet de 20

Teintes : Anterior Paquet avec 20 Unitips à 109,80CHF: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, AE, IE; Teintes : Anterior Paquet avec 10 Unitips à 55,20 CHF: BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO4, JE, TE, SE, CVE, XBW; Teintes : Posterior Paquet avec 20 unitips à 109,80 CHF: PA1, PA2, PA3, PA3.5, P-JE, PIE

Nous standardisons nos seringues composites

Les produits suivants sont inclus :

G-æniat A'CHORD
G-æniat Anterior & Posterior
Gratia Direct Anterior & Posterior
Gratia Direct X



G-æniat Flo X

L'art de créer les bases d'une esthétique parfaite !

G-æniat Flo X contient des particules ultra-fines distribuées de manière homogène de taille moyenne (particules de verre de baryum) et se caractérise par sa faible viscosité et en particulier par sa très bonne radio-opacité (300 % à 1 mm, 284 % à 0,5 mm d'épaisseur), ce qui facilite notamment le diagnostic de caries secondaires.

OFFRE

4 + 1 | **10 + 3**

77,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-æniat FloX seringues au prix de 4 !
Recevez 13 paquets G-æniat FloX seringues au prix de 10 !

N°art. 10003362 **G-æniat Flo X A2**
N°art. 10003363 **G-æniat Flo X A3**
Seringue 3,6 g (2 ml), 20 embouts III en plastique
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 und AO3

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



G-æniat Universal Injectable

Composite de restauration haute résistance – solide comme un roc

G-æniat Universal Injectable est un composite de restauration universel présentant une solidité et une résistance exceptionnelles pour des restaurations esthétiques de longue durée. Doté de charges de baryum ultra-fines et de la technologie FSC (Full-coverage Silane Coating/recouvrement total au silane) de GC, G-æniat Universal Injectable est incroyablement résistant, même plus résistant que les principaux composites de restauration présents sur le marché.

OFFRE

4 + 1 | **10 + 3**

À PARTIR DE 43,90 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-æniat Universal Injectable seringues ou Unitips au prix de 4 !
Recevez 13 paquets G-æniat Universal Injectable seringues ou Unitips au prix de 10 !

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.

Prix par paquet de seringues 43,90 CHF
N°art. 10003706 **A2 Seringue**
N°art. 10003707 **A3 Seringue**
Prix par paquet d'unitips 66,10 CHF
N°art. 10006897 **A2 Unitip**
N°art. 10006898 **A3 Unitip**



Informations complémentaires et actions spéciales pour G-æniat Universal Injectable en page 9 dans la partie pratique.

G-æniat Universal Flo

Un vrai matériau fluide pour toutes les indications

Grâce à sa fluidité contrôlée, G-æniat Universal Flo peut être appliqué comme un fluide tout en présentant la stabilité d'un composite traditionnel. Il est adapté à toutes les classes de cavité et se caractérise par une résistance, un polissage et une polyvalence exceptionnelles.

OFFRE

4 + 1 | **10 + 3**

79,60 CHF

Prix par paquet

Recevez 5 paquets G-æniat Universal Flo seringues au prix de 4 !
Recevez 13 paquets G-æniat Universal Flo seringues au prix de 10 !

N°art. 10000839 **G-æniat Universal Flo A2**
N°art. 10000840 **G-æniat Universal Flo A3**
Seringue 3,4 g (2 ml), 20 embouts III en plastique
Teintes standards : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV;
Teintes intérieures : AO2, AO3; Teintes extérieures : JE, AE

Mélange de teintes possible. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC. Seulement valable pour une même unité d'emballage.



EQUIA Forte™ HT

Système de restauration verre hybride haute densité – des restaurations postérieures longue durée faciles à réaliser

- Matériau plus solide et non collant,
- Translucidité accrue
- Excellente biocompatibilité
- Résistance prouvée sur le long terme
- Restaurations postérieures simples en quelques étapes – pas d'isolation requise
- Restauration de dents MIH hypominéralisées sensibles chez les patients jeunes

OFFRE

4 + 1
10 + 3 **186,60**
CHF

Prix par paquet

Recevez 5 EQUIA Forte HT
paquets refill au prix de 4 !
Recevez 13 EQUIA Forte HT
paquets refill au prix de 10 !

Offre valide par l'intermédiaire
de votre consultant GC.
Action valable pour tous EQUIA Forte HT
Refill Packs.

Remplacement de l'amalgame



Avec l'aimable autorisation de Dr. Victor Cedillo Felix, USA

Patient à risque de caries



Avec l'aimable autorisation de Dr. Zeynep Bilge Kütük, Turquie



OFFRE

**EQUIA FORTE HT
PROMO PACK A2 ou A3**

10% **327,51** CHF
~~363,90 CHF~~

Offre de 10 % seulement valable pour le Promo
Pack en teinte A2 (N°art. 10004866) ou
le Promo Pack en teinte A3 (N°art.10004811)

Autres unités valables :

EQUIA Forte HT, Refill Pack; 186,60 CHF;
Contenu : 1 paquet contient 50 Capsules EQUIA Forte
HT, 0,40 g Poudre und 0,13 g (0,10 ml) liquide;
contenu assorti par capsule 0,14 ml Teintes :
assorti, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

EQUIA Forte HT Intro Pack; 105,10 CHF;
Contenu : 20 Capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose
Teintes : A2, A3, B2

EQUIA Forte HT Promo Pack; 363,90 CHF
Contenu : 100 Capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml
Teintes : A2, A2-A3, A3, A3-B2

EQUIA Forte HT Clinic Pack; 615,80 CHF
Contenu : 200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml)
Teintes : A2, A3, B2

N°art. 10004885

EQUIA Forte Coat FlipCap
4 ml flacon, accessoires; 91,40 CHF
N°art. 10003513

EQUIA Forte Coat, Unitdose-Paquet
50 unitdose (à 0,1 ml) 120,80 CHF



**1 x EQUIA Forte HT
PROMO PACK**
Contenu : à 100 capsules,
1 x Equia Forte Coat 4 ml

**1 x EQUIA Forte HT
INTRO PACK GRATUIT**
Contenu : 20 capsules,
20 Equia Forte Coat Unitdose

Achetez 1 x EQUIA Forte HT Promo Pack
(à 100 Capsules, 1 EQUIA Forte Coat 4 ml)
et recevez 1 x EQUIA Forte HT Intro Pack
(20 capsules, 20 Equia Forte Coat Unitdose)
gratuitement !

Offre valide par l'intermédiaire
de votre consultant GC.
Action valable pour tous EQUIA Forte HT
Promo Packs.

Indications principales pour



INDICATIONS

- Restaurations de classe I
- Restaurations occlusales de classe II
- Restaurations non-occlusales de classe II
- Restaurations immédiates
- Restaurations de classe V et de surfaces radiculaires
- Reconstitution de moignons

1 x EQUIA Forte HT Clinic Pack
Contenu : à 200 capsules, 1 x Equia Forte Coat 4 ml

**+ 1 CM-II CAPSULE MIXER
GRATUIT !**

**+ 1 CAPSULE APPLIER IV
GRATUIT !**

Achetez 1 paquet EQUIA Forte HT Clinic Pack
et recevez 1 CM-II Capsule Mixer CM-II
(d'une valeur de 749,10 CHF) et 1 Capsule Applier IV
(d'une valeur de 120,70 CHF) gratuitement !

Mélange de teintes possible.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.
Action valable pour tous EQUIA Forte HT Clinic Packs.



EQUIA Forte HT Clinic Pack
615,80 CHF par paquet
Contenu : 200 capsules,
1 x Equia Forte Coat (4 ml)
Teintes : A2, A3, B2



**GC VERRE
IONOMÈRES
(5 PAQUETS)**

**CAPSULE MIXER
CM-II GRATUIT !**

Achetez 5 paquets GC verre
ionomère ou GC verre hybride
+ 1 Capsule Mixer CM-II
(d'une valeur de 749,10 CHF)
gratuitement !

Promotion valable pour tous les
GC verres ionomères/GC verres
hybrides disponibles.

Mélange de teintes possible.

Offre valide par l'intermédiaire
de votre consultant GC.

**RESTORATIVE
SOLUTIONS**

Restorative-Guide

Choisir le bon matériau pour
chaque indicationn !

CAVITON

Matériau d'obturation provisoire

Matériau d'obturation provisoire
pour cavité standard et
après traitement endodontique.



OFFRE

3 + 1 **22,50** CHF

Recevez 4 paquets Caviton au prix de 3 !

N°art. 10000101 **CAVITON**
Jar, 30 g, White; 22,50 CHF par paquet

Caractéristiques & avantages

- Prise initiée par l'eau et la salive
- Adaptabilité excellente
- Facile à retirer

Restorative Solutions

Le meilleur choix pour chaque indication



Systèmes de restauration de longue durée ● Verre ionomère de haute viscosité ● Verre ionomère de faible viscosité ● Verre ionomère modifié par adjonction de résine ● Matériau photopolymérisable			POSTÉRIEURE						
			Classe I		Classe II			Classe V	Base (technique sandwich)
			Petite, non soumise aux contraintes	Grande, soumise aux contraintes	Petite, non soumise aux contraintes	Petite, soumise aux contraintes	Grande, soumise aux contraintes*		
EQUIA Forte HT (verre hybride haute densité)			+++	+++	+++	+++	+++	+++	+
EQUIA			+++	+++	+++	+++		++	+
GC Fuji II LC			+					++	+++
GC Fuji TRIAGE									
GC Fuji IX GP			+		+			+	+++
GC Fuji IX GP FAST			+		+			+	+++
GC Fuji IX GP EXTRA			+		+			+	+++

Systèmes de restauration de longue durée ● Verre ionomère de haute viscosité ● Verre ionomère de faible viscosité ● Verre ionomère modifié par adjonction de résine ● Matériau photopolymérisable			ANTÉRIEURE		AUTRES INDICATIONS				
			Classe III	Classe V	Reconstitution coronoradiculaire	Dents temporaires	Protection des sillons	Protection des surfaces radiculaires	Restaurations provisoires
EQUIA Forte HT (verre hybride haute densité)				++	+++	++		+	+
EQUIA				+++	++	++		+	+
GC Fuji II LC			+++	+++	++	+++			
GC Fuji TRIAGE							+++	+++	+++
GC Fuji IX GP				+	++	+		+	+++
GC Fuji IX GP FAST				+	++	++		+	+++
GC Fuji IX GP EXTRA				+	++	++		++	+++

* La préparation doit être réalisée à 1-1,5 mm des pointes des cuspidés. Veuillez consulter le mode d'emploi.
** Ensemble d'indications pour la teinte rose.

GC Fuji IX GP FAST

Verres Ionomères condensables de restauration



GC Fuji IX GP est idéal pour les restaurations permanentes ou provisoires de classe I et II chez l'enfant, les restaurations de classe I et II non chargées chez l'adulte, les restaurations de classe V et de surface radiculaire, la stratification coronaire, mais également pour une utilisation avec un composite ou un inlay en technique sandwich immédiate ou différée.

- Multiples indications
- Adhésion chimique
- Placement rapide en une fois
- Sans hiatus marginal
- Résistance à la compression et dureté de surface exceptionnelles
- Protection par le fluor
- Biocompatible



OFFRE

4 + 1
10 + 3

161,-
CHF

Prix par paquet
Recevez 5 Fuji IX GP FAST paquets au prix de 4 !
Recevez 13 Fuji IX GP FAST paquets au prix de 10 !
N°art. 10000078 **GC Fuji IX GP FAST Capsules A2**
N°art. 10000079 **GC Fuji IX GP FAST Capsules A3**
Contenu : à 50 capsules (0,40 g Poudre und 0,11 g (0,09 ml) liquide. Contenu assorti par capsule (0,14 ml)
Offre valable pour toutes les teintes.
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

GC Fuji™ II LC

Le premier CVI photopolymérisable au monde



Fuji II LC Improved, Ciment Verre Ionomère photopolymérisable, est le ciment verre ionomère le plus utilisé au monde. Bien qu'ayant été conçu à l'origine comme un matériau de restauration pour les cavités de Classes III et V, ainsi que pour les dents de lait, Fuji II LC Improved est un matériau à usages multiples comme liner, base ou pour la reconstitution de moignons.

- Polymérisation duale
- Esthétique exceptionnelle
- Comme base ou liner dans la technique sandwich
- Fuji II LC permet à la restauration de durer plus longtemps en prévenant le hiatus marginal
- Performance clinique prouvée 100 % de rétention après 5 ans



OFFRE

4 + 1
10 + 3

188,60
CHF

Prix par paquet
Recevez 5 Fuji II LC paquets au prix de 4 !
Recevez 13 Fuji II LC paquets au prix de 10 !
N°art. 10000035 **GC Fuji II LC Capsules A2**
N°art. 10000036 **GC Fuji II LC Capsules A3**
Contenu : à 50 capsules (0,33 g poudre et 0,10 g (0,085 ml) liquide. Contenu assorti par capsule (0,10 ml);
Offre valable pour toutes les teintes.
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Les prix indiqués sont basés sur les recommandations de prix non contraignantes du fabricant, hors TVA, et correspondent à une valeur marchande moyenne de 1,00 (CHF/EUR).
Les prix de vente actuels sont disponibles directement auprès de votre dépôt dentaire. La livraison est faite exclusivement par votre spécialiste dentaire. Une combinaison de différentes actions n'est pas possible.
Actions valables en Suisse jusqu'au 30.06.2026. Erreurs d'impression et de composition réservées. Veuillez consulter cette brochure pour les nouveaux numéros d'article.

G-CEM ONE™

Instructions techniques

Quand utiliser le G-CEM ONE™ ADHESIVE ENHANCING PRIMER (AEP) ou G-Premio BOND ? (UNIQUEMENT pour la dent/pilier : cf procédures ci-après)

Préparation rétentive

Substrat de la restauration	AEP ou G-Premio BOND
Métal, Zircon, Céramiques	En option
Céramiques hybrides Composite	Indispensable ✓

Préparation non rétentive

Substrat de la restauration	AEP ou G-Premio BOND
Métal, Zircon, Céramiques	Indispensable ✓
Céramiques hybrides Composite	Indispensable ✓

Quand utiliser G-Multi PRIMER ? (UNIQUEMENT pour la restauration)

Substrat de la restauration	G-Multi PRIMER
Métal, Zircon	En option*
Céramiques, Tenon en fibre, de verre, Céramiques, hybrides, Composite	Indispensable ✓

*La colle G-CEM ONE contient du MDP, le G-Multi PRIMER est donc optionnel pour le métal et la zircon.

TECHNIQUE DE COLLAGE pour tenons fibrés, métal et céramique et inlays core coulés

Lorsqu'une adhésion supplémentaire est nécessaire

- Nettoyer et rincer l'espace du tenon, sécher soigneusement à l'aide de pointes de papier. **Ne pas utiliser d'H2O2 et/ou EDTA** pour nettoyer chimiquement l'espace du tenon.
- Si une adhésion supplémentaire est nécessaire, appliquer le **G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER**, laisser agir 10 secondes et sécher sous une pression MAXIMALE pour éviter les excès de primer dans le canal radiculaire. Enlever l'excès de solution à l'aide de pointes de papier. **Ne PAS utiliser G-Premio BOND dans ce cas.**
- Préparer le tenon selon les instructions du fabricant.
- Extraire le matériau directement dans l'espace canalair. Insérer le tenon dans l'espace **dans la minute qui suit l'application de la colle.**
- Continuer à maintenir une pression modérée en vous assurant que le tenon reste en place puis enlever l'excès de ciment.
- Tout en maintenant une pression modérée, photopolymériser toutes les surfaces / marges.
- Laisser le matériau prendre 4 minutes de plus.

Temps d'irradiation	G-CEM ONE
Puissance élevée LED (plus de 1200 mW/cm²)	10 secondes
Halogène / LED (700-1200 mW/cm²)	20 secondes

TECHNIQUE DE COLLAGE pour tous inlays, onlays, couronnes, bridges et facettes

Préparation de la dent

Lorsqu'une adhésion plus importante est nécessaire

- Nettoyer, rincer et sécher soigneusement la dent préparée.*
- 2A. Appliquer le **G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER**, attendre 10 secondes, et sécher avec une pression d'air MAXIMALE pendant 5 secondes pour éviter que le liquide ne s'accumule dans le sillon gingival. **La photopolymérisation n'est PAS nécessaire.**
- 2B. Après avoir **agit le flacon**, appliquer **G-Premio BOND**, laisser agir 10 secondes et sécher avec une pression d'air MAXIMALE pendant 5 secondes pour éviter l'accumulation de liquide dans le sillon gingival** et **photopolymériser**. Cf tableau ci-dessous pour le temps d'irradiation.

* En cas de collage d'une facette ou d'un onlay, mordancer l'émail avec de l'acide phosphorique à 35-40 % pendant 10-15 secondes et rincer soigneusement.

Préparation de la restauration

Application de la colle

3. Préparer la restauration selon les instructions du fabricant.
4. Placer l'embout de mélange et extraire le matériau directement dans la restauration.
5. Positionner immédiatement et maintenir une pression modérée. Le temps de travail est de 2'45" à 23°C. (réduit si G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER est utilisé).
- 6A. «Tack cure» en agitant l'embout de la lampe à polymériser sur l'excès de colle **pendant 1 seconde** jusqu'à atteindre une consistance caoutchouteuse.
- 6B. Maintenir une pression modérée jusqu'à l'obtention d'une consistance solide et caoutchouteuse.
7. Retirer l'excès de colle tout en maintenant une pression modérée.
- 8A. Tout en maintenant une pression modérée, photopolymériser toutes les surfaces / marges.
- 8B. Laisser le matériau prendre pendant 4 minutes si la restauration ne laisse pas passer la lumière.

Temps d'irradiation	G-Premio BOND	G-CEM ONE
Puissance élevée LED (plus de 1200 mW/cm²)	5 secondes	10 secondes
Halogène / LED (700-1200 mW/cm²)	10 secondes	20 secondes

**** Accumulation de liquide dans le sillon gingival**

Retrouver les step-by-steps pour tous vos défis d'assemblage dans le GC Luting Guide

20012121 041122SK

G-CEM ONE™

Ciment résine auto-adhésif

Fiable

Des forces d'adhésion optimales pour les préparations rétentives et non rétentives¹ grâce à la capacité unique « GC Touch Cure » de l'optionnel G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP).

Universell

Force d'adhésion excellente à la dent et tous autres substrats : émail, dentine, zircon, métal, céramiques vitreuses², matériaux hybrides².

OFFRE
3 + 1 À PARTIR DE **73,20 CHF**

Recevez 4 Refill Packs G-CEM ONE au prix de 3 !

Offre valable dans le même groupe de produits Refill. Mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art.10006923 **G-CEM ONE Single Refill AO3**
N°art.10006924 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**
Contenu par Single Refill : 1 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips; 73,20 CHF par paquet

N°art.10006921 **G-CEM ONE Twin Refill A2**
N°art.10006922 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**
Contenu pro Twin Refill: 2 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix Endo Tips; 139,70 CHF par paquet
N°art.10006833

N°art.10006925 **G-CEM ONE Value Refill A2**
N°art.10006926 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**
Contenu par Value Refill: 8 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 60 x GC Automix Tips Regular, 20 x GC Automix Endo Tips; 443,70 CHF par paquet

¹ Avec G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer | ² Avec G-Multi PRIMER | ³ Résultats test terrain. Utilisation de G-CEM ONE uniquement. Données sur fichier.

G-CEM ONE Universal Kits

Colle universelle auto-adhésive

Collage universel simplifié grâce à G-Premio BOND :

- Avec trois monomères adhésifs fonctionnels pour une force d'adhésion optimale, un seul agent de collage est nécessaire pour tous vos flux de travail directs et indirects !
- Flacon au design primé pour une application très précise
- Procédure simple : appliquer G-Premio BOND, laisser agir 10 secondes, sécher à l'air, photopolymériser pendant 10 secondes. Toutes les techniques de mordantage (auto-mordantage, mordantage sélectif, mordantage total) sont possibles

Insensible à la technique

Une chémozopolymérisation exceptionnelle pour votre tranquillité d'esprit, la fonction « tack cure » pour enlever et nettoyer facilement les excès, la tolérance à l'humidité et à la salive¹, l'optimisation de la viscosité et pratiquement aucune sensibilité post-opératoire³.

1 x G-CEM ONE System Kit
+ G-CEM ONE SINGLE REFILL GRATUIT

Achetez 1 x G-CEM ONE System Kit et recevez 1 x G-CEM ONE Single Refill Pack (d'une valeur de 73,20 CHF) gratuitement !

N°art.10006920 **G-CEM ONE System Kit**
Contenu : 1 x G-CEM ONE Seringue A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Seringue TR (4,6 g), 15 x Automix Tips Regular, 5 x Automix endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 4 ml; 185,40 CHF par paquet

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art.10006918 **G-CEM ONE Starter Kit A2**
N°art.10006919 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**
Contenu par Starter Kit: 1 x G-CEM ONE Seringue (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2 ml; 84,90 CHF par paquet

Accessoires :
N°art.10003289 **Automix Tip for Endo**
10 pcs. avec pointe de rallonge; 14,00 CHF
N°art.10003335 **Automix Tip Regular**
10 pcs.: 12,90 CHF

OFFRE
10 % **177,75 CHF**
~~197,50 CHF~~

Autres unités valables :

N°art.10037114
G-CEM ONE Universal Starter Kit A2
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo Tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 137,90 CHF par paquet


N°art.10037115
G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent
1 x G-CEM ONE Syr.TR (4,6 g), 8 x GC Automix Tips Regular, 2 x GC Automix Endo tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml; 137,90 CHF par paquet



L'optionnel G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Pour toutes les préparations et cavités

- MDP : colle à la structure de la dent, la zircon et aux métaux non précieux
- 4-MET : colle à la structure de la dent
- MDTP : colle aux métaux
- Accélérateur Puissante adhésion avec le pilier de la dent et la cavité grâce à la fonction « GC Touch Cure ».

N°art.10006833
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer
Contenu : 1 x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4 ml; prix par paquet 75,80 CHF

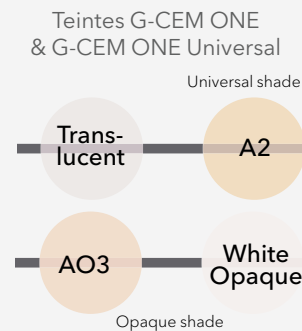

N°art.10037116
G-CEM ONE Universal System Kit
1 x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Syr. TR (4,6 g), 15 x GC Automix Tips Regular, 5 x GC Automix endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml; **177,75 CHF** au lieu de 197,50 CHF

G-CEM ONE avec G-Premio BOND pour compléter
GC introduit 3 nouveaux packs qui combinent G-CEM ONE avec G-Premio BOND pour compléter les packs qui incluent G-CEM ONE AEP, et ainsi permettre à l'utilisateur final de choisir son protocole de collage préféré.

GC FujiCEM™ Evolve

Le CVIMAR dernière génération ergonomique et fiable

Un pas en avant
FujiCEM Evolve est une solution de fixation polyvalente pour votre travail quotidien, un protocole simple avec les propriétés exceptionnelles d'un verre ionomère GC. Un nouveau système de dosage et la possibilité de faire un » tack cure « pour un retrait d'excès simple. Une cimentation aisée plus que jamais. En outre, FujiCEM Evolve impressionne par une radio-opacité plus élevée et une liaison adhésive plus durable – principalement sur zircone.



Aux vidéos :



- Idéale pour restaurations zircones et métaux
- Mélange manuel ou automix
 - besoin de prétraitement
 - Temps de travail long, temps de prise court
 - Tolérant à l'humidité : la digue n'est pas nécessaire
 - Excellente étanchéité et adaptation marginale
 - Viscosité optimale
 - Faible épaisseur du film et adaptation précise
 - Option « tack cure » pour un retrait plus facile
 - Adhésion optimisée à la zircone

Autres unités valables :
N°art.10006621
FujiCEM Evolve Clinic Pack
Contenu : 8 x GC FujiCEM Evolve seringue (9,2 g / 5,0 ml), 2 x Mixing Pad #22; 543,30 CHF
Accessoires :
N°art.10004917
Push and Click Mixing Tips Regular (15 pcs.); 20,60 CHF
N°art.10004929
Push and Click Mixing Tips Endo (15 pcs.); 30,60 CHF

OFFRE

20% À PARTIR DE 183,36 CHF 229,20 CHF

Prix par Triple Pack
N°art. 10004928
FujiCEM Evolve Triple Pack Automix
Contenu par Triple Pack Automix: 3 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 45 GC Push and Click Mixing Tips Regular; **214,88 CHF** au lieu de 268,69 CHF
N°art. 10004916
FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix
Contenu par Triple Pack Handmix: 3 x GC FujiCEM Evolve Seringues (à 9,2 g / 5,0 ml), 1 x Mixing Pad #22; **183,36 CHF** au lieu de 229,20 CHF

OFFRE

ESSAYEZ MAINTENANT FUJICEM EVOLVE SINGLE PACK

3 + 1 105,40 CHF

Prix par paquet
Recevez 4 Paquets FujiCEM Evolve au prix de 3!
N°art. 10004926
FujiCEM Evolve Single Pack
Contenu : 1 x GC FujiCEM Evolve Seringue (à 9,2 g / 5,0 ml), 15 x GC Push and Click Mixing Tips Regular



Solution d'assemblage

Sélectionnez le bon matériau et retrouvez toutes les étapes du protocole dans le guide d'assemblage GC (Luting Guide).

GC Luting guide : Choisir le bon matériau pour chaque indication !



Au webpage :



GC FUJICEM EVOLVE
GC INITIAL LISI BLOCK
CERASMART270

GC Initial LiSi Bloc

Bloc CAD/CAM en disilicate de lithium entièrement cristallisé



Initial LiSi Bloc : Résistance, précision et esthétique dans un bloc entièrement cristallisé Initial LiSi Bloc est un bloc en disilicate de lithium entièrement cristallisé qui offre des propriétés physiques optimales sans cuisson. Ce bloc unique est doté de la technologie HDM (High Density Micronization) exclusive à GC pour la dentisterie CAD/CAM afin d'offrir une résistance élevée à l'usure, des limites cervicales lisses et un résultat final esthétique... Lorsqu'il est utilisé avec la technique ONE SQIN - le système de céramique avec forme et couleur à peindre - vous pouvez rapidement et facilement obtenir des résultats encore plus esthétiques.



INITIAL LISI BLOCK AESTHETIC KIT

497,90 CHF

- Gain de temps, car aucune cuisson de cristallisation n'est nécessaire
- Esthétique durable
- Limites nettes
- Opalescence naturelle
- Une base idéale pour la technique ONE SQIN



Prix par paquet
N°art. 10007322 **Initial LiSi Block Aesthetic Kit**
Initial LiSi Block, CEREC, taille 14, 5 teintes à 1 Block; A1 HT; A2 HT; A2 LT; A3 HT; A3 LT; Initial IQ, Lustre Paste ONE, 5 teintes à 4 g; L-NFL; L-A; L-3; L-2; L-OP; Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8 ml; Refresh Liquid, 8 ml; accessoires; 497,90 CHF


OFFRE

4 + 1 10 + 3 127,80 CHF

Prix par paquet
Recevez 5 paquets Initial LiSi Block au prix de 4 !
Recevez 13 paquets Initial LiSi Block au prix de 10!
Seulement valable pour une même unité d'emballage. Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

CERASMART™270

Bloc céramique hybride amortissant les forces masticatoires CAD/CAM

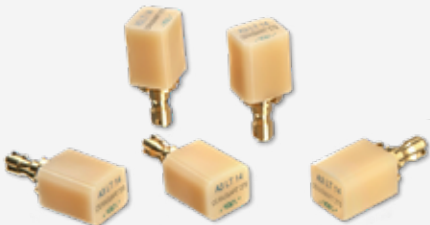


Ajustage naturel et flexibilité. Précision, force et flexibilité associées à un vernis de caractérisation facile à utiliser

- Flexibilité pour absorber les chocs
- Résistance à l'usure pour les restaurations de longue durée
- Des marges nettes qui assurent une transition en douceur
- Polissage facile permettant d'obtenir rapidement un brillant super
- Fluorescence et translucidité optimales
- Couronne sur implant, Couronne complète, Inlay, Onlay, Facette laminée



Teintes

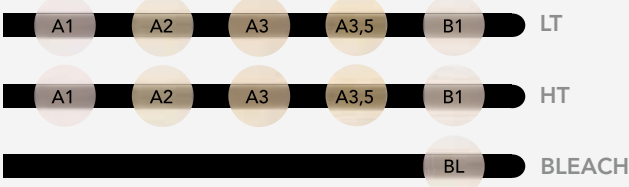

OFFRE

4 + 1 10 + 3 À PARTIR DE 134,80 CHF

Prix par paquet (5 blocs par paquet)
Recevez 5 paquets CERASMART 270 CAD/CAM blocs (à 5 pcs.) au prix de 4 !
Recevez 13 paquets CERASMART270 CAD/CAM blocs (à 5 pcs.) au prix de 10 !

Offre valable pour toutes les références disponibles, mais seulement dans la même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Teintes : A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, Bleach
Taille 12: 134,80 CHF par paquet
Taille 14: 147,10 CHF par paquet
Taille 14L: 159,60 CHF par paquet

Les blocs CERASMART™270 sont compatibles avec CEREC et listés dans la mise à jour logicielle actuelle de CEREC. Disponible à la commande auprès de vendeurs CEREC autorisés.

TEMPSMART® DC

Vers votre restauration définitive...
en toute sérénité

Composite dual pour couronnes et bridges provisoiresn

Les restaurations provisoires jouent un rôle important en dentisterie prothétique. Non seulement elles protègent les dents préparées mais elles apportent confort et esthétique à votre patient en attendant la restauration finale. GC innove avec TEMPSMART DC, le premier matériau temporaire sans plastifiant, à prise duale qui rend votre travail plus facile et plus agréable.



- PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS SÛR
une résistance à la fracture élevée pour des provisoires qui durent
- PRENEZ LE CHEMIN LE PLUS BEAU
fluorescence et brillance à long terme pour des patients souriants
- PRENEZ LE BON CHEMIN
une procédure courte grâce à la photopolymérisation
- PRENEZ LE CHEMIN SANS ENCOMBRE
des restaurations non collantes pour une brillance élevée en quelques étapes

OFFRE

10% ON TOP

4 + 1

À PARTIR DE 63,27 CHF

Prix par paquet
TEMPSMART DC 48 ml cartouche
106,20 CHF au lieu de 118,- CHF par paquet
Recevez 5 paquets TEMPSMART DC
48 ml cartouche au prix de 4!

TEMPSMART DC 10 ml cartouche
63,27 CHF au lieu de 70,30 CHF par paquet
Recevez 5 paquets TEMPSMART DC
10 ml cartouche au prix de 4!

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.
Valable pour toutes teintes, mais seulement pour une même unité d'emballage.

Accessoires :
N°art.10003754
Mischkanülen II taille SSS
(60 pcs.) 70,00 CHF
N°art.10003335
GC Automix Tip Regular
(10 pcs.) 12,90 CHF



48 ml cartouche, 16 embouts de mélange; **106,20 CHF** au lieu de 118,- CHF

N°art.	10001463	10001464	10001465	10001466
Teinte	A1	A2	A3	A3,5
N°art.	10001467	10001468		
Teinte	B1	BW		

10 ml cartouche, 10 embouts de mélange; **63,27 CHF** au lieu de 70,30 CHF

N°art.	10001469	10001470	10001471	10001472
Teinte	A1	A2	A3	B1

MAINTENANT SYMPRESS MIXER GRATUIT!

EXA'lençe®

Matériau d'empreinte en silicone vinyl-polyéther



Associant sa vaste expérience en chimie et celle de la création de solutions originales pour la dentisterie, GC Europe a exploité les meilleures qualités de deux grands matériaux pour mettre au point la prochaine génération de matériau d'empreinte: Le silicone vinyl-polyéther (VPESTM). EXA'lençe est la solution de GC Europe pour des reproductions précises et détaillées. En bouche, l'environnement peut être imprévisible et humide... mais vous pouvez toujours compter sur EXA'lençe pour obtenir à chaque fois, des empreintes de la plus haute précision.



PREISVORTEIL

6 + 1

Prix par paquet
Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.
Seulement valable pour une même unité d'emballage.

Recevez 7 paquets EXA'lençe au prix de 6 !

EXA'lençe Standard Kit
370 ml cartouche à 172,70 CHF par paquet;
10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring;
N°art. 10001518 Medium Body Regular Set
N°art. 10001519 Heavy Body Regular Set
N°art. 10001520 Heavy Body Fast Set

EXA'lençe Refill Pack, 2 x 370 ml cartouche à 240,10 CHF;
N°art. 10001507 Medium Body Regular Set;
N°art. 10001506 Heavy Body Regular Set;
N°art. 10001504 Heavy Body Fast Set

N°art. 10001512 **EXA'lençe Putty 1-1 Paquet**
(500 g / 278 ml Base, 500 g / 278 ml catalyseur, accessoires);
155,60 CHF
N°art. 10001514 **EXA'lençe Putty 5-5 Clinic Pack**
(5 x 500 g / 278 ml Base, 5 x 500 g / 278 ml catalyseur,
accessoires); 452,40 CHF

EXA'lençe, Clinic Pack, 6 x 370 ml cartouche à 708,10 CHF;
N°art. 10001516 Medium Body Regular Set
N°art. 10001515 Heavy Body Regular Set;
N°art. 10001517 Heavy Body Fast Set

EXA'lençe Refill Pack,
2 x 48 ml par Refill Pack, Mixing Tips à 79,70 CHF;
EXA'lençe ExtraLight Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow);
N°art. 10001524 Regular Set | N°art. 10001529 Fast Set
EXA'lençe Light Body Refill, 6 Mixing Tips II Size SS (yellow)
N°art. 10001525 Regular Set | N°art. 10001530 Fast Set
EXA'lençe Medium Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001531 Regular Set | N°art. 10001528 Fast Set
EXA'lençe Heavy Body Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001522 Regular Set | N°art. 10001526 Fast Set
EXA'lençe Heavy Body Rigid Refill, 6 Mixing Tips II Size L (blue)
N°art. 10001527 Fast Set



Mélangeur Renfert Sympress
n'est pas une marque de
commerce du GC.

OFFRE MATÉRIAU
D'IMPREINTE

RENFERT SYMPRESS
MIXER GRATUIT!

Commandez de matériau d'empreinte GC (EXA'lençe)
en valeur de 1890,- CHF et recevez le Renfert
Sympress Mix (en valeur de 949,- CHF) gratuitement !

Êtes-vous intéressé
à d'autres workshops ?
Voilà les informations !



Get the app !
Pour rester informé de nos dernières
actualités, publications, cours ...
Et collectez des Smiles !

Vous trouvez les cours actuels sur :
<https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses>




GET CONNECTED
SMILE
PROGRAM

GC Get Connected – tous dans une application !

Saisissez l'occasion de vous informer à tout moment sur GC et nos produits à tout moment – téléchargez l'application Get Connected de GC sur votre téléphone portable. Parcourez notre bibliothèque en ligne, regardez les vidéos des utilisateurs, apprenez-en plus sur vidéos, pour en savoir plus sur le cours ou les événements de formation et obtenir des informations sur nos produits. Gagnez des sourires en partageant des articles, en réalisant des enquêtes et en s'inscrivant à des événements éducatifs. Chez GC, les sourires comptent – apprendre, partager, profiter. Téléchargez le programme Get Connected Smile sur votre téléphone portable.



APPRENDRE.
PARTAGER.
PROFITER.

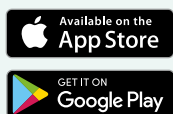

Restaurations réussies et systèmes de collage de GC



RESTORATIVE
SOLUTIONS



LUTING
SOLUTIONS




THE 6TH INTERNATIONAL DENTAL SYMPOSIUM

The 6th International Dental Symposium
Gather Knowledge,
Create "8 billion" Smiles!

UNE SEMAINE D'EXCELLENCE AVEC GC AU JAPON !

Célébrez le 70^e anniversaire de la GC Membership Society et participez à des conférences inspirantes animées par des experts internationaux, ainsi qu'à des ateliers pratiques sur les tendances les plus actuelles. Découvrez des résultats de recherche novateurs, des connaissances cliniques et des innovations produits qui façonnent l'avenir de la dentisterie, et créez des liens précieux avec des professionnels du monde entier. En plus du programme scientifique, profitez d'événements sociaux exclusifs et de la possibilité de découvrir la fascinante culture de Tokyo lors de visites touristiques sélectionnées. Ne manquez pas cette occasion unique d'élargir vos connaissances, de renforcer votre réseau et de célébrer ensemble - le tout dans un événement exceptionnel !

- 72 conférences spécialisées animées par des experts internationaux en dentisterie
- Ateliers pratiques sur les thèmes tendance actuels
- Opportunités de networking, événements sociaux et visites touristiques exclusives
- Crédits de formation continue (CE Credits) reconnus selon ADA/CERP

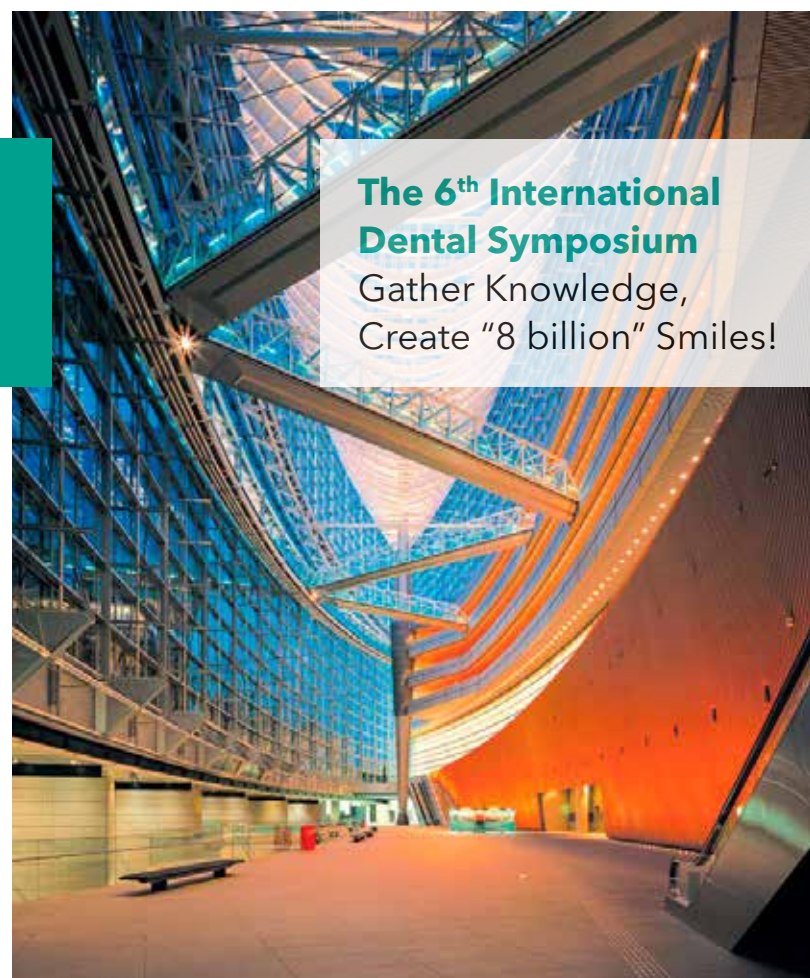

Tokyo International Forum • 5-1 Marunouchi 3-chome • Chiyoda-ku, Tokyo, Japan



Register Now

Soyez parmi les premiers :
Inscrivez-vous dès maintenant
et profitez des avantages !

Enregistrez votre intérêt sans
engagement et recevez rapidement
des informations pertinentes.

Register NOW



The 70th anniversary of the GC Membership society

2026.10.3 SAT 4 SUN

Tokyo International Forum
(Chiyoda City, Tokyo)



Weitere Informationen



CLAUS NÜSSELE
Regional Sales Manager DACH
Managing Director Germany
Country Manager Switzerland
M: 079 172 19 85
claus.nuessle@gc.dental

Chères clientes, chers clients !

Au nom de toute l'équipe de GC Swiss Office, nous vous souhaitons, à vous et à votre équipe, santé, beaucoup de bonheur et un succès continu pour la nouvelle année !

En ce début d'année 2026, nous sommes heureux de vous accueillir avec la première édition des GC News & Highlights sous le slogan « **Wear is real** »...

De la diagnostic à la solution : Une gestion efficace de l'usure

L'usure dentaire (Tooth Wear) est un sujet de plus en plus pertinent dans la pratique dentaire – en particulier chez les jeunes adultes, la perte non carieuse de substance dentaire augmente considérablement. L'ampleur de cette perte due à l'usure varie fortement d'un individu à l'autre.

Notre focus se concentre sur l'usure modérée : lorsque des signes visibles sont déjà présents, mais sans dommages graves ni limitations structurelles. À ce stade, une intervention précoce peut stopper la progression et éviter des traitements complexes. En revanche, si la thérapie est retardée, le risque de troubles tels que l'hypersensibilité, la douleur et les altérations esthétiques augmente.

C'est pourquoi une action rapide est essentielle – GC vous accompagne dans cette démarche. Nous vous montrons comment identifier l'usure dentaire en toute sécurité, prévenir sa progression et quelles étapes sont nécessaires pour une restauration efficace.

N'hésitez pas à contacter nos spécialistes produits hautement qualifiés partout en Suisse : ils sont à votre disposition pour des conseils et des démonstrations en direct dans votre cabinet ou votre laboratoire. La confiance crée l'espace pour l'innovation !

Votre Team GC SWISS !



MARVIN HANANY
Field Product Specialist
Manager & Laboratory/Digital
Product Specialist
M: 079 351 27 63
marvin.hanany@gc.dental



FELIX GLOOR
Prothésiste dentaire,
conseiller spécialisé
dans les produits dentaires
Région Suisse romande, Valais
M: 079 950 09 50
felix.gloor@gc.dental


Spécialistes GC



EVELINE WANGLER
Conseillère spécialisée
dans les produits dentaires
Région Bâle, Argovie,
Suisse centrale
M: 079 737 41 94
eveline.wangler@gc.dental



MANUELA SCHULER
Conseillère spécialisée
dans les produits dentaires
Région Suisse orientale,
Zürich, Liechtenstein
M: 079 326 23 30
manuela.schuler@gc.dental

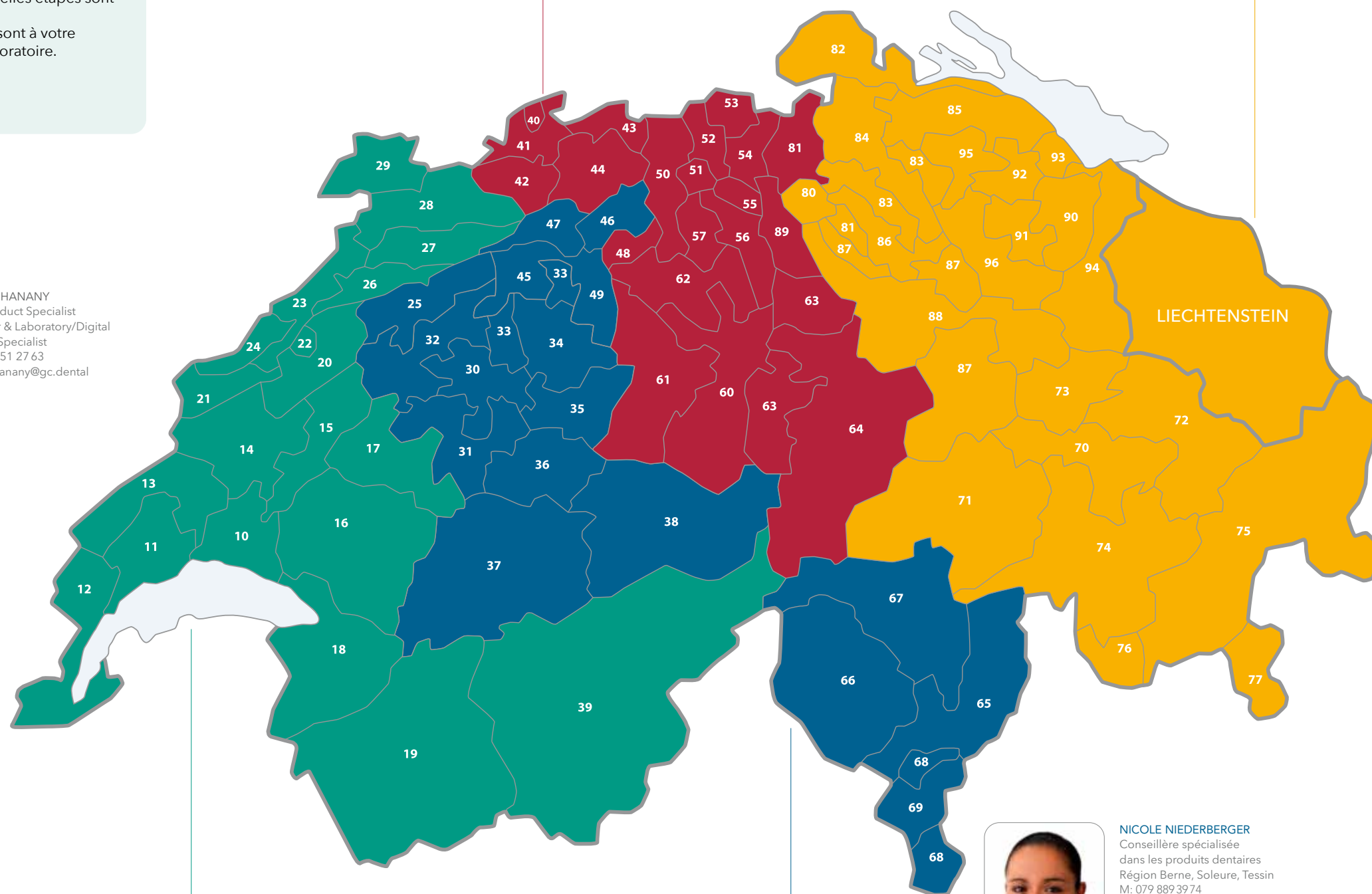

NICOLE NIEDERBERGER
Conseillère spécialisée
dans les produits dentaires
Région Berne, Soleure, Tessin
M: 079 889 39 74
nicole.niederberger@gc.dental



Visitez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/gcswitzerland



Visitez-nous :
<https://www.gc.dental/europe/fr-CH>



Visitez-nous sur Instagram :
[gc_switzerland](https://www.instagram.com/gc_switzerland)



Visitez-nous sur Youtube :
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts

GC Austria GmbH SWISS Office | Zürichstrasse 31 | 6004 Luzern | T: 041 520 01 78 | info.switzerland@gc.dental | <https://www.gc.dental/europe/fr-CH>
GC Austria GmbH | Tallak 124 | A-8103 Gratwein/Strassengel | T: +43.3124.54020 | info.austria@gc.dental | <https://www.gc.dental/europe/de-AT>

Aadva™ Lab Scanner 3

Le scanner est votre espace de travail !

Le seul et unique scanner de laboratoire contrôlé par le geste

GC présente Aadva Lab Scanner 3, un scanner de nouvelle génération qui ouvre la voie à des fonctionnalités ingénieuses et pratiques. Ce scanner de laboratoire dentaire à commande gestuelle allie une expérience utilisateur inégalée avec la vitesse, la précision, la flexibilité et la sécurité que vous attendez dans votre flux de travail CAD/CAM.

- Une expérience utilisateur unique grâce à la technologie de projection brevetée
- Equilibre dynamique entre vitesse et précision grâce aux images de deux caméras prises sous des angles différents et aux moteurs à grande vitesse
- Positionnement facilité par la reconnaissance entièrement automatisée des objets
- Filtre de sécurité contre la lumière bleue
- Technologie de scannage hybride : Elimine la nécessité d'une préparation des moignons
- Occlusion intelligente : Ecarte la nécessité de procéder à des scans du mordu



NOUVEAU
MAINTENANT

AADVA ALS 3

14.999,- CHF

 Aadva™



Êtes-vous intéressé ?

Votre spécialiste GC se tient à votre disposition pour des conseils personnalisés :
info.switzerland@gc.dental
ou par téléphone 041 520 01 78.

GC TECHNIQUE DENTAIRE SPECIALS



OFFRE

Set céramique ancien contre nouveau

50 % ECONOMISEZ

Exemple : L'ancien set est échangé (acheté) contre le nouveau set et en plus, il y a une réduction de 50% sur le prix de vente proposé.



OFFRE

Set de peinture ancien contre nouveau

50 % ECONOMISEZ

Exemple : L'ancien set est échangé (acheté) contre le nouveau set et en plus, il y a une réduction de 50% sur le prix de vente proposé.

Pour plus de détails voir pages 4 dans la partie laboratoire.



OFFRE

Disque/bloc ancien contre nouveau

50 % ECONOMISEZ

Exemple : Achetez 20 x disques/blocs et recevez 10 x disques/blocs gratuitement !



OFFRE

Kit composite ancien contre nouveau

35 % ECONOMISEZ

Exemple : L'ancien set est échangé (acheté) contre le nouveau set et en plus, il y a une réduction de 35% sur le prix de vente proposé.

Pour plus de détails voir pages 12 dans la partie laboratoire.

Nos offres spéciales vous intéressent-elles ?



C'est aussi simple que cela :
Envoyez-moi votre commande ou demande de rendez-vous.
Indiquez-moi le dépôt que vous souhaitez - je m'occupe de votre offre spéciale !

Marvin Hanany:
marvin.hanany@gc.dental
ou par téléphone au 079 351 27 63

C'est important de le savoir :

Toutes les commandes continuent de passer par commerce/dépôt, mais avec moi comme interlocuteur, vous bénéficiez des avantages supplémentaires en plus !

Ce que je vous propose :

- Des visites personnelles dans votre laboratoire - je passe volontiers vous voir !
- Des positions de démonstration gratuites pour presque tous les produits GC, y compris le scanner de modèle et l'appareil de photopolymérisation.
- Des avantages exclusifs en cas de commande par mon intermédiaire

Je me réjouis de nos échanges et j'aimerais :

- faire connaissance avec votre laboratoire et votre équipe
- comprendre vos souhaits et vos besoins
- vous soutenir au mieux

GC FUJIROCK® EP

Nouvelle gamme de produits utilisé pour la réalisation de toutes sortes de prothèses dentaires



GC FUJIROCK EP PREMIUM

Une version spéciale du GC Fujirock EP développée pour les techniques exigeantes telles que les travaux implantaires étendus et les indications complexes des travaux céramiques. La composition améliorée de la poudre et ses couleurs raffinées offrent à ce nouveau plâtre une variété d'applications. Les cas esthétiques exigeants passent par plusieurs procédures au laboratoire ... modèle en cire, fausse gencive, balayage numérique, finition et polissage ... et le modèle en plâtre est bien le fondement de la qualité. Pour une parfaite présentation de vos travaux esthétiques.



GC FUJIROCK EP CLASSIC

Le plâtre de type 4 les plus populaire au monde GC Fujirock EP - des plâtres « classiques » parfaits pour toutes sortes de prothèses. Ils combinent précision élevée, dureté des bords exceptionnelle et stabilité à haute pression. GC Fujirock EP est très fluide tout en restant thixotrope pour une manipulation facilitée et sans bulles d'air.

**ECONO-
MISEZ
20 %**

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC et seulement valable dans la même unité d'emballage. Prix par paquet.

FUJIROCK EP
Classic Line
N°art10003220
**FUJIROCK EP
Classic Line,
Golden Brown, 12 kg**
81,20 CHF
au lieu de 101,50 CHF

N°art10003218
**FUJIROCK EP
Classic Line,
Golden Brown, 5 kg**
42,24 CHF
au lieu de 52,80 CHF

N°art10003219
**FUJIROCK EP
Classic Line,
Topaz Beige, 5 kg**
46,56 CHF
au lieu de 58,20 CHF



GC FUJIROCK EP
Premium Line
N°art10003242
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Pastel Yellow, 4 kg**

N°art10003244
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Polar White, 4 kg**

N°art10003245
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Inca Brown, 4 kg**

N°art10003246
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Titanium Grey, 4 g**
38,08 CHF
au lieu de 47,60 CHF

N°art10003243
**FUJIROCK EP
Premium Line,
Pastel Yellow, 11 g**
82,88 CHF
au lieu de 103,60 CHF

OPTIGLAZE color

Caractérisation de surface photopolymérisable pour les restaurations indirectes acryliques et composites



Teintes de caractérisation photopolymérisables à utiliser avec

- Cerasmart - matériau hybride
- Restaurations en composite - Facettes - Inlays - Onlays
- Résines pour prothèses - individualisations et modifications
- Dents du commerce - individualisation
- Résines provisoires



OFFRE

25 % **597,15 CHF**
~~796,20 CHF~~

N°art10001150 **OPTIGLAZE color Set**;
Contenu : 1 x OPTIGLAZE color A plus, 1 x B plus, 1 x C plus, 1 x white, 1 x ivory white, 1 x yellow, 1 x orange, 1 x pink orange, 1 x red brown, 1 x olive, 1 x grey, 1 x blue, 1 x lavender, 1 x pink, 1 x red (pro Farbe 2,6 ml); 1 x OPTIGLAZE color clear, 1 x clear HV, (pro Farbe 5 ml); 5 x disposable pallet, 1 x protective cover, 1 x brush round 5 Stk. (N°1B), 1 x brush flat 5 Stk. (N°1B), 2 x brush holder (1 each ivory, white), 1 x OPTIGLAZE color IFU, 1 x OPTIGLAZE color Technique Card;

597,15 CHF au lieu de 796,20 CHF par paquet

65,80 CHF

OPTIGLAZE® color Refill Pack
N°art10001151 **OPTIGLAZE color, A plus**
N°art10001152 **OPTIGLAZE color, B plus**
N°art10001153 **OPTIGLAZE color, C plus**
N°art10001154 **OPTIGLAZE color, White**
N°art10001155 **OPTIGLAZE color, Ivory White**
N°art10001156 **OPTIGLAZE color, Yellow**
N°art10001157 **OPTIGLAZE color, Orange**
N°art10001158 **OPTIGLAZE color, Pink Orange**
N°art10001159 **OPTIGLAZE color, Red Brown**
N°art10001160 **OPTIGLAZE color, Olive**
N°art10001161 **OPTIGLAZE color, Grey**
N°art10001162 **OPTIGLAZE color, Blue**
N°art10001163 **OPTIGLAZE color, Lavender**
N°art10001164 **OPTIGLAZE color, Pink**
N°art10001165 **OPTIGLAZE color, Red**
Prix par paquet 65,80 CHF à 2,6 ml

N°art10001166 **OPTIGLAZE color, Clear**
N°art10001167 **OPTIGLAZE color, Clear HV**
Prix par paquet 65,80 CHF à 5 ml

Services de GC



Conseil en création de cabinet médical

Profitez de l'occasion de rencontrer nos spécialistes pour votre création de cabinet médical et de demander des conseils. Nous vous soutenons volontiers !

Nous vous soutenons volontiers dans la création de votre cabinet avec un soutien optimal, structuré et professionnel. Sélection de produits - cela aux conditions très particulières.



Ateliers pratiques en interne

Nos spécialistes produits sont toujours prêts à soutenir vous et votre équipe dans votre cabinet/ laboratoire avec différents ateliers pratiques !

Cours et ateliers en interne ainsi que conseils sur des thèmes individuels par nos spécialistes produits GC.



Service clientèle

Notre service clientèle exceptionnel avec le spécialiste produit correspondant est à votre disposition à tout moment.

En supplément à nos visites personnelles préférées nous offrons également des conseils en ligne à votre rendez-vous individuel.



**Êtes-vous intéressé
à d'autres workshops ?**

Voilà les informations !



Get the app !
Pour rester informé de nos dernières actualités, publications, cours ... Et collectez des Smiles !



Vous trouvez les cours actuels sur :
<https://europe.gc.dental/fr-CH/education/courses>

Demandez un demo-set

pour tester !

GRADIA® PLUS

Système Composite Modulaire
pour les restaurations indirectes

Un nouveau standard dans le réalisme
et la stratification des teintes

- La rencontre de l'innovation
et de l'indication
- Technologie polymère céramique
de pointe
- Esthétique rouge et blanc
en parfaite harmonie
- Consistance pâteuse ou fluide
- Rationnel et modulaire
- Polymérisation à la vitesse
de la lumière



Technial manual
GRADIA PLUS



Teintes
GRADIA PLUS



OFFRE
5 + 1

Recevez 6 paquets GRADIA PLUS Refill Pack
au prix de 5 !

Mélange de teintes possible. Valable pour
une même unité d'emballage et par
l'intermédiaire de votre consultant GC.

OFFRE **A**
35 % 1.612,85 CHF
~~2.481,30 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set A
N°art10003559 Layer Set 733,07 CHF
N°art10003560 Paint Set 463,06 CHF
N°art10003563 Accessory Set 416,72 CHF

OFFRE **B**
35 % 2.276,43 CHF
~~3.502,20 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set B
N°art10003559 Layer Set 733,07 CHF
N°art10003652 Layer Pro Set 663,59 CHF
N°art10003560 Paint Set 463,06 CHF
N°art10003563 Accessory Set 416,72 CHF

OFFRE **C**
35 % 1.288,82 CHF
~~1.982,80 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set C
N°art10003562 One Body Set 409,05 CHF
N°art10003560 Paint Set 463,06 CHF
N°art10003563 Accessory Set 416,72 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles
en recharge. Offre valide par l'intermédiaire de
votre consultant GC.

OFFRE **D**
35 % 895,12 CHF
~~1.377,10 CHF~~

GRADIA PLUS Combi-Set D
N°art10003561 GUM Set 478,40 CHF
N°art10003563 Accessory Set 416,72 CHF

GRADIA

Contactez votre distributeur
GC personnel pour
plus d'informations.

Labolight DUO

Unité de polymérisation LED mode duale
pour résine composite indirecte 2 appareils en 1 !

Pré-photopolymérisation (mode step)
Mode de photo-polymérisation finale (mode full)

Avec les dernières technologies LED

Equippé de la technologie LED
double longueur-d'ondes, le Labolight
DUO peut être utilisé en toute
sécurité pour tous les composites GC :
Large longueur-d'ondes de
380 nm-510 nm avec des pics :
• 465 nm-485 nm (12 LED bleue)
• 390 nm-400 nm (3 LED violette)
Cette technologie assure un
durcissement optimal de tous
les matériaux dentaires photopoly-
mérisables, et sa puissance réduit les
cycles de photopolymérisation.



Système rotatif automatique

La plaque réfléchissante répartit la
lumière de manière efficace dans toutes
les directions. Le plateau de photo-
polymérisation permet un positionnement
précis des pièces pendant le cycle
de photo-polymérisation.



Un style épuré contemporain & ergonomique

Le GC Labolight DUO est non
seulement capable de traiter
plus de travail mais en plus,
il est élégant. Son style contemporain
a été récompensé, ses surfaces
lisses permettent un nettoyage facile
et son encombrement est réduit.
Une conception conviviale :
l'interface est simple et intuitive et
les parties internes sont facilement
accessibles grâce à sa large ouverture.



Step mode



Full mode

PRIX SPECIAL

10 % 2.998,08 CHF
~~3.331,20 CHF~~

N°art 10001246 Labolight DUO
2.998,08 CHF au lieu de 3.331,20 CHF

Offre valide par l'intermédiaire de votre
consultant GC.

Un système céramique avec forme et couleur à peindre pour disilicate de lithium

Nos solutions disilicate de lithium – version pressée ou assistée par ordinateur – offrent les propriétés physiques et esthétiques les plus optimales.



GC Initial LiSi Press
Lingotin céramique pressée



GC Initial LiSi Block
bloc CAD/CAM pour des solutions au fauteuil

Comment faire ? Vous choisissez... ce que vous peignez est ce que vous obtenez !



Armature avec réduction à minima (0.3 mm)
(Zr ou disilicate de lithium)



Lustre Pastes ONE
Application + cuisson
Couleur + fluorescence



SQIN
Application + cuisson
Forme, texture + brillance



TERMINÉ !



Armature monolithique
(Zr ou disilicate de lithium)



Lustre Pastes ONE
Application + cuisson
Couleur + fluorescence



TERMINÉ !

G-CEM ONE

Le partenaire clinique UNIQUE pour toutes vos indications de collage ... le matériau de scellement optimal pour GC Initial LiSi Block – CAD/CAM Block au disilicate de lithium et GC Initial LiSi Press !



Collage optimal des piliers hybrides !

G-CEM ONE™

Ciment résine auto-adhésif pour le collage extra-oral de piliers hybrides

GC CEM ONE est un ciment résine de scellement universel à prise duale, conçu pour le collage de restauration composite indirecte, tout céramique ou métallique. Ses caractéristiques et propriétés en font une option idéale pour le collage des piliers au laboratoire. Il offre l'auto-polymérisation la plus élevée ce qui lui permet de garantir des résultats parfaits, surtout lorsque la transmission de la lumière ne peut être correctement assurée. L'utilisation de MDP dans le G-CEM ONE garantit une force d'adhésion et une durabilité supérieures au titane et à la zircone, sans prétraitement avec un primer.

Cependant, lorsqu'il est utilisé avec de la vitrocéramique, l'utilisation d'un primer contenant du silane est recommandée. G-CEM ONE se présente sous la forme d'une seringue Automix qui facilite la manipulation avec un minimum de déchets. Il présente également le film le plus fin du marché (3 µm) pour un ajustage parfait des pièces prothétiques.

* Toutes les données sont disponibles sur demande



OFFRE

3+1 73,20 CHF

Prix par paquet

Recevez 4 Refill Packs G-CEM ONE au prix de 3 !

Seulement valable pour une même unité d'emballage (Refill). Mélange de teintes possible.

Offre valide par l'intermédiaire de votre consultant GC.

N°art 10006923

G-CEM ONE

Single Refill AO3

N°art 10006924

G-CEM ONE

Single Refill White Opaque

Contenu par Single Refil :
1 x G-CEM ONE Spritze (4,6 g),
8 x GC Automix Tips Regular,
2 x GC Automix Endo Tips;
prix par paquet 73,20 CHF

Pour plus de détails voir page 21 dans la partie cabinet.

Accessoires :

N°art 10003289

Automix Tip for Endo

10 Stk. avec Pointe de rallonge;
13,50 CHF

N°art 10003335

Automix Tip Regular

10 Stk.; 12,90 CHF



Teintes opaques

AO3

White Opaque

Demandez le Guide Technique pour le collage extra-oral de piliers hybrides avec G-CEM ONE.



Pilier Ti
+ vis



Modèle avec analogue d'implant
+ Pilier Ti
+ fausse gencive



Analogue d'implant
+ bandeau
gingival (vue laterale)



Analogue
+ Pilier Ti
+ Couronne
tout céramique

Initial LiSi

Céramique pour disilicate de lithium.
Un système de teintes – un système de stratification

- Remarquable esthétique naturelle, spécialement développée et adaptée pour la réfraction de la lumière sur le disilicate de lithium
- Faibles températures de cuisson et valeurs de CET parfaitement adaptées, avec une stabilité élevée après cuisson, même après plusieurs cycles
- Système étendu de teintes de stratification – le concept Initial
- Manipulation aisée
- Résultats rapides, esthétiques et rentables

Demandez votre offre spéciale !

Initial Zr-FS
Système céramique aux indications multiples

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 1.985,40 CHF

Prix par paquet
Initial Zr-FS Basic + Advanced Set
N°art 10003119 **Basic Set**; 1985,40 CHF
N°art 10003120 **Advanced Set**; 1985,40 CHF
N°art 10003168 **Bleach Set**; 366,90 CHF
N°art 10003172 **Gum Shades Set**; 332,00 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

OFFRE

5+1 INITIAL ZR-FS INITIAL MC

Recevez 6 Refill Packs de Initial Zr-FS ou Initial MC au prix de 5!

Mélange de teintes possible, offre pour une même unité d'emballage et valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 847,20 CHF

Prix par paquet
Initial LiSi Basic + Advanced Set
N°art 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 766,00 CHF
N°art 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 928,40 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Initial MC
Céramo-métal

OFFRE

MAINTENANT À PARTIR DE 2.132,55 CHF

Prix par paquet
AktionsPrix für Initial MC Basic (Paste) + Basic Plus (Paste) + Advanced Set
N°art 10003150 **Basic Set mit Poudre-Opaquer**; 1743,30 CHF
N°art 10003111 **Basic Set mit Pasten-Opaquer**; 1577,10 CHF
N°art 10003151 **Basic Plus Set mit Poudre-Opaquer**; 1734,40 CHF
N°art 10003112 **Basic Plus Set mit Pasten-Opaquer**; 1622,20 CHF
N°art 10003113 **Advanced Set**; 1065,80 CHF
N°art 10003170 **Gum Shade Set (Poudre-Opaquer)**; 292,40 CHF
N°art 10003171 **Gum Shade Set (Pasten-Opaquer)**; 260,50 CHF
N°art 10003165 **Bleach Set**; 358,90 CHF
N°art 10003181 **Initial MC Classic Line Paste Opaque Set**; 601,30 CHF
N°art 10003114 **Initial MC Paste Opqaue Set**; 689,60
N°art 10003183 **Initial MC Chroma Shade Translucent Set**; 341,20 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.
Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Initial LiSi Press

Nouvelle céramique pressée révolutionnaire – pour une solidité unique alliée à une esthétique exceptionnelle

- Voici ce que vous aimerez chez Initial LiSi Press :
- Résistance incomparable à la flexion grâce à la technologie HDM
 - Esthétique inégalée en combinaison avec la céramique de stratification LiSi et l'Initial Lustre Pastes NF
 - Vaste choix de couleurs chaudes et éclatantes avec une excellente fluorescence
 - Pratiquement aucune couche de réaction après le démoulage

OFFRE

4 + 1 98,50 CHF

Prix par paquet
Recevez 5 Initial LiSi Press Ingots Packs (à 5 x 3 g) au prix de 4 !



Mélange de teintes possible. Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



INITIAL LISI
INITIAL ZR-FS
INITIAL MC
INITIAL LISI PRESS
LISI PRESSVEST



Demandez dès maintenant un kit de calibrage !

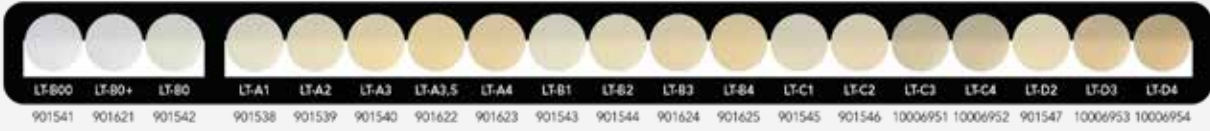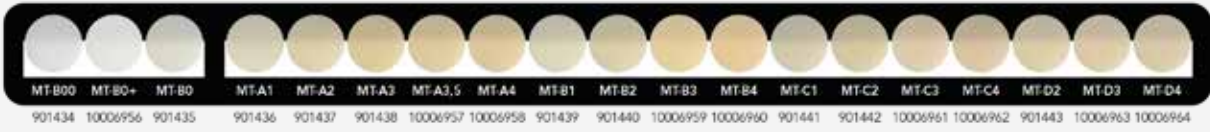

Informez-vous auprès de votre conseiller personnel GC sur la céramique pressée unique et révolutionnaire Initial LiSi et consultez nos offres spéciales Initial LiSi Press !

Low Translucency - One Body Concept (LT-IQ)



Ce teintier ne constitue qu'une proposition de guide de référence.

Medium Opacity (MO)



GC LiSi PressVest

Le secret du GC LiSi PressVest : Moins de couche de réaction et un retrait plus facile

La combinaison de l'agent séparateur unique inclus dans la poudre du revêtement avec le Liquide GC LiSi PressVest SR permettent de créer un vide ou « ligne de séparation » qui fragilise la couche de réaction.

- Indications
- Spécialement conçu pour de nombreux procédés de pressage de céramique :
- Procédés de pressée tout céramique : Inlays, revêtements et couronnes
 - Procédés de surpressée



- Grande fluidité
- Temps de travail long
- Temps de prise stable
- Temps avant l'enfournement plus flexible
- Gain de temps – idéal pour les flux de travail des laboratoires
- grande capacité des tiges de coulée
- Meilleure adaptation interne
- Retrait facile de la couche de réaction – pas d'acide fluorhydrique

LISI PRESSVEST POWDER

219,70 CHF

N°art10003661
GC LiSi PressVest Powder
100 g x 60, EU/US | 6 kg;
219,70 CHF par paquet

LISI PRESSVEST LIQUID

44,40 CHF

N°art10003662
GC LiSi PressVest Liquid
900ml, EU/US | 900 ml;
44,20 CHF par paquet

Autres unités valables :
N°art10003663
GC LiSi PressVest SR Liquid
100 ml, EU/US | 100 ml;
67,10 CHF

initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Le premier choix pour les normes les plus élevées

Conçu pour offrir un équilibre parfait entre une résistance élevée et une esthétique exceptionnelle, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite est le choix idéal pour les restaurations antérieures et postérieures.

ESTHETIQUE SUPERIEURE

Gradient de teinte et de translucidité fidèle à la nature pour les restaurations antérieures et postérieures.

RESISTANCE ELEVÉE

Classé en classe V selon la norme DIN EN ISO 6872 avec une valeur moyenne > 1.100 MPa.

OMNI-FONCTIONNEL

Polyvalent et adapté à un large éventail d'indications cliniques. Frittage rapide ou régulier.

Propriétés physiques

- Dioxyde de zirconium Type II Classe V DIN EN ISO 6872
- Résistance à la flexion : valeur moyenne typique ≥ 1.100 MPa
- Gradient de translucidité élevé de >45 % à >49 %.
- Frittage rapide pour couronnes et bridges jusqu'à 3 unités

PREISVORTEIL

3+1 À PARTIR DE 179,- CHF

Prix par paquet

Recevez 4 paquets Initial Zirconia Disk Multilayer Elite au prix de 3 !

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

+ 1 INITIAL ZIRCONIA COLORING LIQUID GRATUIT

Achetez 3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite et recevez 1 x Initial Zr Coloring Liquid gratuitement !

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Le disque Initial Zirconia Multilayer Elite est disponible dans toutes les couleurs 16 V et dans 3 types de blanchiment, dans les rainures de disque 14, 16, 20 et 98 mm. 25 mm, avec un diamètre de 98,5 mm.
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3

3 Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

+ 1 INITIAL IQ LUSTRE PASTES ONE REFILL GRATUIT

Achetez 3 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite et recevez 1 x Initial IQ Lustre Paste ONE Refill Pack gratuitement !

Mélange de teintes possible. Valable pour une même unité d'emballage et par l'intermédiaire de votre consultant GC.

Initial Spectrum Stains

L'art de peindre les céramiques - solutions céramique 2D et 3D

OFFRE

3+1 INITIAL SPECTRUM STAINS

Recevez 4 paquets Initial Spectrum Stains au prix de 3 !

20 Teintes Powder (3 g) à 57,90 CHF:
SPS-1 Ivory White, SPS-2 Melon Yellow, SPS-3 Signal Yellow, SPS-4 Light Terracotta, SPS-5 Savannah Gold, SPS-6 Caramel, SPS-7 Camel, SPS-8 Olive, SPS-9 Brown, SPS-10 Dark Walnut, SPS-11 Coral, SPS-12 Denim Blue, SPS-13 Twilight, SPS-14 Deep Orange, SPS-15 Sunset, SPS-16 Midnight, SPS-17 Dark Brown, SPS-18 Illusion 1, SPS-19 Illusion 2, SPS-20 Illusion 3

N°art 10003190
Initial Spectrum Stain Set
966,90 CHF

Toutes les teintes sont également disponibles en recharge.

Laissez votre consultant GC personnel vous conseiller sur les colorations uniques et révolutionnaires du spectre Initial™ et obtenez vos offres spéciales !

initial™
Painting Solutions



Coloration externe

Une large gamme d'applications

- Caractérisation et individualisation des céramiques
- Individualisation de la céramique stratifiée
- CET adapté et compatible avec toutes les céramiques dentaires
- Un coffret pour tous les systèmes
- 20 couleurs en poudre

manuel technique :



Painting Solution :

Initial Zirconia Coloring Liquid

Colorant liquide pour ZrO2


- Les « GC Initial Zirconia Coloring Liquid » sont destinés à être utilisés par les prothésistes dentaires pour la coloration de restaurations en zircone pré-frittée
- Limiter la finition nécessaire
- Plus rapide, plus prévisible et individuel L'Initial Zirconia Coloring Liquid, en revanche, permet une approche véritablement individualisée de la base, y compris de la partie gingivale.
- Peindre ou immerger

OFFRE

4+1 À PARTIR DE 25,- CHF

Recevez 5 Initial Zr Coloring Liquid Refill Packs au prix de 4 !

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.

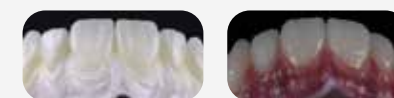

OFFRE

20% 479,20 CHF
~~599,- CHF~~

N°art 10041648 Initial Zr Coloring Liquid Set
479,20 CHF au lieu de 599,- CHF

Contenu :
700 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml:
1 x Body A, 1 x Body B, 1 x Body C, 1 x Body D,
1 x Cervical A, 1 x Cervical B, 1 x Cervical C,
1 x Cervical D, 1 x Effect Blue, 1 x Effect Grey,
1 x Effect Pink, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25 ml: 1 x Red, 1 x Blue, 1 x Yellow, 1 x Green, Technial manual



INITIAL ZIRCONIA DISK
MULTILAYER ELITE
INITIAL CERAMIC
ZIRCONIA COLOR LIQUID



PERFECTIONNEZ MAINTENANT VOTRE DÉTERMINATION DE COULEUR !

... AVEC LE TEINTIER ORIGINAL
INITIAL ZIRCONIA MULTILAYER ELITE.
Contactez nos spécialistes produits.

NOUVEAU

N°art70017398 bis 70017416
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,
14 mm 179,- CHF par paquet

N°art70017417 bis 70017435
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,
16 mm 199,- CHF par paquet

N°art70017436 bis 70017454
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,
20 mm 239,- CHF par paquet

N°art70017455 bis 70017473
Initial Zirconia Disk Multilayer Elite,
25 mm 278,- CHF par paquet

NOUVEAU



Autres unités valables :

N°art 10041649
Initial Zr Coloring Liquid, Intro Kit;
190,- CHF par paquet
Contenu : 250 g, GC Initial Zr Coloring Liquid à 50 ml: 1 x Body A, 1 x Cervical A, 1 x Effect Grey, 1 x Neutral, GC Initial Zirconia Marking Liquid à 25ml: 1 x Red, 1 x Blue, Technial manual
Refill Packs à 50 ml;
53,50 CHF
Initial Zr Coloring Liquid:
Body A, B, C, D; Cervical A, B, C, D; Effect Blue, Effect Grey, Effect Pink, Neutral

Refill Packs à 25 ml;
25,00 CHF
Initial Zr Marking Liquid:
Red, Blue, Yellow, Green


Initial IQ ONE SQIN

Système céramique
avec forme et couleur à peindre



Technique ONE SQIN - pour toutes vos restaurations en zirconie et disilicate de lithium

- Créez des détails de forme et de texture au stade humide - aucune modification après la cuisson.
- Propriétés auto-glaze - obtenez une belle finition glacée en une seule cuisson.
- Niveau de fluorescence optimal - assure l'aspect des dents naturelles sous toutes conditions de lumière.
- Une esthétique maximale dans une micro-couche.

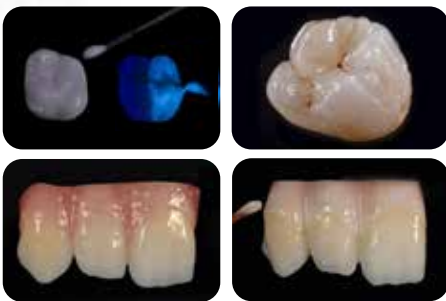

© ZTM Michael Brusch
© ZTM Stefan M. Roosen

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Shades

Peignez votre esthétique rouge et
blanche : Deux coffrets, une approche



Initial IQ
Lustre Paste ONE V-Shades Set

+ INITIAL ZIRCONIA DISK
MULTILAYER ELITE GRATUIT

Achetez 1 x Initial IQ Lustre Paste
ONE V-Shades Set et recevez
1 x Initial Zirconia Disk Multilayer Elite
(toutes tailles) gratuitement !

Offre valable par l'intermédiaire
de votre consultant GC.



Point de départ

Résultat final

OFFRE

15 %

400,- CHF
~~470,60 CHF~~

N°art 10003186
Initial IQ One Body LP NF GUM Shades Set
5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x
Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g); 1 x IQ LP NF
Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml);
1 x IQ LP NF mixing dish; 1 x IQ LP NF Brush A; 1 x IQ LP
NF Brush B; 1 x IQ LP NF Plastic Cover; 1 x IQ LP NF, Color
Chart; 1 x IQ LP NF; Technical Manual;
400,- CHF au lieu de 470,60 CHF par set



OFFRE

15 %

723,01 CHF
~~850,60 CHF~~

N°art 10007017
Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-Shades Set
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g;
4 x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g;
10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 /
L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel
Effect Opal (L-OP), 4 g; 1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value
(L-V), 4 g; 1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP
ONE/NF; Refreshing Liquid, 8 ml; 1 x IQ LP ONE Mixing
dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00; 1 x IQ LP ONE Brush 2;
1 x IQ LP ONE Colour Chart;
723,01 CHF au lieu de 850,60 CHF par set



OFFRE

4 + 1

INITIAL
IQ ONE SQIN

Recevez 5 Refill Packs Initial IQ ONE SQIN
au prix de 4 !

Mélange de teintes possible. Offre valable
par l'intermédiaire de votre consultant GC
et pour une même unité d'emballage.

OFFRE

RISK-FREE

1.476,60 CHF

1.107,45 CHF

Prix par paquet

N°art 10006991
Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET
10 x SPS Stain (SPS-1/2/7/8/13/14/17/18/19/20), 3 g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
2 x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N/L-NFL), 4 g;
4 x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A/B/C/D), 4 g;
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3/6/8/9/10/OP), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ LP ONE Mixing Dish; 1 x IQ LP ONE Brush 00
1 x IQ LP ONE Brush 2; 1 x IQ LP ONE Plastic Cover
1 x IQ ONE SQIN Technical Manual;
1 x IQ LP ONE Colour Chart; 1 x SPS Colour Chart

Offre valable par l'intermédiaire de votre consultant GC.



INITIAL IQ
SQIN SHADES SET

604,10 CHF

Prix par paquet


N°art 10006990
Initial IQ SQIN SHADES SET
5 x IQ SQIN Powder Dentin
(Body A/B/C/D/BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel
(E-57/58/59/60/BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translu-
cent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM
(light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture
Liquid, 25 ml 1 x IQ SQIN;
Technical Manual



Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades (4 g), 69,80 CHF



Initial IQ Lustre Pastes NF Gum Farben (4 g), 57,90 CHF

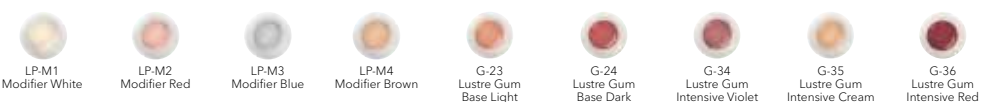

OFFRE

4 + 1

INITIAL IQ
LUSTRE PASTE ONE

Recevez 5 Refill Packs Initial IQ Lustre Pastes
ONE V-Teinten au prix de 4!

Mélange de teintes possible. Offre valable
par l'intermédiaire de votre consultant GC
et pour une même unité d'emballage..



GC AUSTRIA SWISS OFFICE NEWS & HIGHLIGHTS

JANVIER – JUIN 2026

LABORATOIRE

