

# NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

## GABINET

Oferty ważne do 31 grudnia 2026



# Starcie to realne wyzwanie, poznaj nasze rozwiązania

## Długoczasowe rozwiązania pośrednie w leczeniu zaawansowanego starcia zębów

### Leczenie zaawansowanego starcia zębów - od czego zacząć?

Nie istnieje jedna zasada wyboru między leczeniem technikami bezpośrednimi czy pośrednimi, jednak celem jest zawsze zachowanie najmniej inwazyjnego podejścia. Większość przypadków rozpoczyna się od odbudów bezpośrednich. Jednak w złożonych przypadkach obejmujących zaawansowane lub patologiczne starcie, leczenie z użyciem materiałów do uzupełnień pośrednich może być konieczne. Wymaga to zastosowania materiałów, które sprawdzają się w długim okresie, a jednocześnie są łagodne dla istniejącego uzębienia. Produkty GC zostały zaprojektowane z myślą o tych potrzebach, zapewniając niezawodne wsparcie na każdym etapie leczenia.



Wszystkie produkty z kampanii „Starcie to realne wyzwanie” oznaczone są takim znakiem.



ZESKANUJ KOD I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KAMPANII

Ocena powinna obejmować:



Zakres utraty tkanek



Etiologię



Tempo progresji starcia



W przypadku zaawansowanego, uogólnionego starcia zębów kluczowe znaczenie ma staranne planowanie, pozwalające zachować równowagę między estetyką, funkcją i fonetyką, przy jednoczesnym utrzymaniu minimalnej inwazyjności leczenia. Zgodnie z doniesieniami naukowymi, pionowy wymiar zwarcia (VDO) można bezpiecznie zwiększyć - **zazwyczaj do około 5 mm w obrębie siekaczy - w granicach komfortu pacjenta**



Dzięki uprzejmości: dr Ch. Lampson, Niemcy

W tym przypadku konieczne było zwiększenie pionowego wymiaru zwarcia. Umieszczenie uzupełnień tymczasowych z **TEMPSMART DC** pozwala od razu uzyskać wizualizację efektu końcowego.

#### TEMPSMART DC

Podwójnie utwardzalny kompozyt na tymczasowe korony i mosty

- Brak kleistości podczas obróbki
- Wysoka wytrzymałość na pękanie
- Łatwe polerowanie, długotrwały połysk
- Możliwość naprawy i podścielania

Lekarz dentysta

Diagnoza kliniczna i funkcjonalna

Planowanie leczenia estetycznego i funkcjonalnego

Mock-up i preparacja zębów prowadzona przez mock-up

Faza adaptacyjna z uzupełnieniami tymczasowymi

Cementowanie

Technik dentystyczny

Wax-up, tworzenie modeli, kluczy i uzupełnień tymczasowych

Uzupełnienia protetyczne



Skuteczna komunikacja pomiędzy lekarzem dentystą a technikami dentystycznym ma kluczowe znaczenie dla uzyskania funkcjonalnej i estetycznej rehabilitacji



Dzięki uprzejmości: RDT Stephen Lusty, Wielka Brytania


Anatomię z najmniejszymi szczegółami można odtworzyć w bardzo prosty sposób! Niewielkie korekty lub dopasowanie do warunków zgryzowych można łatwo wykonać poprzez szlifowanie lub dodanie materiału kompozytowego. **GC Fuji TEMP LT** doskonale nadaje się do cementowania tymczasowego.



#### GC Temp PRINT

Światłutwardzalny kompozyt do druku 3D koron i mostów tymczasowych

- Doskonałe i stabilne właściwości mechaniczne
- Nie zawiera metakrylanu metylu (MMA) do druku w technologii DLP
- Kompatybilny z OPTIGLAZE color

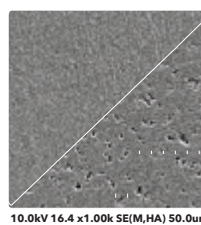

10.0kV 16.4 x 1.00k SE(M,HA) 50.0um

Porównanie (dwukrotnie wypolerowanych powierzchni **GC Initial LiSi Press** (u góry po lewej) z tradycyjnym konwencjonalnym dwukrzemianem litu (na dole po prawej) przy takim samym powiększeniu.



#### Initial LiSi Block & Initial LiSi Press

Rozwiązania oparte na dwukrzemianie litu do frezowania i technologii tłoczenia

- Doskonała estetyka
- Zdefiniowany na nowo dwukrzemian litu z technologią HDM zapewniającą niezrównane właściwości fizyczne
- Gładkie krawędzie i doskonała polerowalność dzięki homogennej strukturze



Dzięki uprzejmości: dr Z. Ali, Wielka Brytania

Pacjent z zaawansowanym starciem erozyjnym zębów bocznych został poddany leczeniu za pomocą częściowych uzupełnień protetycznych wykonanych z **GC Initial LiSi Press**.



#### GC Temp PRINT

Światłutwardzalny kompozyt do druku 3D koron i mostów tymczasowych



#### GC Initial™ LiSi Block

Rozwiązania z dwukrzemianem litu do CAD/CAM



#### GC Initial LiSi Press

Dwukrzemian litu do techniki tłoczenia



#### GC Initial Zirconia Disk

Dyski cyrkonowe CAD/CAM do bardziej wymagających przypadków



#### G-CEM ONE™

Uniwersalny cement kompozytowy do adhezyjnego cementowania



#### TEMPSMART™ DC

Podwójnie utwardzalny kompozyt na tymczasowe korony i mosty



#### CERASMART™270

Absorbujące działanie sił blokki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej



#### GC Initial IQ ONE SQIN

System do malowania koloru i nadawania kształtu



#### GC Initial Zr-FS

System do licowania tlenku cyrkonu



#### GC FujiCEM™ Evolve

Modyfikowany żywica cement glijasjonomerowy do osadzania

**CERASMART270**  
Absorbujące działanie sił blokki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

- Równomierne rozproszenie wypełniacza dzięki technologii FSC - wytrzymały, gładki i długotrwały
- Amortyzuje działanie sił okluzyjnych
- Łatwa naprawa bezpośrednia

Dzięki uprzejmości: dr C. Moussally, Francja

U pacjenta cierpiącego na bruksizm odtworzono powierzchnie okluzyjne przy użyciu materiału **CERASMART270**.

**G-CEM ONE**  
Uniwersalny samoadhezyjny cement kompozytowy

- Uniwersalny i samoadhezyjny
- Wysoka siła wiązania we wszystkich trybach
- Odporność na przebarwienia
- Wysoka wytrzymałość na ścieranie

**GC FujiCEM Evolve**  
Modyfikowany żywica cement glijasjonomerowy

- Jednoetapowa aplikacja
- Mniejsza wrażliwość na technikę pracy w porównaniu do cementów kompozytowych
- Tolerancja na wilgoć
- Optymalna adhezja do tlenku cyrkonu
- Mała grubość warstwy i precyzyjna adaptacja

Dzięki uprzejmości: dr G. Pongione, Włochy

**G-CEM ONE** charakteryzuje się wysoką stabilnością koloru.

Dzięki uprzejmości: Prof. R. Sorrentino, Włochy

**GC FujiCEM Evolve** zapewnia odporność na wilgoć i łatwe usuwanie nadmiaru.



## CERASMART™270


Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni



- Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
- Odporność na ścieranie dla trwałych uzupełnień
- Niezwykle precyzyjne brzegi zapewniające płynne przejścia
- Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- Optymalna fluorescencja i przezierność

### Odcienie

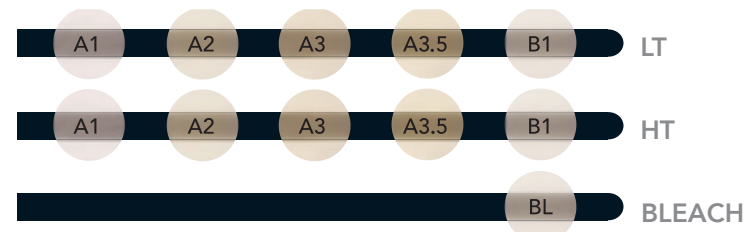

## GC Initial™ LRF BLOCK

Bloczek CAD/CAM z ceramiki skalenkowej z dodatkiem leucytu, który wzmacnia strukturę i umożliwia stosowanie zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku zębów. Specjalny rozmiar i rozkład kryształów leucytu wpływa na odbicie padającego światła i zapewnia niezwykle estetyczny efekt końcowy.

### MIX BLOCZKÓW

Zamów MIX\*\* 3 dowolnych opakowań bloczków (po 5 szt.) spośród: CERASMART270, Initial LiSi Block, Initial LRF BLOCK + 1 opakowanie Initial LiSi Block A2 LT lub HT w rozmiarze 14 GRATIS!  
Zamów MIX\*\* 10 dowolnych opakowań bloczków (po 5 szt.) spośród: CERASMART270, Initial LiSi Block, Initial LRF BLOCK + 4 opakowania Initial LiSi Block A2 LT lub HT w rozmiarze 14 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
\*\* Promocja obowiązuje przy zakupie minimum dwóch różnych opakowań bloczków CAD/CAM. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### Initial LRF BLOCK

**350 zł**  
Cena jednego opakowania

Odcienie:  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT  
BL  
Rozmiar 12; 350 zł za opakowanie  
Rozmiar 14; 350 zł za opakowanie  
Rozmiar 14L; 350 zł za opakowanie  
Opakowanie zawiera 5 bloczków



## ROZWIĄZANIA CAD/CAM z GC

**initial™**  
LiSi Block

## GC Initial™ LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami opartymi na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



- Oszczędność czasu, ponieważ nie wymaga krystalizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj

### KORZYSTNA CENA

**3 + 1**  
**10 + 4**  
**520 zł**  
Cena jednego opakowania


Zamów 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (5 szt.) A2 LT lub HT w rozmiarze 14 GRATIS!

Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu + 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) A2 LT lub HT w rozmiarze 14 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.


Polerowanie czy charakteryzacja?  
Wybór należy do Ciebie!

### Polerowanie

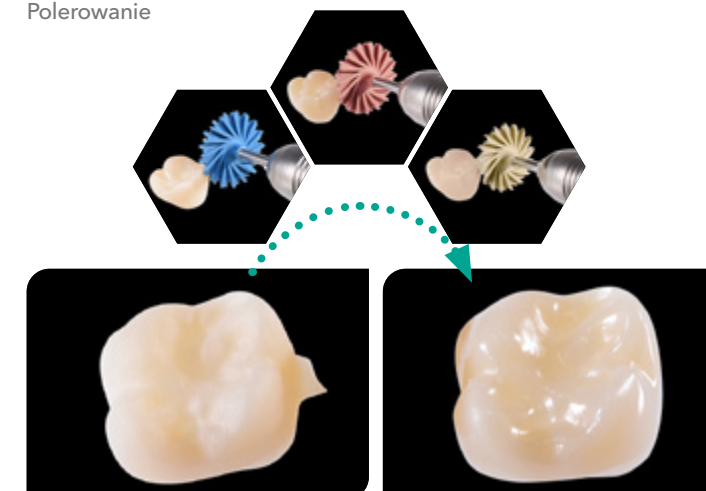

### Malowanie

Charakteryzacja przy użyciu Initial Lustre Pastes ONE

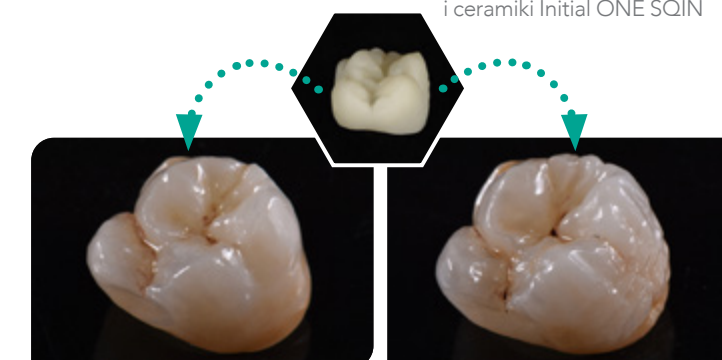

### Technika

mikrowarstwowania  
Mikrowarstwowanie z wykorzystaniem past Initial Lustre Pastes ONE i ceramiki Initial ONE SQIN

CERASMART270  
GC INITIAL LRF BLOCK  
GC INITIAL LISI BLOCK



### Initial LiSi Block AESTHETIC KIT

**2 025 zł**  
Cena zestawu

Art. Nr 10007322  
Initial LiSi Block AESTHETIC KIT  
Zestaw zawiera: 5 x Initial LiSi Block (A1 HT, A2 HT, A2 LT, A3 HT, A3 LT), CEREC, rozmiar 14, 5 x Initial IQ, Lustre Pastes ONE (L-NFL, L-A, L-3, L-2, L-OP), 4 g, 1 x Płyn do rozcieńczania 8 ml, 1 x Płyn do odświeżania 8 ml, akcesoria; **2 025 zł**



## G-CEM ONE™

## Samoadhezyjny cement kompozytowy

G-CEM ONE jest prawdziwie uniwersalnym samoadhezyjnym cementem kompozytowym do wszystkich wskazań i wszystkich rodzajów uzupełnień. W zależności od preparacji, można wybrać uproszczoną procedurę samoadhezyjną lub pełną procedurę adhezyjną.

## Niezawodny

Optymalna siła wiązania zarówno w przypadku preparacji o charakterze retencyjnym, jak i nieretencyjnym<sup>1</sup> dzięki funkcji GC Touch Cure - unikalnej zdolności wiązania kontaktowego opcjonalnie stosowanego primera G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.


## Uniwersalny

Do doskonała siła wiązania do zębów oraz do powierzchni i podłoży: szkliwa, zębiny, cyrkonu, metalu, ceramiki szklanej<sup>2</sup>, ceramiki hybrydowej<sup>2</sup>.

## Estetyczny

Odporne na ścieranie brzegi, wysoki stopień utwardzenia hydrofobowej matrycy cementu o niskiej sorpcji wody, zapewnia długotrwale, stabilne kolorystycznie efekty estetyczne.

## Odcienie G-CEM ONE &amp; G-CEM ONE Universal

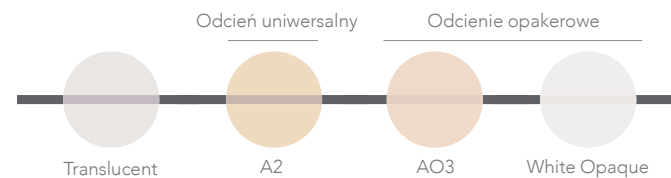

<sup>1</sup> Z użyciem G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

<sup>2</sup> Z użyciem G-Multi PRIMER

## KORZYSTNA CENA

**3 + 1** OD **295 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania G-CEM ONE Single Refill lub 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill i 1 opakowanie G-CEM ONE Single Refill + G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## Dostępne opakowania:

Art. Nr 10006932 **G-CEM ONE Single Refill AO3**  
Art. Nr 10006933 **G-CEM ONE Single Refill White Opaque**

Opakowanie Single Refill zawiera:  
1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g),  
8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips;  
Cena jednego opakowania: **295 zł**

## G-Multi PRIMER

## Jeden primer do wszystkich rodzajów uzupełnień.

G-Multi PRIMER to uniwersalny primer przeznaczony do przygotowania i naprawy każdego rodzaju uzupełnień pośrednich. Dzięki zawartości trzech różnych związków chemicznych - silanu, 10-MDP i MDTP - zapewnia wysoką i stabilną adhezję do wszystkich podłoży (nawet stopów szlachetnych).



## G-Multi PRIMER

**325 zł**

Art. Nr 10001350 **G-Multi PRIMER**  
butelka 5 ml



**NOWOŚĆ**



## G-CEM ONE Twin Refill

**+ G-Premio BOND GRATIS!**

**570 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill w odcieniu A2 lub TR + 1 x G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!<sup>1</sup>

## G-CEM ONE Twin Refill

**+ G-Multi PRIMER GRATIS!**

**570 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 1 opakowanie G-CEM ONE Twin Refill w odcieniu A2 lub TR + 1 x G-Multi PRIMER 5 ml GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10006930 **G-CEM ONE Twin Refill A2**  
Art. Nr 10006931 **G-CEM ONE Twin Refill Translucent**  
Opakowanie Twin Refill zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips  
Cena jednego opakowania: **570 zł**

## Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10006934 **G-CEM ONE Value Refill A2**  
Art. Nr 10006935 **G-CEM ONE Value Refill Translucent**  
Opakowanie Value Refill zawiera: 8 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 60 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 20 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips;  
Cena jednego opakowania: **1 805 zł**

W przypadku procedury adhezyjnej,  
G-CEM ONE oferuje dwie opcje:

G-CEM ONE  
ADHESIVE ENHANCING PRIMER

## Wiązanie kontaktowe bez dostępu światła

G-CEM ONE można łączyć z dedykowanym ADHESIVE ENHANCING PRIMER (AEP). Ten innowacyjny Primer wywołuje to, co nazywamy „mechanizmem wiązania kontaktowego” dla przyspieszonej i bardzo skutecznej reakcji wiązania bez dostępu światła (samoutwardzania) G-CEM ONE.

Procedura  
bez utwardzania światłem

Nałożyć G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER. Odczekać 10 sekund.

Osuszyć maksymalnie sprężonym powietrzem przez 5 sekund.

Art. Nr 10006929 **G-CEM ONE System Kit**

Zestaw G-CEM ONE System Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER 4 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;  
Cena jednego opakowania: **755 zł**

## Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10006927 **G-CEM ONE Starter Kit A2**  
Art. Nr 10006928 **G-CEM ONE Starter Kit Translucent**  
Zestaw G-CEM ONE Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER 2 ml;  
Cena jednego opakowania: **375 zł**



## G-Premio BOND

## Uproszczona, uniwersalna procedura łączenia

G-CEM ONE można również stosować w połączeniu z uniwersalnym systemem łączącym G-Premio BOND, który zawiera trzy funkcyjne monomery adhezyjne (10-MDP, 4-MET, MDTP).

Procedura  
z utwardzaniem światłem

Nałożyć G-Premio BOND. Odczekać 10 sekund.

Osuszyć maksymalnie sprężonym powietrzem przez 5 sekund.

Utwardzić światłem.

Art. Nr 10037120 **G-CEM ONE Universal System Kit**

Zestaw G-CEM ONE Universal System Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml, 1 x G-Multi PRIMER 5 ml;  
Cena jednego opakowania: **805 zł**

## Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10037118 **G-CEM ONE Universal Starter Kit A2**  
Art. Nr 10037119 **G-CEM ONE Universal Starter Kit Translucent**  
Zestaw G-CEM ONE Universal Starter Kit zawiera: 1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix Endo Tips, 1 x G-Premio BOND 5 ml;  
Cena jednego opakowania: **560 zł**



## ROZWIĄZANIA DO CEMENTOWANIA z GC

### GC FujiCEM™ Evolve

Innowacyjny, wzmocniony żywicą cement glasionomerowy zapewniający niezawodność i komfort stosowania

#### O jeden krok do przodu

FujiCEM Evolve to wszechstronne rozwiązanie do cementowania w codziennej praktyce, łączące prosty protokół postępowania z wyjątkowymi właściwościami szkło-jonomerów GC. Nowy system dozowania i możliwość utwardzenia światłem w celu usunięcia pozostałości materiału, ułatwiają cementowanie. Ponadto FujiCEM Evolve charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami, takimi jak wyższa nieprzepuszczalność dla promieni rtg i bardziej trwałe wiązanie – zwłaszcza z tlenkiem cyrkonu.



#### FujiCEM Evolve Clinic Pack

+ 4 x Push and Click Tip Regular GRATIS!

Zamów 1 opakowanie FujiCEM Evolve Clinic Pack + 4 opakowania końcówek Push and Click Tip Regular GRATIS!

Art. Nr 10006621  
FujiCEM Evolve Clinic Pack  
Opakowanie zawiera: 8 strzykawk  
FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g),  
2 bloczki do mieszania N° 22;  
Cena jednego opakowania: **2 210 zł**

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Prosta aplikacja, łatwe usuwanie nadmiaru.  
Dzięki uprzejmości: dr J.Tapia Guadix, Hiszpania



Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo

Idealny do uzupełnień z metalu i cyrkonu

- Optymalna adhezja do tlenku cyrkonu
- Wersja do mieszania ręcznego lub Automix
- Bez konieczności wcześniejszego przygotowania
- Długi czas pracy, krótki czas wiązania
- Odporny na wilgoć – koferdam nie jest wymagany
- Doskonałe uszczelnienie i adaptacja brzeżna
- Optymalna lepkość
- Minimalna grubość warstwy
- Opcjonalne utwardzanie światłem

#### KORZYSTNA CENA

**20 %** **350 zł**  
~~430 zł~~  
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10004926 FujiCEM Evolve Single Pack  
Opakowanie zawiera:  
1 strzykawkę FujiCEM Evolve (5 ml/9,2 g),  
15 końcówek Push and Click Tip Regular;  
Cena: **350 zł** zamiast **430 zł**

### GC FujiCEM™ 2 Slide & Lock

Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement glasionomerowy do osadzania, z innowacyjną technologią Force & Fusion



#### KORZYSTNA CENA

**25 %** **1 660 zł**  
~~2 200 zł~~  
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003468 FujiCEM 2 SL Eco Pack  
Opakowanie zawiera: 4 x nabój FujiCEM 2 SL (7,2 ml/13,3 g)  
Cena: **1 660 zł** zamiast **2 200 zł**

#### Rozwiązania do cementowania

Przewodnik „GC Luting Guide” pomoże Ci wybrać właściwy materiał. Zawiera również informacje dotyczące poszczególnych etapów cementowania.

Instrukcje krok po kroku dla wszystkich procedur cementowania można znaleźć w przewodniku „GC Luting Guide”



Skontaktuj się z Konsultantem GC,  
aby uzyskać więcej informacji na temat TEMPSMART DC!

FUJICEM EVOLVE  
FUJICEM 2 SL  
TEMPSMART DC  
OPTIGLAZE COLOR

### TEMPSMART™ DC

Szybko i skutecznie do tymczasowego uzupełnienia

Uzupełnienia tymczasowe odgrywają ważną rolę w stomatologii odtwórczej.

Nie tylko chronią opracowane zęby, ale także zapewniają komfort i estetykę do momentu uzyskania przez pacjenta ostatecznej odbudowy. TEMPSMART DC to pierwszy, niezawierający plastifikatorów, podwójnie utwardzalny materiał tymczasowy, zaprojektowany tak, aby ułatwić i uczynić codzienną pracę bardziej wydajną.

#### KORZYSTNA CENA

**4 + 1** **430 zł**  
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania TEMPSMART DC w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie TEMPSMART DC w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

#### PEWNA WYTRZYMAŁOŚĆ

- Wysoka odporność na złamania
- Idealny na mosty w odcinku bocznym



#### KOMFORT UŻYTKOWANIA

- Nie klei się
- Wysoki połysk w kilku krokach



#### INTELIGENTNA KONCEPCJA

- Krótki czas obróbki dzięki opcji utwardzania światłem



#### ESTETYCZNE REZULTATY

- Fluorescencja i długotrwały połysk



Aksesoria:  
Art. Nr 10003754  
**Końcówki mieszające II SSS (60 szt.); 295 zł**  
Art. Nr 10003335  
**Końcówki mieszające GC Automix Tip Regular (10 szt.); 75 zł**

#### TEMPSMART DC

+ OPTIGLAZE color GRATIS!

Zamów 1 opakowanie TEMPSMART DC w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie OPTIGLAZE color, Refill, A plus lub Clear GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji uzupełnień kompozytowych, akrylowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D



#### Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe

Art. Nr 10001150 OPTIGLAZE color Set; **3 315 zł**  
Zestaw zawiera: 15x butelka (2,6 ml) OPTIGLAZE color (po jednej w kolorze: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red); 2 x butelka (5 ml) OPTIGLAZE color ( po jednej w kolorze Clear, Clear HV), akcesoria.

Dostępne opakowania:  
**OPTIGLAZE color** butelka (2,6 ml); **275 zł**  
Kolory: A plus, B plus, C plus, White, Ivory White, Yellow, Orange, Pink Orange, Red Brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red  
**OPTIGLAZE color** butelka (5 ml); **275 zł**  
Kolory: Clear, Clear HV

#### KORZYSTNA CENA

**3 + 1** **275 zł**  
Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania OPTIGLAZE color + 1 opakowanie OPTIGLAZE color, Refill, A plus lub Clear GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Nasze wydajne i niezawodne systemy  
łączące do wszystkich codziennych  
wyzwań związanych z odbudową

## ZWYCIĘSKA 2!

Skontaktuj się z Konsultantem GC,  
aby uzyskać więcej informacji.

Nie zawiera  
HEMA!

### G-Premio BOND

Jednoskładnikowy światłoutwardzalny uniwersalny system łączący



Odbudowy  
bezpośrednie

Cementowanie  
uzupełnień pośrednich


Leczenie  
nadwrażliwości

Naprawy  
wewnętrzne

Uniwersalny w zakresie  
technik trawienia.  
Wybór należy do Ciebie!




Zero kompromisów w zakresie uzyskanego efektu  
- Zero kompromisów w procedurze

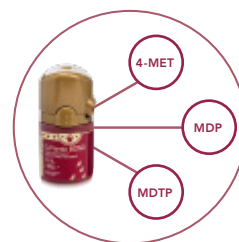

Trzy monomery  
funkcyjne:  
zapewniają adhezję  
do zębiny, szkliwa,  
tlenku cyrkonu,  
tlenku glinu, metali  
niezłachetnych  
i szlachetnych



Mała grubość  
warstwy:  
zmniejszone ryzyko  
przebarwień,  
doskonałe  
dopasowanie  
do krawędzi i wysoka  
estetyka

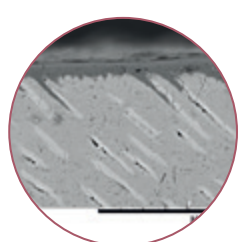

Doskonałe  
zapływanie: brak  
nadwrażliwości  
pozabiegowej



G-Premio  
BOND DCA

Aktywator podwójnego  
utwardzania (DCA),  
zapewnia polimeryzację  
systemu łączącego przy  
ograniczonym  
dostępie światła.



Zero  
strat

cienka końcówka:  
300 aplikacji  
z jednej 5 ml  
butelki



Praktyczne  
zamknięcie  
Flip-Top



Art. Nr 10001459  
**G-Premio BOND Kit**  
1 butelka 5 ml, akcesoria; **510 zł**



Art. Nr 10001462  
**G-Premio BOND uzupełnienie**  
1 butelka 5 ml; **410 zł**



Art. Nr 10001349  
**G-Premio BOND DCA**  
1 butelka 3 ml aktywatora Dual Cure; **225 zł**



Art. Nr 10001460  
**G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe**  
3 butelki po 5 ml; **1 040 zł**

**G-Premio BOND**  
opakowanie 3-butelkowe

+ G-Premio BOND GRATIS!

**1 040 zł**

Cena jednego opakowania

Zamów 1 x G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe  
1 x G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC  
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Dzięki uprzejmości:  
dr Serhat Köken, Turcja



Selektywne wytrawianie szkliwa



Dozowanie G-Premio BOND



Aplikacja G-Premio BOND



Niewidoczna warstwa łącząca

### G2-BOND Universal

Nowy standard 2-butelkowego  
uniwersalnego systemu łączącego

G2-BOND Universal, dzięki opatentowanej technologii  
Dual-H, która zapewnia zaawansowane, zoptymalizowane  
połączenie zarówno z zębem, jak i kompozytem, jest  
uniwersalnym systemem 2-butelkowym, łączącym w sobie  
to, czego klinicyści oczekują od istniejących złotych  
standardów samowytrawiania (Self-Etch) oraz wytrawiania  
i płukania (Etch-and-Rinse).



Zredukowany kontakt między  
osłoną a butelką



Zębrowanie skonstruowane  
do skutecznego dociskania

Uniwersalne zastosowanie unikalnej kompozycji

- 4-MET dla niezawodnej adhezji do szkliwa i zębiny
- MDP dla doskonałej adhezji do szkliwa i zębiny, tlenku cyrkonu, tlenku glinu i metali niezłachetnych
- MDP do łączenia z metalami szlachetnymi
- System łączący bez HEMA dla potwierdzonej klinicznie wyjątkowej trwałości<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Van Dijken J, et al, Dent Mater. 2013.

**JUŻ TERAZ  
ZACZNIJ STOSOWAĆ**

**710 zł**

Art. Nr 10006820  
**G2-BOND Universal Bottle Kit**  
Opakowanie zawiera: 1 x 1-PRIMER 5 ml,  
1 x 2-BOND 5 ml, akcesoria; **710 zł**

Inne dostępne opakowania:

Art. Nr 10006823  
**G2-BOND Universal 1-PRIMER**  
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **520 zł**  
Art. Nr 10006824  
**G2-BOND Universal 2-BOND**  
uzupełnienie 1 x butelka 5 ml; **220 zł**



## G-ænial A'CHORD™

Zaawansowany uniwersalny kompozyt z prostotą jednoodcieniowego systemu

Prostota, estetyka i efektywność w Twoich rękach



### Rewolucyjna technologia A'CHORD

- chroniony patentem wypełniacz i powłoka
- wysoka odporność na przebarwienia i ścieranie
- doskonały kontrast na zdjęciach rtg




### Prostota A'CHORD

- uproszczony system jednoodcieniowy
- uproszczona procedura postępowania
- po prostu uniwersalny



### Estetyka A'CHORD

- naturalna fluorescencja
- długotrwały połysk
- ekstremalne wyzwania

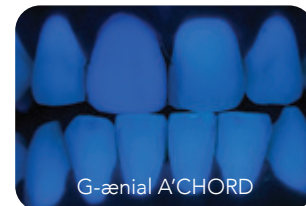

Dzięki uprzejmości: dr J. Tapia Guadix, Hiszpania



Przed polerowaniem Po polerowaniu



Dzięki uprzejmości: dr Georg Benjamin, Niemcy



Dzięki uprzejmości: dr Radosław Asparuhov, Bułgaria

## EPITEX

Paski z tworzywa sztucznego do wykańczania i polerowania

Łatwe wykańczanie i polerowanie przestrzeni międzyzębowych. Przeznaczone do wypełnień glijasonomerowych i kompozytowych.

### Uzupełnienia

Pojedyncze opakowanie zawiera 10 m paska w jednej ziarnistości.  
Art. Nr 10000122 **EPITEX Refill, Translucent Matrix** (przezroczysty)  
Art. Nr 10000118 **EPITEX Refill, Coarse** (gruboziarnisty-niebieski)  
Art. Nr 10000120 **EPITEX Refill, Medium** (średnioziarnisty-zielony)  
Art. Nr 10000119 **EPITEX Refill, Fine** (drobnoziarnisty-szary)  
Art. Nr 10000121 **EPITEX Refill, X-Fine** (ekstra drobnoziarnisty-czerwony)  
Cena opakowania: **155 zł**

### Art. Nr 10000117 EPITEX Starter Kit

Zestaw zawiera: Stojak z dyspenserami pasków po 10 m we wszystkich dostępnych rodzajach ziarnistości (gruboziarniste-niebieskie, średnioziarniste-zielone, drobnoziarniste-szare, ekstra drobnoziarniste-czerwone, przezroczyste)  
Cena zestawu: **905 zł**



## DIAPOLISHER PASTE

Diamantowa pasta polerska



### Art. Nr 10000892 DIAPOLISHER PASTE

Opakowanie zawiera: DIAPOLISHER PASTE strzykawka 2 g, 1 x końcówka dozująca (typu igła), 1 x ochronna nasadka  
Cena opakowania: **215 zł**

## GC Composite Modeling Kit

Zestaw do modelowania materiałów kompozytowych do uzupełnień bezpośrednich



### Art. Nr 10003388

#### GC Composite Modeling Kit

Zestaw zawiera: 1 x GC Modeling Liquid płyn do modelowania 6 ml, 5 x pędzelek płaski - Gradia Brush Flat, 5 x pędzelek okrągły - Gradia Brush Round, 2 x uchwyt do pędzelków Gradia, bloczki do mieszania; Cena zestawu: **425 zł**

## Wstrzykuj nasz najmocniejszy materiał do odbudowy bezpośredniej!

Starcie w odcinku przednim - odbudowa techniką iniekcji naprzemiennej



Zeskanuj, aby  
obejrzeć filmy wideo



Pobrać wycisk zębów pacjenta (cyfrowy lub konwencjonalny).



Utworzyć KOMPLETNY wax-up (cyfrowy lub konwencjonalny) wszystkich zębów.



Utworzyć CZĘŚCIOWY wax-up (cyfrowy lub konwencjonalny\*) obejmujący co drugi ząb.



Opcjonalnie przygotować indeks silikonowy do techniki nakładania warstw (tylko z modelu KOMPLETNEGO).



Naćłóżyć masę EXACLEAR na nieperforowaną łyżkę wyciskową (metalową lub przezroczystą).



Pobrać wycisk obu modeli (KOMPLETNEGO i CZĘŚCIOWEGO). Czas wiązania EXACLEAR poza jamą ustną wynosi 7 minut.



W rezultacie powstaną dwa przezroczyste silikonowe indeksy (KOMPLETNY i CZĘŚCIOWY). Minimalna grubość indeksu powinna wynosić 3-4 mm, aby uniknąć zniekształceń.



Selektywnie wytrawiać (tylko szkliwo) zęby 12, 21 i 23 przez 30 sek. Wyplukać i usunąć nadmiar wody (lekko osuszyć).



Naćłóżyć G-Premio BOND na zęby 12, 21 i 23 na 10 sek. Suszyć przez 5 sek. maksymalnie sprężonym powietrzem i utwardzać światłem przez 10 sek.



Opcjonalnie, utwórzć mamelony przy użyciu opakowego odcienia kompozytu, z pomocą silikonowego indeksu wykonanego z masy typu putty. Utwardzić światłem.



Wstrzyknąć G-æNIAL Universal Injectable używając CZĘŚCIOWEGO indeksu silikonowego, na pierwszy ząb. Utwardzić światłem przez 5 sek. Powtórzyć proces dla drugiego i trzeciego zęba.



Usunąć ostrożnie nadmiar kompozytu za pomocą skalpela z każdego odbudowanego zęba. Utwardzać światłem każdą stronę przez 20 sek.



Wykończyć za pomocą pasków New Metal Strips i EPITEX.



Dopasować w zgryzie.



Wypolerować gumką polerską EVE DIACOMP® w kolorze szarym.



Efekt końcowy.

\* W przypadku konwencjonalnego nawoskowania na modelu gipsowym, najpierw wykonać KOMPLETNY indeks silikonowy, a następnie ostrożnie usunąć wosk z naprzemiennych zębów. Dopiero wtedy można wykonać CZĘŚCIOWY indeks silikonowy.

## EXACLEAR

Transparentny materiał poliwinylsiloksanowy

- Wysoka przezroczystość umożliwia dokładną kontrolę wzrokową
- Skuteczne utwardzanie światłem dzięki doskonałej przezroczystości
- Optymalna konsystencja umożliwiająca łatwe umieszczenie w łyżce wyciskowej
- Dobre odwzorowanie, optymalna stabilność i odporność na rozzerwanie podczas aplikacji

### EXACLEAR

+ G-æNIAL Universal Injectable GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EXACLEAR + 1 strzykawkę G-æNIAL Universal Injectable A1 lub A2 GRATIS!<sup>1</sup>

Art. Nr 10001483  
EXACLEAR; 335 zł

Opakowanie zawiera:  
2 naboje (48 ml),  
6 końcówek mieszających II L

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



### OFERTA SPECJALNA

-10%  
570 zł  
~~635 zł~~  
Cena jednego opakowania

Art. Nr 10003753 Injection Moulding Kit  
Opakowanie zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g) G-æNIAL Universal Injectable po jednej w odcieniu A1, A2, A3; 1 nabój (48 ml) EXACLEAR; 3 końcówki mieszające II L;  
Cena: 570 zł zamiast 635 zł



## G-æNIAL™ Universal Injectable

Kompozyt o wysokiej wytrzymałości do odbudowy

Zoptymalizuj swój sposób pracy!

G-æNIAL Universal Injectable wyznacza nowe standardy w stomatologii odtwórczej! Łączy w sobie wyjątkową wytrzymałość, niezrównaną polerowalność i estetykę. Idealnie dopasowuje się do dna ubytku, umożliwia kształtowanie i konturowanie podczas wstrzykiwania. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze!



- Ultradrobne cząstki szkła barowego (150 µm)
- Wysoka zawartość wypełniacza
- Technologia pełnego pokrycia powłoką silanową (FSC) poprawia: dyspersję i adhezję wypełniaczy w matrycy
- Bez kleistości
- Mała siła przy wyciskaniu
- Wysoki kontrast na zdjęciach rtg

### KORZYSTNA CENA

G-æNIAL Universal Injectable + G-Premio BOND


~~1065 zł~~ 880 zł  
Cena zestawu

Art. Nr 10003741

G-æNIAL Universal Injectable + G-Premio BOND

Zestaw zawiera: 3 strzykawki (1 ml/1,7 g), po jednej w odcieniu A1, A2 i A3; 1 x butelka G-Premio BOND 5 ml;

Cena zestawu: 880 zł zamiast 1065 zł

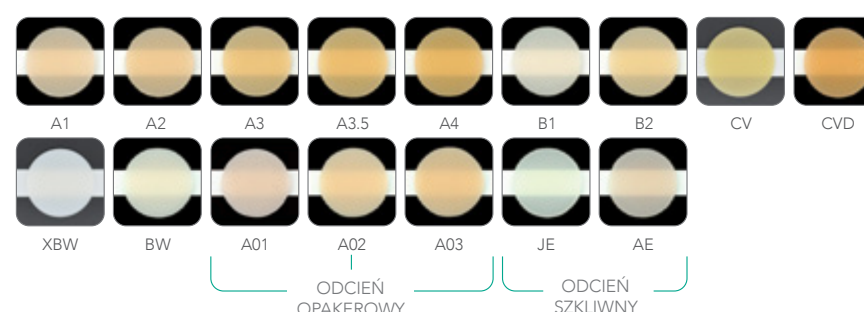


G-æNIAL Universal Injectable; 180 zł  
Opakowanie zawiera: strzykawkę 1 ml (1,7 g), 10 x końcówka dozująca typu długa igła, 1 x osłona chroniąca przed światłem

Twój ulubiony kompozyt - ta sama jakość, nowy wygląd!

Przed zmianą

Teraz

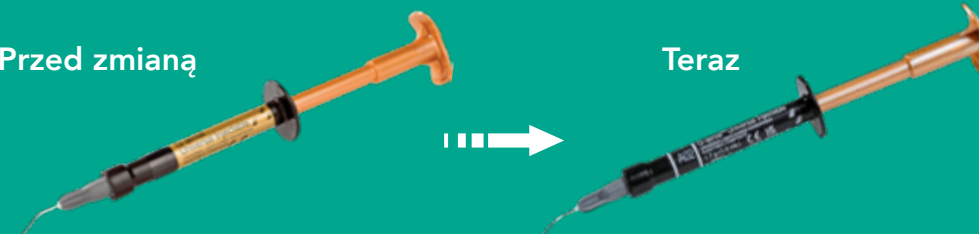

Więcej informacji

### KORZYSTNA CENA

8 + 2 180 zł  
Cena jednego opakowania

Zamów 8 strzykawkę G-æNIAL Universal Injectable w dowolnym odcieniu + 2 strzykawki G-æNIAL Universal Injectable A1 lub A2 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### 4 x G-æNIAL Universal Injectable

+ everX Flow GRATIS!

Zamów 4 strzykawki G-æNIAL Universal Injectable w dowolnym odcieniu + 1 strzykawkę everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### 5 x G-æNIAL Universal Injectable

+ G-Premio BOND GRATIS!

Zamów 5 strzykawkę G-æNIAL Universal Injectable w dowolnym odcieniu + 1 x G-Premio BOND uzupełnienie GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## everX Flow™

Wzmocniony krótkimi włóknami  
kompozyt płynny

### Absolutnie stabilna struktura

everX Flow to nowe rozwiązanie GC do trwałego i nieskomplikowanego wzmocnienia wszystkich Twoich uzupełnień. Dzięki łatwości użycia, dwóm odcieniom i wyjątkowej wytrzymałości, everX Flow szybko stanie się Twoim nowym produktem numer 1 do wszystkich uzupełnień wymagających stabilnej struktury. Odcień „Bulk” o głębokości utwardzania 5,5 mm jest idealny do głębokich ubytków zębów bocznych, podczas gdy odcień „Dentin” o głębokości utwardzania 2,0 mm - materiałem z wyboru zapewniającym uzyskanie znakomitych rezultatów estetycznych.

### NOWA PROCEDURA!



- Bezpośrednia odbudowa ubytków klasy II, w tym powierzchni stycznych
- Optymalny do procedury Deep Margin Elevation
- Uproszczona procedura i rozszerzone wskazania

#### Dotychczasowa procedura



konwencjonalny kompozyt

#### Nowa procedura



everX Flow



# THE 6<sup>TH</sup> INTERNATIONAL DENTAL SYMPOSIUM

## Register NOW



The 70th anniversary of the GC Membership society

**2026.10.3 SAT** **4 SUN**

**Tokyo International Forum**  
(Chiyoda City, Tokyo)



Więcej informacji

### KORZYSTNA CENA

everX Flow  
+ G-aenial Universal Injectable  
~~1 040 zł~~ **775 zł**

Art. Nr 10004834  
**everX Flow + G-aenial Universal Injectable**  
Zestaw zawiera: 2 strzykawki (2 ml/3,7 g) everX Flow po jednej w odcieniu Bulk i Dentin; 2 strzykawki (1 ml/1,7 g), G-aenial Universal Injectable po jednej w odcieniu A2 i A3; akcesoria;

Cena: **775 zł** zamiast 1 040 zł



### KORZYSTNA CENA


**4 + 1**  
**10 + 3** **265 zł**

Zamów 4 strzykawki everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!  
Zamów 10 strzykawek everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS!

Art. Nr 10001490 **everX Flow Bulk**  
Art. Nr 10001491 **everX Flow Dentin**  
Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml (3,7 g), 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, osłona chroniąca przed światłem  
Cena jednego opakowania: **265 zł**


<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Konwencjonalny kompozyt:  
Rozprzestrzenianie się pęknięcia przez uzupełnienie i strukturę zęba

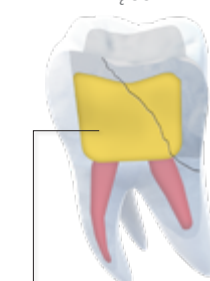

Podbudowa z konwencjonalnego kompozytu

everX Flow:  
Rozprzestrzenianie się pęknięcia zostało zatrzymane

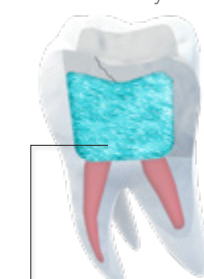

Podbudowa z kompozytu wzmocnionego włóknami

## G-ænia™

Uniwersalny kompozyt do niewidocznych uzupełnień z systemem doboru koloru dostosowanym do wieku



G-ænia ANTERIOR oferuje:

- estetykę i kontrast w obrazie rtg
- wszechstronność w stosowaniu
- system odcieni dostosowany do wieku pacjenta
- bezproblemową pracę

G-ænia POSTERIOR oferuje:

- doskonałą estetykę przy użyciu pojedynczego odcienia
- optymalną nieprzepuszczalność dla promieni rtg
- nie klejącą się, umożliwiającą kondensację konsystencji
- doskonałą wytrzymałość i trwałość

### MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

+ LM Mini Spatula GRATIS!

Zamów MIX\*\* 4 strzykawek spośród: G-ænia ANTERIOR & POSTERIOR/G-ænia Universal Flo/G-ænia Flo X/ G-ænia A'CHORD/Essentia/everX Posterior/everX Flow w dowolnym odcieniu + 1 LM Mini Spatula GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.  
\*\* Promocja obowiązuje przy zakupie minimum dwóch różnych materiałów kompozytowych. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

### KORZYSTNA CENA

4 + 1  
10 + 3

240 zł

Cena jednej strzykawki

Zamów 4 strzykawki G-ænia ANTERIOR/POSTERIOR w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-ænia A2 lub P-A2 GRATIS!

Zamów 10 strzykawek G-ænia ANTERIOR/POSTERIOR w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-ænia A2 lub P-A2 GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10000966 strzykawka A2  
Art. Nr 10000967 strzykawka A3  
Art. Nr 10000987 strzykawka P-A2  
Art. Nr 10000988 strzykawka P-A3

Strzykawki uzupełnienie:  
G-ænia ANTERIOR  
1 strzykawka (2,7 ml/4,7 g)  
Odcienie standardowe: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD  
Odcienie specjalne wewnętrzne: AO2, AO3, AO4  
Odcienie specjalne zewnętrzne: JE, AE, SE, IE, TE, CVE  
Cena jednej strzykawki: **240 zł**

G-ænia POSTERIOR  
1 strzykawka (2,7 ml/5,5 g)  
Odcienie standardowe: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5  
Odcienie specjalne zewnętrzne: P-JE, P-IE  
Cena jednej strzykawki: **240 zł**

### 5 x GRADIA DIRECT

+ LM Mini Spatula GRATIS!

650 zł

Cena zestawu z narzędziem

Zamów 5 strzykawek GRADIA DIRECT w dowolnym odcieniu + 1 narzędzie LM Mini Spatula GRATIS!

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC

## G-ænia™ Flo X

Idealny partner do wszystkich odbudów w odcinku bocznym!

G-ænia Flo X jest łatwym w użyciu, nieprzepuszczalnym dla promieni rtg kompozytem do podścieleń. Dobrze zbilansowany skład umożliwia łatwe i płynne nakładanie, a doskonała zwilżalność umożliwia perfekcyjną adaptację do ścian ubytku.

### MIX MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

+ G-ænia A'CHORD GRATIS!

Zamów MIX\*\* 10 strzykawek spośród: G-ænia Anterior & Posterior/G-ænia Universal Flo/G-ænia Flo X/ G-ænia A'CHORD/Essentia/everX Posterior/everX Flow w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-ænia A'CHORD w odcieniu A2 lub A3 GRATIS!

Art. Nr 10003370 G-ænia Flo X A2; 255 zł  
Art. Nr 10003371 G-ænia Flo X A3; 255 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml (3,6 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa; 1 osłona chroniąca przed światłem

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2 i AO3

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

\*\* Promocja obowiązuje przy zakupie minimum dwóch różnych materiałów kompozytowych. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## G-ænia™ Universal Flo

Płynny i w pełni uniwersalny do wszystkich klas ubytków

Ze względu na wyjątkową płynność G-ænia Universal Flo może być stosowany jak płynny, a jest tak samo stabilny, jak konwencjonalny kompozyt. Nadaje się do wszystkich klas ubytków i odznacza się doskonałą wytrzymałością, polerowalnością i wszechstronnością.

### KORZYSTNA CENA

4 + 1 | 10 + 3

250 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 strzykawki G-ænia Universal Flo w dowolnym odcieniu + 1 strzykawka G-ænia Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!

Zamów 10 strzykawek G-ænia Universal Flo w dowolnym odcieniu + 3 strzykawki G-ænia Universal Flo A2 lub A3 GRATIS!

Art. Nr 10000916 G-ænia Universal Flo A2; 250 zł  
Art. Nr 10000917 G-ænia Universal Flo A3; 250 zł

Opakowanie zawiera: Strzykawka 2 ml, (3,4 g); 20 końcówek aplikacyjnych Dispensing Tip III z tworzywa, 1 osłona chroniąca przed światłem

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, BW, CV, AO2, AO3, JE, AE



## D-Light® Pro

Lampa LED do polimeryzacji o dwóch długościach fali, z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji

### Utwardzanie

- Tryb HP – wysokiej mocy 1400 mW/cm<sup>2</sup>
- Dwie długości fali gwarantują skuteczną polimeryzację wszystkich światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych

### Ochrona

- Tryb LP – niskiej mocy 700 mW/cm<sup>2</sup>, idealny, kiedy chcesz ograniczyć emisję ciepła, np. w przypadku głębokich ubytków

### Wykrywanie

- Tryb DT – wykorzystuje tylko światło bliskie ultrafioletu, pozwala wizualizować płytkę nazębną, mikropreciek, nadmiary cementu, pęknięcia.

### Zobacz więcej niż dostrzega oko



7 300 zł

Art. Nr 70000008 D-Light Pro  
Zawiera: rękojeść i moduł elektroniczny, światłowód (8 mm), baterie akumulatorowe (2 szt.), stację ładującą, zasilacz, adapter EU/UK, osłonę chroniącą przed światłem, miękkie osłony oczu (3 szt.)

## EQUIA Forte™ HT

Najnowszy szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill – Twój niezawodny partner przy odbudowie zębów bocznych

- Doskonała biokompatybilność
- Ulepszone właściwości mechaniczne, optymalna wymiana jonowa, doskonała szczelność brzeżna
- Prosta, kilkuetapowa procedura odbudowy zębów bocznych, bez zakładania koferdamu i stosowania systemu łączącego
- Idealny do aplikacji typu bulk fill
- Samoadhezyjna żywica pokrywająca z nanowypełniaczem
- Szeroki zakres wskazań u wszystkich pacjentów




Nie zawiera bisfenolu A

System EQUIA Forte HT łączy w sobie EQUIA Forte HT Fil - szklaną hybrydę nowej generacji i EQUIA Forte Coat - samoadhezyjny materiał do pokrywania na bazie żywicy z dużą zawartością równomiernie rozproszonego wypełniacza.


**Dzięki innowacyjnej technologii równomiernie rozproszonego wypełniacza EQUIA Forte Coat zapewnia:**

- rozszerzone wskazania do stosowania
- wyższą wytrzymałość i twardość uzupełnienia oraz zapobiega starciu podczas fazy dojrzewania hybrydy szkła
- ochronę przed kontaminacją wilgocią i erozją powodowaną kwasami
- nierównanie gładką i błyszczącą powierzchnię
- ochronę odbudowy przed przebarwieniem i długotrwałą stabilność koloru

EQUIA Forte HT Fil bez powłoki\*

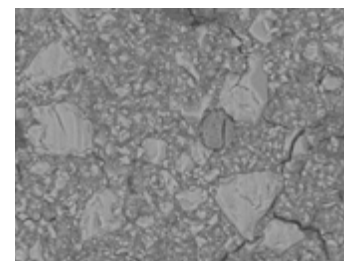

EQUIA Forte HT Fil z powłoką\*

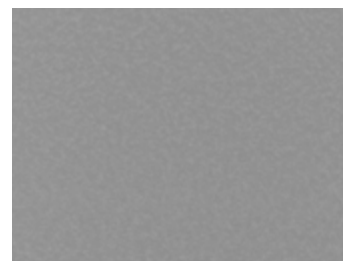

\* Zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego SEM uzupełnienia z EQUIA Forte HT Fil. Powiększenie: x1000 Źródło: Dane GCC R&D. Dane dostępne na życzenie, GC Corporation, Tokio, 2020 r.

## OFERTA SPECJALNA

335 zł

~~345 zł~~

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10004849  
**EQUIA Forte Coat**  
Opakowanie zawiera:  
butelka 4 ml, akcesoria;  
Cena: **335 zł** zamiast 345 zł

## KORZYSTNA CENA

4 + 1

10 + 3

OD 685 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania EQUIA Forte HT Fil (po 50 kapsulek) w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 opakowań EQUIA Forte HT Fil (po 50 kapsulek) w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## OFERTA SPECJALNA

EQUIA Forte HT Fil A2 LUB A3

685 zł

~~700 zł~~

Cena jednego opakowania

Oferta dotyczy tylko opakowania EQUIA Forte HT Fil (50 kapsulek) w odcieniu A2 i A3.

**EQUIA Forte HT Fil; 700 zł**  
Opakowanie zawiera 50 kapsulek EQUIA Forte HT Fil (proszek 0,4 g i płyn 0,1 ml/0,13 g). Zawartość kapsułek po zmieszaniu 0,14 ml. Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4.

## EQUIA Forte HT Fil

+ EQUIA Forte Coat GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Fil w dowolnym odcieniu + 1 x EQUIA Forte Coat GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



## WSKAZANIA

- Wypełnienia ubytków klasy I/ ostateczne
- Narażone na przeciężenia zgryzowe wypełnienia ubytków klasy II/ostateczne
- Pośrednie wypełnienia długoczasowe
- Wypełnienia ubytków klasy V i w obrębie cementu korzeniowego
- Odbudowa zrębu korony

## EQUIA Forte HT Zestaw Promo

+ EQUIA Forte HT Zestaw Intro lub  
+ EQUIA Forte Coat GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Promo + 1 x EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2 lub  
+ 1 x EQUIA Forte Coat GRATIS!<sup>1</sup>

**EQUIA Forte HT Zestaw Promo; 1 440 zł**  
Opakowanie zawiera: 100 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria; Odcienie: A2, A3, A2-A3, A3-B2

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## EQUIA Forte HT Zestaw Clinic

+ EQUIA Forte HT Fil GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Clinic + 1 opakowanie EQUIA Forte HT Fil A2 GRATIS!<sup>1</sup>

**EQUIA Forte HT Zestaw Clinic; 2 500 zł**  
Opakowanie zawiera: 200 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, EQUIA Forte Coat butelka 4 ml, akcesoria; Odcienie: A2, A3, B2

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## EQUIA Forte HT Zestaw Intro

+ Aplikator do kapsulek GRATIS!

Zamów 1 opakowanie EQUIA Forte HT Zestaw Intro w dowolnym odcieniu + aplikator do kapsulek GRATIS!<sup>1</sup>

**EQUIA Forte HT Zestaw Intro; 415 zł**  
Opakowanie zawiera: 20 kapsulek EQUIA Forte HT Fil, 20 jednostkowych ampulek EQUIA Forte Coat; Odcienie: A2, A3, B2


<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## Odbudowa po usunięciu amalgamatu



Dzięki uprzejmości:  
dr Victor Cedillo Felix, USA

## Pacjent z wysokim ryzykiem próchnicy

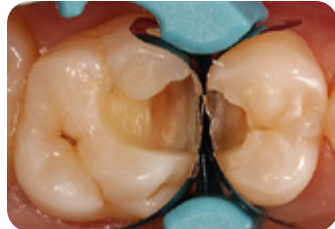

Dzięki uprzejmości:  
dr Zeynep Bilge Kütük, Turcja

## EQUIA Forte HT - procedura krok po kroku

System odtwórczy EQUIA Forte HT został zaprojektowany tak, aby uzupełnienia wykonywane na co dzień w gabinecie były tak łatwe i skuteczne, jak to tylko możliwe. Łączy w sobie łatwość użycia, ale bez kompromisu w zakresie trwałości.

0'00" 0'10" 1'30" 2'30" 3'00" 3'05" 3'25"

Aplikacja



Prawdziwa technika typu bulk-fill  
Wygodna forma kapsulek

Kształtowanie



Dłuższy czas pracy  
Łatwe konturowanie  
Nie klei się

Wykańczanie



Związany po 2:30 min.

Powlekanie



Łśniąca gładka powierzchnia bez polerowania  
Doskonałe uszczelnienie i odporność na zużycie

Utwardzanie światłem 20 sek.



Odbudowa zakończona w ciągu zaledwie 3:25 min.

## GC Fuji™ IX GP FAST

Samoutwardzalny, podatny na upychanie materiał giasjonomerowy o wysokiej lepkości do wypełnień

Umożliwiająca kondensowanie, nieklejąca się konsystencja Fuji IX GP FAST sprawia, że jest to idealny szkło-jonomer do wypełnień ubytków klasy V, I i II, jako materiał bazowy lub do odbudowy zębów. Charakterystyczne właściwości szkło-jonomeru w połączeniu z łatwą procedurą stosowania spełniają wymagania stawiane współczesnym materiałom odtwórczym.

- Szerokie spektrum wskazań
- Silne wiązanie chemiczne
- Szybka aplikacja typu bulk fill
- Brak powstawania mikroszczelin
- Doskonała wytrzymałość na ściskanie i twardość powierzchni
- Ochrona fluorkowa
- Biokompatybilność



Art. Nr 10000579 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A2, 545 zł**  
Art. Nr 10000580 **Fuji IX GP FAST Kapsułki A3, 545 zł**

Opakowanie zawiera:  
50 kapsulek (0,40 g proszek i 0,11 g/0,09 ml płyn)  
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,14 ml.

Odcienie:  
Fuji IX GP: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4  
Fuji IX GP FAST: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4  
Fuji IX GP EXTRA: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4



## GC Fuji™ II LC

Światłoutwardzalny, modyfikowany żywica materiał giasjonomerowy do wypełnień

Szczególnie wskazany do stosowania w przypadkach ubytków klasy III i IV, w których wymagania estetyczne są wysokie oraz przy próchnicy cementu korzeniowego, do techniki kanapkowej, jako materiał do wypełnień u dzieci i do odbudowy zębów, na podkłady pod wypełnienia lub jako liner.

- Kontrolowane utwardzanie światłem dla prostej, bezpośredniej procedury
- Doskonała estetyka i przezierność
- Idealny do przyszykowych erozji/abfrakcji, wypełnień w obrębie powierzchni korzenia i pedodoncji
- Optymalny również przy technice kanapkowej zamkniętej i otwartej
- Silna adhezja chemiczna zapewniająca idealną szczelność brzeżną
- Doskonała, potwierdzona w praktyce skuteczność kliniczna



Art. Nr 10000524 **GC Fuji II LC Kapsułki A2, 640 zł**  
Art. Nr 10000525 **GC Fuji II LC Kapsułki A3, 640 zł**

Opakowanie zawiera:  
50 kapsulek (0,33 g proszek i 0,10 g/0,085 ml płyn.)  
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,10 ml.  
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2



## GC Fuji TRIAGE™

Rozwiązanie do ochrony częściowo wyrzniętych zębów trzonowych z użyciem giasjonomeru

Optymalne zaopatrzenie świeżo wyrzniętych zębów trzonowych wynikające z zalet materiału: ponieważ nie jest konieczne ani wytrawianie, ani środek łączący, aplikacja jest niezwykle prosta i szybka, a dzięki zdolności Fuji TRIAGE do zapływania, materiał łatwo zapływa również w głębokie bruzdy. Reakcja samoutwardzania w wersji Pink może być przyspieszana przez ciepło uwalniane z lampy polimeryzacyjnej. Fuji TRIAGE w kolorze białym jest oferowane jako rozwiązanie estetyczne.

- Wiąże chemicznie w wilgotnym środowisku
- Łączy się z tkankami zęba bez potrzeby stosowania systemu łączącego i wytrawiania
- Dzięki wyjątkowej tolerancji na wilgoć jest idealnym rozwiązaniem do ochrony częściowo wyrzniętych zębów trzonowych i powierzchni korzenia
- Przeznaczony do uzupełnień w zębach z hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczą (MIH)



Art. Nr 10000587 **GC Fuji TRIAGE kapsułki**  
w odcieniu PINK; **605 zł**

Art. Nr 10000588 **GC Fuji TRIAGE kapsułki**  
w odcieniu WHITE; **605 zł**

Opakowanie zawiera:  
50 kapsulek (0,30 g proszek i 0,15 g/0,12 ml płyn.)  
Zawartość kapsułki po zmieszaniu 0,13 ml.



## Skomponuj swój własny zestaw materiałów kapsułkowych



**MATERIAŁY SZKŁO-JONOMEROWE /  
SZKLANO-HYBRYDOWE GC  
(6 OPAKOWAŃ)**

**+ mieszalnik Silver Mix  
GRATIS!**

Zamów 6 opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych GC + mieszalnik Silver Mix GRATIS!<sup>1</sup>

Promocja dotyczy wszystkich materiałów szkło-jonomerowych/ szklano-hybrydowych dostępnych w kapsułkach. Możliwość mieszania kolorów.

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



**KORZYSTNA  
CENA**

**4 + 1 | 10 + 3**

Zamów 4 dowolne opakowania po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 1 opakowanie (50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

Zamów 10 dowolnych opakowań po 50 kapsulek materiałów szkło-jonomerowych/szklano-hybrydowych w dowolnym odcieniu + 3 opakowania (po 50 kapsulek) Fuji IX GP FAST A2, Fuji II LC A2, Fuji TRIAGE Pink lub Fuji PLUS A3 GRATIS!<sup>1</sup>

<sup>1</sup> GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

## GC MI Paste Plus™ &amp; GC Tooth Mousse™

Remineralizujące kremy ochronne do zębów o potrójnym działaniu: wzmacniają, ochraniają, uzupełniają.

Z biegiem czasu zęby mogą tracić niezbędne minerały i osłabiać się z powodu częstego narażenia na działanie kwaśnych pokarmów i napojów, zabiegów wybielających lub naturalnego procesu starzenia. GC Tooth Mousse™ i GC MI Paste Plus™ pozwalają przywrócić utracone minerały, wzmocnić zęby i utrzymać zdrową jamę ustną.

## Zastosowania



Codzienna ochrona  
zdrowia jamy ustnej



Zapobieganie  
próchnicy



Przed i po wybielaniu  
zębów



Erozja, refluks  
i poranne nudności




Nadwrażliwość  
zębów



Dzieci  
i młodzież



Suchość jamy ustnej  
i kserostomia

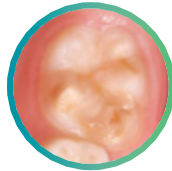

Wady rozwojowe zębów  
i zęby z kredowymi defektami



W trakcie i po leczeniu  
ortodontycznym (aparaty  
ortodontyczne i nakładki)



Po profesjonalnym  
czyszczeniu zębów



Osoby cierpiące  
na choroby przewlekłe  
i stosujące wiele leków



Opieka nad osobami  
starszymi i osobami  
o specjalnych potrzebach

2 x GC Tooth Mousse  
OPAKOWANIE 10 TUB

+ Saliva-Check BUFFER  
GRATIS!

765 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 2 opakowania (po 10 tub)  
GC Tooth Mousse  
+ 1 opakowanie Saliva-Check BUFFER GRATIS!¹

GC Tooth Mousse,  
opakowanie 10 tub; 765 zł  
Dostępne smaki: Melon, Mięta,  
Truskawka, Tutti Frutti, Vanilia.

Obowiązuje dla wszystkich  
dostępnych 10-tubowych  
opakowań GC Tooth Mousse.  
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury  
jedenorazowego zakupu. Oferta ważna  
po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

2 x GC MI Paste Plus  
OPAKOWANIE 10 TUB

+ Saliva-Check BUFFER  
GRATIS!

860 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 2 opakowania (po 10 tub)  
GC MI Paste Plus  
+ 1 opakowanie Saliva-Check BUFFER GRATIS!¹

GC MI Paste Plus,  
opakowanie 10 tub; 860 zł  
Dostępne smaki: Melon, Mięta,  
Truskawka, Tutti Frutti, Vanilia.

Obowiązuje dla wszystkich  
dostępnych 10-tubowych  
opakowań GC MI Paste Plus.  
¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem  
Biura GC na podstawie faktury  
jedenorazowego zakupu. Oferta ważna  
po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Art. Nr 10001767  
Saliva-Check BUFFER; 535 zł  
Opakowanie zawiera: komponenty  
do przeprowadzenia 20 badań.



Wyciśnij niewielką ilość  
preparatu GC Tooth  
Mousse™ lub GC MI Paste  
Plus™ na czysty palec  
lub wacik.



Nałóż preparat na wszystkie  
zęby i rozprowadź go  
równomiernie językiem.



Pozostaw preparat GC  
Tooth Mousse™ lub GC  
MI Paste Plus™ na zębach  
na co najmniej 3 minuty,  
unikając wypluwania  
i polykania. Im dłużej  
preparat pozostaje w jamie  
ustnej, tym lepszy efekt.



Odpłuj nadmiar. Pozostałości  
GC Tooth Mousse™ lub GC  
MI Paste Plus™ na powie-  
rzchni można pozostawić,  
aby stopniowo się rozpuściły.  
Unikaj płukania ust i nie jedz  
ani nie pij przez 30 min.  
po zastosowaniu.

## Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH)

Globalny problem, który dotyka co siódme dziecko

Wzmocnienie i zniesienie nadwrażliwości za pomocą GC Tooth Mousse,  
GC MI Paste Plus i MI Varnish


W przypadku MIH warto zastosować terapię miejscową, żeby wzmocnić zęby i zmniejszyć nadwrażliwość. Stosowanie produktów z RECALDENT (CPP-ACP), który dostarcza dużą ilość przyswajalnego wapnia i fosforanu, daje dobre efekty.

1 na 7 dzieci dotkniętych  
jest hipomineralizacją  
trzonowcowo-siekaczową.  
Poznaj rozwiązania GC  
w leczeniu MIH.



## Więcej o MIH

Zeskanuj, aby znaleźć  
dalsze informacje,  
obraz kliniczny, objawy,  
rozwiązania terapeutyczne  
z GC.

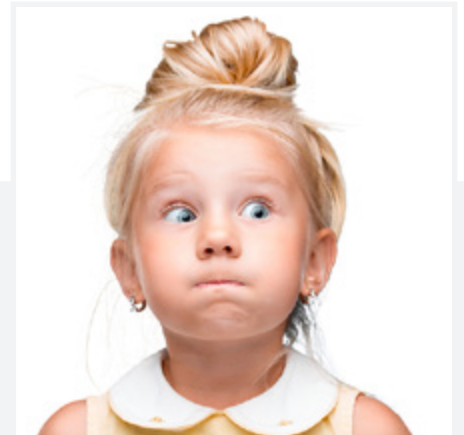

## MI Varnish™ (zawiera 22 600 ppm fluoru)

- Lakier fluorkowy z RECALDENT (CPP-ACP) do stosowania w gabinecie jeden raz na kwartał
- Do stosowania po zabiegach profilaktycznych
- Skutecznie uszczelnia kanaliki zębinowe, znosi nadwrażliwość i pozostawia na powierzchni warstwę ochronną

Leczenie odtwórcze  
Minimalnie inwazyjne uzupełnienia  
z EQUIA Forte HT

## Uzupełnienia ostateczne

Szklano-hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT jest przeznaczony do długoczasowych, minimalnie inwazyjnych uzupełnień. Szybka aplikacja w technice bulk jest wielką korzyścią w przypadku młodych, obawiających się leczenia stomatologicznego pacjentów.

Więcej informacji o produkcie  
znajdziesz na stronie 20.



Łagodna postać MIH

Dzięki uprzejmości:  
Prof. E. van Amerongen, Niemalandy



Umiarkowana postać MIH

Dzięki uprzejmości:  
Prof. C. Baroni, Włochy



Ciężka postać MIH

Dzięki uprzejmości:  
Prof. C. Baroni, Włochy



Siekacze dotknięte MIH

Dzięki uprzejmości:  
Prof. C. Baroni, Włochy

Ochrona powierzchni zębów  
z GC Fuji TRIAGE

Fuji TRIAGE, płynny glasonomer, pomoże chronić powierzchnie zębów przed rozwojem próchnicy i nadwrażliwości

- Fuji TRIAGE wiąże chemicznie w wilgotnym środowisku
- Zęby mogą być chronione nawet przed ich całkowitym wyrznięciem
- Wiązanie Fuji TRIAGE w kolorze różowym może być przyspieszone poprzez użycie lampy do polimeryzacji światłem



## GC Dry Mouth Gel

Żel o neutralnym pH, opracowany w celu łagodzenia nieprzyjemnego uczucia suchości w jamie ustnej.

Dry Mouth Gel to unikalny, niezawierający cukru produkt, dostępny w czterech smakach (mięta, malina, pomarańcza, cytryna). Został opracowany w celu łagodzenia dolegliwości związanych z suchością w jamie ustnej.

24-godzinny komfort i ochrona dzięki Dry Mouth Gel w ciągu dnia, a Tooth Mousse i MI Paste Plus stosowanym na noc.

## Dla pacjentów uskarżających się na następujące dolegliwości:

- sypianie z otwartymi ustami
- suchość w jamie ustnej wynikająca z przyjmowania leków
- zespół Sjögrena
- radioterapia i chemioterapia, choroby przewlekłe, które mogą wpływać na wydzielanie śliny – takie jak np. cukrzyca, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C oraz choroby autoimmunologiczne, np. toczeń rumieniowaty układowy
- użytkownicy protez, w celu ochrony i nawilżenia błony śluzowej

# Warsztaty praktyczne z naszymi Ekspertami



**PROWADZĄCA**  
dr n. med. Kamila  
Wróbel-Bednarz

Gdańsk 12.09.2026r.  
Warszawa 26.09.2026r.  
Częstochowa 09.10.2026r.  
Bielsko-Biała 10.10.2026r.  
Wrocław 17.10.2026r.  
Kraków 24.10.2026r.  
Łódź 21.11.2026r.  
Łomża 27.11.2026r.

## Rekonstrukcja zwarcia z wykorzystaniem uzupełnień ceramicznych

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak zaplanować leczenie protetyczne w oparciu o normy okluzyjne, jaki wybrać sposób preparacji oraz jak bezpiecznie przeprowadzić cały proces, aby uzyskać długotrwały sukces kliniczny.

### Warsztat

- preparacja pod koronę z dwutlenku cyrkonu w odcinku bocznym
- preparacja pod koronę z dwukrzemianu litu w odcinku przednim
- cementowanie koron w procedurze konwencjonalnej i adhezyjnej



## Wieloetapowa odbudowa zaawansowanego starcia zębów - od planowania do odbudowy ostatecznej

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak diagnozować i planować leczenie pacjentów z zaawansowanym starciem zębów. Poznasz technikę Flow Injection, stosowaną do wykonania długoczasowych odbudów tymczasowych w procesie rehabilitacji zwarcia, oraz procedurę krok po kroku preparacji i cementowania częściowego uzupełnienia typu overlay.

### Warsztat

- analiza, pod kierunkiem prowadzącego, przypadku klinicznego oraz planowanie etapów leczenia zaawansowanego starcia zębów
- odbudowa startych zębów w technice Flow Injection
- odbudowa zrębu i preparacja pod uzupełnienie typu overlay
- adhezyjne cementowanie uzupełnienia typu overlay



**PROWADZĄCY**  
lek. dent. Daniel  
Nowakowski

Radom 19.09.2026r.  
Opole 06.11.2026r.  
Sosnowiec 07.11.2026r.  
Nowy Sącz 28.11.2026r.  
Iława 04.12.2026r.  
Gdańsk 05.12.2026r.  
Biała Podlaska 11.12.2026r.  
Warszawa 12.12.2026r.



**PROWADZĄCY**  
dr n. med.  
Piotr Roźniatowski

Kielce 12.09.2026r.  
Rzeszów 17.10.2026r.  
Radom 07.11.2026r.  
Katowice 20.11.2026r.  
Wrocław 21.11.2026r.

## Estetyczna odbudowa startych zębów w odcinku przednim i bocznym - techniki półpośrednie

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak przygotować tkanki zmineralizowane do wykonania rekonstrukcji kompozytowej, jak wykonać odbudowę startych zębów i jak polerować i serwisować prace kompozytowe.

### Warsztat

- wykonanie szyn do techniki stemplowej i flow injection
- wykonanie odbudowy techniką flow injection i techniką stemplową
- protokół polerowania i instrumentarium



## Minimalnie inwazyjne techniki zmiany kształtu zębów w odcinku przednim

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak zmienić kształt zęba mikrodontycznym techniką bezpośrednią, jak uniknąć złamania odbudowanego brzegu siecznego oraz jak odbudować mikro- i makrostrukturę powierzchni zębów przednich.

### Warsztat

- zamknięcie trem i rozbudowa siekacza bocznego
- odbudowa startych guzków kła i ubytku klinowego
- odtworzenie mikro- i makrostruktury odbudowanych powierzchni i procedura polerowania



**PROWADZĄCA**  
lek. dent. Urszula  
Witek-Furman

Szczecin 18.09.2026r.  
Koszalin 19.09.2026r.  
Nowy Targ 02.10.2026r.  
Gliwice 10.10.2026r.  
Lublin 28.11.2026r.



**PROWADZĄCA**  
lek. dent.  
Aleksandra Ślaczan

Tychy 26.09.2026r.

## Bezpośrednia licówka kompozytowa - naturalna estetyka w przypadku ekstremalnych wyzwań

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się w jaki sposób poprawić estetykę zębów przednich z rozległymi ubytkami oraz jak stworzyć naturalną strukturę powierzchni zęba w trzech prostych krokach.

### Warsztat

- procedura krok po kroku wykonania licówki kompozytowej metodą bezpośrednią
- protokół polerowania uzupełnień kompozytowych



## Jednowizytowa przebudowa zwarcia oraz kontrola okluzji

Podczas tego praktycznego kursu dowiesz się jak w szybki, bezpieczny i mało inwazyjny sposób stworzyć „nową okluzję” dla pacjenta, dzięki użyciu materiału kompozytowego, bez konieczności przygotowywania mock-up'u.

### Warsztat

- anatomiczna odbudowa startych powierzchni zębów w odcinku przednim i bocznym
- kontrola okluzji z użyciem kalek okluzyjnych



**PROWADZĄCA**  
lek. dent. Magdalena  
Okręt-Stochaj

Wrocław 26.09.2026r.  
Częstochowa 20.11.2026r.  
Warszawa 21.11.2026r.

Szkolenia praktyczne w Twoim gabinecie: rozwiązania i praktyczna wiedza!

## Inteligentne rozwiązania z GC do uzupełnień pośrednich

Preparacja, wybór materiału i cementowanie uzupełnień pośrednich - przekonaj się jakie to proste z rozwiązaniami GC. Odkryj nasze karty techniczne obejmujące pełne protokoły tworzenia estetycznych koron, licówek lub częściowych uzupełnień pośrednich typu onlay i overlay.

### Szkolenie praktyczne:

- tradycyjne i adhezyjne cementowanie uzupełnień pośrednich w odcinku przednim lub bocznym.

## Biomimetyczne rozwiązania do odbudowy zębów bocznych

Wybierz swoje optymalne rozwiązanie do odbudowy rozległych ubytków w zębach bocznych: wzmocniony krótkimi włóknami płynny kompozyt everX Flow czy szklano - hybrydowy system odtwórczy EQUIA Forte HT.

### Szkolenie praktyczne:

- odbudowa krok po kroku rozległych ubytków w zębach bocznych.

## Estetyka łatwa do osiągnięcia z uniwersalnym materiałem kompozytowym

Przekonaj się jak łatwo za pomocą jednego odcienia G-ænial A'CHORD uzyskasz naturalnie wyglądające uzupełnienie w odcinku przednim.

### Szkolenie praktyczne:

- odbudowa krok po kroku ubytków w odcinku przednim techniką uproszczoną i wielowarstwową.

## Uzupełnienia tymczasowe w praktyce

Poznaj rozwiązania GC do uzupełnień tymczasowych, które zapewniają doskonałe właściwości użytkowe, łatwość polerowania i doskonałe parametry wytrzymałościowe. Odkryj opcje wykańczania i charakteryzacji TEMPSMART DC i OPTIGLAZE color.

### Szkolenie praktyczne:

- wykonanie krok po kroku estetycznego uzupełnienia tymczasowego w odcinku przednim (korona) lub bocznym (most)
- wykańczanie i charakteryzacja

## Zastosowanie wzmocnień z włókien w zębach leczonych endodontycznie

Odkryj rozwiązanie umożliwiające wykonanie w technice bezpośredniej wkładu koronowo-korzeniowego, dopasowanego do kształtu kanału. Poznaj innowacyjny materiał kompozytowy wzmocniony włóknami do odbudowy zrębu.

### Szkolenie praktyczne:

- wykonanie krok po kroku wkładu koronowo-korzeniowego everStick POST
- adhezyjne cementowanie wkładu
- odbudowa zrębu korony zęba z użyciem everX Flow

## Szkolenia w Twoim gabinecie

Zdecyduj się na szkolenie praktyczne GC!

Dostosujemy je do potrzeb Twojej praktyki dentystycznej.

Nasze szkolenia praktyczne oferują rozwiązania do szerokiej gamy codziennych wyzwań i są przeznaczone dla całego zespołu!

PRZYDATNE  
WSKAZÓWKI!

ELASTYCZNY  
czas trwania!

BEZPŁATNY  
UDZIAŁ!

## JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z Konsultantem GC, aby uzyskać więcej informacji lub napisz e-mail na adres: [Info.Poland@gc.dental](mailto:Info.Poland@gc.dental)

## Twój ulubiony kompozyt - ta sama jakość, nowy wygląd!



### Przed zmianą



### Teraz



### Co zostało zmienione:

- etykiety strzykawek
- etykiety z oznaczeniem odcieni
- kolor tłoka strzykawki G-ænial A'CHORD

### Co pozostało bez zmian:

- skład produktów
- numery artykułów
- opakowania zewnętrzne



# OFERTA SPECJALNA

obowiązująca do 31.12.2026 r.

|                              | KUP                                                                                                                                           | OTRZYMASZ GRATIS*                                     | CENA        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Essentia                     |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 4 + 1                        | Essentia, strzykawka 2 ml x 4                                                                                                                 | 1 x strzykawka Essentia U                             | 960 zł      |
| 10 + 3                       | Essentia, strzykawka 2 ml x 10                                                                                                                | 3 x strzykawka Essentia U                             | 2 400 zł    |
| 25 + 1                       | Essentia, strzykawka 2 ml x 25                                                                                                                | 1 x lampa D-LIGHT DUO                                 | 6 000 zł    |
| Essentia HiFlo               |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 4 + 1                        | Essentia HiFlo, strzykawka w odcieniu U x 4                                                                                                   | 1 x strzykawka Essentia U                             | 1 020 zł    |
| 10 + 3                       | Essentia HiFlo, strzykawka w odcieniu U x 10                                                                                                  | 3 x strzykawka Essentia U                             | 2 550 zł    |
| Essentia LoFlo               |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 4 + 1                        | Essentia LoFlo, strzykawka w odcieniu U x 4                                                                                                   | 1 x strzykawka Essentia U                             | 1 020 zł    |
| 10 + 3                       | Essentia LoFlo, strzykawka w odcieniu U x 10                                                                                                  | 3 x strzykawka Essentia U                             | 2 550 zł    |
| everX Flow                   |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 2 + 1                        | everX Flow, strzykawka x 2                                                                                                                    | 1 x strzykawka G-ænial Universal Injectable A1 lub A2 | 530 zł      |
| 3 + 1                        | everX Flow, strzykawka x 3                                                                                                                    | 1 x G-Premio BOND uzupełnienie                        | 795 zł      |
| 4 + 1                        | everX Flow, strzykawka x 4                                                                                                                    | 1 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin             | 1 060 zł    |
| 10 + 3                       | everX Flow, strzykawka x 10                                                                                                                   | 3 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin             | 2 650 zł    |
| G-ænial A'CHORD              |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 4+1                          | G-ænial A'CHORD, strzykawka x 4                                                                                                               | 1 x strzykawka G-ænial A'CHORD A2 lub A3              | 1 020 zł    |
| 4+1                          | G-ænial A'CHORD, strzykawka x 4                                                                                                               | 1 x G-Premio BOND uzupełnienie                        | 1 020 zł    |
| 4+1                          | G-ænial A'CHORD, strzykawka x 4                                                                                                               | 1 x GC Composite Modeling Kit                         | 1 020 zł    |
| 10 + 3                       | G-ænial A'CHORD, strzykawka x 10                                                                                                              | 3 x strzykawka G-ænial A'CHORD A2 lub A3              | 2 550 zł    |
| G-ænial                      |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 4 + 1                        | G-ænial A&P, strzykawka x 4                                                                                                                   | 1 x strzykawka G-ænial Anterior A2 lub Posterior P-A2 | 960 zł      |
| 10 + 3                       | G-ænial A&P, strzykawka x 10                                                                                                                  | 3 x strzykawka G-ænial Anterior A2 lub Posterior P-A2 | 2 400 zł    |
| 25 + lampa                   | G-ænial A&P, strzykawka x 25                                                                                                                  | 1 x lampa D-LIGHT DUO                                 | 6 000 zł    |
| G-ænial Universal Injectable |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 4 + 1                        | G-ænial Universal Injectable, strzykawka x 4                                                                                                  | 1 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin             | 720 zł      |
| 5 + 1                        | G-ænial Universal Injectable, strzykawka x 5                                                                                                  | 1 x G-Premio BOND uzupełnienie                        | 900 zł      |
| 6 + 1                        | G-ænial Universal Injectable, strzykawka x 6                                                                                                  | 1 x EXACLEAR (cartridge 2x 48 ml)                     | 1 080 zł    |
| 8 + 2                        | G-ænial Universal Injectable, strzykawka x 8                                                                                                  | 2 x G-ænial Universal Injectable A1 lub A2            | 1 440 zł    |
| G-ænial Universal Flo        |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 4 + 1                        | G-ænial Universal Flo, strzykawka x 4                                                                                                         | 1 x strzykawka G-ænial Universal Flo A2 lub A3        | 1 000 zł    |
| 10 + 3                       | G-ænial Universal Flo, strzykawka x 10                                                                                                        | 3 x strzykawka G-ænial Universal Flo A2 lub A3        | 2 500 zł    |
| MIX produktów kompozytowych  |                                                                                                                                               |                                                       |             |
| 4MIX + narzędzie             | 4 MIX** produktów kompozytowych, G-ænial Universal Flo, G-ænial Flo X, G-ænial A'CHORD, (G-ænial A&P Essentia, everX Posterior, everX Flow)   | 1 x narzędzie LM Mini Spatula                         | od 960 zł   |
| 10MIX + 3                    | 10 MIX*** produktów kompozytowych, G-ænial Universal Flo, G-ænial Flo X, G-ænial A'CHORD, (G-ænial A&P Essentia, everX Posterior, everX Flow) | 3 x strzykawka G-ænial A'CHORD A2 lub A3              | od 2 400 zł |

# OFERTA SPECJALNA

obowiązująca do 31.12.2026 r.

|                                              | KUP                                                     | OTRZYMASZ GRATIS*                                                                                    | CENA        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRADIA DIRECT                                |                                                         |                                                                                                      |             |
| 5 + 1                                        | GRADIA DIRECT, strzykawka x 5                           | 1 x narzędzie LM Mini Spatula                                                                        | 650 zł      |
| 25 + lampa                                   | GRADIA DIRECT, strzykawka x 25                          | 1 x lampa D-LIGHT DUO                                                                                | 3 250 zł    |
| G-Premio BOND                                |                                                         |                                                                                                      |             |
| 1 + 1                                        | G-Premio BOND, op. 3-butelkowe x 1                      | 1 x G-Premio BOND uzupełnienie                                                                       | 1 040 zł    |
| EXACLEAR                                     |                                                         |                                                                                                      |             |
| 1 + 1                                        | EXACLEAR (cartridge 2x 48 ml) x 1                       | 1 x strzykawka G-ænial Universal Injectable A1 lub A2                                                | 335 zł      |
| TEMPSMART DC                                 |                                                         |                                                                                                      |             |
| 1 + 1                                        | TEMPSMART DC x 1                                        | 1 x OPTIGLAZE color A plus lub Clear                                                                 | 430 zł      |
| 4 + 1                                        | TEMPSMART DC x 4                                        | 1 x TEMPSMART DC A2 lub A3                                                                           | 1 720 zł    |
| G-CEM ONE                                    |                                                         |                                                                                                      |             |
| 1 + 1                                        | G-CEM ONE Twin Refill x 1                               | 1 x G-Premio BOND uzupełnienie                                                                       | 570 zł      |
| 1 + 1                                        | G-CEM ONE Twin Refill x 1                               | 1 x G-Multi PRIMER                                                                                   | 570 zł      |
| 1 + 1                                        | G-CEM ONE Twin Refill x 1 + G-CEM ONE Single Refill x 1 | 1 x G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque                                                     | 865 zł      |
| 3 + 1                                        | G-CEM ONE Single Refill x 3                             | 1 x G-CEM ONE Single Refill AO3 lub White Opaque                                                     | 885 zł      |
| FujiCEM Evolve                               |                                                         |                                                                                                      |             |
| 3 + 1                                        | FujiCEM Evolve Single Pack x 3                          | 1 x FujiCEM Evolve Single Pack                                                                       | 1 400 zł    |
| 1 + końcówki                                 | FujiCEM Evolve Clinic Pack x 1                          | 4 x końcówki mieszające Push and Click Tip Regular                                                   | 2 210 zł    |
| Tooth Mousse                                 |                                                         |                                                                                                      |             |
| 2 + 1                                        | Tooth Mousse, 10-Pack x 2                               | 1 x Saliva-Check BUFFER, pack of 20 tests                                                            | 1 530 zł    |
| 5 + 1                                        | Tooth Mousse, 10-Pack x 5                               | 1 x Tooth Mouse, 10-Pack Assorted                                                                    | 3 825 zł    |
| MI Paste Plus                                |                                                         |                                                                                                      |             |
| 2 + 1                                        | MI Paste Plus, 10-Pack x 2                              | 1 x Saliva-Check BUFFER, pack of 20 tests                                                            | 1 720 zł    |
| 5 + 1                                        | MI Paste Plus, 10-Pack x 5                              | 1 x MI Paste Plus, 10-Pack Assorted                                                                  | 4 300 zł    |
| Materiały szkło-jonomerowe/szklano-hybrydowe |                                                         |                                                                                                      |             |
| 2 + aplikator                                | dowolne 2 opakowania po 50 kapsułek                     | 1 x aplikator do kapsułek CAPSULE APPLIER III                                                        | od 1 040 zł |
| 4 + 1                                        | dowolne 4 opakowania po 50 kapsułek                     | 1 opakowanie do wyboru spośród: Fuji IX GP FAST A2, Fuji TRIAGE Pink, Fuji II LC A2 lub Fuji PLUS A3 | od 2 080 zł |
| 6 + mieszalnik                               | dowolne 6 opakowań po 50 kapsułek                       | 1 x mieszalnik SilverMix                                                                             | od 3 120 zł |
| 10 + 3                                       | dowolnych 10 opakowań po 50 kapsułek                    | 3 opakowania do wyboru spośród: Fuji IX GP FAST A2, Fuji TRIAGE Pink, Fuji II LC A2 lub Fuji PLUS A3 | od 5 200 zł |
| 10 + lampa                                   | dowolnych 10 opakowań po 50 kapsułek                    | 1 x lampa D-LIGHT DUO                                                                                | od 5 200 zł |
| EQUIA Forte HT                               |                                                         |                                                                                                      |             |
| 1 + aplikator                                | EQUIA Forte HT Zestaw Intro x 1                         | 1 x aplikator do kapsułek CAPSULE APPLIER III                                                        | 415 zł      |
| 1 + 1                                        | EQUIA Forte HT Fil x 1                                  | 1 x EQUIA Forte Coat                                                                                 | od 685 zł   |
| 1 + 1                                        | EQUIA Forte HT Zestaw Promo x 1                         | 1 x EQUIA Forte HT Zestaw Intro A2                                                                   | 1 440 zł    |
| 1 + 1                                        | EQUIA Forte HT Zestaw Promo x 1                         | 1 x EQUIA Forte Coat                                                                                 | 1 440 zł    |
| 1 + 1                                        | EQUIA Forte HT Zestaw Clinic x 1                        | 1 x EQUIA Forte HT Fil A2                                                                            | 2 500 zł    |

\* GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.  
\*\*minimum 2 różne materiały kompozytowe  
\*\*\*zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

## Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Magdalena Kujawska  
SZCZECIN / KOSZALIN  
M. +48 532 534 843  
Magdalena.Kujawska@gc.dental  
Stomatologia



Sebastian Lewandowski  
GDAŃSK / BYDGOSZCZ /  
TORUŃ  
M. +48 516 035 806  
Sebastian.Lewandowski@gc.dental  
Stomatologia



Michał Kunda  
BIAŁYSTOK / OLSZTYN /  
EŁK / ŁÓDŹ  
M. +48 505 002 654  
Michal.Kunda@gc.dental  
Stomatologia



Krzysztof Szymański  
WARSZAWA  
M. +48 790 269 100  
Krzysztof.Szymanski@gc.dental  
Stomatologia



Maria Glabisz  
POZNĄ  
M. +48 605 212 615  
Maria.Glabisz@gc.dental  
Stomatologia




Łukasz Lewczuk  
LUBLIN / ZAMOŚĆ  
M. +48 503 506 126  
Lukasz.Lewczuk@gc.dental  
Stomatologia



Joanna Łaban-Nanowska  
WROCLĄW / ZIELONA GÓRA  
M. +48 664 700 144  
Joanna.LabanNanowska@gc.dental  
Stomatologia



Agnieszka Sobala  
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM  
M. +48 666 857 080  
Agnieszka.Sobala@gc.dental  
Stomatologia

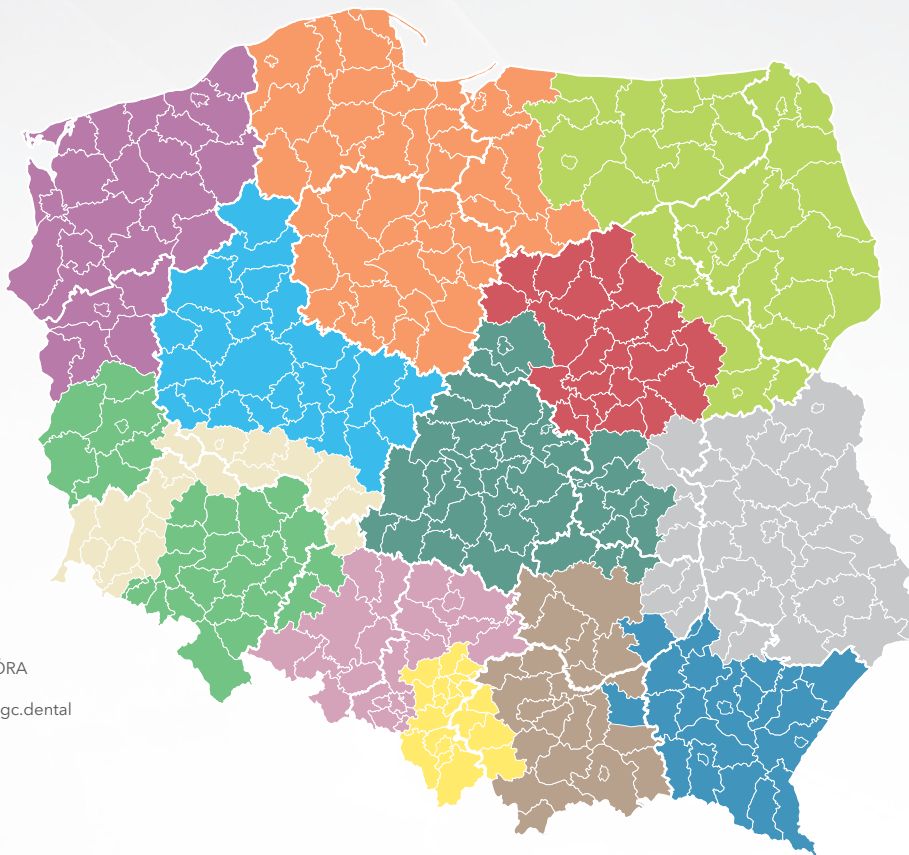

Marcin Sidor  
ZGORZELEC / POLKOWICE /  
LESZNO  
M. +48 508 278 585  
Marcin.Sidor@gc.dental  
Stomatologia



Dominika Ostrowska  
OPOLE / CZĘSTOCHOWA /  
GLIWICE / BYTOM  
M. +48 662 012 689  
Dominika.Ostrowska@gc.dental  
Stomatologia



Łukasz Ryński  
KATOWICE / TYCHY /  
BIELSKO-BIAŁA  
M. +48 733 338 381  
Lukasz.Rynski@gc.dental  
Stomatologia



Piotr Dąbrowski  
KRAKÓW / KIELCE /  
ZAKOPANE  
M. +48 505 402 204  
Piotr.Dabrowski@gc.dental  
Stomatologia



Magdalena Olko  
RZESZÓW / TARNÓW  
M. +48 697 578 193  
Magdalena.Olko@gc.dental  
Stomatologia



Odwiedź naszą stronę internetową:  
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:  
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:  
[www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:  
[https://www.instagram.com/gc\\_polska/](https://www.instagram.com/gc_polska/)