

Abbildung 20: Benutzerverwaltung

22.5 Patientendatenbank



AUSSCHLUSS

GC Europe N.V. und Aadva IOS einschließlich der Aadva Digital Service Platform (DSP) erfüllen die Datenschutzrichtlinie 95/46/EC, die den Umgang mit persönlichen Daten regelt, sowie insbesondere die Datenschutzgesetze des Staates Belgien.

GC Europe empfiehlt Kunden von Aadva IOS, Patientennamen mittels Abkürzungen oder Referenznummern zu anonymisieren und nur solche Daten zu erfassen, die unbedingt erforderlich sind. Außerdem sollten persönliche Daten nur innerhalb der EU übermittelt werden.

Der IOS-Kunde ist verantwortlich dafür, den Patienten zu informieren und seine freiwillige, spezifische und informierte schriftliche Zustimmung zur Erfassung, Verarbeitung und Speicherung von persönlichen Daten einzuholen, sofern dies gemäß der geltenden Rechtslage erforderlich ist. Der IOS-Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze und die Delegation der Datenverarbeitung. Der IOS-Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung der formalen und materialbezogenen Anforderungen. GC Europe verarbeitet Daten im Auftrag und nach Anweisung des IOS-Kunden.

Auf dem Startbildschirm wird die Patientendatenbank angezeigt. Das Symbol "Patient Database" (Patientendatenbank) wird grün angezeigt. Dieser Bildschirm besteht aus zwei Bereichen:

22.5.1 Neuer Patient

Für neue Patienten müssen folgende Angaben eingegeben werden: "First Name" (Vorname), "Family Name" (Nachname), "Birth Date" (Geburtsdatum), "Gender" (Geschlecht), "Social Security Number" (Versicherungsnummer) und "Dentist Name" (Name des Behandlers). Sobald eines dieser Felder ausgefüllt wurde, erscheint das Symbol "Start Scan" (Scan starten). Wenn Sie dieses Symbol drücken, wird der Bereich "Scan" geöffnet.



Abbildung 21: Screenshot Neuer Patient

22.5.2 Bestehender Patient

Im oberen Teil dieses Bereichs finden Sie ein Suchfeld. Geben Sie hier den Vornamen, Nachnamen oder die Fall-ID von bestehenden Patienten ein, die Sie suchen. Im linken Bildschirmbereich werden die entsprechenden bereits erfassten Patienten angezeigt. Nachdem Sie einen Patienten ausgewählt haben, werden die zuvor gespeicherten Scans und andere Informationen auf der rechten Bildschirmseite angezeigt. Hier können Sie bereits erstellte Scans bearbeiten oder löschen und neue Scans hinzufügen.

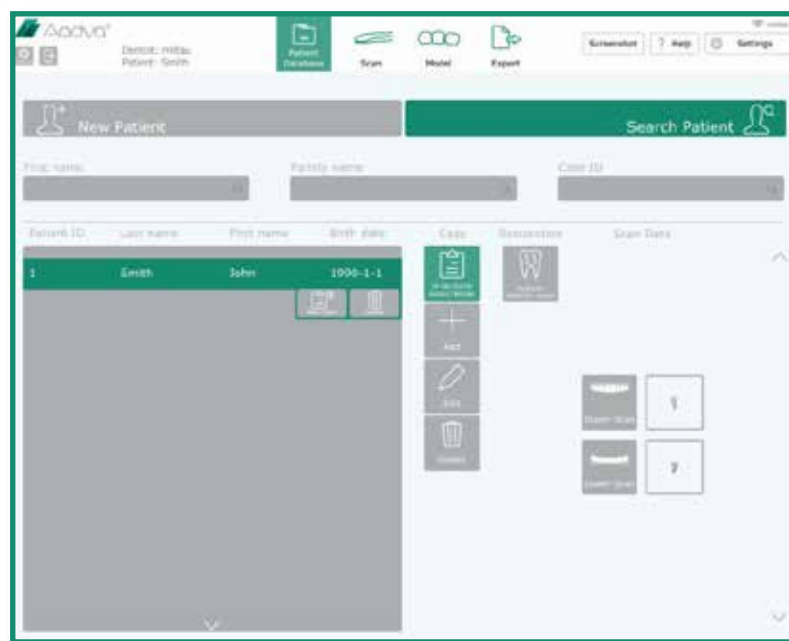


Abbildung 22: Screenshot Bestehender Patient

22.6 Scanbereich



VORSICHT

Vor dem Scannen eines Patienten mit dem AADVA IOS sollte die Dentalfachkraft eine Sichtprüfung des Systems vornehmen. Dabei sollten Scanner und Kabel auf abgeknickte Kabel, Verfärbungen, Verschleiß und Schäden jeder Art geprüft werden.

Drücken Sie im Bildschirm "Patient Database" (Patientendatenbank) auf das Symbol "Start Scan" (Scan starten). Im Bildschirm "Scan" (Scannen) wird das entsprechende Menüsymbol grün hervorgehoben. Der Bildschirm "Information" wird geöffnet. Hier sehen Sie folgende wichtige Hinweise:

1. Verwenden Sie für jeden neuen Patienten eine sterilisierte GC AADVA-Einlage.
2. Desinfizieren Sie den Handscanner. (Siehe Kapitel 23, "Reinigen und Desinfizieren").
3. Nehmen Sie den Handscanner erst aus dem GC AADVA-Halter, wenn die Wärmeplatte die erforderliche Temperatur erreicht hat. Dies ist der Fall, wenn die Temperaturanzeige grün wird.
4. Halten Sie Weichgewebe mit einem intraoralen Retraktor ab.
Zur Isolation empfehlen wir den Optiview² Retraktor von Kerr^{TM3}.
5. Trocknen Sie den Scanbereich mit Luft und halten Sie ihn mit Zahnwatterollen, -pads und Absauger trocken.
6. Nehmen Sie die Kamera aus dem GC AADVA-Halter, bevor Sie mit dem Scannen beginnen.
7. Beginnen Sie mit dem Scannen, indem Sie auf "OK" drücken oder indem Sie den Handscanner hoch und runter schwenken (sofern im Einstellungsmenü aktiviert).
8. Ein Timer zählt 5 Sekunden rückwärts, um anzuzeigen, wann der Scanner mit dem Scannen beginnen wird. So hat die Gesundheitsfachkraft Zeit, die richtige Position einzunehmen.

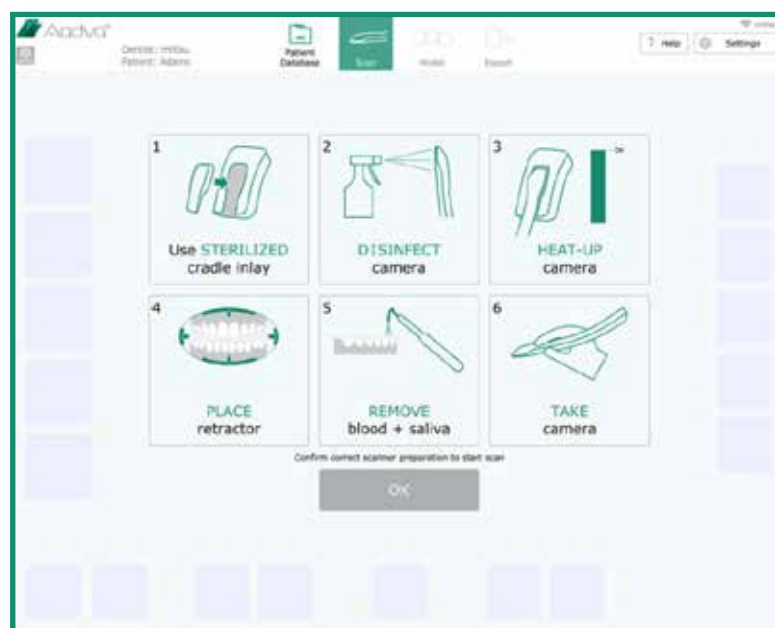


Abbildung 23: Screenshot Scanbereich

22.7 Scannen

1. Ausgangsposition und Bewegung des Handscanners

² Optiview ist ein Produkt von Kerr.

³ Kerr ist keine Marke von GC.

- 1.1. Nach dem Drücken auf "OK" oder der oben beschriebenen Auf- und Abwärtsbewegung startet der Scanvorgang automatisch.
- 1.2. Bringen Sie den Handscanner in die Ausgangsposition (siehe Beispiel unten). Sie können an jeder beliebigen Stelle des Zahnbogens mit dem Scannen beginnen, sobald sich das Glas des Handscanners parallel zur Okklusionsebene befindet.
- 1.3. Wird der Scanvorgang unterbrochen, bringen Sie den Handscanner an eine bereits gescannte Stelle und bewegen Sie ihn. Der Scanvorgang wird fortgesetzt, sobald eine bereits gescannte Stelle erkannt wird.

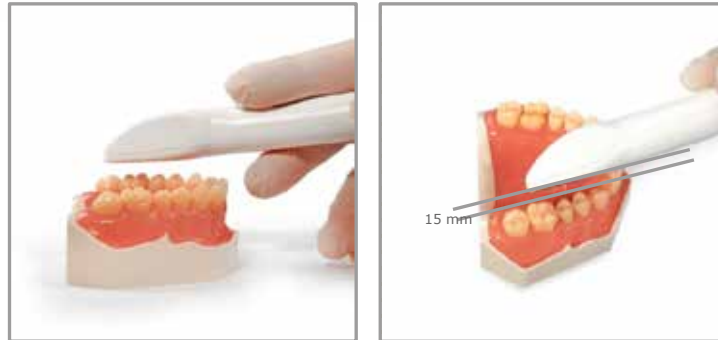


Abbildung 25: Scannen parallel zur Okklusionsebene

Abbildung 24: Idealer Abstand

- 1.4. Um einen einzelnen Quadranten zu scannen, bewegen Sie den Handscanner in Richtung Bukkal-Palatinal über die Zahnflächen, während die Kamera den hinteren oder vorderen Bereich des Bogens abtastet (siehe Abb. 15). Wenn Sie den Prämolaren erreicht haben, fahren Sie in Richtung Palatinal-Lingual fort. Heben Sie den Handscanner an, beginnen Sie wieder am Prämolaren und fahren Sie vestibulär fort.

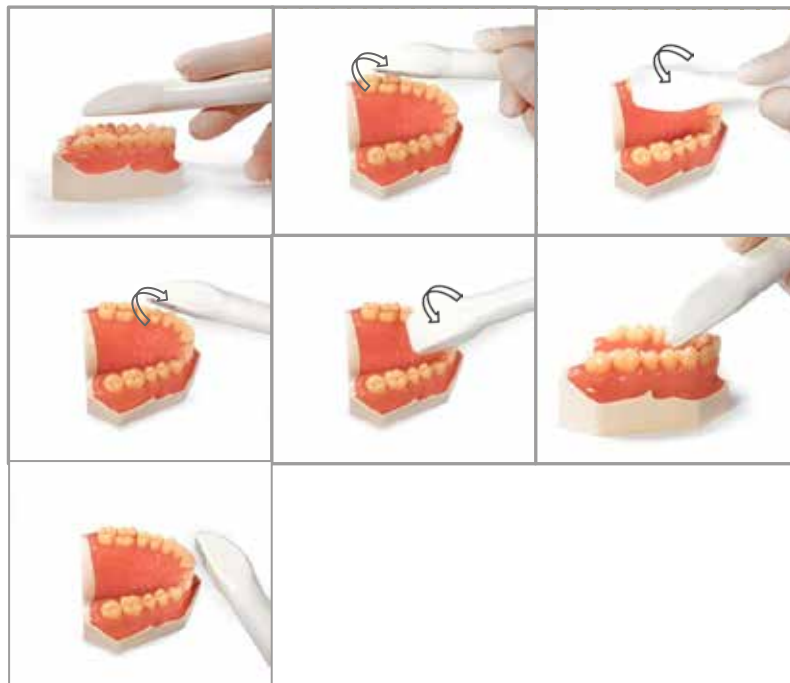


Abbildung 26: Scanablauf für halben Zahnbogen (Einzelquadrant)

2. Aufbau des Bildschirms

Im kleinen "Hilfsfenster" wird der Scanvorgang in Echtzeit angezeigt. Im blauen Bereich sehen Sie, was die Kamera aktuell aufnimmt. Die grauen Bereiche sind die Bereiche, in denen ausreichend Informationen für den Aufbau von 3-D-Bildern erfasst wurden. Bereiche, in denen die erfassten Informationen noch nicht ausreichen, werden rot und gelb dargestellt. Bringen Sie den Handscanner in diese Bereiche, um die fehlenden Informationen zu erfassen. Das heißt, der blaue Bereich muss in den gelben und roten Abschnitten gehalten werden, bis diese grau angezeigt werden, also vollständig erfasst wurden. Im Hauptbildschirm erhalten Sie einen Überblick über den gesamten Scan.

Die Fokusdistanz liegt zwischen 0 und 15 mm. Sie können die Zähne also beim Scannen berühren, ohne dass der Scanvorgang dadurch unterbrochen wird. Durch das Berühren festgelegter Oberflächen (z.B. der okklusale Bereich von Molaren und Prämolaren) werden sehr gute Referenzpunkte, so genannte 'Wegpunkte' erzeugt, an denen der Scanvorgang fortgesetzt werden kann, falls er einmal unterbrochen werden musste. Durch das Wegbewegen des Handscanners von den Zähnen (bis zu 15 mm) wird auf der anderen Seite das Sichtfeld und somit auch die Scangeschwindigkeit vergrößert. Das erleichtert auch das Kopieren von Unterschnitten und schwierigen Bereichen.

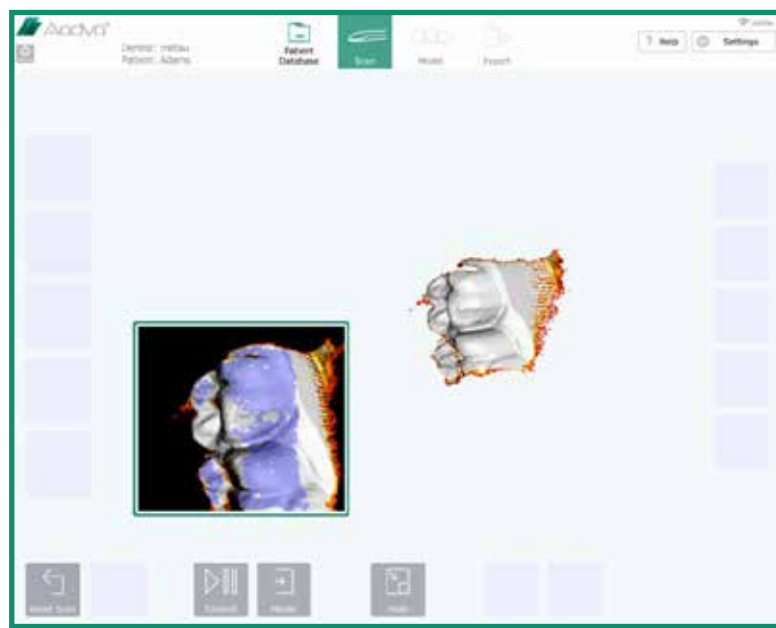


Abbildung 27: Screenshot Aufbau des Bildschirms

Durch Berühren des Symbols "Hide" (Verbergen) am unteren Bildschirmrand wird das Hilfsfenster geschlossen.

Wenn Sie den Scanvorgang wegen schlechter Scanqualität wiederholen möchten, berühren Sie das Symbol "Reset Scan" (Scan zurücksetzen). Daraufhin werden Sie gefragt, ob Sie den Scan verwerfen möchten.

Mit der Taste "Control" (Steuerung) können Sie den Scanvorgang jederzeit unterbrechen. Sie können das Modell dann mit den Symbolen auf der rechten Bildschirmseite zur weiteren Auswertung bewegen. Informationen hierzu finden Sie in der folgenden Abbildung und Tabelle.






	Drehen: Bewegen Sie Ihren Finger über dem Modell. Das Modell wird entsprechend Ihrer Bewegung gedreht.
	Bewegen: Bewegen Sie Ihren Finger in die gewünschte Richtung.
	Vergrößern und Verkleinern: Bewegen Sie Ihren Finger zum Vergrößern nach oben oder links und zum Verkleinern nach unten oder rechts.
	Ansicht zurücksetzen: Mit diesem Symbol setzen Sie das Modell auf die anfängliche Position und Größe zurück.
	Ansicht verändern: Mit diesem Symbol ändern Sie den Kontrast. So lassen sich die Präparationsgrenzen besser erkennen.

Tabelle 5: Screenshot Tasten

Berühren Sie das Symbol "Control" (Steuerung) erneut, um in den Scanmodus zurückzukehren. Bringen Sie die Kamera in einen bereits gescannten Bereich, um mit dem Scannen fortzufahren. Wenn das Modell abgeschlossen ist, können Sie durch Berühren des Symbols "Model" (Modell) ein Gitterbild erstellen.

Sie erhalten nun eine detaillierte Ansicht des Modells, in der die noch nicht erfassten Bereiche automatisch rot dargestellt werden (Abbildung unten). Diese Aussparungen (nicht gescannten Bereiche) werden von einem hochpräzisen Programm unter Nutzung von Daten der umliegenden Bereiche mittels Interpolation ergänzt. Auch hier können Sie das Modell wie oben beschrieben mit Hilfe der Symbole auf der rechten Seite bewegen.

Die Taste "Fast Export" (Schneller Export) wird angezeigt. Mit ihr können Sie den aktuellen Scan schnell auf einen externen Speicher-Stick exportieren.



Abbildung 28: Aufbau des Bildschirms 2

Wenn wichtige Bereiche erneut gescannt werden müssen, berühren Sie das Symbol "Rescan" (Neu scannen) und anschließend das Symbol "Control" (Steuerung), um mit dem Scanvorgang fortzufahren.

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, speichern Sie den Scan, indem Sie das Symbol "Save" (Speichern) berühren. Es werden vier weitere Symbole angezeigt. Wählen Sie den gerade bearbeiteten Scantyp: "Pre-Scan lower" (Vorscan unten), "Pre-Scan upper" (Vorscan oben), "Lower" (Unten) und "Upper" (Oben). Hinweis: Vorscans werden vor der Präparation erstellt.



Abbildung 29: Aufbau des Bildschirms 3

Je nach gewähltem Scantyp wird der Scan automatisch gespeichert. Nach dem Speichern gelangen Sie zurück zum Startbildschirm (siehe Abbildung unten). Beachten Sie, dass der gespeicherte Scan auf der linken Seite grün dargestellt wird, um zu zeigen, dass er korrekt verarbeitet und gespeichert wurde. Sie können auch einen neuen Scan erstellen und den alten überschreiben, indem Sie das neue Modell unter demselben Typ speichern.

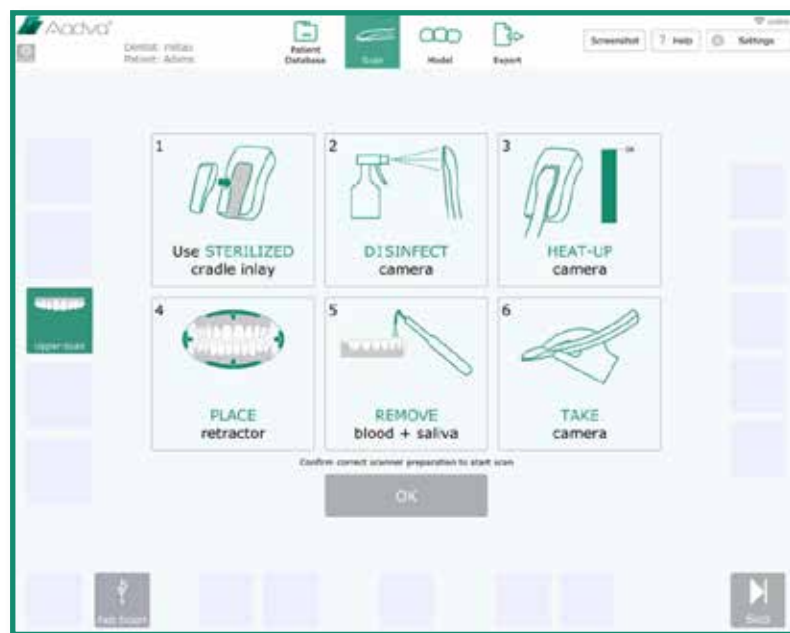


Abbildung 30: Screenshot Ablauf

Klicken Sie auf "OK", um mit dem nächsten Scan fortzufahren. Falls Sie keinen weiteren Scan erstellen möchten, berühren Sie in der unteren rechten Ecke das Symbol "Skip" (Überspringen).

22.8 Bite Scan (Digitaler Gebissabdruck)

Wenn Sie das obere und das untere Gebiss gescannt haben, wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie aufgefordert werden, mit dem digitalen Gebissabdruck fortzufahren (siehe Abbildung unten). Berühren Sie "OK", um mit dem Gebissscan fortzufahren. Scannen Sie bei maximaler Interkuspitation die bukkale Oberfläche der oberen und unteren Zähne. Wenn Sie keinen digitalen Gebissabdruck erstellen möchten, berühren Sie "Skip" (Überspringen).

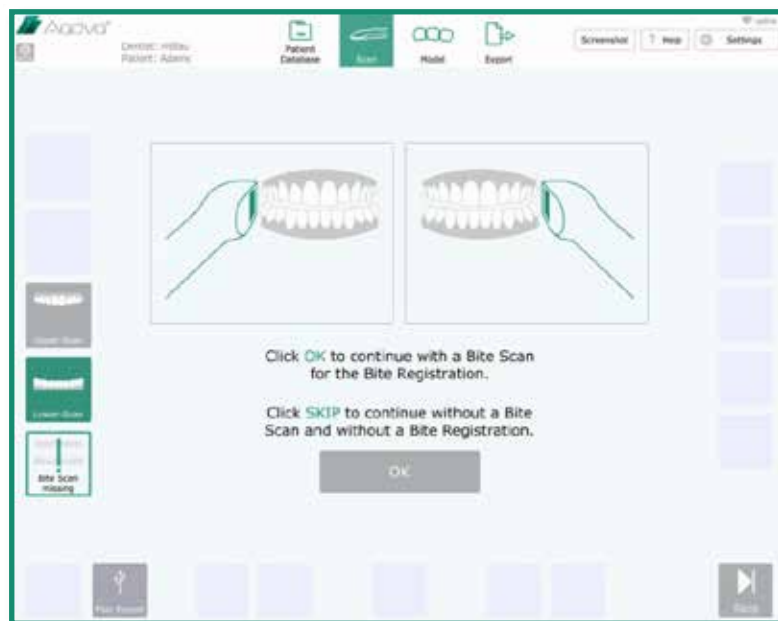


Abbildung 31: Screenshot Gebissabdruck

Wenn die Scantypen "Upper" (Oben), "Lower" (Unten) und "Bite" (Gebiss) gespeichert wurden, gelangen Sie automatisch in den Bereich "Model" (Modell). Das Symbol "Model" (Modell) oben im Menü wird grün markiert. Auch wenn noch nicht alle drei Scantypen abgeschlossen wurden, können Sie jederzeit in den Bereich "Model" (Modell) wechseln. Berühren Sie dazu einfach im Hauptmenü das Symbol "Model" (Modell).

22.9 Definition von Präparationsgrenzen

Mit dieser Funktion können Sie die Grenzlinien für präparierte Zähne bestimmen.

- "Add points" (Punkte hinzufügen): Mit diesem Symbol können Sie entlang der Präparationsgrenzen Punkte hinzufügen.

- "Undo" (Rückgängig): Jedes Mal, wenn Sie dieses Symbol berühren, machen Sie einen Punkt rückgängig. Insgesamt können bis zu 40 Punkte rückgängig gemacht werden.
- "Delete points" (Punkte löschen): Wenn Sie dieses Symbol berühren, können Sie Punkte löschen, indem Sie die gewünschten Punkte in der Modellansicht anklicken.
- "Hide" (Verbergen): Die Position wird im Hilfsfenster ausgeblendet.
- "Save" (Speichern): Mit diesem Symbol werden die erstellten Präparationsgrenzen gespeichert.
- "Redo" (Wiederholen): Alle Punkte werden gelöscht und Sie können die Definition der Präparationsgrenzen erneut beginnen.



Abbildung 32: Screenshot Präparationsgrenze

Im zentralen Hauptbereich wird das 3D-Modell mit der Präparation (gewählter Scantyp) angezeigt. Sie können eine Draufsicht des Modells anzeigen.

Wenn Sie das Modell im zentralen Hauptbereich berühren, wird der entsprechende Bereich im Hilfsfenster vergrößert angezeigt. Der Punkt, den Sie berührt haben, wird mit einem Kreuz markiert. Dieses Kreuz kann mit dem Finger an die Stelle bewegt werden, an der ein Punkt hinzugefügt werden soll. Wenn Sie das Kreuz loslassen, wird der Punkt hinzugefügt. Um den Punkt zu verschieben, können Sie ihn einfach erneut mit dem Finger berühren und an die gewünschte Stelle ziehen. Es können mehrere Punkte gleichzeitig markiert werden.

Nachdem Sie eine Präparationsgrenze gespeichert haben, werden Sie gefragt, ob Sie zum nächsten Bildschirm wechseln oder eine weitere Präparationsgrenze hinzufügen möchten.

22.10 Bissregistrierung

Bei der Bissregistrierung wird die Okklusion zwischen oberem und unterem Scan sowie dem digitalen Gebissabdruck erstellt und überprüft. Dafür werden alle drei Scans geladen.



Abbildung 33: Screenshot Bissregistrierung

Im Hauptmodellfenster werden die drei 3D-Modelle (Oben, Unten und Gebiss) angezeigt.

Im ersten Schritt werden im Hauptansichtsfenster nur das obere Modell und das Gebissmodell angezeigt. Sie müssen nun mit der Funktion "Add points" (Punkte hinzufügen) mindestens drei Punkte auf dem oberen Scan und dem Gebissmodell auswählen (Hinweis: In beiden Scans müssen dieselben Stellen in derselben Reihenfolge ausgewählt werden). Im Hilfsfenster wird die Zielregion um den Punkt, den Sie berührt haben, vergrößert dargestellt, damit Sie die Punkte verschieben können.

Folgende Symbole werden unten angezeigt:

- "Add points" (Punkte hinzufügen): Mit diesem Symbol können Sie Punkte hinzufügen, indem Sie in den entsprechenden Modellbereich klicken.

Hinweis: Es stehen nur Classical Shades⁴ von Vita zur Verfügung. Wenn Sie eine andere Farbskala verwenden möchten, müssen Sie sie auf der Registerkarte "Attachments" (Anhänge) unter "Note" (Hinweis) hinzufügen.

Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um die Restauration zu speichern.

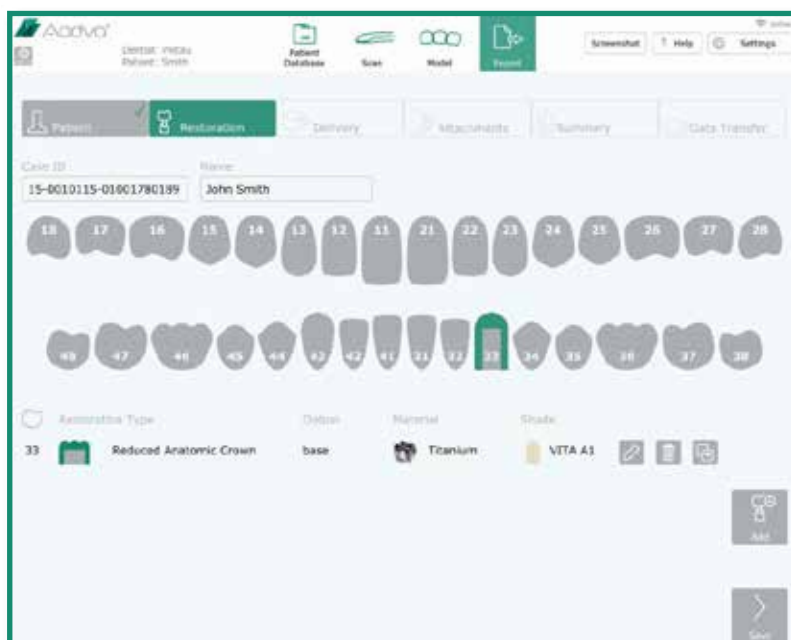


Abbildung 38: Screenshot Registerkarte "Restoration" (Restauration)

22.12 Registerkarte "Delivery" (Lieferung)

Wählen Sie über das Symbol "Select Date" (Datum auswählen) ein Lieferdatum. Wählen Sie dann im grün markierten Feld eine bereits bestehende Adresse oder geben Sie über das Symbol "New Address" (Neue Adresse) eine neue Lieferadresse ein. Über das Symbol "Add to Favourites" (Zu Favoriten hinzufügen) können Sie die neue Adresse speichern.

⁴ 'Vita Shades' ist kein Produkt von GC.

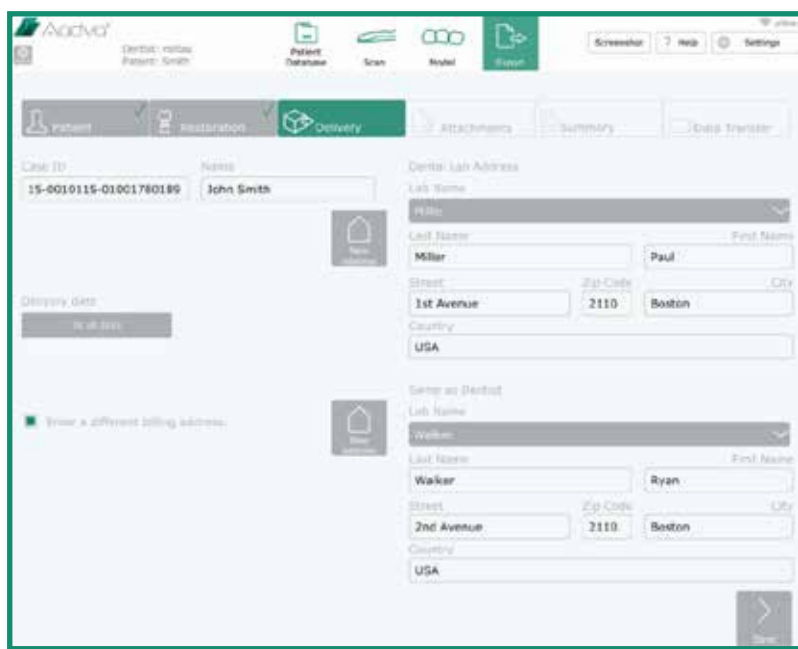


Abbildung 39: Screenshot Registerkarte "Delivery" (Lieferung)

Aktivieren Sie bei abweichender Rechnungsadresse das Kontrollkästchen (roter Pfeil in der Abbildung unten) und geben Sie die Rechnungsadresse ein. Durch Klicken auf die Schaltfläche "Next" (Weiter) können Sie den Vorgang speichern und gelangen zum nächsten Schritt.

22.13 Registerkarte "Attachments" (Anhänge)

Mit dem Symbol "Add" (Hinzufügen) auf der linken Seite können Sie externe Dateien hinzufügen (beispielsweise von einem USB-Stick oder einer Speicherkarte). Es wird ein Explorer-Fenster geöffnet, in dem Sie die gewünschten Dateien (z. B. digitale Patientenbilder) auswählen können. Alle

hinzugefügten Dateien werden auf der linken Seite aufgelistet und zusammen mit dem Auftragsformular und den STL-Dateien im Fallordner gespeichert.

Über das Symbol "Add" (Hinzufügen) auf der rechten Seite können Sie Hinweise hinzufügen. Geben Sie im ersten leeren Feld einen Namen und im folgenden Feld die gewünschten Informationen ein. Minimieren Sie die Tastatur, indem Sie rechts neben der Taste "Alt Gr" auf das Tastatursymbol klicken. Berühren Sie das Symbol "Add" (Hinzufügen) erneut, um weitere Hinweise hinzuzufügen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Next" (Weiter) können Sie die Anhänge und Hinweise speichern und gelangen zum nächsten Schritt.

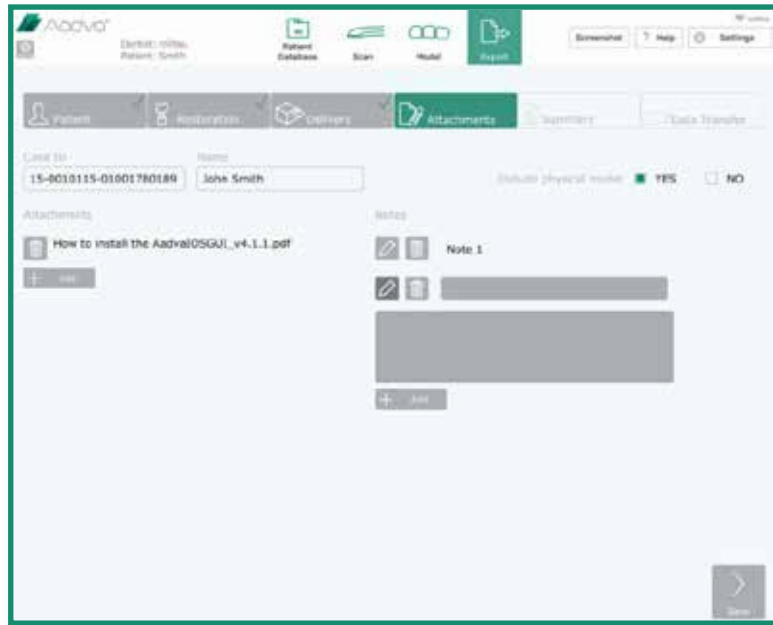


Abbildung 40: Screenshot Registerkarte "Attachments" (Anhänge)

22.14 Registerkarte "Summary" (Zusammenfassung)

Auf dieser Registerkarte werden die eingegebenen Daten einschließlich der Anhänge, Hinweise, Scans und beauftragten Restaurationen kurz zusammengefasst.

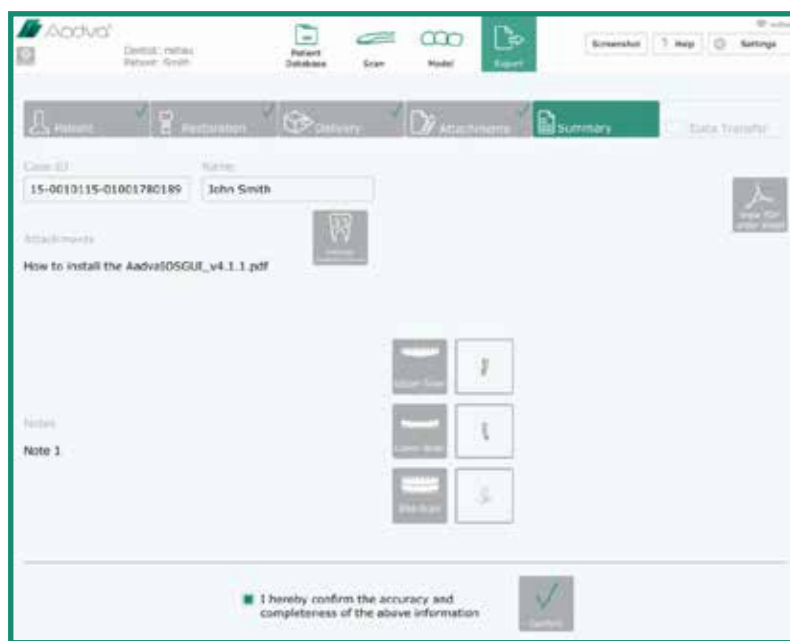


Abbildung 41: Screenshot Registerkarte "Summary" (Zusammenfassung)

Klicken Sie rechts auf das Symbol "View PDF Order Form" (PDF-Auftragsformular anzeigen), um ein PDF-Auftragsformular zu erstellen, in das bereits alle eingegebenen Daten eingetragen wurden. Diese PDF-Datei wird im nächsten Schritt (Datenübertragung) zusammen mit den Scandaten exportiert.

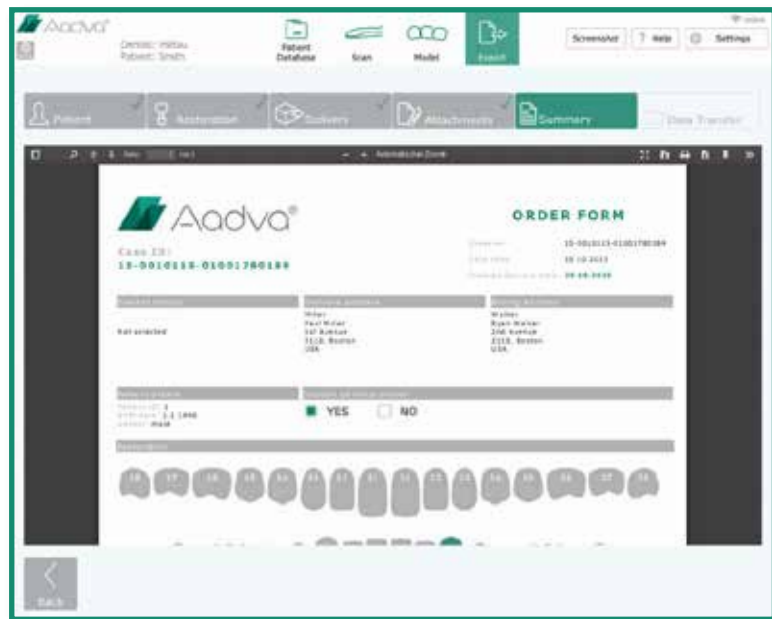


Abbildung 42: Screenshot PDF-Formular

Wenn Sie sicher sind, dass alle Daten im PDF-Auftragsformular korrekt und vollständig sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen im unteren Bildschirmbereich und berühren Sie das Symbol "Confirm" (Bestätigen).

22.15 Registerkarte "Data Transfer" (Datenübertragung)

Wählen Sie die gewünschte Übertragungsmethode: USB, Aadva DSP, USB und Aadva DSP oder oder Export in das Netzwerk. Wenn Sie Daten auf ein externes Laufwerk exportieren möchten, stecken Sie einen USB-Stick oder eine Speicherkarte in den entsprechenden Anschluss auf der Seite des beweglichen Arms des AADVA IOS. Wählen Sie dann "USB" oder "USB and Aadva DSP" (USB und Aadva DSP). Standardmäßig werden alle Fälle außerdem auf die Festplatte des AADVA IOS gespeichert.

Warten Sie anschließend, bis die Meldung "Export to USB successful" (USB-Export erfolgreich) angezeigt wird.

Nachdem Sie die Dateien hochgeladen haben, erscheint das Symbol "Close Case" (Fall schließen). Mit diesem Symbol schließen Sie den aktuellen Fall, auch wenn im Hintergrund noch Daten hochgeladen werden. Anschließend wird der Eingabebildschirm für einen neuen Fall geöffnet.

Wenn Sie den Export in Aadvia DSP wählen, wird die geschätzte Zeit für den Export berechnet. Diese kann sich bei einer angenommenen Upload-Geschwindigkeit von 1000 KB/s verändern.

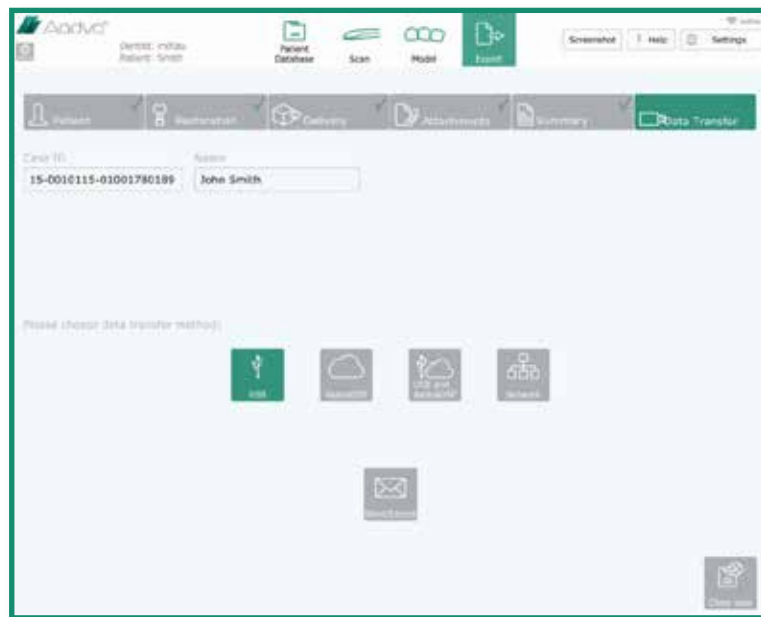


Abbildung 43: Screenshot Registerkarte "Data Transfer" (Datenübertragung)

Weitere Informationen zum Export in Aadvia DSP finden Sie in der DSP-Schnellreferenz.

23 Reinigen und Desinfizieren des IOS

HINWEIS:

- Verwenden Sie nur von GC Europe N.V zugelassene Desinfektionsmittel.
- Lesen Sie vor der Desinfektion das Herstellerhandbuch und das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durch.
- Tragen Sie Schutzkleidung.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine farbigen Tücher, da diese bei der Verwendung mit Desinfektionsmitteln abfärben und so die Oberflächen verschmutzen können.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie nur feuchte, aber keine nassen Tücher. Die Feuchtigkeit könnte in die Lüftungsschlitze eindringen.

Geeignet sind Desinfektionsmittel mit einer Kombination aus Ethanol und Didecyldimethylammoniumchlorid. (FD 333⁵ und FD 333⁶ Desinfektionstücher von DÜRR Dental AG⁷, (Bietigheim-Bissingen, Deutschland)).

⁵ FD 333 und FD 333-Desinfektionstücher werden von DÜRR Dental hergestellt.

Gehen Sie zur Desinfektion von Handscanner, Bildschirm und anderen Oberflächen folgendermaßen vor:

- 1 Reiben Sie die Oberflächen für ca. 30 Sekunden mit Desinfektionstüchern oder einem trockenen, weichen, nicht scheuernden Tuch und unverdünnter Reinigungslösung (gemäß den Herstelleranweisungen) ab. Entsorgen Sie das Tuch/die Tücher dann gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in einem Behälter für biogefährliche Abfälle.
- 2 Trocknen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, nicht scheuernden und fusselfreien Tuch ab und lassen Sie das Desinfektionsmittel 5 Minuten einwirken.
- 3 Überprüfen Sie den Handscanner auf sichtbare Verschmutzung. Wenn das Gerät nicht vollständig sauber ist, wiederholen Sie die Reinigungsschritte 1 bis 3.

24 GC AADVA-Einlagen für den Halter

24.1 Einsetzen und Herausnehmen

Um die GC AADVA-Einlage für den Halter zu entfernen, bewegen Sie zunächst den Arm nach oben, um den Handscanner aus der Halterung nehmen zu können. Mit dieser Bewegung lässt sich der Handscanner einfach aus der GC AADVA-Einlage herausnehmen. (Abb. 16)



Abbildung 44: Handscanner herausnehmen

Nachdem Sie den Handscanner herausgenommen haben, greifen Sie die beiden herausragenden Enden der GC AADVA-Einlage

⁶ FD 333 und FD 333-Desinfektionstücher werden von DÜRR Dental hergestellt.

⁷ Dürr Dental ist keine Marke von GC.

und drücken Sie sie sanft zusammen. Ziehen Sie die GC AADVA-Einlage in horizontale Richtung und nach unten. Auf diese Weise löst sich die GC AADVA-Einlage. (Abb. 17)

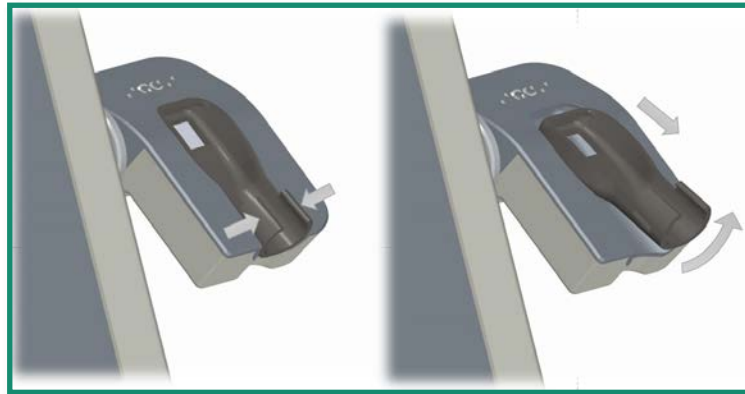


Abbildung 45: Einlage für den Scannerhalter herausnehmen

24.2 Reinigen und Sterilisieren

So sterilisieren Sie die Einlage des Halters:

1. Reiben Sie die Oberflächen für ca. 30 Sekunden mit Desinfektionstüchern ab. Geeignet sind Desinfektionstücher mit einer Kombination aus Ethanol und Didecyldimethylammoniumchlorid. (FD 333-Desinfektionstücher, DÜRR Dental AG⁸, Bietigheim-Bissingen, Deutschland). Alternativ können Sie die Oberflächen auch mit einem trockenen, weichen, nicht scheuernden Tuch und unverdünnter Reinigungslösung (FD 333, DÜRR Dental AG⁹, Bietigheim-Bissingen, Deutschland) gemäß Herstelleranweisungen abreiben. Entsorgen Sie das Tuch/die Tücher dann gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in einem Behälter für biogefährliche Abfälle.
2. Trocknen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, nicht scheuernden und fusselfreien Tuch ab und lassen Sie das Desinfektionsmittel 5 Minuten einwirken.
3. Überprüfen Sie den Handschanner auf sichtbare Verschmutzung. Wenn das Gerät nicht vollständig sauber ist, wiederholen Sie die Reinigungsschritte 1 bis 3.
4. Wickeln Sie die Einlage in Sterilisationsfolie mit Sterilisationsdetektor und legen Sie sie bei 121°C und 1,16 Bar Dampfdruck für mindestens 18 Minuten Plateauzeit in einen Autoklav.
5. Lagern Sie die sterilen Einlagen an einem sauberen, trockenen Ort.

Eine GC AADVA-Einlage kann 20-mal verwendet und sterilisiert werden. Sie sollte jedoch sofort ausgetauscht werden, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- Aufgeraute Oberfläche
- Ablösen der Oberfläche
- Verfärbung der GC AADVA-Einlage für den Halter
- Andere Veränderungen der Oberfläche
- Veränderungen der Abmessungen
- Flecken

⁸ FD 333 und FD 333-Desinfektionstücher werden von DÜRR Dental hergestellt. Dürr Dental ist keine Marke von GC.

⁹ FD 333 und FD 333-Desinfektionstücher werden von DÜRR Dental hergestellt. Dürr Dental ist keine Marke von GC.

- Risse an der GC AADVA-Einlage für den Halter
- Strukturelle Schäden

Neue oder sterilisierte GC AADVA-Einlagen werden in das IOS-Gerät eingeklickt.



WARNUNG

Reduzieren des Risikos von Kreuzkontaminationen:

- Desinfizieren Sie den Handscanner vor jeder Verwendung.
- Reinigen Sie den Handscanner nicht mit Ultraschall.

Reduzieren der Brand- und Stromschlaggefahr:

- Der Bereich, in dem das Kabel in das Gerät geführt wird (Zugentlastung), darf nicht unter Wasser geraten oder mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Falls dies dennoch geschieht, muss der Bereich sofort abgetrocknet werden. Die Zugentlastung muss zunächst vollständig getrocknet sein, bevor das Gerät wieder angeschlossen werden darf.

Reduzieren der Stromschlaggefahr:

- Der Handscanner und das gesamte System (Rollwagen, Monitor und Kabel) müssen vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden.

Reduzieren der Brand- und Stromschlaggefahr:

- Schließen Sie das Gerät nur an geerdete Wandsteckdosen an.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachstecker.



VORSICHT







Vermeiden von Umweltrisiken:

Die Entsorgung von Desinfektionsmitteln muss immer gemäß den lokalen Vorschriften erfolgen.

25 Sicherheit / Leitlinien / Technologie

Geräteteile, die in Kontakt mit dem Menschen kommen (Scanner), sind hinsichtlich ihrer Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1 und entsprechender Unterabschnitte zertifiziert.

Regulatorische und sicherheitsrelevante Symbole und ihre Bedeutung:

	<p>Begleitdokumentation lesen. Gemäß Handbuch vorgehen.</p>
	<p>Nur geeignet für Innenräume.</p>
	<p>Wechselstrom</p>
	<p>Dieses Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2002/96/EC WEEE. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät als elektrisches oder elektronisches Gerät gemäß der Richtlinie 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) nicht mit dem Hausmüll oder dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden darf, sondern getrennt eingesammelt werden muss.</p>
	<p>Gewicht</p>
	<p>Dieses Symbol zeigt, dass der Hersteller des medizinischen Geräts die EU-Richtlinie 93/42/EEC beachtet.</p>







	Dieses Symbol steht für "Conformité Européenne", übersetzt "Europäische Konformität". Damit erklärt der Hersteller, dass das Produkt den grundlegenden, in der europäischen Gesetzgebung geregelten Anforderungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz entspricht.
	Seriennummer
	Artikelnummer
	Herstellungsdatum
	Teile vom Typ BF (Handscanner)
	Quetschgefahr – halten Sie Hände und Finger fern.

Tabelle 6: Symbole

26 Gerätepflege

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, decken Sie es ab, um es vor Staub zu schützen.
- Der AADVA IOS kann, sofern nötig, eingeschaltet bleiben. Das Gerät wird jedoch ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Daten speichern, bevor Sie das Gerät ausschalten.
- Ziehen Sie das Netzkabel und entfernen Sie alle Objekte in der Umgebung, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
- Versuchen Sie nicht, den Handscanner zu öffnen. Dadurch wird das Gerät beschädigt.
- Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf, dass die Kondensatoren oder andere elektrische Bauteile des AADVA IOS nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf oder über dem Scanner ab. Dies kann die Scanfunktion beeinträchtigen;
- Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.



WARNUNG

Setzen Sie sich nicht auf den Rollwagen oder den Monitor und belasten Sie den Wagen oder den Monitor auch nicht auf andere Weise. Dies kann das Gerät beschädigen und zu Verletzungen führen.

27 Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Dieses Produkt wurde gemäß der EMV-Norm IEC 60601-1-2 entwickelt und getestet. Die Dokumentation enthält Informationen und Warnungen, die vom Benutzer beachtet werden müssen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und das Produkt in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.



WARNUNG

Die Verwendung von Zubehörteilen, Kabeln und Komponenten, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, kann zu verstärkten Emissionen oder einer geringeren Störfestigkeit des medizinischen Geräts führen.



WARNUNG

Dieses IOS-Gerät muss gemäß den angegebenen EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.

Leitlinien und Herstellererklärung zu elektromagnetischer Strahlung

AADVA IOS ist für den Einsatz in folgenden elektromagnetischen Umgebungen geeignet. Der IOS-Kunde oder der Benutzer des AADVA I IOS muss sicherstellen, dass das Gerät nur in solchen Umgebungen eingesetzt wird. Gemäß DIN EN 60601-1-2: 2007-12; VDE 0750-1-2: 2007-12 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen und Prüfungen (IEC 60601-1-2: Änderung 2007); deutsche Version EN 60601-1-2: 2007

Leitlinien und Herstellererklärung zu elektromagnetischen Emissionen		
Der [AADVA IOS] ist für den Einsatz in folgenden elektromagnetischen Umgebungen geeignet. Der Kunde oder der Benutzer des [AADVA IOS] muss sicherstellen, dass das Gerät nur in solchen Umgebungen eingesetzt wird.		
Emissionsprüfung	Compliance	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Der [AADVA IOS] nutzt HF-Energie nur für interne Funktionen. Daher kommt es nur zu sehr geringen HF-Emissionen, die keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen dürften.
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Der [AADVA IOS] ist für den Einsatz in allen Einrichtungen einschließlich Wohnbereichen und solchen geeignet, die unmittelbar an ein öffentliches Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt.

Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2	Klasse B
Spannungsschwankungen/ Flicker IEC 61000-3-3	Übereinstimmung

Tabelle 7: Elektromagnetische Emissionen



WARNUNG

Das IOS-Gerät kann durch tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte beeinflusst werden.

Leitlinien und Herstellererklärung zu elektromagnetischer Störfestigkeit			
Der [AADVA IOS] ist für den Einsatz in folgenden elektromagnetischen Umgebungen geeignet. Der Kunde oder der Benutzer des [AADVA IOS] muss sicherstellen, dass das Gerät nur in solchen Umgebungen eingesetzt wird.			
Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	3 V	Bei der Verwendung von tragbarer und mobiler HF-Kommunikationsausrüstung sollte der empfohlene Abstand zum Gerät und zu den Kabeln eingehalten werden, der sich aus der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung ergibt. Empfohlener Schutzabstand $d = 1,2 \sqrt{P}$
Gestrahlte HF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,5 GHz


			<p>wobei P für die maximale Nennausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß den Angaben des Senderherstellers steht und d dem empfohlenen Schutzabstand in Metern (m) entspricht.</p> <p>Die Feldstärke stationärer HF-Sender muss bei allen Frequenzen gemäß einem elektromagnetischen Standortgutachten^a unter dem Übereinstimmungspegel liegen.^b</p> <p>In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten:</p> 
HINWEIS 1	Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der jeweils höhere Frequenzbereich.		
HINWEIS 2	Diese Richtlinien gelten unter Umständen nicht in allen Fällen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorptionen und Reflexionen von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.		
<p>^a Die Feldstärke stationärer Sender wie Basisstationen von (drahtlosen) Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten sowie MW-, UKW- und TV-Übertragung können nicht mit Genauigkeit vorausgesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte ein elektromagnetisches Standortgutachten erwogen werden. Wenn die ermittelte Feldstärke am Standort des [AADVA IOS] den oben angegebenen HF-Übereinstimmungspegel überschreitet, muss der [AADVA IOS] auf normale Betriebstätigkeit hin kontrolliert werden. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, kann es notwendig sein, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Neuausrichtung oder Umstellung des [AADVA IOS].</p> <p>^b Über dem Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke unter 3 V/m liegen.</p>			

Tabelle 8: Elektromagnetische Störfestigkeit

Empfohlener Schutzabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem [AADVA IOS]			
Der [AADVA IOS] ist für den Einsatz in elektromagnetischen Umgebungen geeignet, in der gestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des [AADVA IOS] kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen durch Einhalten eines Mindestabstandes zwischen den tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem [AADVA IOS] entsprechend der maximalen Nennausgangsleistung der Kommunikationsgeräte zu vermeiden, wie weiter unten empfohlen wird.			
Maximale Ausgangsnennleistung des Senders W	Schutzabstand gemäß der Frequenz des Senders m		
	150 kHz bis 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3



10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
<p>Für Sender, deren maximale Nennausgangsleistung oben nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzabstand d in Metern (m) mittels einer Gleichung, die für die Frequenz des Senders anwendbar ist, geschätzt werden, wobei P für die maximale Nennausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß den Angaben des Senderherstellers steht.</p> <p>HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der jeweils höhere Schutzabstand.</p> <p>HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten unter Umständen nicht in allen Fällen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorptionen und Reflexionen von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.</p>			

Tabelle 9: Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem [AADVA IOS]

Hinweis: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Schutzabstand für den höheren Frequenzbereich. Diese Anweisungen gelten unter Umständen nicht in allen Fällen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorptionen und Reflexionen von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

Die Feldstärke stationärer Sender wie Basisstationen von Mobiltelefonen oder (drahtlosen) Funktelefonen und Mobilfunkdienstleistungen sowie Amateurfunkgeräten sowie MW- und UKW-Radios können nicht mit Genauigkeit vorausgesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung in Folge von stationären HF-Sendern zu ermitteln, ist eine elektromagnetische Standortuntersuchung zu empfehlen. Wenn die ermittelte Feldstärke am Standort des AADVA IOS den oben angegebenen HF-Übereinstimmungspegel überschreitet, muss der AADVA IOS auf normale Betriebstätigkeit hin kontrolliert werden. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, kann es notwendig sein, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Neuausrichtung oder Umstellung des [AADVA IOS].

Über dem Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke unter 3 V/m liegen.

28 Elektrostatische Entladung

Der Schutz gegen elektrostatische Entladung spielt beim Anschließen und Trennen von Leitungen am GC AADVA IOS eine zentrale Rolle. Die in Ihrem Körper vorhandene elektrostatische Ladung kann bei Entladung empfindliche Schaltelemente beschädigen. Selbst kleine, nicht wahrnehmbare Entladungen können elektronische Komponenten dauerhaft beschädigen. Vermeiden von Schäden am GC AADVA IOS:

- Führen Sie eine Sichtprüfung des Arbeitsbereichs durch, um sicherzustellen, dass keine nicht leitenden Arbeitsflächen bzw. Materialien oder Werkzeuge verwendet werden, die elektrostatische Ladung generieren können.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 m zwischen empfindlichen Geräten und Objekten ein, die elektrostatische Spannung erzeugen können.
- Nicht geerdete Personen müssen mindestens 1 Meter Abstand zu dieser elektrostatischen Schutzzone halten.
- Vermeiden Sie das Entstehen elektrostatischer Ladungen (z. B. von Klimaanlage, Luftbefeuchtern, leitenden Bodenbelägen, nicht-synthetischer Kleidung).
- Entladen Sie Ihren Körper durch Berühren des Bodens oder eines Metallgegenstandes.

- Berühren Sie die mit dem Elektrostatisksymbol markierten Bereiche nur mit Ihrem Finger oder einem Werkzeug, wenn Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt haben.

Alle Benutzer des GC AADVA IOS sollten sich mit den Maßnahmen zum Schutz vor elektrostatischer Ladung vertraut machen, bevor sie mit dem Scanner arbeiten. Im Rahmen einer Schulung sollten folgende Punkte erörtert werden: die Grundlagen der elektrostatischen Entladung, die unter normalen Umständen auftreten kann; Spannungsspitzen und die möglichen Schäden, die an elektronischen Komponenten bei Kontakt mit einem elektrostatisch geladenen Bediener entstehen können. Außerdem sollten Methoden vermittelt werden, wie elektrostatische Ladung vermieden werden kann und wie man sich erdet.

Wenn am Handscanner eine Störung aufgrund einer elektrostatischen Entladung oder einer anderen elektrischen Anomalie auftritt, sollte der Scanvorgang (sofern möglich) wiederholt werden oder der Scanbildschirm erneut aufgerufen werden.

Wenn der Monitor durch ein transientes elektrisches Ereignis beeinträchtigt wird, muss er mit dem Netzschalter des Monitors aus- und wieder eingeschaltet werden.

Leitlinien und Herstellererklärung zu elektromagnetischen Emissionen			
Der [AADVA IOS] ist für den Einsatz in folgenden elektromagnetischen Umgebungen geeignet. Der Kunde oder der Benutzer des [AADVA IOS] muss sicherstellen, dass das Gerät nur in solchen Umgebungen eingesetzt wird.			
Emissionsprüfung	Compliance	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien	
HF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Der [AADVA IOS] nutzt HF-Energie nur für interne Funktionen. Daher kommt es nur zu sehr geringen HF-Emissionen, die keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen dürften.	
HF-Emissionen CISPR 11	Klasse B	Der [AADVA IOS] ist für den Einsatz in allen Einrichtungen einschließlich Wohnbereichen und solchen geeignet, die unmittelbar an ein öffentliches Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt.	
Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2	Klasse B		
Spannungsschwankungen/ Flicker IEC 61000-3-3	Übereinstimmung		
Leitlinien und Herstellererklärung zu elektromagnetischer Störfestigkeit			
Der [AADVA IOS] ist für den Einsatz in folgenden elektromagnetischen Umgebungen geeignet. Der Kunde oder der Benutzer des [AADVA IOS] muss sicherstellen, dass das Gerät nur in solchen Umgebungen eingesetzt wird.			
Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Elektrostatische Entladung IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Empfohlene Bodenbeläge: Holz, Beton oder Keramikfliesen. Bei Bodenbelägen aus synthetischem Material sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	± 2 kV für Stromversorgungsleitungen ± 1 kV für Zu- und Ableitungen	± 2 kV für Stromversorgungsleitungen ± 1 kV für Zu- und Ableitungen	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer normalen Gewerbe- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannungen IEC 61000-4-5	± 1 kV Leitung(en) zu Leitung(en) ± 2 kV Leitung(en) zu Masse	± 1 kV Leitung(en) zu Leitung(en) ± 2 kV Leitung(en) zu Masse	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer normalen Gewerbe- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Spannungsschwankungen in Versorgungszuleitungen IEC 61000-4-11	< 5 % U_T (> 95 % Einbruch in U_T) für 1/2 Zyklus 40 % U_T (60 % Einbruch in U_T) für 5 Zyklen 70 % U_T (30 % Einbruch in U_T) für 25 Zyklen	< 5 % U_T (> 95 % Einbruch in U_T) für 0,5 Zyklus 40 % U_T (60 % Einbruch in U_T) für 5 Zyklen 70 % U_T (30 % Einbruch in U_T) für 25 Zyklen	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer normalen Gewerbe- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn ein unterbrechungsfreier Betrieb des [AADVA IOS] auch bei Stromausfall erforderlich ist, sollte der [AADVA IOS] an eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine Batterie angeschlossen werden.

	< 5 % U_T (> 95 % Einbruch in U_T) für 5 s	< 5 % U_T (> 95 % Einbruch in U_T) für 5 s	
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetfelder der Netzfrequenz sollten der einer normalen Gewerbe- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
HINWEIS U_T ist die ist die Netzwechselfspannung vor der Anwendung des Prüfpegels.			

Tabelle 10: Elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit

29 Typenschild und Kennzeichnung

Die Informationen auf dem Typenschild beschreiben den AADVA IOS. Sie bestehen aus der Seriennummer und den erforderlichen regulatorischen und sicherheitsrelevanten Symbolen.



Abbildung 46: Typenschild

30 Gerätespezifikationen und Klassifikationen

Dieses Gerät ist ein bildgebendes System.

Allgemeine Spezifikationen und Klassifikationen	
Videoabtastrfrequenz/Blinkfrequenz	18 Bilder pro Sekunde
Größe des Touchscreen	(19") diagonal 5/4
Abmessungen des Rollwagens (Stellfläche)	50 cm x 49 cm
Höhe des Systems (Boden bis Monitorrahmen) max.	110 cm
Neigungsverstellung des Monitors	-30° bis + 45°
Eingangsleistung	100-240 VAC 50/60 Hz, 5A @230AC, 10A @115vAC

Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Schutz gegen schädliches Eindringen von Wasser oder Schwebstoffen	Rollwagen IP21 Handscanner IP54 (in vivo) Handscanner IP53 (nicht in vivo)
Betriebsmodus	Dauerhaft
Gewicht	
Gesamtliefergewicht einschl. Verpackung	40,5 kg
Wagen mit Monitor	32 kg
Handscanner	175 g einschließlich Kabel
Abmessungen des Handscanners	
Länge	210 mm
Breite der Handscannerspitze	22,2 mm
Höhe der Handscannerspitze	19 Zoll
Max. Durchmesser	25,2 mm
Kabellänge des Handscanners	1,4 m (sichtbar)
Kalibrierung	Keine Kalibrierung vor Ort erforderlich
Temperatur	
Betrieb	10 - 35°C
Lagerung/Transport	-20°C bis +60°C
Feuchtigkeit (Umgebung)	
Betrieb	30-60 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerung/Transport	10-90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftdruck (Umgebung)	
Betrieb	700 bis 1060 mbar
Lagerung/Transport	700 bis 1060 mbar

Tabelle 11: Gerätespezifikationen

AADVA IOS-Kabel

Nr.	Typ	Länge	Beschreibung
1	Nicht abgeschirmtes Netzkabelsystem	2m	AC an AADVA IOS
1	Abgeschirmtes USB-Kabel, freiliegend Handscanner und Wagen	2m	USB 2.0 für Videoaufnahme
1	Abgeschirmtes VGA-Kabel, Monitor	1,5m	Analoges Videosignal an Monitor
1	Abgeschirmtes USB-Kabel, Monitor	1,5m	USB 2.0 für Touch-Monitor
3	Abgeschirmtes USB-Kabel, externer Datenträger	1,5m	USB 2.0 USB-Speicher
1	Nicht abgeschirmtes AC-Netzkabel, Monitor	1,5m	12 VDC/10 A

Tabelle 12: Kabelspezifikationen



WARNUNG

Reduzieren der Stromschlaggefahr:



Verwenden Sie für dieses Produkt nur das mitgelieferte, für Ihr Land geeignete Original-Netzkabel.

HINWEIS: Um Schäden am AADVA IOS zu vermeiden, beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Schützen Sie den GC AADVA IOS vor direkter Sonneneinstrahlung, um ein Überhitzen während des Betriebs zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der GC AADVA IOS auf festem, ebenem Boden steht.
- Der Touchscreen darf nicht mit scharfen oder spitzen Objekten berührt werden.
- Die Komponenten des GC AADVA IOS können durch Korrosion beschädigt werden und dürfen daher nur im Gebäude aufgestellt werden.

31 Transport und Verpackung

Stellen Sie vor dem Aufstellen und Montieren des AADVA IOS sicher, dass alle erforderlichen Komponenten und Teile mitgeliefert wurden. (Vergleichen Sie dazu mit dem Lieferschein). Führen Sie außerdem eine Sichtprüfung durch, um das Gerät auf Transportschäden hin zu untersuchen.

Lieferumfang des AADVA IOS:

- AADVA IOS Intraoral-Scanner
- AC-Netzkabel
- 10 GC AADVA-Einlagen für den Halter
- AADVA IOS Betriebshandbuch (dieses Handbuch)
- AADVA IOS Schnellreferenz
- AADVA DSP Schnellreferenz
- Konformitätserklärung
- Kundendienstmerkblatt

Lieferung:

Der AADVA IOS wird auf einer Standard-Europalette geliefert. Falls das Gerät zurückgeschickt werden muss, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, da nur so ein sicherer Transport und die Aufrechterhaltung der Gewährleistungsansprüche sichergestellt werden kann. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den aktuellen Recyclingvorgaben.

Heben und Tragen:

Der AADVA IOS wird am besten per Hand bewegt und aufgestellt. Der AADVA IOS kann mit Hilfe des Griffs an der Vorderseite über Hindernisse gehoben werden.



WARNUNG

Schätzen Sie Ihre eigenen Kräfte beim Transportieren, Heben, Verpacken und Tragen hinsichtlich des in den Spezifikationen angegebenen Gerätegewichts richtig ein und lassen Sie sich gegebenenfalls helfen.

Verriegeln Sie für den Transport über kurze Strecken den beweglichen Arm, indem Sie den Verriegelungsknopf nach außen schieben und den beweglichen Arm in eine vertikale Position bringen. Falls das Gerät eingeschaltet ist, wird es durch die Verriegelung automatisch ausgeschaltet. Stellen Sie sicher, dass alle Dateien gespeichert wurden, bevor Sie das Gerät ausschalten. Andernfalls kann es zu Datenverlust kommen. Neigen Sie das Gerät, bis es auf den hinteren Rollen steht, und transportieren Sie es am Griff über dem Monitor (Abb. 47).



Abbildung 47: Transport des IOS-Geräts

32 Umwelt

Hinweis: Elektrische Geräte oder Bauteile dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät umweltgerecht recycelt/entsorgt werden muss. Es darf nicht dem normalen Hausmüll zugeführt werden. Der schwarze Balken unter dem durchgestrichenen Abfalleimer zeigt an, dass dieses Produkt nach dem 13.08.2005 in den Kreislauf gelangt ist (siehe Richtlinie 2012/19/EU und EN 50419:2006).



Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt der EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) und den jeweiligen nationalen Gesetzen für eine umweltgerechte Wiederverwertung/Entsorgung unterliegt. Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entsorgen Sie alle Komponenten gemäß den geltenden Vorschriften.

Nur für EU-Länder:

Unter Einhaltung der EU-Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationalen Gesetzen müssen elektrische Geräte, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, getrennt eingesammelt und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zugeführt werden.

Bezüglich der Rückgabe von AADVÄ IOS-Geräten wenden Sie sich bitte an einen IOS-Experten in Ihrer Nähe (siehe Kapitel 20, "IOS-Kundendienst").

Andere Länder:

Bezüglich länderspezifischer Informationen wenden Sie sich bitte an einen IOS-Experten in Ihrer Nähe (siehe Kapitel 20, "IOS-Kundendienst").



33 Fehlerbehebung

Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ist das Netzkabel angeschlossen? ▪ Ist der Hauptnetzschalter auf der Rückseite des Geräts eingeschaltet (Position I)? ▪ Haben Sie den Netzschalter neben den USB-Anschlüssen an der Stütze des Touchscreen gedrückt? ▪ Befindet sich das Gerät in Transport- oder in Scanposition? Befindet es sich in Transportposition, bringen Sie es in Scanposition. Schaltet sich das Gerät jetzt automatisch ein? ▪ Ist die Sicherung neben dem Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Geräts in der richtigen Position? ▪ Wenn das grüne GC-Logo am Gerät (Rollwagen und Halter) aufleuchtet: Ist der Bildschirm ausgeschaltet? ▪ Funktionieren die Lüfter des PCs? Macht das Gerät Geräusche?
Es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ist das Gerät ausreichend aufgewärmt? Zeigt die Thermoanzeige "COLD" oder "OK" an? ▪ Befindet sich der Handscanner im Halter? ▪ Wenn Sie in die Kamera schauen, leuchtet dort eine kleine blaue LED auf? ▪ Ist das Licht in der Kamera weiß oder schwarz? ▪ Berühren Sie das Heizelement im Halter: Ist es warm? ▪ Ist das Schutzglas der Kamera frei und sauber? ▪ Befindet sich ein zu scannendes Objekt im Abstand von 15 mm?
Es können keine Daten in das Feld "Patient ID" (Patienten-ID) eingegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haben Sie Zahlen oder Buchstaben in das Feld eingegeben?
Es können keine Daten über Aadva DSP übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ist das Gerät im Internet? ▪ Ist Ihr GC Connect-Konto noch aktiv? ▪ Haben Sie diese Daten bereits zuvor einmal übermittelt? ▪ Haben Sie diese Daten bereits auf ein USB-Gerät übertragen? ▪ Haben Sie den Validierungsprozess abgeschlossen und vor der Datenübertragung auf "Confirm" (Bestätigen) geklickt?
Der ROLLWAGEN lässt sich nicht bewegen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Befindet sich das Bremspedal vorne am Gerät in der oberen Stellung?
Im Feld "Search patient" (Patienten suchen) werden keine Patienten aufgelistet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haben Sie sich mit Ihrem eigenen Benutzernamen/Passwort angemeldet?

Fall	Fehlermeldung/Anzeige	Grund	Lösung
Falsche PIN	"The dentist and password you have entered are not valid." (Name und Passwort sind ungültig).	Die PIN wurde falsch eingegeben.	Geben Sie die richtige PIN ein.
Keine Temperaturanzeige	Die Temperatur des Scanners wird nicht angezeigt.	Keine Handscanner-Referenzdatei im Config-Ordner. Der Scanner-Treiber wurde nicht korrekt installiert. Das USB-Kabel des Scanners ist defekt.	Kopieren Sie die richtigen Handscanner-Dateien in den Config-Ordner. Installieren Sie den korrekten Scanner-Treiber. Überprüfen Sie das USB-Kabel auf Beschädigungen und wenden Sie sich an die Service-Hotline.

Keine USB-Laufwerk gefunden.	Der USB-Export ist fehlgeschlagen, weil kein USB-Laufwerk gefunden wurde. Schließen Sie ein USB-Laufwerk an. Wiederholen Sie den Export.	Kein USB-Stick angeschlossen oder Stick ist nicht korrekt formatiert.	Schließen Sie einen FAT32- oder NTFS-USB-Stick an.
Netzwerkverzeichnis nicht angegeben.	Der Netzwerk-Export ist fehlgeschlagen, weil kein Exportverzeichnis angegeben wurde. Geben Sie das Netzwerkexportverzeichnis in den Einstellungen an.	In den Exporteinstellungen wurde kein Netzwerkexportverzeichnis angegeben.	Geben Sie ein Netzwerkexportverzeichnis an.
Nicht genügend Speicherplatz auf dem USB-Laufwerk.	USB-Export ist fehlgeschlagen. Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar.	Auf dem USB-Stick ist nicht genügend freier Speicherplatz, um den Fall zu speichern.	Schließen Sie einen USB-Stick mit ausreichend Speicherplatz an.

34 IOS-Kundendienst: GC Digital Services Team

Wenn Sie Fragen zum AADVA IOS und/oder zu diesem Handbuch haben, wenden Sie sich an das GC Digital Services Team in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie im **DSP** oder auf dem Merkblatt "**GC Digital Services Team**", das dem IOS-Gerät beiliegt.

Primäre Unterstützung:

- Erstellen eines Support-Tickets in **DSP**
- Kontaktieren von Vertretern in der Nähe (über die Kontaktinformationen im DSP oder auf dem Merkblatt "GC Digital Services Team")

Sekundäre Unterstützung:

Tel.: +32 16 74 26 00

E-Mail: digitalservices@gceurope.com

