


ISTI izgled, **ISTI** pristup.
Gdje je onda **razlika?**



Kada treba povezati **čvrstoću** i **fleksibilnost**.

CERASMART ima najvišu savojnu čvrstoću u svojoj kategoriji te je nadvisio klasične glinične keramičke blokove. Najvažnije, također nudi **visoku elastičnost (energija lomljenja)** za amortizaciju **žvačnog pritiska** i potporu u najizazovnijim kliničkim situacijama.

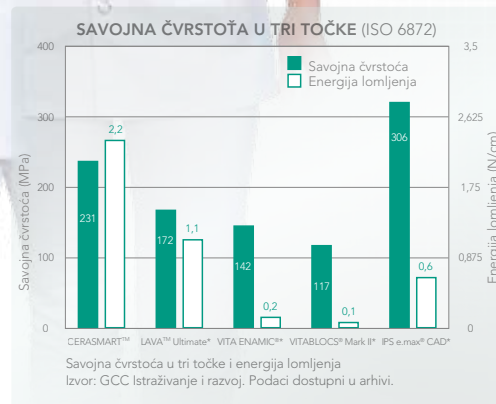

Dobrodošli u
PAMETNO doba

Otkrijte **CERASMART™** i proizvode koji ga ističu
www.gceurope.com



Ceramic Primer II je najnoviji primer iz tvrtke GC, koji se može koristiti za sve vrste keramika (uključujući staklokeramiku, cirkonij-oksidnu i aluminij-oksidnu keramiku), kompozite i hibridnu keramiku.

Specijalizirani primer koji omogućuje čvrstu i trajnu adheziju...

Vaš savršeni partner za vaše **CERASMART™** radove!



Otkrijte Optiglaze Color, novi svjetlosno polimerizirajući materijal za karakterizaciju iz tvrtke GC!

Bojanje, povećana otpornost na trošenje i visoki površinski sjaj uz jedan potez kista...

Jer sve izgleda bolje u boji!



DiaPolisher je GC pasta za poliranje s ultrafinim dijamantnim česticama - samo slijedite uobičajeni postupak poliranja i koristite DiaPolisher pastu za postizanje višeg sjaja.

Poboljšajte estetiku jednim jednostavnim korakom!

CERASMART™ - najbolja klasa hibridne keramike iz tvrtke GC



BOJE:

High Translucency (visoka translucencija) (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT

- uglavnom za nadomještanje cakline
- za inleje, onleje, estetske ljuske, djelomične i potpune krunice

Low Translucency (niska translucencija) (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT

- za nadomještanje dentina i cakline
- za prekrivanje diskoloracija, osobito za krunice

Bleach Shade (BL) (za izbjeljivanje)

VELIČINE:

raspoloživo u veličinama 12, 14, i 14L

PAKIRANJA:

CERASMART za Cerec, nadopuna od 5 blokova CERASMART univerzalni, nadopuna od 5 blokova CERASMART Advanced Kit (prošireni komplet) CERASMART Starter Kit (početni komplet)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

O LF HR21 01 01/19



GC CERASMART™

Nova hibridna keramika za CAD/CAM sustav

Jeste li sigurni da to nije keramika?

GC

Pametni materijal za pametne primjene.



Predstavljanjem novog hibridno keramičkog bloka, GC otvara vrata "pametnog" doba, gdje se za svaki slučaj zasebno odabire točno odgovarajuća vrsta CAD/CAM bloka.

Keramika - zlatni standard kod CAD/CAM tehnologije - i CERASMART na neki su način slični. No CERASMART nudi nenadmašne mogućnosti za određene kliničke situacije.

- Zbog sposobnosti amortizacije, CERASMART je savršeno pogodan za izazovne okluzijske situacije
- Precizna prilagodba i otpornost na okrhnuće osiguravaju dugotrajnu rubnu nepropusnost
- Uravnotežena tvrdoća površine osobito je pogodna za smanjenje trošenja suprotnih zubi, također osiguravajući dugotrajni sjaj rada

Pored toga CERASMART također nudi

- Učinkoviti proces glodanja s kratkim vremenom glodanja i poboljšanom trajnošću glodalica
- Izvršna mogućnost poliranja postiže izraziti sjaj nakon kratkog vremena poliranja
- Jednostavna karakterizacija premazom Optiglaze Color, samo za nekoliko minuta

Kada treba povezati preciznost i trajnost

CERASMART dokazuje da ne treba birati između preciznosti i brzine: kroz kratko vrijeme glodanja postižu se vrlo oštri rubovi. Bez vidljivog okrhnuća, čak i pod velikim mikroskopskim povećanjem.

Preciznost glodanja


Izvor: GCC Istraživanje i razvoj.



Jedinstvena tehnologija

Slike pod skenirajućim elektronskim mikroskopom; Izvor: GCC Istraživanje i razvoj

CERASMART se temelji na najnovijoj GC tehnologiji punila, s ultrafinim homogeno raspršenim punilima koja omogućuju dugotrajni sjaj te manje trošenje suprotnih zubi. Njegova visoka radioopaknost također olakšava kontrolu radova.

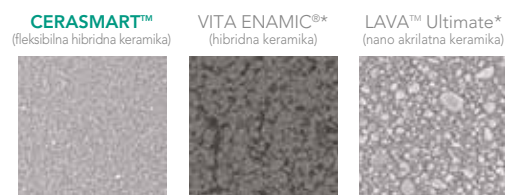

Kada treba spojiti estetiku i CAD/CAM


Cerasmart pacijentima nudi estetske radove, nevidljive u svim slučajevima zahvaljujući svojoj optimalnoj ravnoteži fluorescencije i opalescencije te prirodnoj integraciji boje.

CERASMART™ A2 HT LAVA™ Ultimate A2 HT* VITA ENAMIC™ 1M2 H* IPS e.max® CAD A2 HT*



PROPUŠTENO SVJETLO

CERASMART™ A3LT LAVA™ Ultimate A3 LT* VITA ENAMIC™ 2M2 T* IPS e.max® CAD A3 LT*

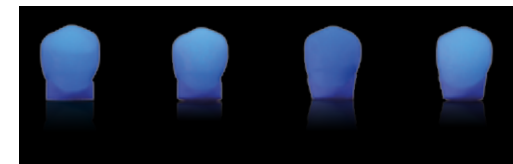

CRNO SVJETLO

*Nije zaštitni znak GC Europe

Povećajte svoje CAD/CAM restorativne mogućnosti s CERASMART™!



Gore lijevo: Inlej, uz dozvolu dr. Gumpei Koike, Japan

Gore desno: Endo-krunica, uz dozvolu dr. Gilles Aldié, (e-Dentisterie), Francuska

Dolje lijevo: Onlej, uz dozvolu dr. Rich Rosenblatt, SAD

Dolje desno: Krunica, uz dozvolu prof. Marleen Peumans, Belgija

Pametniji sustav za pametniji tijek rada

Bez glaziranja, bez pečenja

Završni koraci za estetski rad su olakšani izborom dvije opcije: jednostavno ručno poliranje ili brza karakterizacija jednim potezom kista... korištenjem premaza otpornog na trošenje, Optiglaze Color.

