



Confort și protecție timp de 24 de ore cu **GC.**
Dry Mouth Gel pe timpul zilei,
Tooth Mousse și **MI Paste Plus** pe timpul nopții.



GC Dry Mouth Gel

Pachet Asortat, 10 tuburi,
 4 Mentă, 2 Zmeură, 2 Portocală, 2 Lămâie
 Conținutul unui tub: 40 g (35 ml)
 Arome disponibile:
 Portocală, Zmeură, Lămâie & Mentă



GC Saliva-Check Buffer

Cutie cu 20 teste
 20 benzi pentru testarea pH-ului in vitro
 20 pahare pentru colectarea salivei
 20 bucăți de gumă pentru stimularea salivei
 20 pipete pentru dozarea salivei
 20 benzi pentru testarea capacității tampon



GC MI Paste Plus

Pachet Asortat, 10 Tuburi, 2 din fiecare aromă
 O singură aromă: 10 tuburi 1 aromă
 Conținutul unui tub: 40 g (35 ml)
 Arome disponibile:
 Pepene galben, Căpșuni, Tutti-Frutti, Mentă & Vanilie



GC Tooth Mousse

Pachet Asortat, 10 Tuburi, 2 din fiecare aromă
 O singură aromă: 10 tuburi 1 aromă
 Conținutul unui tub: 40 g (35 ml)
 Arome disponibile:
 Pepene galben, Căpșuni, Tutti-Frutti, Mentă & Vanilie



Ameliorare
 la îndemână
 oricând,
 oriunde!

Dry Mouth Gel
 de la **GC.**

Gel cu pH neutru conceput pentru a ajuta la eliminarea
 disconfortului gurii uscate și a oferi un confort de durată
 și un efect calmant persoanelor care suferă de uscăciune
 a cavității orale.



CPP-ACP a fost dezvoltat de School of Dental Science din cadrul Universității din Melbourne
 Victoria / Australia. RECALDENT™ este folosit sub licență RECALDENT™ Pty. Limited.
 RECALDENT™ CPP-ACP este derivat din caseină lactată, și nu trebuie folosit în cazul pacienților
 cu alergii la proteinele din lapte și/sau la hidroxibenzoați.

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Interleuvenlaan 33
 B - 3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GC EEO - Romania
 BD. N. Balcescu, nr. 5C
 bl. Dunarea 1, ap. 57, sect. 1
 RO - Bucuresti
 Tel. +40.21.315.93.15
 Fax. +40.21.315.93.15
 romania@gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com



Minimă
 Intervenție

z LLFRO 12.16.01/09



Importanța salivei este recunoscută doar atunci când lipsește.

Saliva îndeplinește o serie de roluri importante în cavitatea orală. Printre acestea lubrifierea țesutului oral și stimularea digestiei, asistarea gustului, menținerea sănătății mucoasei orale și favorizarea remineralizării dinților.

Uscarea gurii - cauze și mod de identificare

Gura uscată este de obicei o **condiție sub-diagnosticată** iar simptomele nu reprezintă un indicator precis al cantității și calității debitului glandei salivare în repaos. Într-adevăr, **pacienții pot să nu conștientizeze** debitul redus până în momentul în care fluxul salivei de repaos ajunge la mai puțin de jumătate din fluxul normal. Deshidratarea și uscăciunea cavității orale pot foarte ușor afecta indivizii sănătoși datorită unui număr de factori ai stilului de viață (ex. consumul de cafeină, alcool și nicotină). Mai mult, **multe afecțiuni medicale majore** sunt asociate cu xerostomia (sindromul Sjögren, diabetul, radioterapia). Pe lângă acestea, **peste 300 de medicamente** pot produce xerostomie - inclusiv cele auto-administrate și cele disponibile fără rețetă cum ar fi expectorantele, decongestionantele precum și medicamentele prescrise.



Ați avut pacienți care să acuze următoarele simptome?

- Gură uscată
- Dificultate la înghițire
- Gust rău / Halitoză
- Dificultate în vorbire

Ați observat unele din următoarele semne?


- **Modificări ale țesuturilor moi** - uscarea mucoasei, fisurarea și formarea plăcii bacteriene pe limbă
- **Modificări ale țesuturilor dure** - o rată crescută de apariție a cariilor, eroziuni, hipersensibilitate, acumulare crescută a plăcii bacteriene

Pentru a putea realiza o evaluare mai ușoară a pacienților care prezintă uscăciune a cavității orale, kiturile cum ar fi **Saliva Check Buffer** vă pot fi de un real ajutor. Acesta este un test direct în 5 etape care oferă informații utile, individualizate, referitoare la pH, cantitatea și capacitatea tampon a salivei.


Ameliorare imediată - oricând, oriunde: GC Dry Mouth Gel.

Dry Mouth Gel este un produs unic, fără zahăr, disponibil în patru arome delicioase. Este conceput să ajute la **ameliorarea simptomelor cavității orale uscate** și să ofere pacienților un **confort de durată** precum și un efect de calmare. Acest gel transparent este livrat într-un **tub compact** care va încăpea ușor în buzunar sau în poșetă, ceea ce înseamnă că poate fi folosit **oricând și oriunde atunci când este necesar**. Pacientul trebuie doar să aplice o cantitate generoasă de gel cu ajutorul degetelor curate pe suprafețele bucale și linguale ale dinților și pe țesuturile orale mucozale. În mod unic, spre deosebire de majoritatea substituenților salivare, Dry Mouth Gel are un **pH neutru**, ceea ce înseamnă că poate oferi o ameliorare efectivă a simptomelor, și în același timp **menține pH-ul oral în limitele normale** pentru a preveni demineralizarea.

Valoarea pH-ului Dry Mouth Gel (DMG) și a unui produs similar (OBA)

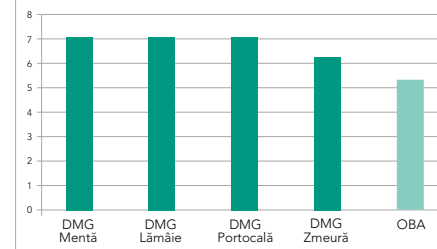

Potențialul de eroziune al dentinei bovine înainte și după aplicarea pe timpul nopții a Gelului Dry Mouth și a unui produs similar (OBA)

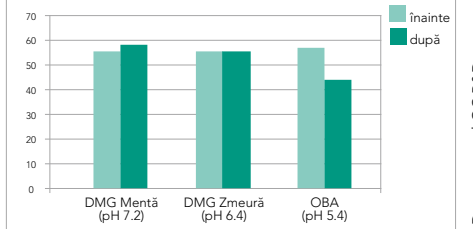

Departamentul GC R&D

Pacienții care prezintă următoarele afecțiuni pot beneficia de ajutorul Gelului Dry Mouth:

- Respirație orală pe perioada somnului
- Uscăciune a gurii datorată medicației prescrise sau a produselor disponibile fără rețetă
- Sindromul Sjögren
- Iradiere
- Afecțiuni de durată care pot împiedica fluxul salivar - e.x. diabetul zaharat, hepatita cronică C și alte boli autoimune care afectează țesuturile conjunctive cum ar fi lupus sistemic eritematos
- În cazul protezării pentru protecția țesutului și lubrifiere

Oferiți pacientului dumneavoastră mai mult confort pe perioada zilei cu...

Dry Mouth Gel

și mai multă protecție pe perioada nopții cu...
Tooth Mousse și MI Paste Plus

Pacienții cu un flux salivar deficitar prezintă un dezechilibru al ionilor necesari pentru protejarea țesuturilor dentare dure. În consecință, sunt predispuși la hipersensibilitate dentară, eroziuni dentare și carii. Cu toate că Dry Mouth Gel calmează simptomele cavității orale uscate, nu crește nivelul ionilor bio-disponibili de calciu, fosfor și fluor necesar pentru remineralizare și prevenție. O aplicare cu Tooth Mousse sau MI Paste Plus care conțin RECALDENT™ CPP-ACP, va restabili acest echilibru oral mineral necesar și va oferi extra protecție.

