

שחזורי EQUIA - מושלמים בתוך 3 וחצי דקות בלבד!

ניתן להשתמש ב-EQUIA בהתוויות הבאות: שחזורים סוג I, סוג II, סוג V ושחזור שיני חלב; עששת השורשים, תיקון שחזורים ישנים ויצירת מבנה.



הכנת חלל רגילה
שימוש אופציונלי ב-Conditioner. שטוף ביסודיות.
מילוי החלל ב-EQUIA Fil. גילוף החומר לאחר התקשות ראשונית.
גימור סופי תחת ספריי מים, 2 דקות ו-30 שניות לערך לאחר תחילת הערבוב.
מריחת EQUIA Coat. הקשיית אור למשך 20 שניות.
תוצאות מצוינות בתוך 3 וחצי דקות בלבד.

Prof. Dr. K.H. Friedl, Germany

מה אומרות ראיות מדעיות על EQUIA

הפיתוח של EQUIA התבסס על משוב חיובי משנים רבות של ניסיון קליני בשחזורי GIC בצמיגות גבוהה*. על בסיס זה, ישנן עדויות לכך שציפוי חומר מרוכב* משפר את התכונות הפיזיקליות של שחזור ה-EQUIA. מחקרים קליניים רבים הנערכים כעת ברחבי העולם מציגים תוצאות מבטיחות ביותר*.

- תוצאות קליניות מצביעות על כך ש-EQUIA מגלה התאמת גוון ראשונית מצוינת*.
- בהשוואה לחומר מרוכב Micro-filled לאורך תקופה של 12 חודשים, עולה כי EQUIA יעילה במידה דומה לזו של מערכת חומר מרוכב Micro-filled*.
- מהערכה בדיעבד, שנתיים אחרי ביצוע של כ-150 שחזורים, עולה כי ניתן להשתמש ב-EQUIA כחומר שחזור קבוע בכל גודל של חלל Class I ובחללים קטנים יותר מסוג Class II*.
- בהערכה קלינית נוספת בכ-245 מתרפאים לאורך תקופה של שנתיים, עולה כי מערכת ה-EQUIA נראית כבחירה מהימנה לשחזורים דנטליים ארוכי טווח, גם על פני שיניים נושאות עומס*.

* הנתונים זמינים בקובץ ובאתר <http://www.gceurope.com/goto/references>



מערכת ה-EQUIA זמינה במגוון ערכות משולבות, המכילות בקבוק 4 מ"ל של EQUIA Coat וקפסולות של EQUIA Fil המגיעות בנווני Vita® הבאים: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 ו-C4.

Vita® הנו סימן מסחרי רשום של Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, גרמניה.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
<http://www.gceurope.com>

GC Israel
4 Koifman st.
Tel Aviv
Israel 68012
Tel. +972.3.79.79.630
Fax. +972.3.51.61.982
info@gcisrael.com
<http://www.gcisrael.com>


EQUIA

מבית GC

הפתרון


לשחזורים אחוריים אסתטיים
בשיטת Bulk Fill.

רף חדש בטכנולוגיה שחזורית המאפשרת לך לעמוד בכל ציפיות המתרפאים שלך.

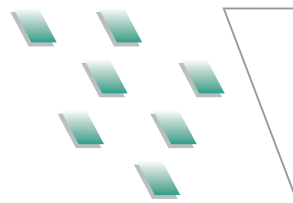

ייחודי - Unique

שכבה אחת של EQUIA Coat לא רק מגנה על השחזורים שלך מפני פגיעת לחות ושחיקה חומצית אלא גם מגבירה באופן משמעותי את התכונות הפיזיקליות של שחזור EQUIA. זהו שילוב ייחודי הקיים רק ב- EQUIA.

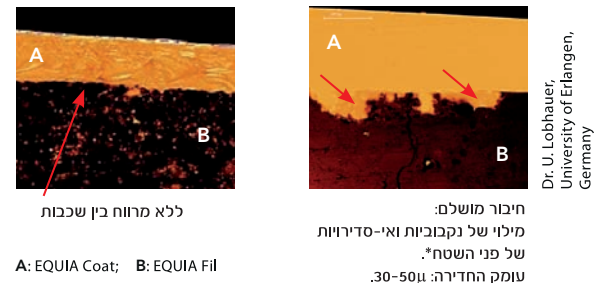


נוסף לכך, EQUIA Coat יוצר אטימת שוליים מצוינת שמגינה על שחזור ה-EQUIA מפני רגישות, דלף מיקרוסקופי ושינויי צבע*.

אינטליגנטי - Intelligent


הציפוי מתוכנן כך שישחק וייעלם באופן הדרגתי ואחיד תוך מספר חודשים. שחזור ה-EQUIA עובר אפקט התבגרות ייחודי המיוחס לרוק, שגורם לחוזק מוגבר ולערכים של חומרים מרוכבים אחוריים אוניברסליים*.

כאשר EQUIA Fil מצופה ב-EQUIA Coat ניתן להבחין בעמידות גבוהה בפני שבר ובעמידה בפני כוחות כיפוף באופן ברור*. תכונות פיזיקליות משופרות אלו מובילות לשחזורים עמידים בפני סדקים שמחזיקים מעמד זמן רב ושמסוגלים לעמוד בעומסים סיגריים כבדים.

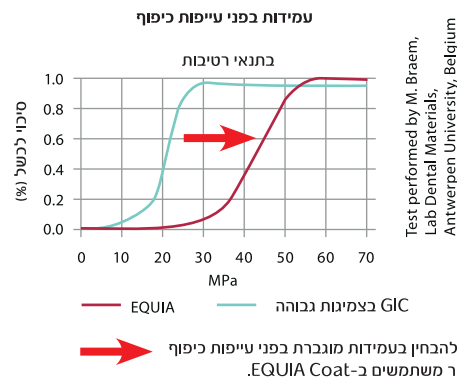


EQUIA משחררת כמות גדולה של פלואוריד, ומספקת בכך את ההגנה הנחוצה כל כך מפני עששת משנית, וכן הגנה עבור שיניים סמוכות.

שחרור פלואוריד

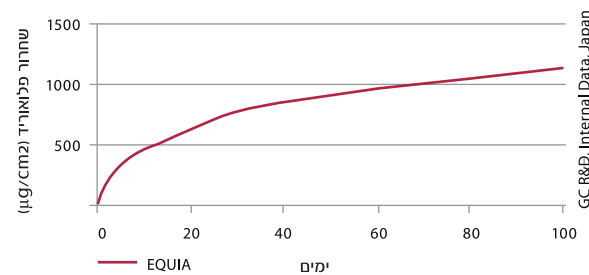


קשיות

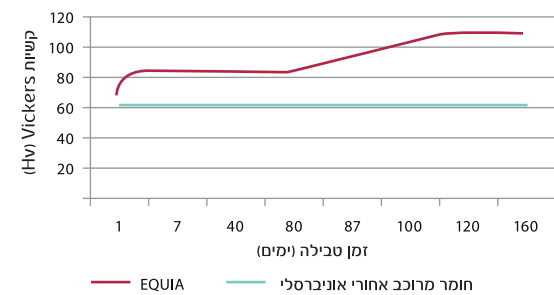

ק. קאטו ואחרים, The Influence of Coating for the Maturation of, Glass-Ionomer Cement, IADR 2006, abstract 2076


הודות לרדיופאקיות מצוינת, כל השחזורים נראים היטב בצילומי רנטגן.

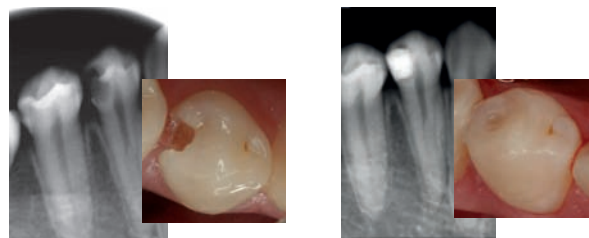

תם החיפוש אחר חומר מילוי אסתטי וחסכוני לשחזור.


EQUIA היא מערכת שחזור ייחודית שמאחדת דור חדש של גלאס יונומרים (EQUIA Fil Capsules) עם חומר ציפוי מחומר מרוכב EQUIA COAT. EQUIA משלבת טיפול מהיר וקל עם תכונות פיזיקליות מושלמות ואסתטיקה ללא פשרות.

EQUIA של GC מרחיבה את אפשרויות השחזור האחורי האסתטי שלך כדי לעמוד בציפיות של המתרפאים שלך.

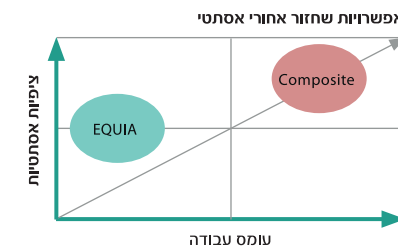

קל - Easy

הודות לעמידות גבוהה בפני לחות ולמידת התכווצות נמוכה, ומאחר שלא דווח על רגישות בשיניים לאחר טיפול, EQUIA מיועדת למילוי כל החלל בחומר שחזור בבת אחת ללא צורך במס' שכבות - כל זה ללא שימוש בחומרי צריבה וקישור יקרים ומסובכים.

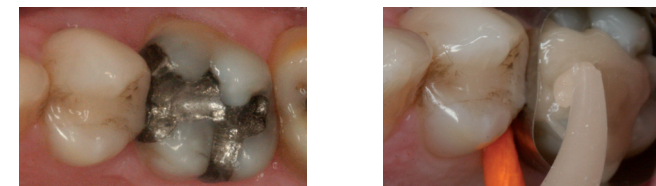

מהיר - Quick

חלקיקי הזכוכית מהדור החדש של EQUIA Fil מאפשרים ריאקציה מהירה יותר שמובילה לזמן התקשות כולל קצר יותר. העמידות המעולה בפני לחות של EQUIA Fil מאפשרת מילוי מהיר וקל וללא הכרח בסכר גומי. EQUIA אף ניתנת ל"דחיסה" ואינה נדבקת לכלים בעת עבודה. שכבה אחת בלבד של EQUIA Coat, בשלב הסופי יוצרת החלקה מושלמת של שטח הפנים וברק טבעי. כתוצאה מכך, אין כל צורך בגימור ובליתוש מורכבים.

הזמן הממוצע שנדרש להשלמת שחזור דו משטחי עם סוגים שונים של חומרי שחזור.

זמן כולל	חומר מרוכב	אמלגם	EQUIA
בדקות	25.86	20.50	17.24
באחוזים	150 %	118.91 %	100 %

EQUIA מעניקה יתרון זמן משמעותי של 50% לעומת שחזור חלל דו משטחי בחומר מרוכב רגיל ויתרון של כ-20% לעומת אמלגם.

*Adapted from: 'Materialien zur Beanspruchungsdauer und Beanspruchungshöhe ausgewählter Behandlungsanlässe', Prof. Dr. K.H. Friedl, Deutscher Zahnärzte Verlag DÄV 2002.



אסתטיקה - Aesthetic

הפתרון האמיתי הראשון שהוא ידידותי לסביבה, אסתטי וחסכוני. EQUIA מציעה תכונות אופטיות טבעיות שהופכות אותה לחלופה מושלמת עבור השחזורים האחוריים שלך.

