

everX Flow од GC

Силен кон јадрото



Балк боја
за длабоки
кавитети

**Дентинска
боја**
за високи естетски
резултати



Подгответе го кавитетот



Во случај на кавитет Класа II, изградете ги ѕидовите што недостасаваат со композит кој вообичаено го користите



Исполнете го кавитетот со everX Flow



Краен резултат после прекривање со вообичаениот композит

everX Flow	
012900	everX Flow, шприц 2 ml (3.7g) Балк боја ЕЕР
012901	everX Flow, шприц 2 ml (3.7g) Дентинска боја ЕЕР

Дознајте повеќе



G-Premio BOND
Универзално адхезивно
средство



G-aenial Universal Injectable
Инјектирачки реставративен
материјал со голема цврстина



Essentia Universal
Универзален композит
во паста

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND и G-aenial Universal Injectable се заштитени трговски марки на GC. Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ и Tetric EvoFlow Bulk Fill не се заштитени трговски марки на GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info.eeo@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Овластен дистрибутер
за Македонија:
ДЕНТОМЕД-М
Ул. "Бојмија" бр. 2/2
Пошт. фак. 182
1000 Скопје
Тел./Факс: 02/24.62.739
Тел. 02/24.64.781
dentomed@t-home.mk

ZOLF MK 19 02 07/19

Силен кон јадрото

everX Flow™ од GC

Течен композит зајакнат
со кратки стаклени влакна
за замена на дентинот

everX Flow од GC

Силен кон јадрото


Откријте го **everX Flow**, течен композит зајакнат со кратки стаклени влакна направен за **замена на дентинот и дополнително зајакнување на реставрациите**. Следејќи го истиот принцип на железните зајакнувања на конрукции, стаклените влакна во everX Flow ги зајакнуваат реставрациите и истите ги **заштитиуваат од кршење**.

Поради лесното нанесување, две бои и неверојатна јачина, everX Flow **ќе биде Вашиот нов избор за сите реставрации каде што има потреба од силно јадро**, како и за изработка на надградби.



Супериорна отпорност на фрактури за долготрајни големи реставрации

Повеќето композити имаат одлични својства за замена на емајлот: висока отпорност на истрошување и естетика. Сепак, композитите неможат да се изедначат со дентинот кога станува збор за отпорност на фрактури. everX Flow го надминува овој проблем и поседува **одлична отпорност на фрактури слична со дентинот**, благодарение на **големата количина на кратки стаклени влакна** силно поврзани во матрицата од смола. Тоа му овозможува на материјалот **ефикасно да зајакне големи постериорни реставрации**, во комбинација со конвенционален композит, кој го користите како емајлов слој.

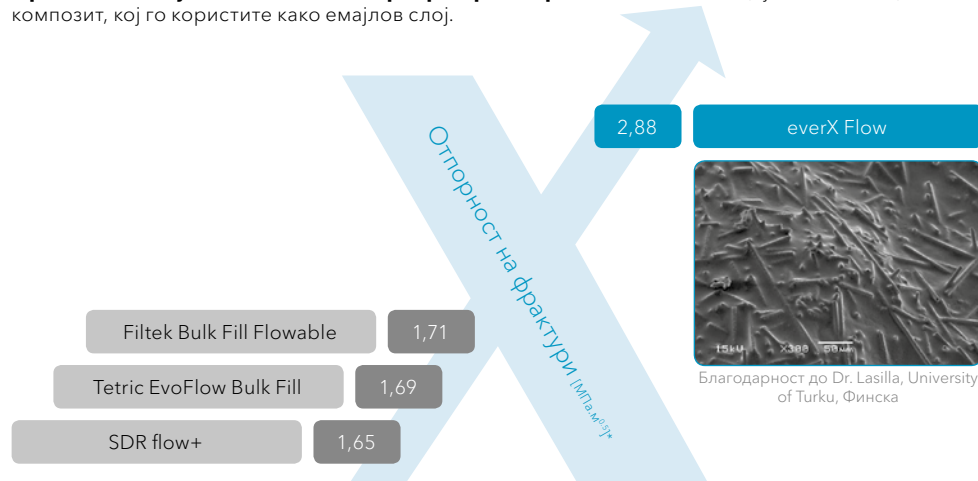

* Извор: GCC R&D - Податоците се достапни во досие. Тестот е изведен според ASTM E399-90 (1997).

Совршена тиксотропност за лесно нанесување и одлична адаптација




Благодарение на неговата оптимална тиксотропност, everX Flow лесно **ќе се адаптира на секоја препаација** и ќе помогне да се **избегне порозност**.



Исто така, неговото контролирано течење ќе Ви овозможи да го нанесете на горните молари **без да капне**.

Благодарност до Dr Javier Tapiá Guadix, Spain

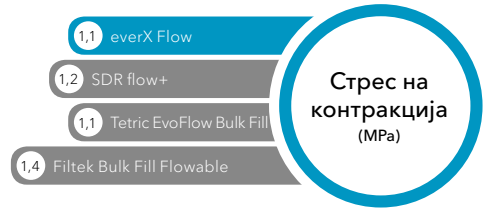

Извор: GCC R&D - Податоците се достапни во досие.

Две бои за да одговори на сите Ваши потреби



Оптимално за **длабоки постериорни кавитети**



Оптимално за **поестетски резултати** и за **надградби**

Совршен за зајакнување на големи кавитети и постигнување на долготрајни естетски резултати



Препаација на кавитет



Нанесување на **everX Flow** (Дентинска боја)



Завршен слој со **Essentia** (Универзална боја)



Краен резултат



Препаација на кавитет



Нанесување на **everX Flow** (Балк боја)



Завршен слој со **G-aenial Universal Injectable** (A3 боја)



Краен резултат

Благодарност до Georg Benjann, Германија

Благодарност до Dr. Lucile Dahan, Франција