



40 ans de progrès en matière de précision des matériaux d'empreinte

EXA Advanced™
de GC

Matériau d'empreinte en silicone-A



EXA Advanced
Regular type
Prise normale

138500



EXA Advanced
Regular type
Prise rapide

138100



EXA Advanced
Injection type
Prise normale

138700




EXA Advanced
Injection type
Prise rapide

138300

GC

La qualité d'une marque EXA

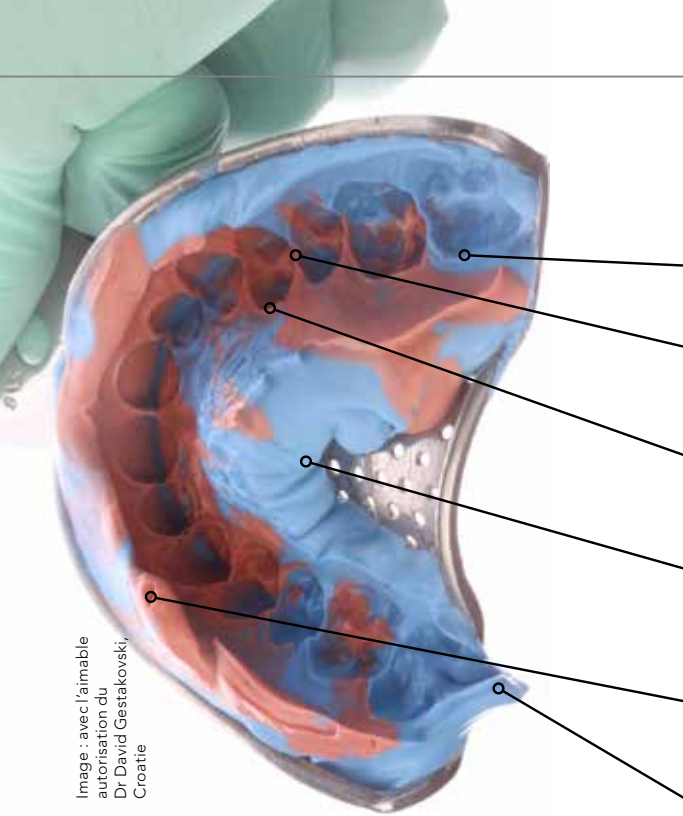

Rigidité et élasticité en parfait équilibre pour des résultats optimaux

Résistant au déchirement pour une reproduction fidèle des marges de préparation les plus fines

Hydrophile pour capturer tous les détails nécessaires à une reproduction précise



Élasticité, goût et odeur agréables pour le meilleur confort possible tant pour les patients que pour les praticiens

Bonne résistance à la déformation due au retrait de l'empreinte.

Maintient sa précision même après stockage et transport, grâce à une excellente stabilité dimensionnelle

Image : avec l'aimable autorisation du Dr David Gestakovski, Croatie

Résistance accrue au déchirement*

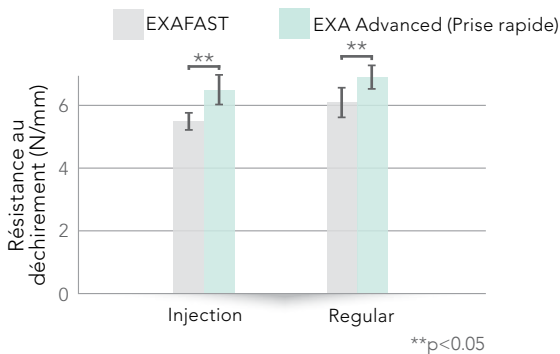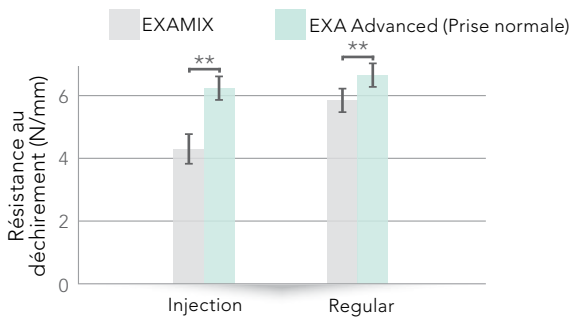

Temps de travail et de prise

	Temps de travail à 23°C	Temps de prise en bouche
EXA Advanced Normal set (Injection & Regular)	2'00"	4'00"
EXA Advanced Fast set (Injection & Regular)	1'00"	1'30"

Guide d'utilisation des techniques

Technique	Injection	Regular
Deux étapes, deux matériaux	● Putty ● Injection Comme matériau wash avec EXAFAST ou EXAFLEX Putty	● Putty ● Regular Comme matériau wash avec EXAFAST ou EXAFLEX Putty
Une étape, deux matériaux	● Putty ● Injection Comme matériau wash avec EXAFAST Putty	● Putty ● Regular Comme matériau wash avec EXAFAST Putty
	⋯ Recommandé	

*Par rapport à EXAMIX et EXAFAST

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC Europe NV

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tél. +32.16 74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://europe.gc.dental/fr-BE>

GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office
Zürichstrasse 31
CH-6004 Luzern
Tél. +41.41.520.01.78
Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental
<https://europe.gc.dental/fr-CH>



Since 1921
100 years of Quality in Dental