



# Le nuove evoluzioni dopo 40 anni di impronte accurate

EXA Advanced™  
di GC

Materiale da impronta in silicone A



**EXA Advanced**  
Formulazione iniettabile  
Indurimento normale

138500



**EXA Advanced**  
Formulazione iniettabile  
Indurimento rapido

138100



**EXA Advanced**  
Formulazione iniettabile  
Indurimento normale

138700



**EXA Advanced**  
Formulazione iniettabile  
Indurimento rapido

138300

**GC**

# La qualità di un brand EXA

Rigidità ed elasticità in perfetto equilibrio per ottenere risultati ottimali

Resistenza alle lacerazioni per una riproduzione accurata dei più dettagliati margini delle preparazioni.

Idrofilia per rilevare tutti i dettagli necessari al fine di una riproduzione accurata.


Il materiale presenta un totale recupero dopo la deformazione che si verifica a seguito della rimozione dalla bocca del paziente.

Il materiale presenta un totale recupero dopo la deformazione che si verifica a seguito della rimozione dalla bocca del paziente.

Mantiene inalterata l'accuratezza durante i giorni di conservazione e trasporto, grazie all'eccellente stabilità dimensionale.

Immagine: per gentile concessione del Dott. David Gestakovsky, Croazia

## Maggiore resistenza alle lacerazioni\*

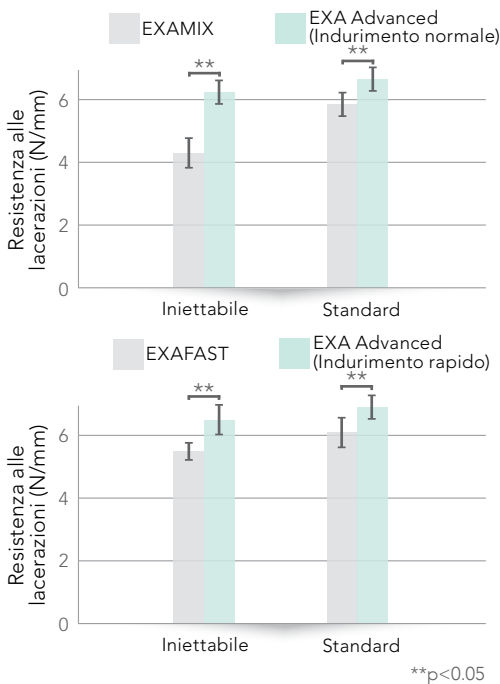

## Tempi di lavorazione e di indurimento

	Tempo di lavorazione a 23°C	Tempo di indurimento in bocca
EXA Advanced Standard set (Iniettabile & Standard)	2'00"	4'00"
EXA Advanced Rapido set (Iniettabile & Standard)	1'00"	1'30"

## Guida all'uso della tecnica

Tecnica	Iniettabile	Standard
Due passaggi, due materiali	● Putty ● Iniettabile Come materiale wash con EXAFAST o EXAFLEX Putty	● Putty ● Standard Come materiale wash con EXAFAST o EXAFLEX Putty
Un passaggio, due materiali	● Putty ● Iniettabile Come materiale wash con EXAFAST Putty	● Putty ● Standard Come materiale wash con EXAFAST Putty
		Consigliato

\* Rispetto a EXAMIX e EXAFAST

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

**GC ITALIA S.r.l.**  
 Via Luigi Cadorna, 69  
 I-20090 Vimodrone (MI)  
 Tel.: +39 02 98282068  
<https://europe.gc.dental/it-IT>



**Since 1921**  
 100 years of Quality in Dental