

Číry ako sklo



EXACLEAR od GC

Číry vinyl polysiloxánový materiál

GRADIA® PLUS' partner
pre transparentnú prácu

- Dokonalá kontrola detailov
- Jednoduché spracovanie
- Rýchle tuhnutie

EXACLEAR a GRADIA PLUS

od GC

EXACLEAR je veľmi vhodný pre vytvorenie dočasných korúnok alebo faziet. Použitie kompozitu GC GRADIA PLUS Light Body namiesto akrylu je jednoduchšie a menej citlivé na techniku. Stačí vstreknúť materiál do formy z EXACLEARu!

Vďaka vysokej priehľadnosti máte optimálnu vizuálnu kontrolu a efektívnu polymerizáciu je možné dosiahnuť vytvrdením svetlom cez formu. Materiál je pevný, ale flexibilný a dá sa ľahko odstrániť a vrátiť do pôvodnej polohy bez roztrhnutia.

Môže byť - tiež zachované miesto pre navrstvenie skloviny s Heavy Body Enamel HB-EL alebo HB-ED. Finálna farebná charakterizácia a glazovanie s Luster Paint je už len, ako čerešnička na torte!



EXACLEAR aplikovaný na voskový model náhrady.



Prípravený model izolovaný so silikónovým izolantom a preparované zuby s GC GRADIA PLUS Separator.



Vstreknutie Light Body.



Kompozit je vytvrdený svetlom cez mimo-riadne číry silikónový kľúč z EXACLEAR.



Po odstránení silikónového kľúča a vstrekovacích kanálikov.



Dočasná náhrada dokončená s použitím Lustre Paint.

Váš partner pre všetky klinické prípady



Dočasné abutmenty na implantátoch s opaknou vrstvou GRADIA PLUS a vystužením s vláknom GC Stick.



Vstreknutý a polymerizovaný odtieň Light Body.



Po vyčistení a cut backu náhrady.



Modifikovanie povrchu s Lustre Paint a prekrytie s Heavy Body Enamel HB-EL alebo HB-ED.



Výsledná náhrada dokončená s Lustre Paint CL.

Prípady: Stephen Lusty, Spojené kráľovstvo
EXACLEAR, GC Stick a GRADIA PLUS sú obchodné značky GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

