

Imejte jasen pogled



GC EXACLEAR

Prozoren vinil polisiloksan

GRADIA® PLUS partner
za transparentne postopke

- Odličen nadzor nad podrobnostmi
- Enostavno rokovanje
- Hitro strjevanje

GC

GC EXACLEAR in GRADIA PLUS

EXACLEAR je zelo uporaben za izdelavo začasnih prevlek in lusk. Uporaba GC GRADIA PLUS Light Body je boljša kot akrilna in enostavneje ter manj občutljivo na tehniko. Preprosto iztisnete material v kalup (opornico) iz EXACLEAR.

Tako imate optimalno vizualno kontrolo zaradi visoke transparence in učinkovite polimerizacije, ki se lahko doseže preko prozorne opornice. Material je čvrst toda fleksibilen in se lahko odstrani in repositionira zelo enostavno, brez trganja.

Lahko se pusti prostor za prekritje z Heavy Body skleninsko HB-EL ali HB-ED. Končno barvanje in 'glaziranje' z Lustre Paint je nato tako kot česnja na vrhu torte!



EXACLEAR iztisnete v vakumsko narejeno opornico, ki jo namestimo preko wax-up (navoska).



Na delovnem modelu, ki je prekrit s silikonskim separatorjem preko prepariranih zob in z GC GRADIA PLUS separatorjem preko ostalih zob.



Injiciranje Light Body.



Kompozit je polimeriziran preko izjemno prozornega EXACLEAR.



Po odstranitvi silikonske opornice in očiščenju odprtin.



Začasne restoracije končane z Lustre Paint.

Vaš partner v kompleksnih kliničnih situacijah



Začasne implantatne nadgradnje z opačno plastjo GRADIA PLUS in GC Stick ojačitvijo.



Injiciran in polimeriziran Light Body.



Po očiščenju in končni obdelavi restoracije.



Površinska modifikacija z Lustre Paint, prekrita z Heavy Body skleninska HB-EL ali HB-ED.



Končan klinični primer z Lustre Paint CLF.



Klinični primer: Stephen Lusty, Združeno Kraljestvo
EXACLEAR, GC Stick in GRADIA PLUS so blagovne znamke podjetja GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

'GC'