

GC EXACLEAR

Za čist pogled



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, patrona 51 g (x 2), nastavak za miješanje II veličina L (x 6)
900114	Nastavak za miješanje II veličina L (x 60)

Vaši partneri u složenim kliničkim situacijama

Tehnika uštrcavanja

Laka kontrola
uštrcavanja pomoću
materijala EXACLEAR



S G-aenial Universal Injectable

Kompozit za uštrcavanje
velike čvrstoće i savršene
tikotropnosti

Tehnika slojevanja

Laka svjetlosna
polimerizacija
palatinalno pomoću
materijala EXACLEAR



S Essentia

Visoko estetski
kompozit s
jednostavnim
sistemom boja

Postavljanje ortodontskih vlaknima pojačanih retainera

Efikasna svjetlosna
polimerizacija spoja i vlakana
za pojačanje pomoću
materijala EXACLEAR



S everStickORTHO

Staklena vlakna
za pojačavanje za
estetske ortodontske
retainere

Privremene krunice i mostovi

Savršena svjetlosna
polimerizacija
materijala za krunice i
mostove pomoću
materijala EXACLEAR



S TEMPSMART DC

Privremeni materijal
s dvostrukim
stvrđivanjem za
krunice i mostove

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BA - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.470.736
Fax. +387.51.470.736
info.bosniaherzegovina@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Z O L F B A 03.68.03/20

Za čist pogled



GC EXACLEAR

Proziran vinil-polisiloksanški
materijal

Vaš partner za
transparentni rad

GC EXACLEAR

Transparentnost u radu

EXACLEAR je inovativni, prozirni silikonski materijal koji ispunjava potrebe zahtjevnih estetskih slučajeva te olakšava način postizanja dobrih rezultata. Njegova potpuna prozirnost čini ga posebno efikasnim u složenim kliničkim situacijama.



Visualna kontrola uštrcavanja kompozita.
*nisu zaštitni znaci tvrtke GC.



Kristalno čist pogled

Visoka prozirnost omogućuje izvrsnu vizuelnu kontrolu i vrlo efikasnu svjetlosnu polimerizaciju kroz silikon.

To dovodi do veće konverzije i izbjegava stvaranje inhibirajućeg sloja za kisik, što olakšava završno poliranje.



Prozirnost materijala EXACLEAR (krajnje desno) u poređenju sa konkurentnim proizvodima.

Optimalna konzistencija za uspješni postupak

Tečenje bez pritiska



Optimalna konzistencija za lako postavljanje u kašiku

Tečenje pod pritiskom



Tečući kod postavljanja za savršeno prilagođavanje preparaciji i tačnu reprodukciju detalja

Jednostavno brušenje



Krut i čvrst nakon stvrdnjavanja te jednostavan za brušenje i bušenje rupa za uštrcavanje

Bez trganja



Dovoljno fleksibilan za odstranjivanje bez loma ili deformacija

Jer je i vrijeme važno

Otisak je stvrdnut nakon samo 2 minute u ustima i može se odstraniti.



2 min. intraoralno



7 min. ekstraoralno

Ako se radi na modelu, materijal će se stvrdnuti kroz 7 minuta.

Otkrijte tehniku uštrcavanja

Izrada direktnih estetskih ljuski

EXACLEAR korišten zajedno s kompozitom za uštrcavanje, kao što je G-ænial Universal Injectable, omogućuje izradu estetskih restauracija kao što su indirektno ljuske, no na brži i jeftiniji način, uz manje invazivne preparacije.

Prozirnost materijala EXACLEAR omogućuje provjeru svakog malog detalja i sprječava stvaranje inhibirajućeg sloja za kisik, čime se olakšava završno poliranje. G-ænial Universal Injectable je vrlo pogodan za ovu tehniku, zbog svoje tiksotropnosti, čvrstoće i sjaja.



1. Početna situacija



2. Kašiku za otisak ispuniti materijalom EXACLEAR te uzeti otisak wax-up na modelu



3. Nakon stvrdnjavanja odstraniti silikon iz kašike



4. Izbušiti rupu kroz silikonski ključ i izraditi otvor za vrh štrcaljke s kompozitom



5. Izolirati susjedne zube, jetkati caklinu i nanijeti sredstvo za spajanje



6. Postaviti silikonski ključ u usta i uštrcati G-ænial Universal Injectable kroz rupu u ključu



7. Polimerizovati svjetlom silikonski ključ i zatim ga odstraniti



8. Oštricom odstraniti višak kompozita



9. Završni rezultat nakon nekoliko koraka poliranja

Terapija trošenja zuba pomoću direktnih kompozita

Tehnika uštrcavanja je takođe idealna za smanjenje trošenja zuba ili za rekonstrukciju složenih morfologija. Prozirnost materijala EXACLEAR pomaže kontrolisati uštrcavanje tokom istovremene obrade nekoliko zuba. Visoka svojstva čvrstoće i otpornost na trošenje materijala G-ænial Universal Injectable idealna je za takve slučajeve u stražnjem području.



1. Početna situacija



2. Kašiku za otisak ispuniti materijalom EXACLEAR i uzeti otisak wax-up na modelu



3. Situacija nakon terapije tehnikom uštrcavanja