



שקוף שזה עדיף.



EXACLEAR

מבית GC

חומר מטבע שקוף מויניל פוליסילוקסן

השותף שלך לעבודה שקופה

א.א.

EXACLEAR מבית GC

שקוף שזה עדיף!

EXACLEAR הוא חומר מטבע סיליקוני שקוף וחדשני, העונה לצרכים במקרים בעלי דרישות אסתטיות גבוהות ומאפשר השגת תוצאות מעולות. השקיפות המוחלטת שלו הופכת אותו ליעיל במיוחד במצבים קליניים מורכבים.



שליטה ייזאלית בהזרקת קומפוזיט.
*לא סימן מסחרי רשום של חברת GC



Transparency of EXACLEAR (far right) in comparison to competitors.

ראות צלולה כבדולה

השקיפות הגבוהה מציעה בקרה חזותית מעולה ויכולת מושלמת להקשיה באור דרך חומר המטבע הסיליקוני.

התוצאה היא שיעור המרה גבוה יותר והימנעות מיצירת שכבת מניעת-חמצון, וכך יכולת ליטוש קלה ומהירה יותר.

סמיכות מיטבית לביצוע מוצלח

לא נקרע



גמיש דיו להסרה ללא קריעה או עיוות

קל לקידוח



קשיח וחזק לאחר ההקשיה, קל לחיתוך וקידוח חורי הזרקה

זרימה תחת לחץ



רמת זרימה גבוהה תחת לחץ במהלך לקיחת המטבע, להתאמה מושלמת להכנה ולשעתוק מדויק של הפרטים הקטנים ביותר

זרימה ללא לחץ



סמיכות מיטבית, להזרמה קלה לכף המטבע

כי גם הזמן חשוב

לאחר 2 דקות בלבד בפה המטבע מתקשה וניתן להסרה.

בעבודה על מודל, החומר יתקשה תוך 7 דקות.



7 דקות מחוץ לפה



2 דקות בתוך הפה

גלו את טכניקת ההזרקה לתבנית

יצירת ציפויים ישירים בצד הכסא

EXACLEAR, בשילוב עם קומפוזיט להזרקה, כגון G-aenial Universal Injectable, מאפשר לרופאים ליצור שחזורים אסתטיים כמו ציפויים מעבדתיים, אך בתהליך מהיר יותר, בעלות נוחה יותר ותוך שימוש בהכנות יותר שמרניות.

השקיפות של EXACLEAR מאפשרת לך לבחון כל פרט קטן ומונעת היווצרות של שכבת מניעת-חמצון (oxygen inhibition layer), וכך מקלה על תהליך הליטוש הסופי. G-aenial Universal Injectable מתאים היטב לטכניקה זו, בגלל הטיקסטורופיות הגבוהה שלו, החוזק והברק הסופי.



3. לאחר התקשות, הסרת המטבע השקוף מכף המטבע



2. מילוי כף מטבע ללא חורים ב-EXACLEAR ולקיחת מטבע של דגם עם השלמת שיעור (wax-up)




1. מצב התחלתי



6. מיקום מפתח הסיליקון בפה המתרפא והזרקת שבמפתח G-aenial Universal Injectable דרך החור



5. בידוד השיניים הסמוכות, צריבת זוגית השן והנחת חומר קישור

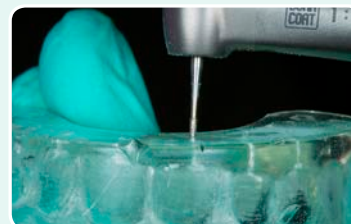

4. קידוח חורים דרך מפתח הסיליקון, ליצירת חלל לטיפ של מזרק הקומפוזיט



9. תוצאה סופית לאחר שלבי ליטוש ספורים



8. סילוק שאריות קומפוזיט באמצעות להב



7. הקשיה באור של הקומפוזיט דרך מפתח הסיליקון, ולאחר מכן הסרת מפתח הסיליקון.

צורנית A. Salehi ד"ר

טיפול לצד הכסא בשחיקה כללית באמצעות קומפוזיט ישיר

טכניקת ההזרקה לתבנית אידיאלית גם לטיפול במקרי שחיקה סגרית, או ליצירת מחדש של מורפולוגיה מורכבת. השקיפות של EXACLEAR מסייעות לראות ולשלוט בהזרקת החומר, בזמן הטיפול בכמה שיניים במקביל. החוזק הגבוה לכפיפה והעמידות הגבוהה לשחיקה של G-aenial Universal Injectable אידיאליות למקרים כאלו של שיניים אחוריות.



3. המצב לאחר הטיפול, תוך שימוש בטכניקת ההזרקה הישירה



2. מילוי כף מטבע ב-EXACLEAR ולקיחת מטבע של השלמת שיעור על מודל גבס



1. מצב התחלתי

צורנית A. Mak ד"ר אוטלר

EXACLEAR מבית GC

שקוף שזה עדיף!



EXACLEAR	
EXACLEAR 2, שפופרות של 48 מ"ל, 6 טיפים לערבוב II בגודל 5	012792
60 טיפים לערבוב II בגודל 5	800100

השותפים שלך לסיטואציות קליניות מורכבות

כתרים וגשרים זמניים

הקשיה מושלמת באור של חומרי שחזור לגשרים וכתרים זמניים דרך EXACLEAR



עם TEMPSMART DC

חומר שחזור זמני לכתרים וגשרים עם הקשיה כפולה

הנחת סיבי קיבוע אורתודונטיים

הקשיה יעילה של חומר הקישור והסיבים דרך EXACLEAR



עם EverStick ORTHO

קיבוע שיניים אסתטי לאחר טיפול אורתודונטי

טכניקת ריבוד בשכבות

הקשיה קלה באור מהצד החכי דרך EXACLEAR



עם Essentia

קומפוזיט אסתטי במיוחד עם שיטת בחירת גוונים פשוטה

טכניקת הזרקה לתבנית

שליטה קלה בהזרקה דרך EXACLEAR



עם G-aenial Universal Injectable

חומר שחזור בהזרקה עם חוזק גבוה וטיקסטורפיות מושלמת

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC ISRAEL
4 Koifman st.
Tel Aviv
Israel 68012
Tel. +972.3.79.79.610
Fax. +972.3.51.61.982
info.gcisrael@gc.dental
http://www.gcisrael.com

