



Mieć doskonały widok



EXACLEAR
z GC

Transparentny materiał
poliwinylsiloksanowy

Twój partner
do przejrzystej pracy

GC

EXACLEAR z GC

Przezroczystość w Twojej pracy

EXACLEAR to innowacyjny, przezroczysty materiał silikonowy, który spełnia potrzeby szczególnie wymagających przypadków estetycznych i ułatwia drogę do doskonałych rezultatów. Jego całkowita przezroczystość sprawia, że jest szczególnie skuteczny w złożonych sytuacjach klinicznych.



Wizualna kontrola wstrzykiwania kompozytu.

* Nie są znakami towarowymi GC



Krystalicznie czysty obraz

Wysoka przezroczystość zapewnia doskonałą kontrolę wizualną i bardzo skuteczne utwardzanie światłem przez silikon.

Prowadzi to do wyższego współczynnika konwersji i zapobiega tworzeniu się warstwy inhibicji tlenowej, co **ułatwia końcowe polerowanie**.



Przezroczystość EXACLEAR (z prawej) w porównaniu do konkurentów.

Optymalna konsystencja do przeprowadzenia udanej procedury

Zapływanie przy braku nacisku



Optymalna konsystencja **ułatwiająca umieszczanie w łyżce**

Zapływanie pod wpływem nacisku



Płynna podczas wprowadzania dla zapewnienia **doskonałego dopasowania** do preparacji i **precyzyjnego odtworzenia szczegółów**

Łatwe nawiercanie



Sztywna i stabilna po związaniu i łatwa do nacinania i wywiercania otworów do wstrzykiwania

Nie rozrywa się



Na tyle **elastyczna**, aby podczas zdejmowania materiał **nie pękał i nie odkształcał się**

Ponieważ liczy się również czas

Już po **2 minutach** w jamie ustnej wycisk jest utwardzony i można go usunąć.

W przypadku pracy na modelu, materiał zwiąże w ciągu **7 minut**.



2 min w jamie ustnej



7 min poza jamą ustną

Odkryj iniekcyjną technikę modelowania

Licówki wykonywane metodą bezpośrednią na fotelu

EXACLEAR stosowany wraz z kompozytem do wstrzykiwania, takim jak G-ænial Universal Injectable, umożliwia klinicyście wykonanie równie estetycznych jak licówki pośrednie uzupełnień, ale szybszą, bardziej przystępną metodą i przy wykorzystaniu **mniej inwazyjnych preparacji**.

Przezroczystość EXACLEAR pozwala sprawdzić **każdy najmniejszy szczegół** oraz zapobiega tworzeniu się warstwy inhibicji tlenowej, ułatwiając w ten sposób końcowe polerowanie. **G-ænial Universal Injectable** doskonale nadaje się do tej techniki ze względu na tiksotropię, wytrzymałość i połysk.



1. Sytuacja wyjściowa



2. Nałożyć EXACLEAR na łyżkę wyciskową i pobrać wycisk modelu woskowego



3. Po związaniu zdjęć przezroczysty silikon z łyżki



4. Nawiercić otwór w kluczu silikonowym aby stworzyć miejsce dla końcówki z kompozytem



5. Odizolować sąsiednie zęby, wytrawić szkliwo i nałożyć środek łączący



6. Umieścić klucz silikonowy w jamie ustnej i wstrzyknąć G-ænial Universal Injectable przez otwór w kluczu



7. Utwardzić światłem przez klucz silikonowy, a następnie go wyjąć



8. Usunąć nadmiary kompozytu za pomocą skalpela



9. Efekt końcowy po kilku krokach polerowania

Dzięki uprzejmości Dr A.Salehi, Francja

Leczenie uogólnionego patologicznego starcia zębów metodą bezpośrednią z zastosowaniem kompozytów

Technika modelowania iniekcyjnego jest również idealna do odbudowy startych zębów lub do odtwarzania złożonych morfologii. Przezroczystość EXACLEAR pomaga widzieć i kontrolować wstrzykiwanie podczas leczenia kilku zębów jednocześnie. Wysoka wytrzymałość na zginanie i odporność na ścieranie **G-ænial Universal Injectable** są idealne do takich przypadków w zębach bocznych.



1. Sytuacja wyjściowa



2. Nałożyć EXACLEAR na łyżkę wyciskową i pobrać wycisk modelu woskowego



3. Sytuacja po leczeniu przy użyciu iniekcyjnej techniki modelowania

Dzięki uprzejmości Dr A.Mak, Australia

EXACLEAR z GC

Mieć doskonały widok



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 51 g nabój, 6x końcówka mieszająca II L
900114	Kończówki mieszające II L (60)

Twoi partnerzy w złożonych sytuacjach klinicznych

Technika modelowania iniecyjnego

Łatwa kontrola wstrzykiwania przez EXACLEAR



Wraz z G-aenial Universal Injectable
Kompozyt do wstrzykiwania o wysokiej wytrzymałości i doskonałej tiksotropii

Technika warstwowa

Łatwe utwardzanie światłem przez EXACLEAR



Wraz z Essentia
Wysoce estetyczny kompozyt o uproszczonym systemie odcieni

Umieszczanie retainerów ortodontycznych z włókna szklanego

Skuteczne utwardzanie światłem kleju i włókna przez EXACLEAR



Wraz z everStickORTHO
Wzmocnione włókno szklane na estetyczne retainery ortodontyczne

Prace z tymczasowymi koronami i mostami

Idealne utwardzanie światłem materiału C&B przez EXACLEAR



Wraz z TEMPSMART DC
Podwójnie utwardzalny materiał na tymczasowe korony i mosty

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.312.52.08
info.poland@gc.dental
<https://europe.gc.dental/pl-PL>