



Obțineți o imagine clară



## EXACLEAR de la GC

Material vinil polisiloxanic  
transparent

Partenerul dumneavoastră  
pentru lucrări transparente

**GC**

# EXACLEAR de la GC

## Transparența lucrărilor dumneavoastră

EXACLEAR este un material inovator, din silicon transparent, ce vine în întâmpinarea cazurilor cu cerințe estetice ridicate și facilitează obținerea unor rezultate excepționale. Transparența sa totală îl face eficient în mod special în cazul situațiilor clinice complexe.



Control vizual a injectării compozitului.

\*Nu sunt mărci înregistrate GC



## Imagine limpede ca cristalul

**Transparența ridicată** oferă control vizual foarte bun și o polimerizare extrem de eficientă prin silicon.

Acest lucru determină o rată de conversie mai ridicată și evitarea formării unui strat inhibitor de oxigen, fapt ce face ca **finisarea finală să fie mai simplă**.



Transparența lui EXACLEAR (dreapta în spate) în comparație cu produse concurente.

## Consistență optimă pentru o procedură reușită

Fluid fără presiune



Consistență optimă pentru o **aplicare simplă în lingură**

Fluid sub presiune



Fluid pe perioada inserării pentru o **adaptare perfectă** la preparație și o **reproducere exactă a detaliilor**

Ușor de frezat



**Rigid și rezistent** după realizarea prizei, tăiere și frezare ușoare a găurilor de injecție

Fără rupere



Suficient de **flexibil** pentru a fi îndepărtat **fără rupere sau deformare**

## Pentru că și timpul contează

După doar **2 minute** intra-oral amprenta face priză și poate fi îndepărtată.

Atunci când se lucrează pe model, materialul va face priză în **7 minute**.



2 min intra oral



7 min extra oral

# Descoperiți tehnica de realizare a obturațiilor prin injectare

## Realizarea în cabinet a fațetelor directe

EXACLEAR utilizat împreună cu un compozit injectabil cum ar fi G-ænial Universal Injectable oferă medicului stomatolog posibilitatea de a crea restaurări cu o estetică similară cu cea a fațetelor indirecte, dar mai rapid, mai economic și utilizând mai puține preparații invazive.

Transparența lui EXACLEAR vă permite să verificați cele **mai mici detalii** și previne formarea unui strat inhibitor de oxigen, facilitând astfel lustruirea finală. **G-ænial Universal Injectable** este adecvat pentru această tehnică datorită tixotropicității sale, a rezistenței și a luciului.



1. Situație inițială



2. Umpleți lingura de amprentă cu EXACLEAR și luați amprenta machetei de ceară de pe model



3. După realizarea prizei, îndepărtați siliconul transparent din lingură



4. Realizați o gaură prin cheia de silicon pentru a crea spațiu pentru vârful compozitului



5. Izolați dinții învecinați, demineralizați smalțul și aplicați un agent de adeziune



6. Introduceți cheia de silicon în cavitatea orală și injectați G-ænial Universal Injectable prin gaura realizată în cheia



7. Fotopolimerizați prin cheia de silicon și apoi îndepărtați-o



8. Îndepărtați excesul de compozit cu o lamă



9. Rezultat final după câteva etape de lustruire

Imagini prin amabilitatea Dr. A. Salehi, Franța

## Tratamentul în cabinet a uzurii generalizate cu compozite directe

Tehnica de realizare a obturațiilor prin injectare este ideală de asemenea pentru a trata cazurile de uzură sau pentru a recrea morfologii complexe. Transparența lui EXACLEAR ajută la observarea și controlul injectției în timp ce se tratează mai mulți dinți simultan. Rezistența ridicată la flexiune și rezistența la abraziune a lui **G-ænial Universal Injectable** sunt ideale pentru astfel de cazuri posterioare.



1. Situație inițială



2. Umpleți lingura de amprentă cu EXACLEAR și luați amprenta machetei de ceară de pe model



3. Situație după tratament utilizând tehnica de realizare a obturațiilor prin injectare

Imagini prin amabilitatea Dr. A. Mak, Australia

# EXACLEAR de la GC

## Obțineți o imagine clară



### EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 51 g cartușe, 6x vârfuri de mixare II mărime L
900114	Vârfuri de mixare Tip II L (60)

## Partenerii dumneavoastră în situații clinice complexe

### Tehnica de realizare a obturațiilor prin injectare

Control facil al injectăii prin EXACLEAR



#### Cu G-aenial Universal Injectable

Compozit injectabil cu rezistență ridicată și tixotropicitate perfectă

### Tehnica de stratificare

Fotopolimerizare palatinală simplă prin EXACLEAR



#### Cu Essentia

Compozit cu grad ridicat de estetică ce utilizează un sistem de nuanțe simplificat

### Aplicarea dispozitivelor cu fibre ortodontice

Fotopolimerizare performantă a agentului de adeziune & fibrelor prin EXACLEAR



#### Cu everStickORTHO

Consolidare cu fibre de sticlă pentru dispozitive ortodontice estetice

### Coroane și punți provizorii

Fotopolimerizare perfectă a materialului C&B prin EXACLEAR



#### Cu TEMPSMART DC

Material provizoriu cu polimerizare duală pentru coroane și punți

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.02.14  
 info.gce@gc.dental  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GCEEO Romania  
 Str. Carol Davila 21A,  
 etaj 2, ap.17, sector 5  
 RO - 050451 București  
 Tel: +40.31.425.75.27  
 info.romania@gc.dental  
 www.eeo.gceurope.com