

GC EXACLEAR

Imejte jasen pogled



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 51 g kartuše, 6x mešalni nastavek tip II, velikost L
900114	Mešalni nastavki tip II L (60)

Vaš partner pri kompleksnih kliničnih primerih

Tehnika oblikovanja z odtisi (mock-up)

Enostavna kontrola injiciranja preko EXACLEAR



Z G-aerial Universal Injectable

Iztisljiv kompozit z visoko trdnostjo in odlično tiksotropnostjo

Tehnika plastenja

Enostavna svetlobna polimerizacija palatinalno preko EXACLEAR



Z Essentia

Visoko estetski kompozit z uporabo poenostavljenega barvnega sistema

Namestitev ortodontskih reteinerjev iz vlaken

Izvedba svetlobne polimerizacije adheziva & vlaken preko EXACLEAR



Z everStickORTHO

Steklasta vlakna ojačana za estetske ortodontske reteinerje

Začasne prevleke in mostovi

Odlična svetlobna polimerizacija C&B materiala preko EXACLEAR



Z TEMPSMART DC

Dvojno strjujoč začasni material za prevleke in mostove

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

z O L F S I 03 68 03/20



Imejte jasen pogled



GC EXACLEAR


Prozoren vinil polisiloksan

Vaš partner za transparentne postopke

GC EXACLEAR

Transparentnost pri vašem delu

EXACLEAR je inovativen, prozoren silikonski material, ki zadovolji potrebe pri zahtevnih estetskih postopkih in pospeši pot do odličnih rezultatov. Njegova absolutna transparentnost naredi ta material še posebej učinkovit v kompleksnih kliničnih situacijah.

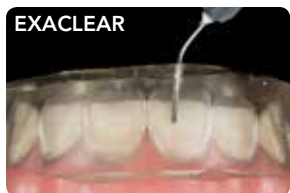

Vizualna kontrola kompozitnega vnosa.
*Ni trgovska znamka GC.



Kristalno jasen pogled

Visoka transparentnost, ki ponuja odlično vizualno kontrolo in zelo učinkovito svetlobno polimerizacijo preko silikonskega materiala.

To vodi do visoke stopnje konverzacije, tako izognemo formiranju kisikove inhibicijske plasti, kar naredi **končno poliranje enostavnejše**.



Transparentnost EXACLEAR (popolnoma desno) v primerjavi s tekmeči.

Optimalna konsistenca za uspešnost postopka

Teče brez pritiska



Optimalna konsistenca za **enostaven vnos v odtisno žlico**

Tekoč pod pritiskom



Tekoč med vstavitvijo za **odlično adaptacijo** na preparacijo in **natančno reprodukcijo podrobnosti**

Enostaven za vrtnje



Rigidni in močni po strditvi, da se lahko enostavno reže in vrta skozi luknjice za vnos

Se ne trga



Dovolj **fleksibilen**, da se lahko odstrani **brez zloma ali deformacije**

Čas je prav tako pomemben

Po samo **2 minutah** intra-oralno je odtis pripravljen in se lahko odstrani iz ust.



2 minuti intra-oralno



7 minut ekstra-oralno

Ko delate na modelu, se material strdi v **7 minutah**.

Odkrijte tehniko oblikovanja z odtisi (mock-up)

Ustvarjanje direktnih lusk v ordinaciji

EXACLEAR uporabljen skupaj z iztisljivim kompozitom kot je G-ænial Universal Injectable omogoča zobozdravnikom, da ustvarijo estetske restavracije kot so indirektne luske toda hitreje, z manj stroški in z **manj invazivnimi preparacijami**.

Translucenca EXACLEAR omogoča, da preverite **vsako najmanjšo podrobnost** in preprečite formiranje kisikove inhibicijske plasti in s tem pospešite končno poliranje. **G-ænial Universal Injectable** je zelo dobro prilagojen za to tehniko zaradi svoje tiksotropnosti, trdnosti in sijaja.



1. Začetna situacija



2. Napolnite odtisno žlico z EXACLEAR in odtisnite navosk na modelu



3. Po strditvi, odstranite prozoren silikon iz odtisne žlice



4. Zvrtajte luknjo skozi silikonski ključ da ustvarite prostor za konico tekočega kompozita



5. Izolirajte sosednje zobe, jedkajte sklenino in nanesite adheziv



6. Vstavite silikonski ključ v usta in injicirajte G-ænial Universal Injectable preko luknjice v ključu



7. Svetlobno polimerizirajte preko silikonskega ključa in ga nato odstranite iz ust



8. Odstranite viške kompozita z rezilom



9. Končni rezultat po končnem poliranju

Zdravljenje generalizirane obrabe z direktnim kompozitom

Tehnika oblikovanja z odtisi je prav tako idealna za oskrbo primerov generalizirane obrabe ali za poustvarjanje kompleksnih morfologij. Transparentnost EXACLEAR pomaga videti in nadzorovati injiciranje kompozita pri oskrbi večjega števila zob naenkrat. Visoka upogibna trdnost in odpornost na obrabo **G-ænial Universal Injectable** je prav tako idealna za uporabo pri posterioh primerih.



1. Začetna situacija



2. Napolnite odtisno žlico z EXACLEAR in odtisnite navosk na modelu



3. Situacija po oskrbi z uporabo tehnike oblikovanja z odtisi (mock-up)