

GC EXACLEAR

Za jasan pogled



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, patrona 48 ml (x 2), nastavak za mešanje II veličina S (x 6)
800100	Nastavak za mešanje II veličina S (x 60)

Vaši partneri u složenim kliničkim situacijama

Tehnika ubrizgavanja

Laka kontrola ubrizgavanja pomoću materijala EXACLEAR



S G-ænial Universal Injectable

Kompozit za ubrizgavanje velike čvrstoće i savršene tiksotropnosti

Tehnika slojevanja

Laka svetlosna polimerizacija palatinalno pomoću materijala EXACLEAR



S Essentia

Visoko estetski kompozit s jednostavnim sistemom boja

Postavljanje ortodontskih vlaknima ojačanih retainera

Uspešna svetlosna polimerizacija bonda i vlakana za ojačanje pomoću materijala EXACLEAR



S everStickORTHO

Staklena vlakna za ojačavanje za estetske ortodontske retainere

Privremene krunice i mostovi

Savršena svetlosna polimerizacija materijala za krunice i mostove pomoću materijala EXACLEAR



S TEMPSMART DC

Privremeni materijal sa dvostrukim stvrdnjavanjem za krunice i mostove

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Serbia
Dimitrija Tucovića 119, 6th
floor, ap.35
RS - 11000 Beograd
Tel. +381.11.24.05.419
Fax. +381.11.24.05.419
Mob. +381.63.78.82.777
info.serbia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Z O L F R S 03 68 03/19

Za jasan pogled



GC EXACLEAR

Proziran vinil-polisiloksanški materijal

Vaš partner za prozirne nadoknade

GC EXACLEAR

Transparentnost u radu

EXACLEAR je inovativni, prozirni silikonski materijal koji ispunjava potrebe zahtevnih estetskih slučajeva i olakšava način postizanja dobrih rezultata. Njegova potpuna prozirnost čini ga posebno uspješnim u složenim kliničkim situacijama.



Vizuelna kontrola ubrizgavanja kompozita.
*nisu zaštitni znaci kompanije GC.



Kristalno jasan pogled

Visoka **prozirnost** omogućava izvrsnu vizuelnu kontrolu i vrlo uspješnu svetlosnu polimerizaciju kroz silikon.

To dovodi do veće konverzije i izbegava stvaranje inhibirajućeg sloja za kiseonik, što **olakšava završno poliranje**.



Prozirnost EXACLEARA (krajnje desno) u poređenju sa konkurentnim proizvodima.

Optimalna konzistencija za uspešan postupak

Tečenje bez pritiska



Optimalna konzistencija za **lako postavljanje u kašiku**

Tečenje pod pritiskom



Tečan kod postavljanja za savršeno prilagođavanje preparaciji i **tačnu reprodukciju detalja**

Jednostavno brušenje



Krut i čvrst nakon stvrdnjavanja i jednostavan za brušenje i bušenje rupa za ubrizgavanje

Bez cepanja



Dovoljno **fleksibilan** za odstranjivanje **bez loma ili deformacija**

Jer je i vreme važno

Otisak je stvrdnut nakon samo **2 minuta** u ustima i može da se odstrani.



2 min. intraoralno



7 min. ekstraoralno

Ako se radi na modelu, materijal će se stvrdnuti kroz **7 minuta**.

Otkrijte tehniku ubrizgavanja

Izrada direktnih estetskih faseta

EXACLEAR korišćen zajedno sa kompozitom za ubrizgavanje, kao što je G-ænial Universal Injectable, omogućava izradu estetskih nadoknada kao što su indirektno-fasete, ali na brži i jeftiniji način, uz **manje invazivne preparacije**.

Prozirnost materijala EXACLEAR omogućava proveru **svakog malog detalja** i sprečava stvaranje inhibirajućeg sloja za kiseonik, čime se olakšava završno poliranje. **G-ænial Universal Injectable** je vrlo pogodan za ovu tehniku, zbog svoje tksotropnosti, čvrstine i sjaja.



1. Početna situacija



2. Kašiku za otisak ispuniti EXACLEAROM i uzeti otisak navoštavanja na modelu



3. Nakon stvrdnjavanja odstraniti čist silikon iz kašike



4. Izbušiti rupu kroz silikonski ključ i izraditi otvor za vrh šprica sa kompozitom



5. Izolovati susedne zube, jetkati gled i naneti sredstvo za spajanje



6. Postaviti silikonski ključ u usta i ubrizgati G-ænial Universal Injectable kroz rupu u ključu



7. Polimerizovati svetlom silikonski ključ i zatim ga odstraniti



8. Oštricom odstraniti višak kompozita



9. Završni rezultat nakon nekoliko koraka poliranja

Terapija trošenja zuba pomoću direktnih kompozita

Tehnika ubrizgavanja je takođe idealna za smanjivanje trošenja zuba ili za rekonstrukciju složenih morfologija. Prozirnost materijala EXACLEAR pomaže kontrolu ubrizgavanja tokom istovremene obrade nekoliko zuba. Visoka savojna čvrstina i otpornost na trošenje materijala **G-ænial Universal Injectable** idealna je za takve slučajeve u bočnom području.



1. Početna situacija



2. Kašiku za otisak ispuniti EXACLEAR i uzeti otisak navoštavanja na modelu



3. Situacija nakon terapije tehnikom ubrizgavanja