


מדריך לטכניקת הזרקה לתבנית

בטרם השימוש יש לקרוא היטב את הוראות השימוש

1. מצב התחלתי


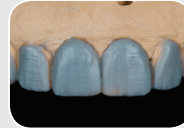


2. הדמיית שעווה (wax-up)
המתבצעת בהתייעצות עם המתרפא




3. יש למלא כף מטבע שלמה (שאינה מחוררת) ב-EXACLEAR

4. יש להניח את כף המטבע עם ה-EXACLEAR על לסת הגבס עם הדמיית השעווה ולהמתין להתקשות (7 דקות). יש להסיר את מטבע הסיליקון מכף המטבע.

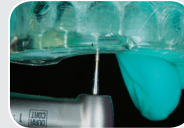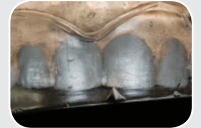

5. יש לקדוח חורים במפתח הסיליקון באמצעות מקדח דמוי סיכה

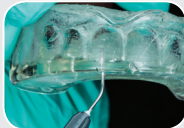

6. יש לוודא כי החור שנקדח גדול דיו להתאמת קצה המזרק של חומר השחזור

7. יש לכבד את השיניים הסמוכות, כדי למנוע את הדבקת חומר השחזור אליהן




8. יש לצרוב את משטחי השן שישוחררו



9. יש להניח על השן חומר קישור בהתאם להוראות היצרן

10. יש להקשות באור את חומר הקישור

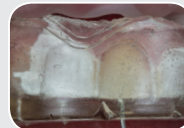

11. יש למקם את מפתח הסיליקון בפה המתרפא, ולהזרים G-aenial Universal Injectable לתוך התבנית דרך החור בסיליקון



12. מקשים באור דרך מפתח הסיליקון. מסירים את מפתח הסיליקון ומסלקים בלהב דק את עודפי החומר

13. מלטשים עם מקדחים וסרטי ליטוש את האזורים הבין-שיניים



14. מסיימים את הליטוש באמצעות גומיות ליטוש



15. תוצאה סופית



מומלץ טכניקה פשוטה עבור:

- מורפולוגיות מורכבות
- מקרי שחיקת שיניים
- מקרים אסתטיים מאתגרים
- שחזור המימד הסגרי האנכי

טיפים קליניים

- יש לוודא כי מפתח הסיליקון הוא בעובי 3-4 מ"מ סביב השיניים המושחזות
- אין ללחוץ יותר מדי על הסיליקון בעת לקיחת המטבע, כדי לוודא ששכבת הסיליקון באזור להב השן עבה מספיק. כך ניתן למנוע קריעה או עיוות של מפתח הסיליקון.
- יש להשתמש במקדח דמוי סיכה כדי לקדוח חור במטבע ה-EXACLEAR.
- מומלץ למקם את החור באמצע הקצה הלהבי של כל שן, בין הפינה המזיאלית לדיסטלית, ולוודא שהחור קטן ככל שניתן, אך גדול מספיק כדי לאפשר את כניסת הטיפ של חומר השחזור בהזרקה בקלות ובנחות.
- בעת קידוח החור יש להזהר שלא לפגוע במשטח הקדמי של מפתח הסיליקון, כדי לשמר את העיצוב המורפולוגי ואת הטקסטורה שמועטקת בעת לקיחת המטבע.
- יש למקם חור נוסף באזור צוואר השן, כפתח בריחה לאוויר שיעוזר במניעת יצירת בועות בשחזור. דבר זה גם יסייע למנוע את הצפת החומר באזורים לא רצויים.
- מומלץ להשתמש בסכר גומי כשהדבר מתאפשר, כדי לשמור על בידוד מושלם. באזורים אחוריים (טוחנות ומלתעות) בידוד מושלם צריך להיות אפשרי, כיוון שבגבולות ההשחזה לרוב מעל לגבול החניכיים.
- יש להתאים ולגוום את מטבע הסיליקון באזור הוסטיבורי, כדי למנוע יצירת לחץ מיותר בין סכר הגומי לחומר המטבע.
- על מפתח הסיליקון להשתרע רחוק מספיק כדי לכלול לפחות שתי שיניים מכל צד של האזור המושחזר. דבר זה יבטיח יציבות של המפתח כשהוא מונח בפה וחינקי מוצלח של האסטיקה במקרים מורכבים.
- מומלץ לבודד את השיניים הסמוכות באמצעות סרט דק של טפלון ולא באמצעות סרטי צלולואיד או אמצעים אחרים, כדי לוודא הושבה מלאה ונוחה של מפתח הסיליקון במקום המיועד לו.
- במהלך ההזרקה, הצפה קלה של חומר השחזור תסייע להבטיח שהאזורים הצרים בגבולות ובאזורים הבין-שיניים מתמלאים היטב.
- להסרת עודפים מומלץ להשתמש בלהב סקלפל מס' 12.