

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas



1. Pradinė situacija



2. Pasitarus su pacientu atliekamas pavaškavimas



3. Į metalinį (neperforuotą) šaukštą įdėkite EXACLEAR



4. Ant pavaškuoto modelio uždėkite šaukštą su EXACLEAR ir palaukite, kol medžiaga sukietės (7). Iš šaukšto išimkite silikoninį atspaudą



5. Silikoniniame gide adatiniumi grąžteliu išgręžkite skylės



6. Užtikrinkite, kad skylės būtų šiek tiek didesnės nei kompozito švirkšto antgaliukas



7. Kad ant gretimų dantų nepatektų kompozito- juos izoliuokite



8. Ėsdinkite dantį



9. Vadovaudamiesi gamintojų nurodymais užtepkite jungiamosios medžiagos



10. Sukietinkite šviesa



11. Į burnos ertmę įdėkite silikoninį gidą ir per išgręžtas skylės įšvirkškite Gaenial Universal Injectable



12. Per silikoninį gidą sukietinkite restauraciją. Nuimkite jį ir peiliuku pašalinkite medžiagos perteklių



13. Poliruokite grąžteliais bei tarpdantiniėmis juostelėmis



14. Poliravimą užbaikite taurelėmis



15. Rezultatas



Rekomenduojama paprastoms procedūroms:

- Kompleksiniam dantų morfologijos atstatymui
- Nusidėvėjusių dantų restauravimui
- Dantų estetikos atkūrimui
- Okliuzinio aukščio atstatymui

Klinikiniai patarimai

- Įsitinkinkite, jog aplink preparaciją silikoninio gido storis būtų apie 3-4 mm.
- Per stipriai nespauskite silikoninio gido, kad kandamieji kraštai pasidengtų tinkamu medžiagos sluoksniu. Taip išvengsite gido plyšimų ar deformacijų.
- Skylių formavimui EXACLEAR atspaudė naudokite adatinės formos grąžtelius.
- Pozicionuokite skyles ties kiekvieno danties kandamojo krašto viduriu, pusiaukelėje nuo distalinio link medialinio krašto, ir suformuokite šiek tiek didesnes nei kompozito švirškšto antgaliukas ertmes, kad jis lengvai ir pilnai pro jas praliptų.
- Gręždami stenkitės nepažeisti silikoninio gido vestibularinių paviršių, kad išsaugotumėte informaciją apie vaškavimo metu suformuotą paviršių.
- Kitą skylutę padarykite netoli danties kaklelio, kad išėitų oras ir išvengtumėte burbuliukų susiformavimo. Ji taip pat pagelbės didelio perpildymo atveju.
- Jei tik įmanoma izoliacijai naudokite koferdamo sistemą. Krūminių dantų restauravimo atvejais, tai padaryti neturėtų būti sudėtinga, kadangi restauracijos kraštai dažniausiai virš dantenu.
- Kaklelių srityje patrupinkite silikoninį gidą, kad jis užsidėtų tinkamai be jokio tempimo ar spaudimo ties koferdamo kraštais.
- Silikoninis gidas turi būti pakankamai platus ir apimti mažiausiai po du dantis iš kiekvienos restauruojamo danties pusės. Tai užtikrina gido stabilumą dedant jį į burnos ertmę ir norimo galutinio estetinio rezultato pasiekimą.
- Įšvirškškite šiek tiek gausesnį medžiagos kiekį, kad užtikrintumėte tinkamą nedidelių plyšelių bei tarpdančių atstatymą.
- Pertekliaus pašalinimui naudokite #12 nr. peiliuką.