

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.



1. Sākotnējā situācija



2. Pēc pacienta konsultācijas tiek izgatavots vaskojums



3. Iepildiet EXACLEAR silikonu karotē (neperforētā)



4. Novietojiet EXACLEAR nospiedumu uz veidula un nogaidiet 7 minūtes, līdz silikons sacietē. Izņemiet nospiedumu no karotes.



5. Ar adatas tipa urbuli silikonā izurbiet injekcijas atveres.



6. Pārbaudiet vai atveres diametrs ir piemērots kompozīta šļircis uzgāja diametram.



7. Izolējiet blakus zobus, lai injicējams kompozīts pie tiem nepielīp.



8. Kodiniet zobu.



9. Aplikējiet saiti, ievērojot ražotāja norādījumus.



10. Polimerizējiet saiti.



11. Novietojiet silikona atslēgu mutē un pa injekcijas atveri atslēgā injicējiet G-aenial Universal Injectable.



12. Polimerizējiet cauri silikona atslēgai. Noņemiet atslēgu un kompozīta pārkares noņemiet ar skalpeli.



13. Proksimālās virsmas nopulējiet ar urbļiem un pulēšanas lentītēm.



14. Pabeidziet pulēšanu ar gumijas pulieriem.



15. Gala rezultāts.



## Tehnika piemērota ērtāki procedūrai:

- Kompleksas morfoloģijas pārvešanai intraorāli
- Nodilušo zobu atjaunošanai
- Sarežģītai estētiskai zobu atjaunošanai
- Oklūzijas vertikālā augstuma atjaunošanai

## Kliniskie padomi

- Silikona atslēgai ap preparāciju jābūt vismaz 3-4 mm biežai.
- Lai incizālās malas būtu nosegtas ar pietiekamu silikona slāņa biezumu, nespīest uz silikonu ar pārmērīgu spēku. Tas pasargā no iespējamās silikona atslēgas deformācijas.
- Injekcijas atveres izurbšanai izmantojiet adatas formas urbuli.
- Injekcijas atveri pozicionējiet katra zoba incizālās šķautnes vidū, pa vidu starp distālo un meziālo robežu. Injekcijas atveri veidojiet pēc iespējas mazāku, bet pietiekami plašu, lai kompozīta šķirces uzgalis tajā ievietojas viegli un pilnībā.
- Lai vaskā atveidoto virsmas tekstūru saglabātu, izvairieties injekcijas atveres urbšanas laikā sabojāt silikona atslēgas iekšējo vestibulāro virsmu
- Tuvu cervikālai virsmai izveidojiet vēl vienu atveri gaisa burbuļu iznākšanai. Tas palīdzēs arī novērst pārkares.
- Kad vien iespējams, lai nodrošinātu labu izolāciju, strādājiet ar koferdamu. Sānu zobu rajonā ir jānodrošina pilnīga izolācija ar koferdamu, jo malas vairumā gadījumu ir lokalizētas virs smaganas.
- Ja izmantojat koferdamu lai iegūtu labu, precīzu silikona atslēgas novietojumu, cervikāli silikona atslēgu saīsīniet.
- Silikona atslēgai vienmēr ir jābūt lielāki- tai jānosēd vismaz divi zobi abās pusēs papildus tiem, kurus atjaunojat. Tādējādi tiek nodrošināta tās stabila pozīcija mutē un precīza detaļu reprodukcija.
- Lai nodrošinātu visu nelielo spraugu, piemēram proksimāli un pie restaurācijas robežām, papildīšanu ar kompozītu, injekcijas laikā ir nepieciešama neliela kompozīta pārplūde.
- Liekā kompozīta noņemšanai izmantojiet #12 izmēra skalpeli.