

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização.



1. Situação inicial



2. É feito um enceramento na consulta com o paciente



3. Encha uma moldeira sólida (não perfurada) com EXACLEAR



4. Coloque o molde EXACLEAR no modelo de enceramento e espere que prenda (7). Remova o molde de silicone da moldeira



5. Faça um orifício na chave de silicone com uma broca em forma de agulha



6. Certifique-se de que o orifício é apenas suficientemente grande para caber a ponta da seringa de compósito



7. Isole os dentes adjacentes para evitar que o compósito injetado adira a eles



8. Condicione o dente



9. Aplique um agente de união seguindo as instruções do fabricante



10. Proceda à fotopolimerização



11. Coloque a chave de silicone na boca e injete G-aenial Universal Injectable no molde através do orifício no silicone



12. Proceda à fotopolimerização através da chave de silicone. Remova a chave e remova o excesso com uma lâmina



13. Faça o polimento com brocas e tiras de polimentos para áreas interproximais



14. Proceda ao acabamento com discos de procedimento complexo de polimento



15. Situação final



Recomendado como procedimento simples para:

- Morfologias complexas
- Casos de desgaste
- Casos esteticamente desafiantes
- Restabelecimento da dimensão oclusal vertical

Sugestões clínicas

- Assegure-se de que a chave de silicone tem 3-4 mm de espessura em redor dos preparos.
- Tenha cuidado para não pressionar demasiado o silicone, para todas as arestas incisais ficarem cobertas com uma camada suficientemente espessa. Isto evitará o rasgamento ou deformação potencial da chave.
- Utilize uma broca em forma de agulha para fazer o orifício no molde de EXACLEAR.
- Posicione o orifício no centro da aresta incisal de cada dente, a meio entre as bordas distal e mesial e faça-o tão pequeno quanto possível, mas suficientemente grande para permitir que a ponta da seringa de compósito passe completa e facilmente.
- Tenha cuidado para não danificar a parte vestibular dentro da chave de silicone com a broca, para manter a informação da textura da superfície que é criada durante o enceramento.
- Faça outro orifício perto da área cervical para permitir que o ar saia e evitar bolhas. Também irá ajudar a ter menos extravasamento.
- Use um dique de borracha sempre que possível, para conseguir um isolamento perfeito. Num caso posterior, o isolamento total com um dique de borracha deverá ser exequível, pois as margens estão localizadas principalmente acima do nível das gengivas.
- Recorte a chave de silicone na posição cervical, para permitir a colocação adequada, sem qualquer tensão entre a chave e o dique de borracha.
- A chave de silicone deve estender-se sempre o suficiente para incluir pelo menos dois dentes distalmente dos dentes a serem tratados dos dois lados. Isto garante a estabilidade da chave quando é posicionada na boca e uma reprodução adequada do trabalho estético, para um resultado final mais previsível.
- Durante a injeção, é necessário um pouco de extravasamento para garantir que todas as pequenas falhas nas margens e nos espaços interproximais são preenchidas.
- Para a remoção do excesso utilize uma lâmina n.º 12.