

Три вида на гипс, неограничени можности

GC Fujirock EP

Еден од најпопуларните во светот, тип 4 дентален гипс за модели, со врвен квалитет. Fujirock EP е идеален за сите видови на протетски направи, со висока прецизност, исклучителна цврстина на рабовите и висока стабилност на притисок. Fujirock EP е високо-течен, а сепак тиксотропен што овозможува одлични својства на ракување и лесно налевање, без формирање на меурчиња од воздух.

Одберете ја бојата што најдобро ја претставува вашата изработка и вашата лабораторија. Златно кафеава, топазно беж, пастелно жолта или бисерно бела.



GC Fujirock EP OptiXscan

Специјален вид на GC Fujirock EP создаден за чувствителните КАД/КАМ и имплантатни технологии. Специјалната хемиска структура и составот на бојата, овозможуваат моделите направени од овој вид на гипс, специјален гипс совршено да се скенираат со сите типови ласери и скенер системи со оптичко светло. GC Fujirock EP OptiXscan има прилагодливо време на работа: со додавање на 20 мл. дестилирана вода се скратува времето на стврднување и времето на работа, а ако се додаде 21 мл. вода, забниот техничар има повеќе време да излее повеќе модели.

Има само една специјална боја - жар кафеава.



GC Fujirock EP OptiFlow

Дентален гипс тип 4 што тече во тенок млаз и служи за формирање на базите на денталните лакови со Fujirock EP и Fujirock EP OptiXscan. Стабилната и ниска експанзија совршено одговара како најдобра потпора на Fujirock EP и Fujirock EP OptiXscan. Со додавање на само 20 мл. вода Fujirock EP OptiFlow тече на сличен начин како и водата, лесно се налева околу приновите, без формирање на меурчиња од воздух.

Одберете ја бојата што најмногу ви одговара од палетата на бои: теракота црвена, сафирно сина, пеперминт зелена и динамично виолетова.



Fujirock EP Fujirock EP OptiXscan Fujirock EP OptiFlow

Физички својства

	Fujirock EP	Fujirock EP OptiXscan	Fujirock EP OptiFlow
Однос прав/течност	20 мл./100 г.	20-21 мл./100 г.	20 мл./100 г.
Рачно мешање	15 сек.	15 сек.	15 сек.
Вакумско мешање	45 сек.	45 сек.	45 сек.
Време на стврднување	10-13 мин.	7-9 мин.	9-11 мин.
Време на отстранување	30-40 мин.	20 мин.	30-40 мин.
Врзувачка експанзија (после 2 часа)	≤ 0.09 %	≤ 0.09 %	≤ 0.09 %
Компресивна јачина	≈ 53 МПа	≈ 53 МПа	≈ 49 МПа

Пакувања



Fujirock EP
Пакување од 5 кгр.
или од 12 кгр.



Fujirock EP OptiXscan
Пакување од 5 кгр.



Fujirock EP OptiFlow
Пакување од 12 кгр.

Сите пакувања се со капак кој лесно се отвора/затвора. Херметичкото затворање заштитува од влага.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Овластен дистрибутер
за Македонија:
ДЕНТОМЕД-М
Ул. "Бојмија" бр. 2/2
Пошт. факс. 182
1000 Скопје
Тел./Факс: 02/24.62.739
Тел. 02/24.64.781
dentomed@t-home.mk

Заедно СОВРШЕНИ



Fujirock EP
Fujirock EP OptiFlow
Fujirock EP OptiXscan
од GC.

Три вида првокласни дентални гипсови тип IV, за прецизни и димензионално стабилни мастер модели, за сите намени, течни и прикладни за КАД/КАМ.

GC

GC

Три вида на гипс, еден стандард за квалитет

Fujirock EP, познат по својот врвен GC квалитет, е еден од најчесто употребуваните гипсови за модели тип IV во Европа, кој се користи при изработка на сите видови денални протетски направи.

Сега ќе може да уживате во истиот висок стандард за квалитет, со не-рефлектирачкиот Fujirock EP OptiXscan наменет за сите современи системи за скенирање. А, за базите со минимална експанзија, ви го претставуваме високо-течниот Fujirock EP OptiFlow. За уште поголема ефикасност и естетика, сите три вида на гипсови за изработка на базата или моделот, може совршено да се комбинираат - соодветно на системскиот принцип на GC: "Еден докажан гипс во три варијанти за сите потреби и намени".

Секој производ, исто така, има своја палета на бои, така што може да ја одберете комбинацијата на бои што најдобро ќе ја прикаже вашата лабораторија и изработката.

Подготовка

Fujirock EP

- Високо течна, а сепак тиксотропна конзистенција за постигнување на одлични својства на работа и лесно налевање без формирање на меурчиња од воздух
- Отсечно стврднување заради продолжено време на работа и пократко време на врзување
- Брзо се отстранува, за само 30 мин.



Висока иницијална јачина со намален ризик од пукање за време на отстранувањето, брусењето и обработката



Метал-порцелански изработки

Компатибилен со широка палета на материјали за отпечатоци

Fujirock EP OptiFlow


- Со само 20 мл. вода тече на слиен начин како и водата, лесно околу пиновите, без формирање на меурчиња од воздух
- Кратко време на стврднување и брзо отстранување од моделот
- Стабилна и ниска експанзија, која совршено одговара на Fujirock EP и Fujirock EP OptiXscan



КАД/КАМ

Fujirock EP OptiXscan

- Флексибилен во работата, без промена на физичките својства
- Прилагодливо време на работа - времето на стврднување и времето на работа може да се скрати со додавање на 20 мл. дестилирана вода
- со додавање на 21 мл. вода, забниот техничар има повеќе време за повеќе модели
- Кратко време на отстранување, за само 20 мин.

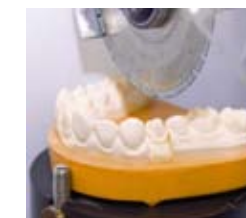

Висока јачина со извонредна цврстина на рабовите и намален ризик од пукање за време на сечењето и брусењето

Излевање



Моделирање



Вложување со Fujivest Premium или Fujivest Platinum



Завршени капици

КАД/КАМ



Скенирање

Исклучително мазна, но не-рефлектирачка површина за најдобро скенирање со сите типови ласери и скенер-системи со оптичко светло



Брусење



Завршени капици

Фасетирање



Initial MC



Initial AI



Initial Zr-FS



Initial Ti