

G-ærial Bond TECHNIQUE GUIDE



Prior to use, carefully read the instructions for use. / Vor der Benutzung Anleitung sorgfältig lesen. / Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.



1 APPLICATION
AUFTRAGEN
APPLICATION



2 WAITING
WARTEZEIT
TEMPS D'ATTENTE



3 DRYING
TROCKNEN
SECHAGE



4 LIGHT CURING
LICHTHÄRTEN
PHOTOPOLYMERISATION

Note



Shake bottle before use. Use immediately after dispensing. Replace cap after use.

Schütteln Sie die Flasche vor der Anwendung. Sofort nach dem Ausbringen verwenden. Die Flasche sofort wieder verschließen.

Secouez le flacon avant utilisation. Utilisez immédiatement après distribution. Remplacez le capuchon après utilisation.

Irradiation Time / Belichtungszeit / Temps d'irradiation

Light curing unit	Distance from light guide tip Abstand vom Lichtleiter Distance de l'embout lumineux	
	(< 10mm)	(> 10mm)
Halogen / LED	10 sec.	20 sec.
G-Light	5 sec.	10 sec.
Plasma arc	3 sec.	6 sec.

G-aenial Bond TECHNIQUE GUIDE



Prima dell'utilizzo leggere attentamente le istruzioni. / Antes de usar, leer cuidadosamente las instrucciones de uso. / Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.



1 APPLICAZIONE
APPLICACIÓN
AANBRENGEN



2 ATTENDERE
ESPERAR
INWERKTIJD



3 ASCIUGARE
SECAR
DROGEN



4 FOTOPOLIMIZZARE
POLIMERIZACIÓN
LICHTUITHARDING

Note



Agitare la boccetta prima dell'uso. Usare immediatamente. Ritappare dopo l'uso.

Agitar bien el frasco antes de usarlo. Utilizar inmediatamente después de la dispensación. Colocar nuevamente la tapa después de usarlo.

Het flesje voor gebruik schudden. Direct na doseren gebruiken. Meteen na doseren het dopje terugplaatsen.

Tempi di irraggiamento / Tiempo de irradiación / Belichtingstijd

Light curing unit	Distanza dal puntale della lampada fotopolimerizzatrice Distancia desde la punta de la guía de luz Afstand tot de tip van de lichtgeleider.	
	(< 10mm)	(> 10mm)
Halogen / LED	10 sec.	20 sec.
G-Light	5 sec.	10 sec.
Plasma arc	3 sec.	6 sec.