

## ► INDRØVNING

**1** Fjern den midlertidige restaurering og rens grundigt efterfølgende.



**2** Kontroller pasform og okklusion. Om nødvendigt, anvend da G-CEM LinkForce Try-In Paste.



**3** Fjern restaureringen og skyl grundigt efter med vand.




## ► BEHANDLING AF RESTAURERINGEN


Forbehandl restaureringen i henhold til producentens anvisninger.

**Glaskeramik**

**1** Æts med flussyre.

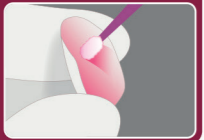

**2** Skyl og tørlæg.



**Hybridkeramik & komposit**

**1** Sandblæs\*  
\*Ved CERASMART, kan der alternativt anvendes flussyre.



**2** Blæs ren med luft. Skyl og tørlæg.



**3** Påfør G-Multi PRIMER.



**4** Tørlæg med luftspray.



## ► BEHANDLING AF TANDOVERFLADE

**5** Skyl og tørlæg den præparerede tand.



**6** Vælg enten "Selective Etch" eller "Total Etch"-teknik. Skyl og tørlæg.



**7** Påfør G-Premio BOND. Vent 10 sekunder.



**8** Tørlæg med MAXIMUM LUFTRYK i 5 sekunder.



**9** Lyshærd i 10 sekunder (Halogen/LED 700 mW/cm²).



## ► CEMENTERING

**10** Påfør cementen direkte på bindingsoverfladen af facaden og/eller tandoverfladen.



**11** Fastgør straks restaureringen på den præparerede tand. Fasthold et moderat tryk.



**12** Fjern overskud. Overskud kan punktluses i 1-2 sekunder.



**13** Lyshærd alle overflader/kanter i 20 sekunder. (Halogen/LED 700 mW/cm²).



**14** Finishier og poler kanter.




# G-CEM LinkForce TEKNIK GUIDE

## OPBEVARING


Opbevar System Starter Kit/Starter Kit eller G-CEM LinkForce sprøjterne i køleskab. Øvrige dele kan opbevares ved rumtemperatur. Der henvises til de respektive anvendelsesvejledninger.



## LAYOUT af STARTER KIT

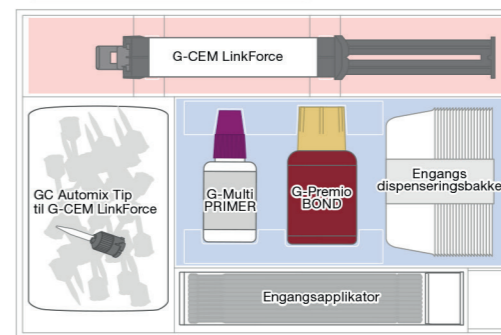

## LAYOUT af SYSTEM KIT

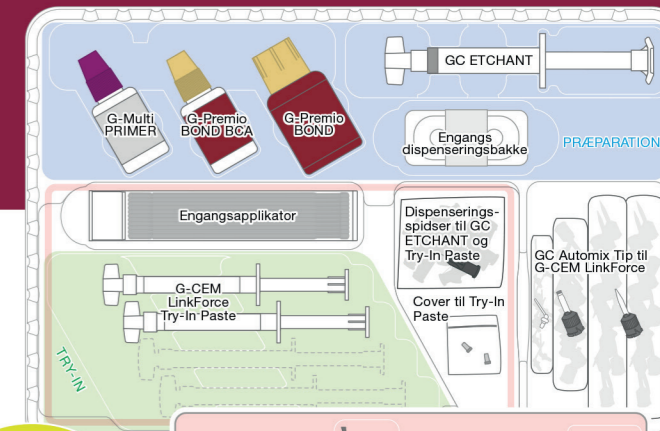

Tomme huller er til opbevaring af ekstra farver efter eget ønske


Bakken kan fjernes og opbevares separat i køleskabet.

CEMENTERING

## CEMENTERINGSTEKNIK TIL INLAYS, ONLAYS, KRONER & BROER

### ▶ INDRØVNING

1 Fjern den midlertidige restaurering og rens grundigt efterfølgende.



2 Kontroller pasform og okklusion. Om nødvendigt, anvend da G-CEM LinkForce Try-In Paste.



3 Fjern restaureringen og skyl grundigt efter med vand.



### ▶ FORBEHANDLING AF RESTAURERINGEN

Forbehandl restaureringen i henhold til producentens anvisninger.

#### Glaskeramik

1 Æts med flussyre.



2 Skyl grundigt og tørlæg.



#### Metal, Zirconia, Alumina, Hybridkeramik & Komposit


1 Sandblæs\*  
\*Ved CERASMART, kan der alternativt anvendes flussyre.




2 Blæs rent med luftspray. Skyl og tørlæg.



3 Påfør G-Multi PRIMER.

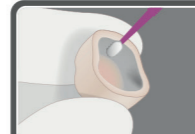

4 Tørlæg med luftspray.

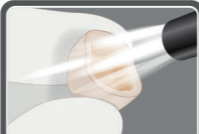


### ▶ FORBEHANDLING AF TANDOVERFLADE

5 Skyl og tørlæg den præparerede tand.



6 Vælg mellem følgende æts-teknikker: self etch, selective etch eller total etch. Skyl og tørlæg.



### ▶ CEMENTERING

10 Applicer G-CEM LinkForce direkte i restaureringen.



11 Fastgør straks restaureringen på den præparerede tand/abutment. Fasthold et moderat tryk.



12 Fjern overskud mens der fastholdes et moderat tryk. Overskud kan punktlyses i 1-2 sekunder for lettere at fjerne overskud.




### ▶ Light-cure mode

7 Påfør G-Premio BOND. Vent 10 sekunder.



8 Tørlæg med MAXIMUM LUFTTRYK i 5 sekunder.




9 Lyshærd i 10 sekunder (Halogen/LED 700mW/cm<sup>2</sup>).



### ▶ Alternativt ved dual-hærdning

7 Mix G-Premio BOND og DCA i forholdet 1:1.



8 Påfør blandingen. Vent 20 sekunder.



9 Tørlæg med MAXIMUM LUFTTRYK i 5 sekunder.



13 Lyshærd alle overflader/kanter i 20 seconds (Halogen/LED 700mW/cm<sup>2</sup>).



14 Hvis ikke der anvendes lys, lad da cementen afbinde i 4 minutter efter placering. Finishing og polering af kanter gøres efterfølgende om nødvendigt.



## CEMENTERINGSTEKNIK AF STIFTER OG OPBYGNINGER

### ▶ FORBEHANDLING AF RESTAURERING

Forbehandl restaureringen i henhold til producentens anvisninger.

1 Rens med alkohol.



2 Påfør G-Multi PRIMER.



3 Tørlæg med luftspray.



### ▶ FORBEHANDLING AF STIFTUDBORING

4 Rens rodkanalen med NaClO eller EDTA. Skyl og tørlæg grundigt.




5 Mix G-Premio BOND og DCA i forholdet 1:1.



6 Applicer blandingen i rodkanalen og vent 20 sekunder.



7 Tørlæg med MAXIMUM LUFTTRYK i 5 sekunder. Fjern eventuel overskud af bonding med paperpoints.




### ▶ CEMENTERING

8 Sprøjt G-CEM LinkForce i rodkanalen.



9 Placer straks stiften i rodkanalen. Fjern overskydende cement.

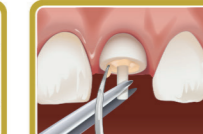

10 Lyshærd alle overflader/kanter i 20 sekunder (Halogen/LED 700 mW/cm<sup>2</sup>).



11 Lad materialet være uforstyrret i 4 minutter efter stiften er placeret. Fortsæt med opbygning.

