## G-CEM LinkForce ZEMENTIERUNGSANLEITUNG FÜR VENEERS

## **▶** ANPROBE

Versorgung entfernen und sorgfältig reiniger





entfernen und mit Vasser abspülen.



## ▶ VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Restauration gemäß Herstellerangaben vorbereiten.

### Glaskeramik

Mit Flusssäure ätzer





### Hybridkeramik und Composite

\*Für CERASMART: alternativ Flusssäure









## ▶ VORBEREITUNG DER ZAHNOBERFLÄCHE





ZEMENTIERUNG

Den Zement direkt

die Zahnoberfläche



Sofort auf den

präparierten Zahn

Druck beibehalten

blatzieren. Moderater



Überschüssiges Materi

leichteren Entfernen



Alle Oberflächen/

Randbereiche je 20









## G-CEM LinkForce TECHNIKANLEITUNG

# ,'GC,'

### AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN


Das System Kit/Starter Kit und G-CEM LinkForce-Spritzen im Kühlschrank aufbewahren. Die anderen Komponenten können bei Raumtemperatur gelagert werden. Entsprechende Gebrauchsanleitungen beachten.




INHALT des SYSTEM KITS



## INHALT des STARTER KITS

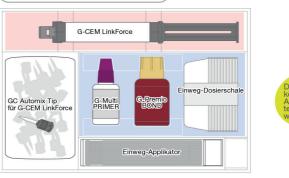

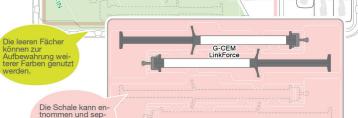

ZEMENTIERUNG

## ZEMENTIERUNGSANLEITUNG FÜR INLAYS, ONLAYS, KRONEN & BRÜCKEN

### ▶ ANPROBE

Versorgung entfernen und sorgfältig reiniger







## ▶ VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Restauration gemäß Herstellerangaben vorbereiten.

### Glaskeramik

Mit Flusssäure ätzer





## Metall, Zirkon, Alumina, Hybridkeramik und Composite

Sandstrahlen\*
\*Für CERASMART:
alternativ Flusssäure



Spülen und trockner







## VORBEREITUNG DER ZAHNOBERFLÄCHE



äparierten Zahn oü<sup>l</sup>en und trock-

**►** ZEMENTIERUNG





Sofort auf den präparierten Zahn/d

. Abutment setzen.

Spülen und trocknen.

G-Premio BOND und DCA im Verhältn





nach dem Einsetzen Minuten ruhen lasser bern und polieren.

### ► Alternative Dualhärtung

Lichthärtung



bei MAXIMALEM LUFTDRUCK

## ZEMENTIERUNGSANLEITUNG FÜR STIFTE UND AUFBAUTEN

## VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Restauration gemäß Herstellerangaben vorbereiten








### ZEMENTIERUNG



trocknen.



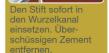

VORBEREITUNG DES WURZELKANALS

