

# G-CEM LinkForce KASUTUSJUHE LAMINAATIDE TSEMENTEERIMINE

## SOBIVUSE PROOV

1 Eemalda ajutine restauratsioon ja puhasta põhjalikult.

2 Kontrolli istuvust ja oklusiooni. Vajadusel kasuta G-CEM LinkForce Try-In Paste'i.

3 Eemalda restauratsioon ja loputa veega.

## RESTAURATSIOONI ETTEVALMISTUS

Töötle restauratsiooni vastavalt tootjapoolsetele juhiste.

### Klaaskeraamika

1 Töötle vesinikfluoriidhappega.

2 Loputa ja kuivata.

### Hübridkeraamika ja komposiit

1 Töötle liivapritsiiga\* CERASMART puhul töötle alternatiivselt vesinikfluoriidhappega.

2 Puhasta õhupustliga puhudes. Loputa ja kuivata.

3 Aplitseeri G-Multi PRIMER.

4 Kuivata õhupustliga puhudes.

## HAMBA PINNA ETTEVALMISTUS

5 Loputa ja kuivata prepreeritud hammas.

6 Vali kas osaline või täielik happetöötlus. Loputa ja kuivata.

7 Aplitseeri G-Premio BOND. Oota 10 sekundit.

8 Kuivata MAKSIMAALSE ÕHUSURVEGA 5 sekundit.

9 Valguskõvasta 10 sekundit (Halogen/LED 700 mW/cm²).

## TSEMENTEERIMINE

10 Kanna tsement otse töödeldud laminaadi ja/või hamba pinnale.

11 Paigalda koheselt prepreeritud hambale. Avalda kerget survet.

12 Eemalda ülejääk. Ülejääki võib 1-2 sekundit valguskõvastada.

13 Valguskõvasta igat pinda/serva 20 sekundit (Halogen/LED 700 mW/cm²).

14 Viimistle ja poleeri piirid.

# G-CEM LinkForce pakendite juhend


## HOIUSTAMISTINGIMUSED

Hoia System Kit/Starter Kit'i või G-CEM LinkForce süstlaid külmkapis. Teisi komponente võib hoida ka toatemperatuuril. Järgi vastavat kasutusjuhendit.




Tutvu kasutusjuhendiga.

### STARTER KIT'I SISU

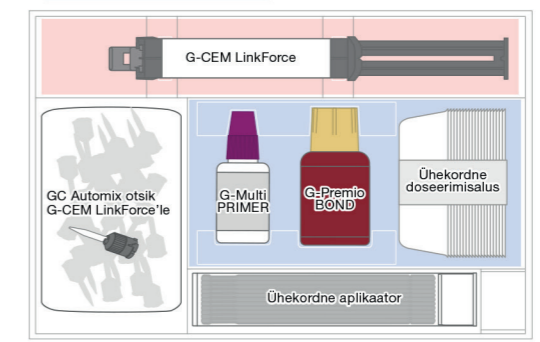

### SYSTEM KIT'I SISU

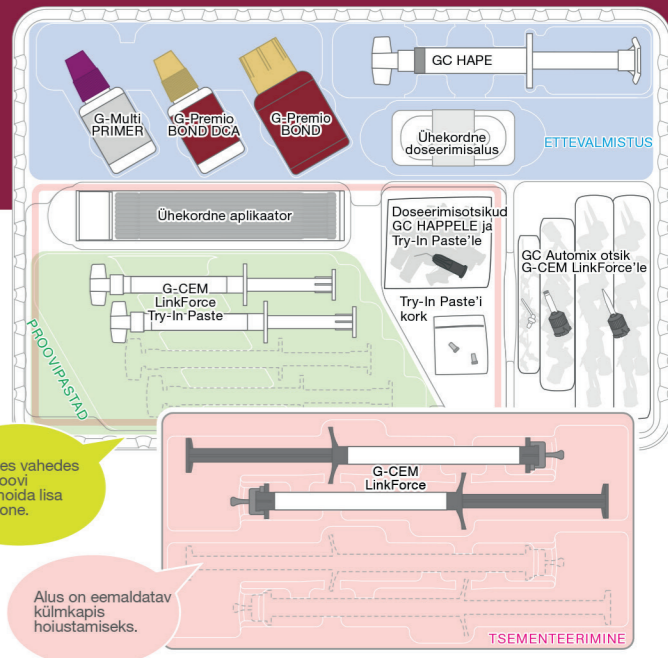

Tühjades vahedes saab soovi korral hoida lisa värvitoone.

Alus on eemaldatav külmkapis hoiustamiseks.


# PANUSTE, KROONIDE JA SILDADE TSEMENTEERIMISE TEHNIKA

## SOBIVUSE PROOV

1 Eemalda ajutine restauratsioon ja puhasta põhjalikult.



2 Kontrolli istuvust ja oklusiooni. Vajadusel kasuta G-CEM LinkForce Try-In Paste'i.

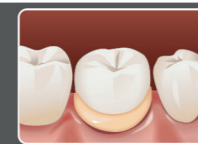

3 Eemalda restauratsioon ja loputa veega.




## RESTAURATSIOONI ETTEVALMISTUS

Töötle restauratsiooni vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

### Klaaskeraamika

1 Töötle vesinikfluoriidhappega

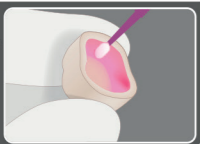


2 Loputa ja kuivata.




### Metall, tsirkoonium, alumiiniumoksiid, hübriidkeraamika ja komposiit


1 Töötle liivapritsiiga\* \*CERASMART puhul töötle alternatiivselt vesinikfluoriidhappega.

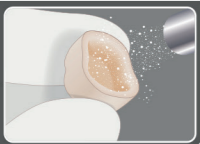

2 Puhasta õhupustliga puhudes. Loputa ja kuivata.

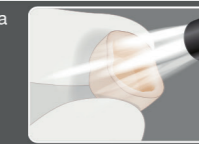

3 Aplitseeri G-Multi PRIMER.

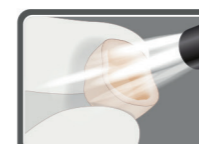


4 Kuivata õhupustliga puhudes.

## HAMBA PINNA ETTEVALMISTUS



5 Loputa ja kuivata prepareeritud hammas.

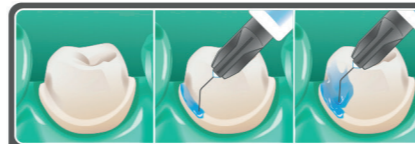

6 Vali kas isesöövitus, osaline või täielik happetötlustehnika. Loputa ja kuivata.

## TSEMENTEERIMINE



10 Väljuta G-CEM LinkForce otse restauratsiooni sisse.



11 Paigalda koheselt prepareeritud hambale/kõndile. Avalda kerget survet.



12 Mõõdukat survet avaldades eemalda ülejääk. Eemaldamise lihtsustamiseks võib ülejääki 1-2 sekundit valguskõvastada.

## Valguskõvastamise puhul



7 Aplitseeri G-Premio BOND Oota 10 sekundit



8 Kuivata MAKSIMAALSE ÕHUSURVEGA 5 sekundit.



9 Valguskõvasta 10 sekundit (Halogen/LED 700mW/cm²).

## Kahelikõvastumise puhul



7 Sega G-Premio BOND ja DCA suhtes 1:1.



8 Aplitseeri segu. Oota 20 sekundit.



9 Kuivata MAKSIMAALSE ÕHUSURVEGA 5 sekundit.



13 Valguskõvasta igit pinda/serva 20 sekundit (Halogen/LED 700mW/cm²).




14 Kui valguslampi ei kasutata lase peale paigaldamist 4 min kõvaneda. Viimistle ja vajadusel poleeri piirid.

# POSTIDE TSEMENTEERIMISE TEHNIKA

## RESTAURATSIOONI ETTEVALMISTUS

Töötle restauratsiooni vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

1 Puhasta piiritusega.

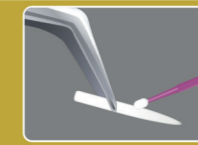


2 Aplitseeri G-Multi PRIMER.




3 Kuivata õhupustliga puhudes.




## JUUREKANALI ETTEVALMISTUS

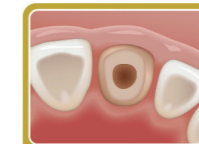


4 Puhasta juurekanal NaClO või EDTA'ga. Loputa ja kuivata täielikult.

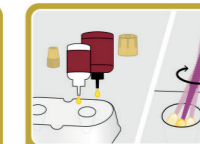

5 Sega G-Premio BOND ja DCA suhtes 1:1.

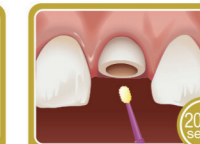


6 Aplitseeri segu kanali seintele ja oota 20 sekundit.

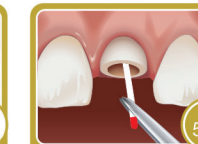


7 Kuivata MAKSIMAALSE ÕHUSURVEGA 5 sekundit. Eemalda üleliigne sidusaine pabertihvtidega.


## TSEMENTEERIMINE

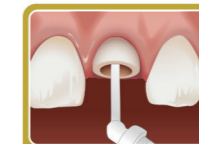


8 Väljuta G-CEM LinkForce juurekanalisse.

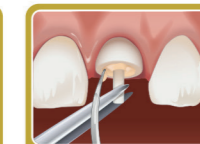

9 Aseta tihvt koheselt kanalisse. Eemalda üleliigne tsement.

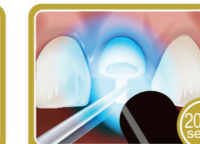

10 Valguskõvasta igit pinda/serva 20 sekundit (Halogen/LED 700mW/cm²).

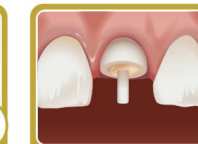

11 Peale tihvti paigaldamist lase materjalil 4 min kõvaneda. Jätka ülesehitusega.