

TECHNIKA CEMENTOVANIA PRE FAZETY

► VYSKÚŠANIE FAZETY

1 Odstráňte dočasnú náhradu a dôkladne vyčistite povrch.



2 Skontrolujte nasadenie a oklúziu. Ak je to potrebné, použite G-CEM LinkForce Try-In Paste (skúšaciu pastu).



3 Zložte fazetu a opláchnite vodou.



► PRÍPRAVA FAZETY

Fazetu pripravte v súlade s pokynmi výrobcu.

► Sklo keramika

1 Naleptajte s kyselinou fluorovodíkovou.



2 Opláchnite a osušte.



► Hybridná keramika & Kompozit


1 Opieskujte *
* Pre CERASMART, môžete alternatívne použiť kyselinu fluorovodíkovú.




2 Vyfúkajte čistým vzduchom. Opláchnite a osušte.



3 Aplikujte G-Multi PRIMER.

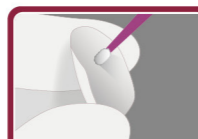


4 Osušte vzduchom.

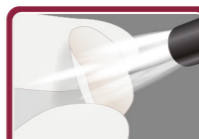

► PRÍPRAVA POVCHU ZUBA




5 Opláchnite a osušte pripravený zub.

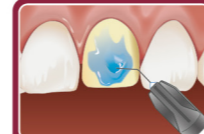


6 Vyberte buď Selektívne alebo Totálne leptanie. Opláchnite a osušte.



7 Aplikujte G-Premio BOND. Počkejte 10 sekúnd.

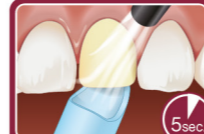

8 Osušte 5 sekúnd pod MAXIMÁLNYM PRÚDOM VZDUCHU.

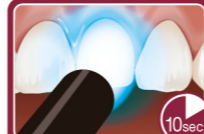


9 Vytvrdte 10 sekúnd (Halogén/LED 700 mW/cm²).


► CEMENTÁCIA



10 Aplikujte cement priamo na fazetu a/alebo povrch zuba.

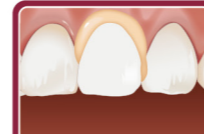

11 Ihneď nasadte na pripravený zub. Udržujte mierny tlak.

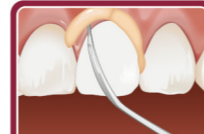

12 Odstráňte prebytky. Prebytky môžu byť osvietené lampou na 1-2 sekundy.



13 Vytvrdte každý povrch/okraje po dobu 20 sekúnd (Halogén/LED 700 mW/cm²).



14 Dokončite a vyleštite okraje.

G-CEM LinkForce TECHNICKÝ SPRIEVODCA




PODMIENKY SKLADOVANIA

Sety (System Kit / Starter Kit) alebo G-CEM LinkForce striekačky skladujte v chladničke. Ďalšie zložky môžu byť skladované pri izbovej teplote. Pozrite príslušný návod na použitie.




Pozrite návod na použitie

USPORIADANIE SETU STARTER KIT

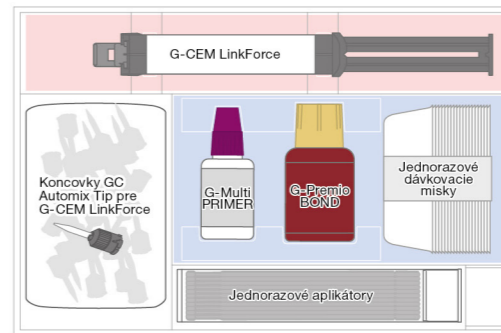

USPORIADANIE SETU SYSTEM KIT

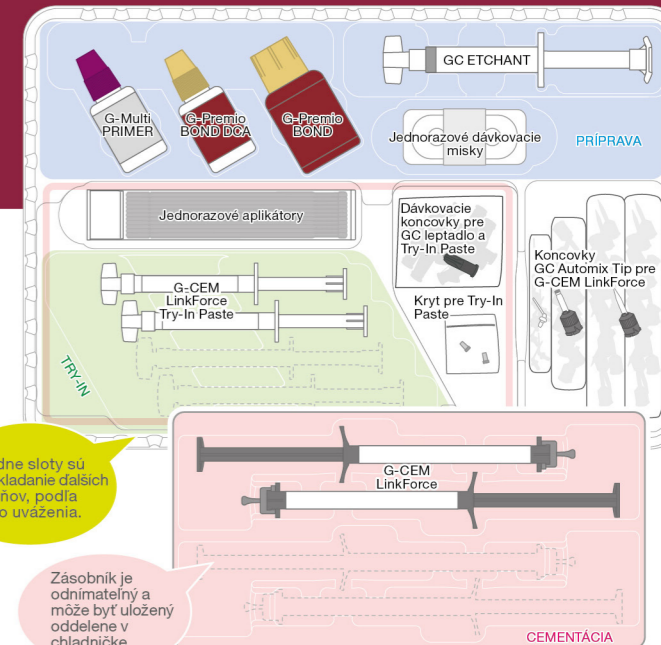

Prázdne sloty sú pre ukladanie ďalších odtiňov, podľa Vašho uvažovania.

Zásobník je odnímateľný a môže byť uložený oddelene v chladničke.

CEMENTÁCIA

TECHNIKA CEMENTOVANIA PRE INLEJE, ONLEJE, KORUNKY A MOSTÍKY

► VYSKÚŠANIE NÁHRADY

1 Odstráňte dočasnú náhradu a dôkladne vyčistite povrch.



2 Skontrolujte nasadenie a oklúziu. Ak je to potrebné, použite G-CEM LinkForce Try-In Paste (skúšaciu pastu).



3 Zložte náhradu a opláchnite vodou.



► PRÍPRAVA NÁHRADY

Náhradu pripravte v súlade s pokynmi výrobcu.

► Sklo keramika

1 Naleptajte s kyselinou fluorovodíkovou.



2 Opláchnite a osušte.




► Kov, Zirkón, Alumínium, Hybridná keramika a Kompozit

1 Opieskujte *
* Pre CERASMART, môžete alternatívne použiť kyselinu fluorovodíkovú.



2 Vyfúkajte čistým vzduchom. Opláchnite a osušte.

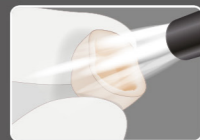

3 Aplikujte G-Multi PRIMER.




4 Osušte vzduchom.



► PRÍPRAVA POVCHU ZUBA



5 Opláchnite a osušte pripravený zub.

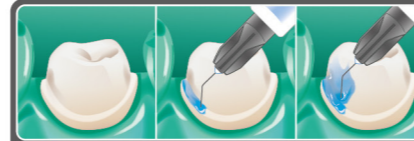

6 Vyberte buď Samoleptanie, Selektívne alebo Totálne leptanie. Opláchnite a osušte.

► CEMENTÁCIA



10 Aplikujte G-CEM LinkForce priamo do náhrady.




11 Ihneď nasadte na pripravený zub/pahýl. Udržujte mierny tlak.




12 Odstráňte prebytky pri zachovaní mierneho tlaku. Prebytky môžu byť osvietené lampou na 1-2 sekundy pre ľahšie odstránenie.

► Svetelný režim vytvrdenia

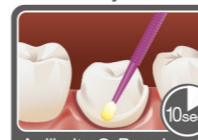

7 Aplikujte G-Premio BOND. Počkejte 10 sekúnd.

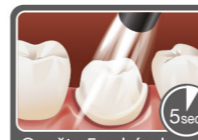

8 Osušte 5 sekúnd pod MAXIMÁLNYM PRÚDOM VZDUCHU.




9 Vytvrdte 10 sekúnd (Halogén/LED 700 mW/cm²).

► Alternatívny duálne-tuhnúci režim vytvrdenia (svetlom + chemicky)



7 Zmiešajte G-Premio BOND a DCA v pomere 1:1.

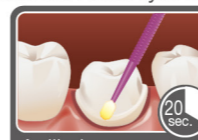

8 Aplikujte zmes. Počkejte 20 sekúnd.



9 Osušte 5 sekúnd pod MAXIMÁLNYM PRÚDOM VZDUCHU.



13 Vytvrdte každý povrch/okraje po dobu 20 sekúnd (Halogén/LED 700 mW/cm²).




14 Ak sa nepoužije vytvrdenie lampou, nechajte ho tuhnúť 4 minúty po nasadení. Dokončíte a vyleštíte okraje ak je to nutné.

TECHNIKA CEMENTOVANIA PRE ČAPY A CORE MATERIÁLY


► PRÍPRAVA NÁHRADY

Náhradu pripravte v súlade s pokynmi výrobcu.

1 Vyčistíte s alkoholom.

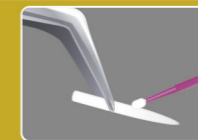


2 Aplikujte G-Multi PRIMER.

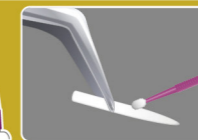


3 Osušte vzduchom.




► PRÍPRAVA MIESTA PRE ČAP

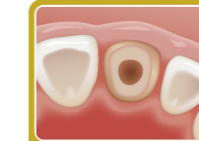


4 Vyčistíte koreňový kanálik s NaClO a EDTA. Opláchnite a dôkladne osušte.

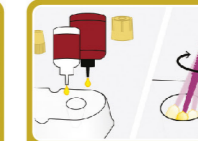

5 Zmiešajte G-Premio BOND a DCA v pomere 1:1.

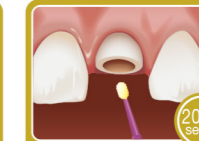

6 Aplikujte bondingovú zmes do kanálika. Počkejte 20 sekúnd.

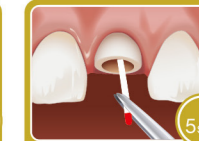


7 Osušte 5 sekúnd pod MAXIMÁLNYM PRÚDOM VZDUCHU. Odstráňte všetky prebytky bondu pomocou papierových čapov.

► CEMENTÁCIA




8 Aplikujte G-CEM LinkForce priamo do kanálika.

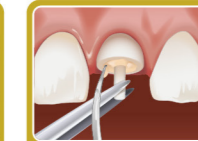

9 Ihneď vložte čap do kanálika. Odstráňte prebytky cementu.



10 Vytvrdte každý povrch/okraje po dobu 20 sekúnd (Halogén/LED 700 mW/cm²).

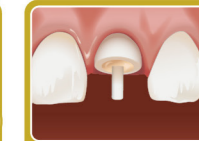

11 Nechajte materiál v kľude 4 minúty po vložení čapu. Pokračujte v dobudovaní.