

G-CEM LinkForce Teknikguide CEMENTERING AV FASADER

'GC.'

► TEST AV PASSFORM

Avlägsna den temporära ersättningen och rengör noggrant.



Kontrollera passform & ocklusion. Ifall nödvändigt, använd G-CEM LinkForce Try-In Paste.



Avlägsna fasaden och skölj med vatten.



► PREPARATION AV ERSÄTTNINGEN


Preparera i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Glaskeramer

Etsa med fluorvätesyra.



Skölj och torrlägg.

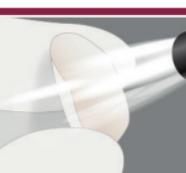

Applicera G-Multi PRIMER.



Hybridkeramer & Komposit

Sandblästra*
*För CERASMART,
Applicera alternativt
fluorvätesyra.



Skölj och torrlägg.



Torrlägg därefter.



► PREPARATION AV TANDSUBSTANS

FÖRVARING

Lagra System Kit/Starter Kit eller G-CEM LinkForce sprutorna i kylskåp. Övriga komponenter kan lagras i rumstemperatur. Se respektive bruksanvisning.

► LAYOUT av SYSTEM KIT

Läs bruksanvisningen



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

► CEMENTERING

LAYOUT av STARTER KIT





CEMENTERING

Tomma utrymmen i fp. kan användas för de andra cementfärger du önskar.

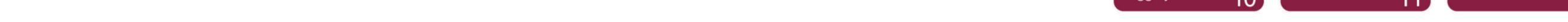



CEMENTERING

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Sätt ersättningen på plats in situ. Ha kvar ett moderat tryck.

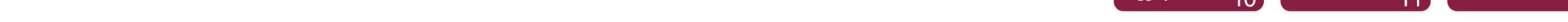


CEMENTERING

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Avlägsna överskottscement. Cementöverfläcket kan för enklare/ snabbare hantering ljushärdas under 1-2 sekunder.

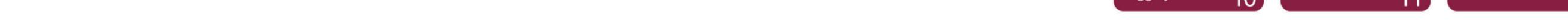



CEMENTERING

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Finishera och putsa därefter anslutningarna.




CEMENTERING

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Ljushärdla alla ytor under 20 sekunder. (Halogen/LED 700 mW/cm²).

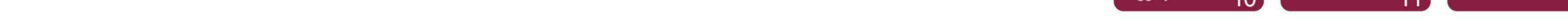



CEMENTERING

Finishera och putsa därefter anslutningarna.

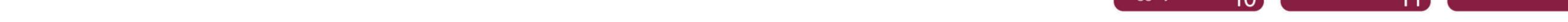



CEMENTERING

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Ljushärdla alla ytor under 20 sekunder. (Halogen/LED 700 mW/cm²).

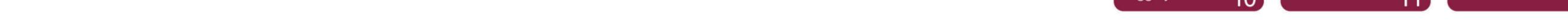

CEMENTERING

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Finishera och putsa därefter anslutningarna.

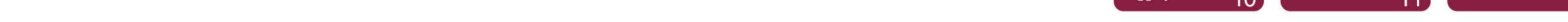


CEMENTERING

Ljushärdla alla ytor under 20 sekunder. (Halogen/LED 700 mW/cm²).




CEMENTERING

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Finishera och putsa därefter anslutningarna.




CEMENTERING

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Ljushärdla alla ytor under 20 sekunder. (Halogen/LED 700 mW/cm²).




CEMENTERING

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Finishera och putsa därefter anslutningarna.





CEMENTERING

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Ljushärdla alla ytor under 20 sekunder. (Halogen/LED 700 mW/cm²).




CEMENTERING

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Finishera och putsa därefter anslutningarna.

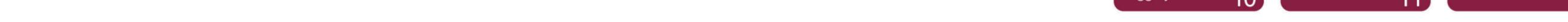


CEMENTERING

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Ljushärdla alla ytor under 20 sekunder. (Halogen/LED 700 mW/cm²).





CEMENTERING

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Finishera och putsa därefter anslutningarna.



CEMENTERING

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Ljushärdla alla ytor under 20 sekunder. (Halogen/LED 700 mW/cm²).

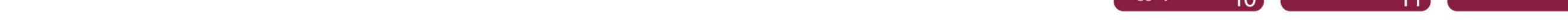

CEMENTERINGSTEKNIK FÖR INLÄGG, ONLAYS, KRONOR & BROAR

► TEST AV PASSFORM


Avlägsna den temporära ersättningen och rengör noggrant.



Kontrollera passform & ocklusion. Ifall nödvändigt, använd G-CEM LinkForce Try-In Paste.



Avlägsna ersättningen och skölj med vatten.

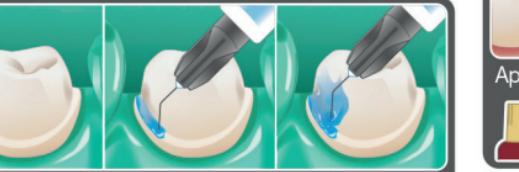

► PREPARATION AV ERSÄTTNINGEN


Preparera i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Glaskeramer

Ets med fluorvätesyra.



Skölj och torrlägg.

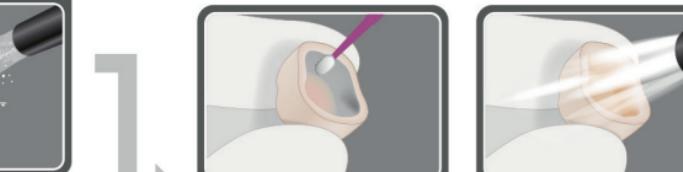

Applicera G-Multi PRIMER.



Metall, Zirkoniumdioxid, Alumina, Hybridkeramer & Komposit

Sandblästra*
*För CERASMART,
Använd alternativt
fluorvätesyra.



Skölj och torrlägg.



Torrlägg därefter.



► PREPARATION AV TANDSUBSTANS



Skölj och torrlägg den preparerade tanden.

5

Välj en av nedan tre etstekniker: självets, selektiv ets eller totalets. Skölj och torrlägg.

6

► Endast ljushärdning

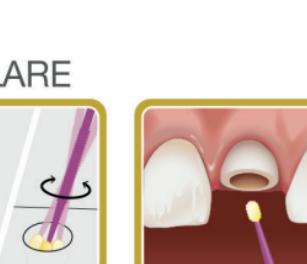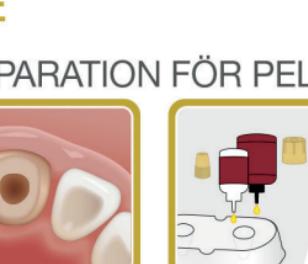


► PREPARATION AV ERSÄTTNINGEN

Preparera i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Rengör med alkohol.




► Alternativt med dual-härdning

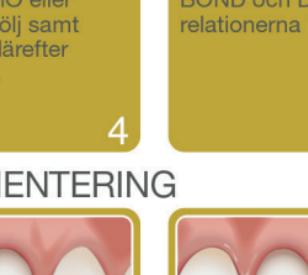

► CEMENTERING



► CEMENTERING

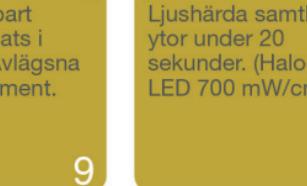

► PREPARATION FÖR PELARE

Preparera i enlighet med tillverkarens anvisningar.


Rengör rotkanalen med NaClO eller EDTA. Skölj samt torrlägg därefter noggrant.



► CEMENTERING



► CEMENTERING

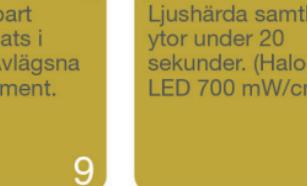

► CEMENTERING AV STIFT OCH PELARE

Preparera i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Rengör med alkohol.



► CEMENTERING



► CEMENTERING

