



Savršeno tečenje



GC G-CEM™ Veneer

Svjetlosno polimerizirajući kompozitni cement za visoku estetiku i lako nanošenje.

GC G-CEM Veneer

Jedinstveno rukovanje, izvrsna čvrstoća.

Zadivite se rezultatima.



Ustupio dr. J. Mattiussi, Italija

Izvrсни rezultati

G-CEM Veneer ima visok udjel punila te je **izrazito otporan na trošenje**.

Uz G-Premio BOND i G-Multi PRIMER, osigurava **visoku čvrstoću spoja za postojeane, estetske restauracije**. Ima mehanička svojstva slična kompozitima u obliku paste, uz lako rukovanje uslijed niske viskoznosti.



Fluorescencija - 0,5 mm pločice. A: G-CEM Veneer; B: Variolink Esthetic; C: Panavia V5; D: NX3 Nexus; E: Calibri; F: RelyX Unicem

Prirodna estetika

G-CEM Veneer se prilagodava svim slučajevima zahtjevne estetike, pružajući **prirodan rezultat**.

Fluorescencija materijala G-CEM Veneer je prilagođena fluorescenciji prirodnih zubi te će izgledati neupadljivo u svim uvjetima osvjjetljenja.

Četiri boje pokrivaju sve

Četiri boje s optimiranim efektom stapanja, pažljivo su izabrane za savršenu integraciju boje u svim slučajevima, uz ograničenje potrebnog broja boja. Pomoću Try-in paste, može se potvrditi da će izabrana boja dati željeni estetski rezultat.



A2



Translucent (transluentna)



Opaque (opakna)



Bleach (za bijeljenje)



A2
Standardna boja za cementiranje veće protetskih restauracija.



Translucent (transluentna)
Savršena za vrlo tanke restauracije, za zadržavanje prirodne boje.



Opaque (opakna)
Koristi se za prekrivanje diskoloriranih podloga, ako je potrebno.



Bleach (za bijeljenje)
Koristi se za povećanje opaciteta i svjetline kada se traže biserno bijeli zubi.

G-CEM Veneer	
G-CEM Veneer Starter Kit	
012383	2x G-CEM Veneer (nadopuna) A2 & TR, 2x Try-in Paste (nadopuna) A2 & TR, 1x G-Multi PRIMER, 1x G-Premio BOND, 45x nastavak igličasti
G-CEM Veneer (nadopuna) 1 ml (1.7 g) + 10x nastavak za doziranje	
012389	G-CEM Veneer A2 EEP
012390	G-CEM Veneer Translucent (TR) EEP
012391	G-CEM Veneer Opaque (OP) EEP
012392	G-CEM Veneer Bleach (BL) EEP
G-CEM Try-in paste 1.2 ml (1.5 g)	
012803	G-CEM Try-in Paste A2
012804	G-CEM Try-in Paste Translucent
012805	G-CEM Try-in Paste Opaque
012806	G-CEM Try-in Paste Bleach
Povezani proizvodi	
901503	GC nastavak za doziranje igličasti, dugački x 30
009553	GC G-Multi PRIMER 5 ml
012695	GC G-Premio BOND, (nadopuna) (5 ml) EEP

G-CEM Try-in Paste, G-CEM Veneer, G-Multi PRIMER i G-Premio BOND su zaštitni znaci tvrtke GC. Calibra, NX3 Nexus, Panavia V5, RelyX Unicem i Variolink Esthetic DC nisu zaštitni znaci tvrtke GC.



Preuzmite naš **GC Luting Guide** upute korak-po-korak za svaku mogućnost cementiranja.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com



GC G-CEM Veneer

Savršeno tečenje

Estetski cement za jednostavnu primjenu i s izvrsnim mehaničkim svojstvima.

G-CEM Veneer ima sastojke koji jamče izvrstan krajnji rezultat za samouvjeren osmijeh. Tajna je u njegovoj optimalno usklađenoj formuli **FSC tehnologije** (Full-coverage Silane Coating / potpuno prekrivajući silanski sloj). Ova inovativna tehnika punila omogućuje postizanje većeg udjela punila pomoću homogene raspodjele punila u matrici. Rezultat su **jedinstvena svojstva rukovanja i izvrsna fizička svojstva**.

Potpuno prekrivajući silanski sloj (FSC)

G-CEM Veneer je izrađen na temelju **najnovije inovacije u tehnologiji punila (FSC)**. Površina punila gotovo je potpuno prekrivena silanskim sredstvom za spajanje, što omogućuje savršenu vezu između punila i matrice. Ova nova tehnologija omogućuje disperziju **veće količine punila (udjel punila 69% w/w)** na vrlo učinkovit način te dovodi do **tiksotropne konzistencije**.



Prednosti tiksotropnosti


Zahvaljujući novoj FSC tehnologiji, G-CEM Veneer je **vrolo tiksotropan materijal**. Ako se ne dira, ostaje u mjestu, a postaje tekuć kad je pod pritiskom. Na taj način je cjelokupna površina restauracije jednolično prekrivena bez praznina, dok se debljina sloja održava na minimalnoj. **Rezultat: savršeno prijanjanje!** Druga prednost FSC tehnologije: **G-CEM Veneer nije ljepljiv**. Stoga je jednostavan za vrlo precizno nanošenje i **lako odstranjivanje viška**. Optimalno usklađeno tečenje čini ovaj cement osobito lakim za korištenje, pristupačnim i učinkovitim u usporedbi s konvencionalnim kompozitima s visokim tečenjem ili prethodno zagrijanih. Jedinstvena konzistencija čini G-CEM Veneer **idealnim partnerom za sve estetske restauracije**.



G-CEM Veneer



Konkurentski proizvod

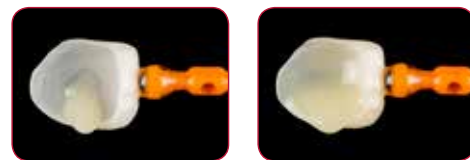

Manje problema.

U kombinaciji s univerzalnim primerom G-Multi PRIMER i univerzalnim adhezivom G-Premio BOND, G-CEM Veneer jamči stabilnu i postojanu adheziju za sve vrste podloga i preparacija. **Cementiranje postaje i u toj mjeri standardizirano.**

G-Premio BOND

G-Premio BOND je **istinski univerzalni adheziv**, potvrđene formule, koji se **spaja za sve preparacije** za čvrstu i trajnu adheziju. G-Premio BOND sadrži tri funkcionalna monomera za spajanje za svaku preparaciju, bilo dentin, caklinu, metal ili kompozit.

G-Premio BOND može se koristiti u **oba načina jetkanja** te se preporuča za tanke restauracije kao što su ljuske: selektivno jetkanje cakline ili totalno jetkanje. Nakon svjetlosne polimerizacije sloj spoja je tanak i ravnomjeran, što omogućuje **savršenu prilagodbu** restauracije u bilo koje doba.

G-Multi PRIMER

G-Multi PRIMER je **univerzalni primer** koji koristi tri različita kemijska sredstva za osiguranje trajne adhezije u svim situacijama. Dodatkom silana primeru, a ne adhezivu, **jamči se stabilnost adhezije**.



JEDNOSTAVNI KORACI ZA NANOŠENJE

0. Prije



Četiri estetske boje

G-CEM Veneer dostupan je u četiri različite boje. Pažljivo su izabrane kako bi zadovoljile sve estetske potrebe.

1. Proba restauracije



Predvidiv završni rezultat

Pomoću Try-in paste lako se može predvidjeti završni rezultat. Pomaže u izboru točne boje i opaciteta.

2. Jetkanje preparacije



Izbor načina jetkanja

Jetkati rubove cakline ili koristiti pristup totalnog jetkanja za minimalne preparacije lokalizirane uglavnom u caklini.

3. Nanošenje G-Premio BOND



Spajanje sa svim podlogama

Dokazana formula adheziva G-Premio BOND osigurava spajanje sa svim podlogama. Zasebno se stvrdnjava i toliko je tanak da ne smeta nanošenju na restauraciju.

4. Nanošenje G-Multi PRIMER



Spajanje sa svim restauracijama

Nakon točne pripreme (jetkanje ili pjeskarenje), G-Multi PRIMER osigurava postojanu adheziju za sve estetske restaurativne materijale.

5. Cementiranje



Precizno nanošenje

Tiksotropnost i dugo vrijeme rada omogućuju precizno nanošenje.

6. Odstranjivanje viška



Lako čišćenje

Kratko stvrdnjavanje od 1-2 sekundi prije odstranjivanja je optimalno. Nakon završne svjetlosne polimerizacije, rubovi se lako mogu završno obraditi i polirati do visokog sjaja, kako bi se maksimalno smanjilo zadržavanje plaka.

7. Završni rezultat



Trajni rezultat

Visoka postojanost boje i izvrsna mehanička svojstva osiguravaju trajni i kvalitetni završni rezultat.

G-CEM Veneer

Izvrсна polimerizacija

G-CEM Veneer može se učinkovito polimerizirati svjetlom kroz restauracije <2 mm uz dovoljnu translucenciju. Indiciran je **za kompozitne i keramičke ljuske, inleje i onleje**.

Izuzetna otpornost na trošenje

Glatka i sjajna površina se održava duže vrijeme zbog visoke otpornosti na trošenje, **sprječavajući stvaranje rubnih pukotina i diskoloracija**. FSC tehnologija i poboljšana matrica sprječavaju gubitak čestica i osiguravaju homogenu distribuciju punila.

Mala debljina sloja

Prednosti čvrstoće u kombinaciji sa savršenim tečenjem... Izvršno prijanjanje postiže se **bez potrebe za prethodnim zagrijavanjem!**

G-CEM Try-in Paste

Boje G-CEM Try-in Paste **savršeno odgovaraju** četiri G-CEM Veneer boje. Na bazi su vode za lako odstranjivanje nakon nanošenja.

