

天地110mm×左右190mm

## G-CEM™ Veneer ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ RAGASZTÁSI TECHIKA HÉJAKHOZ

### A. ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE



Távolítsa el az ideiglenes helyreállítást, majd alaposan tisztítsa le.



Ellenőrizze az illeszkedést és az okklúziót. Ha kell, a G-CEM TRY-In Paste anyagot használja.



Távolítsa el a helyreállítást és öblítse le vízzel.


### B. A HELYREÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Készítse elő a helyreállítást a gyártó utasításainak megfelelően.


>> Üvegkerámia



Savazza hidrofluorsavval.

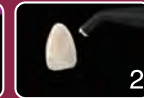

Öblítse le és szárítsa meg.

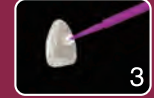

Applikáljon G-Multi PRIMER-t.


>> Hibrid-kerámia és kompozit



Homokfújja\*



Fújja le levegővel. Öblítse le és szárítsa.

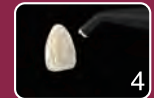

Szárítsa le puszterrel.

\* vagy CERASMART esetén savazhatja hidrofluorsavval.

### C. FOGFELSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE



Öblítse le és szárítsa meg az előkészített fogat.



Választhatja a szelektív és a teljes savazásos technikát is. Öblítse le és szárítsa meg.



Applikáljon G-Premio BOND-ot. Várjon 10 másodpercet.



Szárítsa le MAXIMÁLIS LÉGNYOMÁSSAL 5 másodpercig.



Fénykezelje 10 másodpercig (Halogén/LED 700mW/cm<sup>2</sup>).

### D. RAGASZTÁS



Applikálja a G-CEM Veneer cementet közvetlenül a restaurációba.



Mérsékelt nyomással azonnal helyezze az előkészített fogra. Tartsa nyomás alatt.



Távolítsa el a felesleget ecsettel vagy egy eszközzel, nyomás alatt. A felesleget részpolimerizálhatja 1-2 mp-ig.



Fénykezeljen minden felületet, preparációs határt 20 mp-ig.



Finírozza és polírozza a széleket.

► A GC Luting Guide az összes ragasztáshoz lépésről-lépésre segítséget nyújt



**GC**

天地110mm×左右190mm

## G-CEM™ Veneer ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ RAGASZTÁSI TECHIKA INLAYKHEZ / ONLAYKHOZ

### A. ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE



Távolítsa el az ideiglenes helyreállítást, majd alaposan tisztítsa le.

1



Ellenőrizze az illeszkedést és az okklúziót. Ha kell, a G-CEM TRY-In Paste anyagot használja.

2



Távolítsa el a helyreállítást és öblítse le vízzel.

3

### B. A HELYREÁLLÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Készítse elő a helyreállítást a gyártó utasításainak megfelelően.

>> Üvegkerámia



Savazza hidrofluorsavval.



Öblítse le és szárítsa meg.



Applikáljon G-Multi PRIMER-t.

>> Hibrid-kerámia és kompozit



Homokfújja\*



Fújja le levegővel. Öblítse le és szárítsa.



Szárítsa le puszterrel.

\* vagy CERASMART esetén savazhatja hidrofluorsavval.

### C. FOGFELSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE



Öblítse le és szárítsa meg az előkészített fogat.

1



Választhatja a szelektív és a teljes savazásos technikát is. Öblítse le és szárítsa meg.

2



Applikáljon G-Premio BOND-ot. Várjon 10 másodpercet.

3



Szárítsa le MAXIMALIS LÉGNYOMÁSSAL 5 másodpercig.

4



Fénykezelje 10 másodpercig (Halogén/LED 700mW/cm<sup>2</sup>).

5

### D. RAGASZTÁS



Applikálja a G-CEM Veneer cementet közvetlenül a restaurációba.

1



Mérsékelt nyomással azonnal helyezze az előkészített fogra. Tartsa nyomás alatt.

2



Távolítsa el a felesleget ecsettel vagy egy eszközzel, nyomás alatt. A felesleget részpolimerizálhatja 1-2 mp-ig.

3



Fénykezeljen minden felületet, preparációs határt 20 mp-ig


4



Finírozza és polírozza a széleket.

5

Starter Kit tartalma

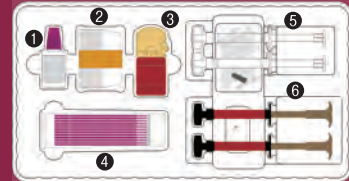

- 1 G-Multi PRIMER
- 2 Disposable dispensing dish
- 3 G-Premio BOND
- 4 DISPOSABLE APPLICATOR II
- 5 G-CEM Try-In Paste
- 6 G-CEM Veneer

13010202  
060981DK