

A. PROVA IN BOCCA



Rimuovere il restauro provvisorio e pulire accuratamente.

1



Controllare l'adattamento e l'occlusione. Se necessario, usare la pasta G-CEM Try-in Paste.

2



Rimuovere il restauro e sciacquare con acqua.

3

B. PREPARAZIONE DEL RESTAURO

Preparare il restauro seguendo le istruzioni del produttore

>> Vetro-ceramiche



Mordenzare con acido fluoridrico

1



Sciacquare e asciugare

2



Applicare G-Multi PRIMER

3

>> Ceramiche ibride e compositi



Sabbiare*

1



Detergere con getto d'aria. Sciacquare e asciugare.

2



Asciugare con getto d'aria

4

C. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DENTALE



Sciacquare e asciugare il dente preparato.

1



Scegliere la tecnica di mordenzatura selettiva o di mordenzatura totale. Sciacquare e asciugare.

2



Applicare G-Premio BOND. Attendere 10 secondi.

3



Asciugare con la MASSIMA PRESSIONE D'ARIA per 5 secondi.

4



Fotopolimerizzare per 10 secondi (lampada alogena/a LED 700mW/cm²)

5

D. CEMENTAZIONE



Estrarre G-CEM Veneer direttamente nel restauro.

1



Mettere immediatamente in situ sul dente preparato. Mantenere una pressione moderata.

2



Rimuovere il materiale in eccesso con un pennello o uno strumento, mantenendo al contempo una pressione moderata. Per facilitare la rimozione del materiale in eccesso, si può effettuare una fotopolimerizzazione flash per 1-2 secondi.

3



Fotopolimerizzare ciascuna superficie/margine per 20 secondi (lampada alogena/a LED 700mW/cm²)

4



Rifinire e lucidare i margini.

5

► Le procedure relative alle cementazioni sono spiegate passo per passo nella Guida alla cementazione GC



A. PROVA IN BOCCA



Rimuovere il restauro provvisorio e pulire accuratamente.

1



Controllare l'adattamento e l'occlusione. Se necessario, usare la pasta G-CEM Try-in Paste.

2



Rimuovere il restauro e sciacquare con acqua.

3

B. PREPARAZIONE DEL RESTAURO

Preparare il restauro seguendo le istruzioni del produttore

>> Vetro-ceramiche



Mordenzare con acido fluoridrico

1



Sciacquare e asciugare

2



Applicare G-Multi PRIMER

3

>> Ceramiche ibride e compositi



Sabbiare*

1



Detergere con getto d'aria. Sciacquare e asciugare.

2



Asciugare con getto d'aria

4

* Per CERASMART, in alternativa applicare acido fluoridrico.

C. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DENTALE



Sciacquare e asciugare il dente preparato.

1



Scegliere la tecnica di mordenzatura selettiva o di mordenzatura totale. Sciacquare e asciugare.

2



Applicare G-Premio BOND. Attendere 10 secondi.

3



Asciugare con la MASSIMA PRESSIONE D'ARIA per 5 secondi.

4



Fotopolimerizzare per 10 secondi (lampada alogena/a LED 700mW/cm²)

5

D. CEMENTAZIONE



Applicare il cemento direttamente sulla superficie di adesione dell'onlay e/o sulla superficie dentale.

1



Mettere immediatamente in situ sul dente preparato. Mantenere una pressione moderata.

2



Rimuovere il materiale in eccesso con un pennello o uno strumento. Si può effettuare una fotopolimerizzazione flash per 1-2 secondi.

3



Fotopolimerizzare ciascuna superficie/margine per 20 secondi (lampada alogena/a LED 700mW/cm²)


4



Rifinire e lucidare i margini.

5

Composizione dello Starter Kit

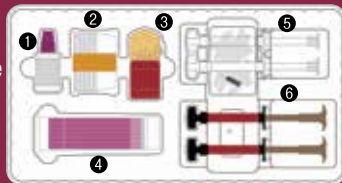

- 1 G-Multi PRIMER
- 2 Blocchetto per miscelazione monouso
- 3 G-Premio BOND
- 4 DISPOSABLE APPLICATOR II
- 5 G-CEM Try-In Paste
- 6 G-CEM Veneer