




היון מהרוק נהית GC

G-COAT PLUS

Nanofilled Self-Adhesive Light-Cured
Protective Coating

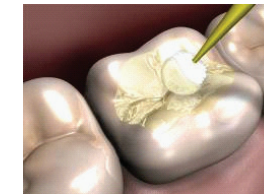

כיצד משתמשים?

1. שמים טיפה אחת של G-Coat Plus בצלוחית
2. מייבשים את השן
3. בעזרת מברשת בונדינג מורחים מיד את החומר על השן ועל השחזור
4. מקשים כ- 20-30 שניות בכל מכשיר אור

למה לשים לב?

- אין למרוח יותר משכבה אחת של החומר
- אין להוסיף חומר שחזור מעל G-Coat Plus
- יש לסגור את הבקבוק מיד לאחר הוצאת החומר
- אסור לייבש או לפזר את החומר בלחץ אוויר
- יש להקשות את החומר מיד לאחר הנחתו על השן

לכמה שימושים מספיק הבקבוק?

הבקבוק מכיל כ- 250 טיפות.
לציפוי השחזור דרושה טיפה אחת בלבד!



GC Europe - Israel Branch
4 Koifman St., Tel Aviv 68012, Israel
Tel. +972-3-7979630, Fax. +972-3-5106279
E-mail: info@gcisrael.com
www.gcisrael.com

מתי?

G-Coat PLUS מיועד לציפוי שחזורי גלאס ינומר, קומפוזיטים ושחזורים זמניים.

FUJI IX על גבי G-Coat PLUS



G-Coat PLUS על גבי שחזור קומפוזיט



GC Coat PLUS על גבי גלאס ינומר



הברקת כתר זמני



איך זה עובד?

בזכות **FUNCTIONAL MONOMER**, בדומה לחומרי קישור המתקדמים, יוצר G-Coat PLUS קשר כימי עמיד עם חומרי שחזור וחומר השן ללא כל צורך בצריבה או כל טיפול אחר בפני השטח! בגלל הפיזור האחיד של חלקיקי מילוי ה- **NANO** G-Coat PLUS אינו מעלה את גובה השחזור (עוביו 35-40 μm בלבד!) ואינו משנה את גוון השחזור המקורי. מילוי ה- **NANO** מהווה כ- 70% מנפח החומר לכן הוא עמיד בפני שחיקה לאורך זמן.

חברת **GC** גאה להציג את **G-Coat PLUS**, חומר לציפוי שחזורים אסתטיים שלא רק מהווה תחליף לתהליך הליטוש הממושך אלא גם מחזק את השחזור לאורך זמן. הנוסחה הייחודית של **G-Coat PLUS** מקנה לחומר יתרונות קליניים רבים. הפיזור האחיד של מילוי ה- **NANO** מקנה לחומר עמידות גבוהה בפני שחיקה, המונמרת האדהיבי מאפשר קישור עצמי של **G-Coat PLUS** לכל סוגי חומרי השחזור ולחומר השן.

תכונות ויתרונות

- מראה שחזור מבריק ללא פעולות ליטוש ממושכות
- פני השטח החלקים של השחזור תורמים לשיפור תחושת המתרפא
- מקטין את הרגישות ההתחלתית של גלאס ינומר למים
- הגנה על גבולות השחזור ומניעת צביעתו
- הפיזור האחיד של מילוי ה- **NANO** מקנה לחומר עמידות גבוהה בפני שחיקה
- ניתן להקשייה על ידי כל סוגי מכשירי האור
- **G-Coat PLUS** קל ונוח לשימוש, חוסך זמן רב בשלב הסופי של ביצוע שחזור, מגביר את חוזק השחזור ומונע שינוי צבע לאורך זמן
- אין לראות ב- **G-Coat PLUS** רק חומר ציפוי להברקת השחזור אלא חומר המחזק את השחזור, מקטין את שחיקתו ומונע דלף שולי

למה?

G-Coat PLUS פותח במיוחד על מנת להגביר את עמידות חומרי השחזור בפני שחיקה ומניעת שינוי הצבע. בנוסף לכך, הוא מונע דלף שולי ומקנה ברק לשחזור לאורך זמן.

