

GC'den G-Premio BOND

Tek bileşenli ışıkla polimerize universal adeziv

Sıfır Taviz



GC'den G-Premio BOND

Tek bileşenli ışıkla polimerize universal adeziv


Belirli bir endikasyon için uygun bondingi seçmek ve farklı uygulama adımlarını tam olarak takip ettiğinizden emin olmak her zaman kolay değildir. GC bu nedenle sadece **direkt bonding** için değil, aynı zamanda **tamir vakaları ve aşırı duyarlılık tedavisinde** de kullanılabilen **tüm etching teknikleri** ile uyumlu tek şişe **universal bonding G-Premio BOND'u** geliştirdi.

Dahası, GC bu uygulama kolaylığını ve çok yönlülüğü, bonding kalitesinde herhangi bir etki yaratmadan sunuyor. G-Premio BOND, **universal avantajları** sunarken **her durumda en üst düzeyde performans** sağlamaktadır.

Çünkü sıfır tavize inanıyoruz.



Neden Universal?

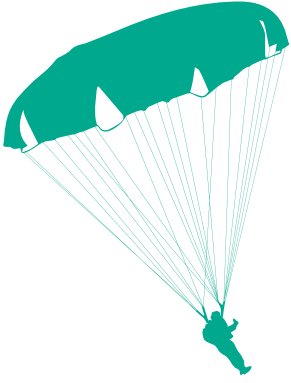

Etch tekniklerinde universal

Seçim sizin!



Self-etch



Selective etch



Total-etch

Endikasyonlarda universal

Çoklu uygulama!




Direkt bonding*



Tamir vakaları*



Aşırı hassasiyet tedavisi**

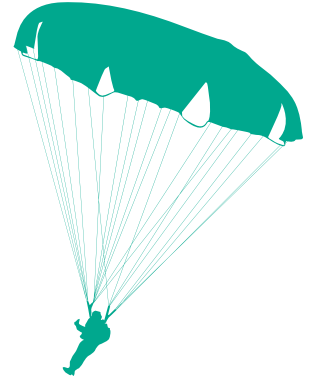

Performansta universal

Farklı yüzeylerde optimal performans!



mine ve dentine
güvenli bağlantı




mine ve dentine,
zirkona, alumina ve
değersiz metallere
mükemmel bağlantı



değerli metallere
bağlantı***

Üç fonksiyonel
monomerin
kombinasyonu
sayesinde:

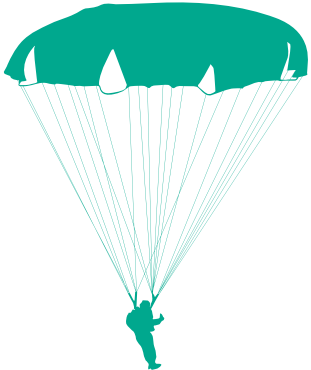

*Fotoğraflar: Dr S. Koide, Japonya **

**Fotoğraflar: Dr E. Sauji, Japonya

***MDTP: Metakriloyloksidesil dihidrojen thiofosfat

Performansta sıfır taviz

Sıfır adezyon kaybı!

Etch tekniğinden bağımsız, **mine ve dentine mükemmel bağlantı kuvveti** ile G-Premio BOND, **zaman içinde optimum performans ve dayanıklılık** sağlar. **Üç fonksiyonel monomer (4-MET, MDP ve MDTP) temeline dayanan eşsiz bileşimi** sadece **diş yapısına** değil, aynı zamanda **kompozitlere, metallere (değerliler dahil), zirkonya ve alüminaya** kalıcı bir bağlantı sağlar. G-Multi PRIMER gibi bir multi primer ile birlikte kullanıldığında, termocycle sonrasında bile her çeşit cam seramiğe dayanıklı bir bağlantı sağlar.

Başarısızlıklara son!

Sıfır renk değişimini hedefleyin!




G-Premio BOND, **optimum penetrasyon özelliği ile difüzyon ve çok verimli bir kurutma** (MAKSİMUM hava basıncında 5 saniye) sayesinde 3 µm gibi **çok ince bir film kalınlığı** sağlar. Bonding çok akışkan olmasına rağmen, **güçlü bir bağ tabakasının elde edilmesine yardımcı yüksek miktarda doldurucu ve foto-başlatıcı** içerir. Bu özellikler, **HEMA içermeyen formülasyon** ile birleştiğinde bonding tabakasının zaman içinde korunmasını garanti eder ve renk değişimlerine yol açan hidrolizi önler.

Dayanıklı estetik sonuçları tercih edin!

Sıfır post-operatif hassasiyet için çalışın!

G-Premio BOND kullanıldığında olası postoperatif hassasiyete yol açan **açık tübüller için endişelenmenize gerek yoktur**. Self-etch ve selektif etch teknikleri uygulandığında tübüller **sadece hafifçe açılır**. Total etch modunda, bondingin olağanüstü penetrasyon özelliği ve difüzyonu sayesinde tübüller **tam olarak infiltre** edilecektir.

Hastalarınızın endişelerini giderin!

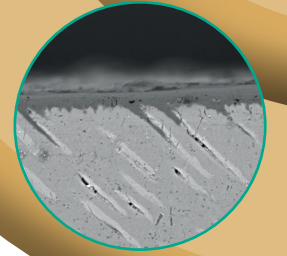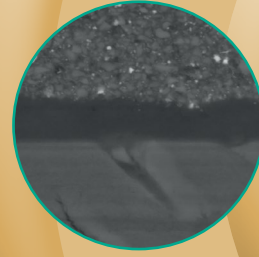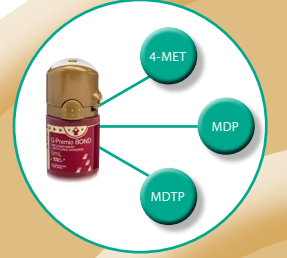

Manipülasyonda sıfır taviz

Sıfır hataya ulaşın!

G-Premio BOND ile rutin restoratif çalışmalarda **uygulama hataları neredeyse önlenir**. Basit kullanım prosedürü, **düşük teknik hassasiyet özelliği** ile birleştiren G-Premio BOND, uygulama sırasında tam konfor sağlar:

- **Bağlantı kuvveti, bekleme süresi tam dolmasa bile yeterlidir.**
- Kurutma adımı: **MAKSİMUM hava basıncında 5 sn.**
- Yüksek fotobaşlatıcı içeriği sayesinde **ışık ile polimerizasyonu çok etkilidir.**
- Polimerizasyon öncesi sarımsı renk ile **uygulamanızı kontrol edebilirsiniz**

Başarısızlıklara son!



Polimerizasyon öncesi sarımsı görünüm (kolay kullanım)



Polimerizasyon sonrası tamamen renksizleşir (mükemmel estetik sonuç)

Fotoğraflar: Dr. S. Köken - Türkiye

Çalışmalarınızda sıfır sorun!

G-Premio BOND kendi godesinde **7 dakikalık** çalışma süresiyle **stressiz bir uygulama** sağlar. Tek şişe ile çok yönlü kullanım olanağı sağlar: **direkt bonding, tamir vakaları, aşırı hassasiyet tedavisi. Optimum viskozitesi ve penetrasyon özelliği** sayesinde çok kolay uygulanır. **Sıkıcı rutinleri unutun!**


Sıfır israf!

G-Premio BOND'un hızlı uygulama prosedürü sayesinde zamandan tasarruf edin: 25 sn. self-etch, 50 sn. selektif veya total etch. İzolasyonun tam sağlanamaması durumlarda veya pedodontik vakalar için özellikle faydalı olacaktır. G-Premio BOND, eşsiz silikon tasarımı sayesinde madde kaybını en aza indirir ve kontrollü damla çıkışı sağlayan ince nozülü sayesinde materyal akışını optimize eder.- her şişe için 300 damla. Son damlasına kadar stabilize..

Zaman ve madde israfına son!



Direkt Restorasyonlarda Sıfır Taviz

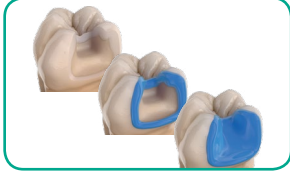

Tercih ettiğiniz tekniği seçin. 10-15 sn. asitleyin, durulayın ve kurutun..



G-Premio BOND uygulayın ve 10 sn. bekleyin.




MAKSİMUM hava ile 5 sn. kurutun.



10 sn. ışıkla polimerize edin.

G-Premio BOND, self-etch modunda mine ve dentinde ısıl döngüden sonra test edilen ürünler arasında en yüksek bağ dayanımı değerleri gösterir.

Mine ve dentin için self-etch modunda, ısıl döngüden sonra (20.000 döngü) kesme bağ dayanımı (MPa)

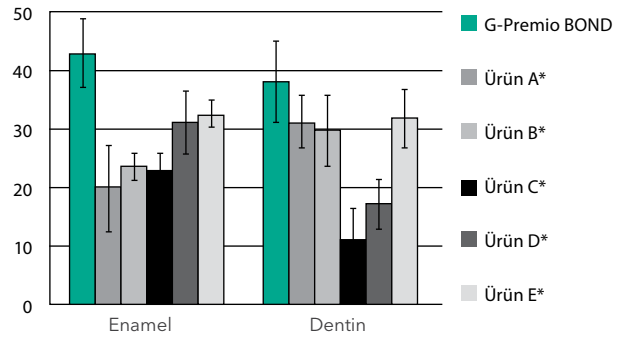

Kaynak: GCC ARGE verileri, Japonya, 2015

* GC ticari markası değildir


Tamirlerde Sıfır Taviz



G-Premio BOND, MDTP monomeri sayesinde değerli metaller dahil olmak üzere, thermocycle sonrası tüm yüzeylere mükemmel bir bağlantı sağlar. Test edilen diğer ürünler değerli metaller ile bağlantıda düşük performansa göstermektedir.

G-Premio BOND ile birlikte cam seramiklere ayrı bir primer(G-Multi PRIMER gibi) uygulaması **dayanıklı bir bağlanma sağlar.**

Thermocycle (5.000 döngü) sonrası indirekt substratlara makaslama bağlantı kuvveti (MPa)

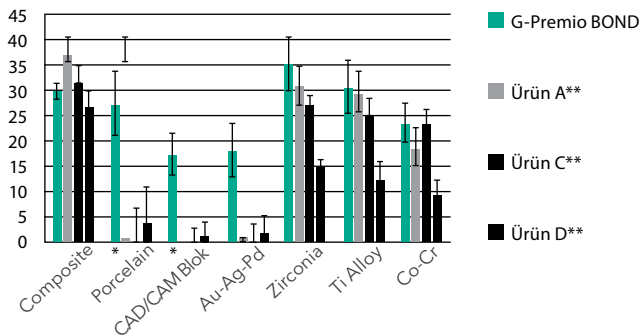

Kaynak: GCC ARGE verileri, Japonya, 2015

* Ceramic Primer II ile birlikte kullanıldığında

** GC ticari markası değildir


Yüzeyi pürüzlendirin; Durulayın ve kurutun.



Yüzey cam seramikse, G-Multi PRIMER uygulayın ve kurutun.



Tamir edilecek tüm yüzeylere G-Premio BOND uygulayın ve 10 sn. bekleyin.

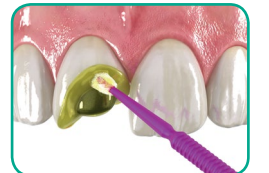

MAKSİMUM hava basıncında 5 sn. kurutun.




10 sn. ışıkla polimerize edin.



GC G-Premio BOND


Zorlu alıřmalara meydan okuyun!

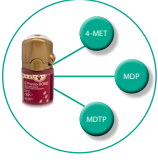

Sıfır adezyon kaybı




Sıfır hata

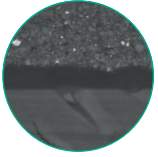

Sıfır renkleřme



Sıfır zorluk

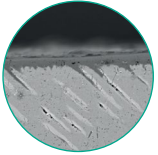

Sıfır postoperatif duyarlılık



Sıfır israf



G-Premio BOND

Sipariř Bilgileri

10001457	G-Premio BOND 5mL Kit
10001461	G-Premio BOND 5mL Bottle Refill
10001458	G-Premio BOND 3-bottle Pack
10001242	G-Premio BOND Unit Dose 50 pcs

GC EUROPE N.V.

Head Office Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33 B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com

GC Turkey Ltd.

Caferađa Mah. Albay Faik
Sözdener Cad.
İffet Gülhan İş Merkezi No: 9 Kat: 1
D: 4 34710 Kadıköy / İstanbul
Tel: +90 216 504 06 01
info.turkey@gc.dental