

# Poslovite se od preobčutljivosti!

GC-jeve rešitve za preobčutljive zobe




## G-Premio BOND: Prava rešitev za izpostavljene korenine



Zaradi vse bolj kisle prehrane se srečujemo z vedno pogostejšo preobčutljivostjo zob. Prav tako pogosto naletimo na **izpostavljene korenine** zaradi **paradontalnih težav** ali **pregrobnega ščetkanja**.

GC-jev G-Premio BOND ponuja hitro in enostavno rešitev, s katero lahko **nemudoma olajšate** pacientove tegobe. Pacient bo zapustil ordinacijo z nasmeškom in se bo rad vrnil na kontrolo.

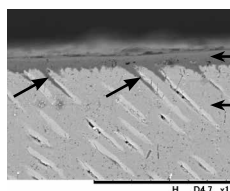

Sloj  
lepljenja  
Dentina

### Učinkovita desenzitizacija

Edinstvena sestava z debelino zgolj 3- $\mu$ m zagotavlja globoko prodiranje in **zapiranje dentina**, s čimer **blokira bolečo** preobčutljivost in pacientu nudi takojšnje, dolgotrajno olajšanje.



Zdravljenje preobčutljivosti  
z G-Premio BOND.  
Z dovoljenjem Dr. Eisuke Sauji,  
Japonska.

### Takojšnje olajšanje - v manj kot 1 minuti!



Nanesite G-Premio BOND.  
Počakajte 5-10 s.



Osušite z maksimalnim  
zračnim curkom.




Presvetlite.



Odstranite  
nepolimerizirani sloj.

## Praktičen in učinkovit

- Natančno doziranje, čista steklenička
- Vsebuje najmanj 300 kapljic
- Viden pri nanosu, neviden po presvetljevanju

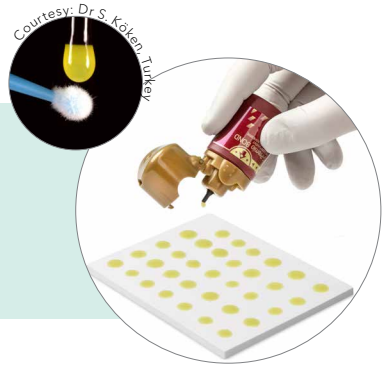

## Univerzalna raba

Poleg takojšnjega olajšanja pri preobčutljivosti lahko G-Premio BOND uporabite tudi za zanesljivo direktno lepljenje, cementiranje in popravila.


## MI Paste Plus: zmanjšuje preobčutljivost doma, med beljenjem zob in v primeru hipomineralizacije.



Kako nanesti  
Tooth Mousse/  
MI Paste Plus

V primeru splošne preobčutljivosti MI Paste Plus učinkovito pomaga in prinese olajšanje.<sup>1</sup> Še več, zahvaljujoč svoji patentirani formuli z RECALDENT™ (CPP-ACP) pomaga ustvariti idealno okolje za remineralizacijo.

Pred (levo) in po (desno) zapiranju dentinskih tubulov z MI Paste Plus. Jasno so razvidni CPP nanofilamenti na obdelani površini.  
Z dovoljenjem Oral Health CRC, Univerza v Melburnu, Avstralija

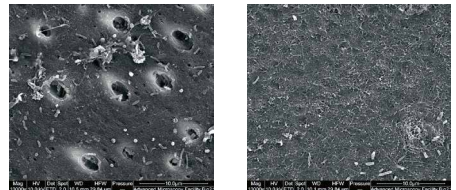

MI Paste Plus lahko naneseemo v ordinaciji, posebej po beljenju zob ali preventivnem zdravljenju - in nadaljujemo doma.



1. Mahesuti A, Duan YL, Wang G, Cheng XR, Matis BA. Short-term Efficacy of Agents Containing KNO<sub>3</sub> or CPP-ACP in Treatment of Dentin Hypersensitivity. Chin J Dent Res. 2014;17(1):43-7.



## G-Premio BOND: vse njegove prednosti

- Hiter postopek, ki vzame manj kot eno minuto
- Takojšnje, učinkovito in dolgotrajno olajšanje
- Ena steklenička za različne možnosti uporabe
- Steklenička dolgo traja: 300 kapljic na stekleničko



## Sorodni izdelki



Tooth Mousse



MI Varnish



RECALDENT in logotip RECALDENT sta licenčni blagovni znamki podjetja Mondelēz International group.

RECALDENT™ pridobivamo iz mlečnega kazeina. Ni primeren za uporabo pri osebah z alergijo na mleko. V primeru alergične reakcije prenehajte z uporabo, usta splaknite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. MI Paste Plus, MI Varnish in Tooth Mousse so blagovne znamke GC.

GC EUROPE N.V., Researchpark Haasrode-Leuven, 1240 Interleuvenlaan 33, 3001 Leuven Belgium  
[www.gc.dental/europe](http://www.gc.dental/europe)

GC EUROPE N.V., GCEEO Slovenia, Ulica Talcev 1a, SLO - 3310 Žalec  
 Tel. +386.3.710.32.70, Fax. +386.3.710.32.71, [info.slovenia@gc.dental](mailto:info.slovenia@gc.dental), [www.gc.dental/europe/sl-SI](http://www.gc.dental/europe/sl-SI)