



יש להיעזר
בהוראות השימוש
המפורטות

לפני שימוש, יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש.

טכניקת קישור



הקשייה באור



לחץ אוויר מרבי

5 שניות

ייבוש



10 שניות

הנחת G-Premio
BOND והמתנה 10
שניות



תחילת הנחת קומפוזיט

בחירת טכניקת צריבה



צריבה עצמית



צריבה סלקטיבית

10-15 שניות



צריבה מלאה

10-15 שניות

יש לצרוב 10-15 שניות,
לשטוח ל-5 שניות ולייבש קלות.

זמן הקשייה

מרחק מקצה מוליך האור		יחידת הקשייה באור
יותר מ-10 מ"מ	פחות מ-10 מ"מ	
20 שניות	10 שניות	הלוגן / לד (700 mW/cm ²)
10 שניות	5 שניות	לד רב-עוצמה (1200 mW/cm ²)

תיקון אינטרה-אוראלי



הקשייה באור



לחץ אוויר מרבי

ייבוש



הנחת G-Premio BOND על כל המשטחים, המתנה 10 שניות



הנחת Ceramic Primer II על משטחי החרסיה. ייבוש.



ספיסוס המשטח. שטיפה וייבוש.



הסרת שכבה לא-מפולמרת.



הקשייה באור



לחץ אוויר מרבי

ייבוש



הנחת G-Premio BOND. המתנה 10 שניות.