

Lakše do estetike: GC Gradia Direct

Svjetlosnopolimerizirajući kompozit
za "nevidljive" ispune

GC GRADIA DIRECT je kompozit s jedinstvenom strukturom čestica i pametnim, a jednostavnim sustavom boja. Raspoloživ u verzijama Anterior i Posterior, za ispune na prednjim i stražnjim zubima, GC GRADIA DIRECT postavlja novi standard estetske "nevidljivosti" i jednostavne uporabe, pružajući izvrsni ispun prirodno izgleda korištenjem samo jedne boje, a ako je potrebno daljnje estetsko poboljšanje, vrlo se jednostavno mogu dodati druge boje.



GC GRADIA DIRECT
OCJENJENA JE ODLIČNOM
OCJENOM, 5 OD 5,
U "DENTAL ADVISOR"-u
(VOL. 21 - 2004).

Jedinstveni sustav boja za još veću jednostavnost

Nevidljivi ispun zahtjeva točan odabir boja GC GRADIA DIRECT. Za pomoć pri odabiru pravog tona, krome, nijanse i translucencije, postoji pametan, no vrlo jednostavni sustav boja s vodičem za boje koji je izrađen za tehniku jedne boje ili više boja.



Standardne boje

Za tehniku jedne boje korištenje jedne standardne boje pruža izvrsni rezultat. Raspoloživ u verziji Anterior (za prednje ispune) i Posterior (za stražnje ispune), svaka predstavlja finu ravnotežu između tona, krome, nijanse i translucencije. Anterior verzija (za prednje ispune) ima A, B i C skupine boja koje se temelje na VITAPAN Classical® vodiču za boje, kao i CV (cervikalnu), XBW (ekstra izbjlijedjelu bijelu) i BW (izbjlijedjelu bijelu) nijansu. Posterior verzija (za stražnje ispune) ima samo A boje.



Primjer prednjeg ispuna



Primjer stražnjeg ispuna

Specijalne boje


Iako GC GRADIA DIRECT pruža izvrsnu estetiku za 95% postupaka koji koriste samo jednu boju, može biti situacija kad se preferira tehnika više boja kao kad je potreban velik ispun. Može se odabrati između dva tipa dodatnih boja, koje se nazivaju specijalne boje i postavljaju se ispod ili iznad standardne boje.

Unutarnje specijalne boje

To su neprozirne boje koje se postavljaju ispod standardne boje i pružaju toplinu konačnoj boji te blokiraju "tamni sjaj" usne šupljine. Postoje četiri unutarnje specijalne boje: AO2, AO3, AO4 i X-AO2.



Primjer prednjeg ispuna

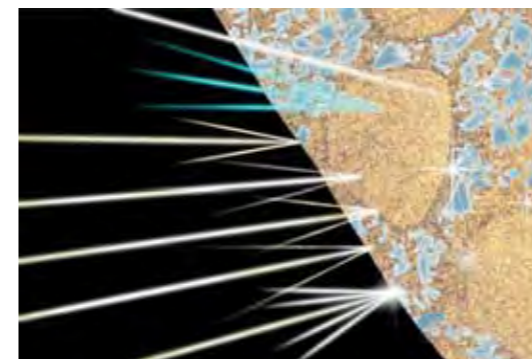

GC GRADIA DIRECT ima sličnu raznovrsnu višestranu strukturu kao PRIRODNI ZUB. Njihove refleksije, te optička svojstva su stoga vrlo slična što ispun čini estetski "nevidljivim" - "invizi-fx".

Vanjske specijalne boje

Postavljaju se iznad standardne boje i uzimaju u obzir caklinske promjene ovisne o dobi koje utječu na njezinu translucenciju i nijansu. To pruža stvarniji izgled.

Budući da debljina cakline ide od deblje do tanje njezina se nijansa smanjuje s godinama. U djece je WT boja (White Translucent - bijela translucetna) najbjelija, a DT boja

(Dark Translucent - tamna translucetna) je za tamnije zube odraslih. Za starije postoji GT boja (Grey Translucent - siva translucetna) koja pruža najtamniju nijansu, a CVT boja (Cervical Translucent - cervikalna translucetna) je za cervikalno područje.

Što je caklina tanja, povećava se translucencija zuba. To je osobito vidljivo na incizalnim rubovima.

Za bolju podudarnost s postojećom translucencijom može se koristiti CT (Clear Translucent - prozirna translucetna) boja i/ili NT (Natural Translucent - prirodna translucetna) boja.

Sve vanjske specijalne boje mogu se nabaviti u anterior verziji (za prednje ispune), a za posterior verziju (za stražnje ispune) postoje WT i NT boje.

Boje za ispune na prednjim zubima

Standardne	
Unutarnje specijalne	
Vanjske specijalne	

Standardne i unutarnje specijalne boje se temelje na Vita® vodiču za boje.

XBW: Extra Bleach White
BW: Bleach White
CV: Cervical
CVD: Cervical Dark
DT: Dark Translucent
CT: Clear Translucent
GT: Grey Translucent
NT: Natural Translucent
WT: White Translucent
CVT: Cervical Translucent

Boje za ispune na stražnjim zubima

Standardne	
Vanjske specijalne	
Unutarnje specijalne	

Boje GC Gradia Direct Flo & LoFlo

--

Vodič za boje

Većina boja vezana je za VITAPAN Classical® vodič za boje, no neke su jedinstvene, pa za pomoć pri odabiru treba jednostavno koristiti vodič za boje. On ima "prste" u obliku klina povećane debljine kako bi se pomoglo stomatolozima ocijeniti utjecaj debljine materijala na određenu boju.



VIŠEBOJNA TEHNIKA

KLASA I



KLASA II



KLASA III



KLASA IV



DJECA ODRASLI STARJI



KLASA V



GRADIA DIRECT



Sadržaj po štrcaljki: 2,7 ml (4 g) za anterior, 2,7 ml (4,7 g) za posterior i 2,7 ml (5 g) za X verziju
Sadržaj po ulošku: 0,16 ml (0,24 g) za anterior, 0,16 ml (0,28 g) za posterior i 0,16 ml (0,30 g) za X verziju

PAKIRANJA

ŠTRCALJKE

Početni komplet: (7 štrcaljki), 6 anterior boja (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT), 1 posterior boja (P-A2) i vodič za boje

Cijeli komplet: (26 štrcaljki), uključujući sve dostupne standardne (osim za B1 i XBW), unutarnje specijalne i vanjske specijalne boje i 1 vodič za boje

Nadopuna: 1 štrcaljka

ULOŠCI

Početni komplet: (35 uložaka) 6 anterior boja (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT), 1 posterior boja (P-A2) i vodič za boje

Cijeli komplet: (106 uložaka), uključujući sve dostupne standardne (osim za B1 i XBW), unutarnje specijalne i vanjske specijalne boje i 1 vodič za boje

Nadopuna: Kutija s 20 uložaka za: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, DT, NT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5

Nadopuna: Kutija s 10 uložaka za: A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, BW, XBW, CT, WT, GT, CVT, X-AO2

Pribor:

Vodič za boje, 1 komad

Aplikator za uloške, 1 komad



GRADIA DIRECT Flo GRADIA DIRECT LoFlo

PAKIRANJA

2 x 1,5/1,3 g (0,8 ml) štrcaljke
4 vrha za doziranje, metalnog tipa
2 poklopca za zaštitu od svijetla

Boje: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW
Pribor: Vrhovi za doziranje, metalnog ili plastičnog tipa, 20 komada



G-Bond

PAKIRANJA

Početni komplet:

Bočica 5 ml, 50 jednokratnih aplikatora i 1 posuda za doziranje
Jedinična doza, 50 x 0,1 ml jedinične doze i 50 jednokratnih aplikatora



G-Light

PAKIRANJA

EU tip (Europska unija), uključujući pribor (vodilica za svjetlo, baterija, punjač baterije, kabel za struju, zaštita od odbijeska svjetlosti, zaštita od svjetla i postolje)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Croatia
Cazmanska 8
HR-10000 Zagreb
Tel. +385.1.46.77.251
Fax. +385.1.46.78.473
croatia@gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

z O LF CO 8 60 07/07

Lakše do
estetike:

GC Gradia Direct

Svjetlosnopolimerizirajući kompozit
za "nevidljive" ispune

...od sada sa novim X nijansama...