

Tenga una visión clara



EXACLEAR de GC

Material de vinilpolisiloxano
transparente

EL SOCIO DE GRADIA® PLUS
para un trabajo transparente

- Control excelente de los detalles
- Manipulación sencilla
- Fraguado rápido

GC

EXACLEAR y GRADIA PLUS

de GC

EXACLEAR es muy útil para crear coronas o carillas provisionales. Utilizar GRADIA PLUS Light Body de GC en lugar de acrílico resulta más sencillo y es menos sensible a la técnica empleada. Solo tiene que inyectar el material en el molde de EXACLEAR.

Obtiene un control visual óptimo gracias a la elevada transparencia y también puede conseguir una polimerización eficaz mediante la fotopolimerización a través del molde. El material es firme pero flexible, además, se puede retirar y volver a colocar fácilmente sin que se rompa.

Se puede mantener un espacio para CUBRIR con Heavy Body Enamel HB-E. El maquillado final y glaseado con Lustre Paint son la guinda del pastel.



EXACLEAR inyectado en una plantilla formada al vacío y colocada sobre el modelo de cera.



Modelo preparado, recubierto con un separador de silicona sobre las preparaciones y un separador GRADIA PLUS de GC sobre el resto.



Inyección de Light Body.



El composite se polimeriza a través del EXACLEAR extremadamente transparente.



Después de retirar la silicona y la limpieza de los orificios de ventilación.



Restauraciones provisionales acabadas con Lustre Paint.

Su socio en situaciones clínicas complejas



Pilares de implantes provisionales con una capa opaca de GRADIA PLUS y refuerzo GC Stick.



Light Body inyectado y polimerizado.



Después de la limpieza y cut back de las restauraciones.



Modificación de la superficie con Lustre Paint, recubierto con Heavy Body Enamel HB-E.



Caso final acabado con Lustre Paint CLF.



Casos: Stephen Lusty, Reino Unido
EXACLEAR, GC Stick y GRADIA PLUS son marcas registradas de GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC IBÉRICA
Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
<http://spain.gceurope.com>

'GC'