

Lásson tisztán



GC EXACLEAR

Átlátszó vinil polisziloxán anyag

A GRADIA® PLUS partnere
a transzparens munkákhoz

- részletek kiváló ellenőrzése
- könnyű kezelhetőség
- gyors kötés

GC EXACLEAR és GRADIA PLUS

Az EXACLEAR nagyon hasznos ideiglenes koronák és héjak készítése során. Amennyiben a GC GRADIA PLUS Light Body termékét használja akrilát helyett, a munkája könnyebb, és technikailag kevésbé érzékeny lesz. Egyszerűen injektálja be az anyagot az EXACLEAR sablonba!

A magas átláthatóság optimális vizuális kontrollt biztosít, és hatékony fénypolimerizáció érhető el a szilikon anyagon keresztül. Rigid és erős, ugyanakkor flexibilis, így törés és eldeformálódás nélkül eltávolítható és újra felhelyezhető.

Helyet is tud fenntartani a Heavy Body Enamel HB-EL vagy HB-ED-vel történő befedéshez. Végső festés és glazúrozás Lustré Paint használatával a hab a tortán!



Egy vákuummal kialakított formába EXACLEAR anyagot injektálunk, majd a wax-up -ra helyezzük.



Preparált modell, szilikon szeparátorral kezelve a preparált területen, és GC GRADIA PLUS szeparátorral máshol.



Light Body beinjektálása.



A kompozit fénypolimerizálása a tökéletesen átlátszó EXACLEAR anyagon keresztül.




A szilikon sablon, és a beömölt csapok eltávolítása után.



Az ideiglenes restauráció, Lustré Paint használatával befejezve.

Az Ön partnerei komplex klinikai szituációknál

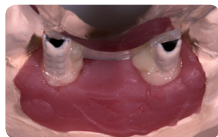

Ideiglenes implant felépítmények GC GRADIA PLUS opaque réteggel, valamint GC Stick meeresítéssel.



Light Body beinjektálása és fénypolimerizálása.



A restauráció letisztázása és visszakaparása.



A felület módosítása Lustré Paint segítségével, majd kialakítása Heavy Body Enamel HB-EL illetve HB-ED-vel.



Az eset Lustré Paint CLF használatával lett befejezve.

Esetek: Stephen Lusty, Egyesült Királyság
EXACLEAR, GC Stick és GRADIA PLUS a GC védjegyei.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Hungary
Fazekas utca 29-31.
HU - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
info.hungary@gc.dental
www.gceurope.com