

Trasparenza e controllo visivo



## EXACLEAR di GC

Materiale trasparente  
in vinilpolisilossano

Il partner di GRADIA® PLUS  
per i lavori trasparenti

- Eccellente controllo dei dettagli
- Buona maneggevolezza
- Indurimento rapido

**GC**

# EXACLEAR e GRADIA PLUS

di GC

EXACLEAR è molto utile quando si devono realizzare corone provvisorie o faccette. GC GRADIA PLUS Light Body è più facile da usare rispetto all'acrilico ed è anche meno sensibile alla tecnica impiegata. Basta iniettare il materiale nello stampo EXACLEAR!

Grazie all'elevata trasparenza, l'operatore avrà un controllo visivo ottimale. Inoltre, fotopolimerizzando attraverso lo stampo si può ottenere un efficiente indurimento. Il materiale è solido ma flessibile e può essere rimosso e riposizionato facilmente e senza strappi.

Si può tenere lo spazio necessario per coprire con Heavy Body Enamel HB-E. L'applicazione finale con il pennello e la glasura con Lustre Paint è la ciliegina sulla torta!



EXACLEAR iniettato in una sagoma formata sotto vuoto, posizionata sulla ceratura diagnostica.



Modello preparato, rivestito con un materiale silconico di separazione applicato sulle preparazioni e con il separatore GC GRADIA PLUS applicato sulla parte restante.



Iniezione di Light Body.



Il composito viene polimerizzato attraverso EXACLEAR, un materiale estremamente trasparente.



Dopo la rimozione del silicone e la pulizia delle aperture.



Restauri provvisori rifiniti con Lustre Paint.

## Il partner ideale per le situazioni cliniche complesse



Abutment d'impianto provvisori con strato opaco realizzato con GRADIA PLUS e rinforzo con GC Stick



Light Body iniettato e indurito.



Dopo la pulizia e il cut back del restauro.



Modifica superficiale con Lustre Paint, rivestimento con Heavy Body Enamel HB-E.



Caso ultimato, rifinitura con Lustre Paint CLF.



Casi di Stephen Lusty, Regno Unito  
EXACLEAR, GC Stick e GRADIA PLUS sono marchi commerciali di GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

**GC ITALIA S.r.l.**  
Via Calabria 1  
I-20098 San Giuliano  
Milanese  
Tel. +39.02.98.28.20.68  
Fax. +39.02.98.28.21.00  
info.italy@gc.dental  
<http://italy.gceurope.com>