



# Mieć doskonały widok



## EXACLEAR z GC

Przezroczysty materiał  
poliwinylosiloksanowy

Partner GRADIA® PLUS  
do przejrzystej pracy

- Doskonała kontrola szczegółów
- Łatwa procedura
- Szybkie wiązanie

**GC**

# EXACLEAR i GRADIA PLUS z GC

EXACLEAR jest bardzo przydatny do wytwarzania tymczasowych koron lub licówek. Użycie GC GRADIA PLUS Light Body zamiast akrylu jest łatwiejsze i mniej wrażliwe na technikę. Wystarczy wstrzyknąć materiał do formy z EXACLEAR!

Dzięki wysokiej przezroczystości masz optymalną kontrolę wzrokową i możliwość skutecznej polimeryzacji stosując utwardzanie światłem przez formę. Materiał jest sztywny, ale elastyczny i wykonaną z niego formę można łatwo zdejmować i przenosić bez zerwania.

Pozostawioną do pokrycia przestrzeń można pokryć za pomocą Heavy Body Enamel HB-EL lub HB-ED. Końcowe malowanie i glazurowanie przy użyciu Lustre Paint jest jak wisienka na torcie!



EXACLEAR wstrzyknięty do uformowanego próżniowo szablonu, umieszczonego na nawoskowanym modelu.



Gotowy model, pokryty silikonowym separatorem w miejscach preparacji i separatorem GC GRADIA PLUS w pozostałych miejscach.



Wstrzykiwanie Light Body.



Kompozyt utwardzany jest przez niezwykle przezroczysty EXACLEAR.



Po usunięciu silikonu i oczyszczeniu kompozytu pozostałego w otworach.



Uzupełnienia tymczasowe wykończone przy użyciu Lustre Paint.

## Twój partner w złożonych sytuacjach klinicznych



Łączniki tymczasowe implantów z warstwą opakerową GRADIA PLUS i wzmocnieniem GC Stick.



Wstrzyknięta i utwardzona światłem pasta Light Body.



Po oczyszczeniu i zredukowaniu uzupełnień.



Modyfikacja powierzchni za pomocą Lustre Paint, pokrytej Heavy Body Enamel HB-EL lub HB-ED.



Końcowa obudowa wykończona Lustre Paint CLF.

Przypadki: Stephen Lusty, Wielka Brytania  
EXACLEAR, GC Stick i GRADIA PLUS są znakami towarowymi GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE Spółka Akcyjna**  
Przedstawicielstwo w Polsce  
ul. Królowej Jadwigi 325B  
PL - 30-234 Kraków  
Tel. +48.12.425.14.74  
Fax. +48.12.625.28.60  
info.poland@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

