

Obțineți o imagine
clară



EXACLEAR de la GC

Material vinil polisiloxanic
transparent

Partener GRADIA® PLUS pentru
un flux de lucru transparent

- Control excelent al detaliilor
- Manipulare simplă
- Priză rapidă

GC

EXACLEAR și GRADIA PLUS

de la GC

EXACLEAR este extrem de util pentru realizarea coroanelor sau fațetelor provizorii. Utilizarea lui GC GRADIA PLUS Light Body în locul unui material acrilic este mai simplă și mai puțin sensibilă la tehnica folosită. Doar injectați materialul în mulajul EXACLEAR!

Aveți un control vizual optim datorită gradului ridicat de transparență și a polimerizării eficiente ce se realizează prin fotopolimerizare prin mulaj. Materialul este ferm, dar flexibil, și poate fi îndepărtat și re poziționat ușor, fără a se rupe.

Poate fi păstrat un spațiu pentru acoperire cu Heavy Body Enamel HB-EL sau HB-ED. Caracterizarea finală și glazurarea cu Lustre Paint este ca cireșa de pe tort!



EXACLEAR injectat într-o port-amprentă creată prin termoformare cu vacuum, aplicat peste macheta de ceară.



Modelul preparat, izolat cu separator de silicon peste preparație și cu separator GC GRADIA PLUS în rest.



Injectare Light Body.



Compozitul este polimerizat prin EXACLEAR foarte transparent.



După îndepărtarea siliconului și curățarea orificiilor.



Restaurări provizorii finisate cu Lustre Paint.

Partenerul dumneavoastră în situații clinice complexe



Bont protetic provizoriu cu strat de opac GRADIA PLUS și consolidare cu GC Stick.



Light Body injectat și polimerizat.



După curățare și cut back -ul restaurărilor.



Modificarea suprafeței cu Lustre Paint, acoperită cu Heavy Body Enamel HB-EL sau HB-ED.



Caz final finisat cu Lustre Paint CLF.



Cazuri: Stephen Lusty, Regatul Unit al Marii Britanii
EXACLEAR, GC Stick și GRADIA PLUS sunt mărci înregistrate a GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Romania
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 București
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

'GC'