

# Za bistar pogled



## GC EXACLEAR

Proziran vinil-polisiloksanški  
materijal

Partner materijala  
GRADIA® PLUS  
za transparentne radove

- Izvrsna kontrola detalja
- Lako rukovanje
- Brzo stvrdnjavanje

**GC**

# GC EXACLEAR i GRADIA PLUS

EXACLEAR je materijal vrlo pogodan za izradu privremenih krunica ili faseta. Mnogo je lakše koristiti GC GRADIA PLUS Light Body nego akrilat pa je manje osetljiv na tehniku. Materijal se jednostavno ubrizga u EXACLEAR silikonski ključ!

Zbog visoke prozirnosti vizualna kontrola je optimalna pa se svetlosnom polimerizacijom kroz silikonski ključ može postići sveobuhvatna polimerizacija. Iako čvrst, materijal je fleksibilan i može se lako pomicati ili premeštati, bez raspadanja.

Može se ostaviti prostor za prekrivanje materijalom Heavy Body Enamel HB-EL ili HB-ED. Završno bojenje i glaziranje pomoću Lustre Paint je poput glazure na torti!



EXACLEAR ubrizgan u vakuumski formiran ključ, postavljen na navoštenu model.



Model brušenih zuba premazan silikonskim separatorom pa GC GRADIA PLUS separatorom preko ostalih zuba.



Ubrizgavanje Light Body materijala.



Kompozit se stvrdnjava kroz proziran EXACLEAR.



Model nakon odstranjenja silikona i čišćenja ulaznih kanala.



Privremena nadoknada završena pomoću Lustre Paint.

## Vaš partner za složene kliničke situacije



Privremene nadogradnje implantata sa slojem GRADIA PLUS opakera i ojačane GC Stick štapićima.



Ubrizgan i stvrdnut Light Body materijal.



Nakon čišćenja i redukovanja nadoknada.



Modifikacija površine materijalom Lustre Paint, prekrivenim materijalom Heavy Body Enamel HB-EL ili HB-ED.



Završno izrađena nadoknada pomoću Lustre Paint CLF.



Klinički slučaj: Stephen Lusty, Velika Britanija  
EXACLEAR, GC Stick i GRADIA PLUS su zaštitni znaci kompanije GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Serbia  
Dimitrija Tucovića 119,  
6th floor, ap.35  
RS - 11000 Beograd  
Tel. +381.11.24.05.419  
Fax. +381.11.24.05.419  
Mob. +381.63.78.82.777  
info.serbia@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**'GC'**