

Отримайте прозорість
огляду



EXACLEAR від GC

Прозорий вініл
полісилоксановий матеріал

ПАРТНЕР GRADIA® PLUS
ДЛЯ ПРОЗОРОЇ РОБОТИ

- Відмінний контроль деталей
- Легке моделювання
- Швидке твердіння

GC

EXACLEAR та GRADIA PLUS

ВІД GC

EXACLEAR ідеально підходить для створення коронок чи вінірів. Використовувати GC GRADIA PLUS Light Body замість акрилу простіше завдяки невибагливій техніці застосування. Просто внесіть матеріал у шаблон, що виготовлений з EXACLEAR!

Ви маєте оптимальний візуальний контроль завдяки високій прозорості, в той час як ефективна полімеризація досягається завдяки проходженню світла крізь шаблон. Матеріал твердий та гнучкий одночасно, його легко видалити та встановити знову без розривів.

Можна зберегти місце для покриття з Heavy Body Enamel HB-EL чи HB-ED, а фінальне розфарбування за допомогою Lustre Paint зробить вашу реставрацію неперевершеною!



EXACLEAR внесений поверх wax-up.



Відпрепарована модель, куки вкриті силіконовим сепаратором, інші зуби – GC GRADIA PLUS separator.



Ін'єкційне внесення Light Body.



Композит полімеризований крізь неймовірно прозорий EXACLEAR.



Після видалення силікону та очищення отворів.



Тимчасова реставрація завершена за допомогою Lustre Paint.

Ваш партнер у складних клінічних ситуаціях



Тимчасові абатменти з опаквим шаром GRADIA PLUS та армуванням GC Stick.



Ін'єкційно внесений та полімеризований Light Body.



Після очищення та проведення cut back реставрації.



Поверхня, модифікована з Lustre Paint, покрита з Heavy Body Enamel HB-EL чи HB-ED.



Кінцевий результат завершений за допомогою Lustre Paint CLF.

Клінічні випадки: Stephen Lusty, Великобританія
EXACLEAR, GC Stick та GRADIA PLUS – торгові марки GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.
GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
<https://europe.gc.dental/uk-UA>

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

