


Créez votre monde  
avec **Initial** de **GC**,

le système de céramique le plus complet pour toutes les indications.



# Bienvenue dans la gamme Initial „One Body“

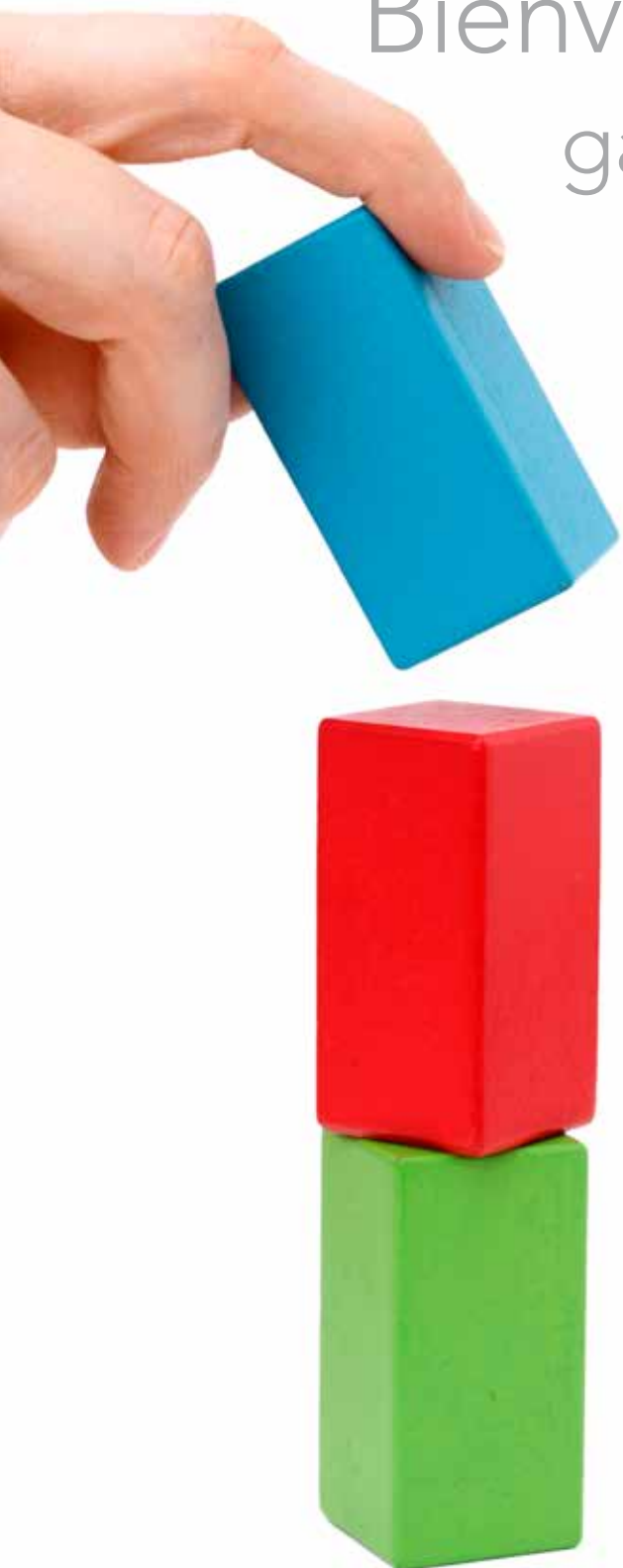

Initial IQ –  
„One Body“ de GC.

Layering-over-Zircon  
Layering-over-Metal  
Press-over-Zircon  
Press-over-Metal

Une qualité inégalée,  
une esthétique reproductible  
et une réalisation simple et  
économique.

**GC**

# GC Initial IQ -

Layering-over-Metal e  
Press-over-Metal e

Grâce au développement de l'Initial IQ - One Body - Concept, GC peut maintenant proposer des systèmes compacts de céramique pour la reproduction rapide et facile des teintes Vita®. Cette approche permet aux prothésistes de se concentrer sur la morphologie afin de créer, lors de l'étape finale, vitalité et aspect naturel en combinaison avec les nouveaux maquillants céramique en 3 Dimensions GC Initial IQ Lustre Paste NF. Le concept GC Initial IQ - One Body est synonyme de qualité uniforme et reproductible en peu de temps et avec un seul matériau.

Le concept de «One Body» est une procédure simple et économique, où le volume est réalisé avec une seule poudre.

- Compatible avec les alliages céramiques standard et les infrastructures à base de Zr
- Disponible en stratification (LOM-LOZ) et en système pour la pressée (POM-POZ)
- Rapide et facile à appréhender
- Uniformité de la qualité du travail indépendamment de la technique utilisée.

## Etape 1 : Préparation sur armature

### Zircone

#### Layering-over-Zircon



Armature en dioxyde de zirconium

#### Press-over-Zircon



Appliquez une couche de GC Initial IQ Light Reflective Liner pour masquer l'armature Zirconium.



Appliquez une fine couche de Power Frame Modifiers (PFM).

### Métal

#### Layering-over-Metal



Armatures coulées ou usinées (CAD/CAM).


#### Press-over-Metal



Appliquez la première couche d'Opaque (lait d'opaque) avec une pâte Opaque GC Initial MC à l'aide d'un pinceau plat. Avant la cuisson, saupoudrez la surface de cristaux « Fluor crystals ».



## CET

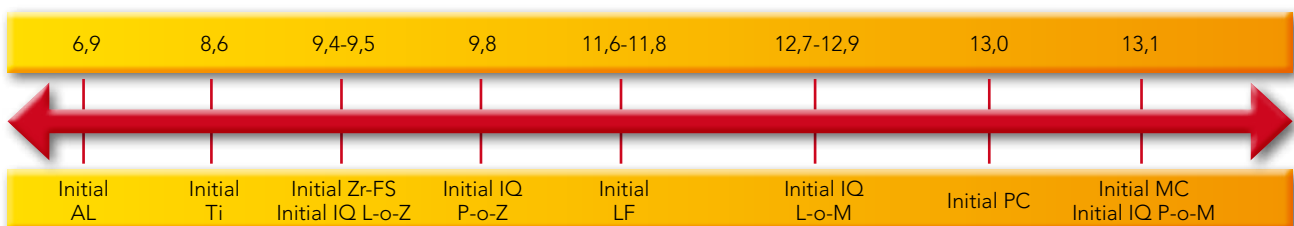

# - One Body

t Layering-over-Zircon  
t Press-over-Zircon

## Etape 2 : Montage selon la technique choisie

### Layering-over

- Une seule poudre pour la réalisation de la dent.
- Une alternative rapide et économique pour des couronnes et bridges céramique esthétiques.
- Aucun équipement supplémentaire.

#### Layering-over-Zircon



Volume définitif complet en monocouche.



Résultat après une cuisson.

#### Layering-over-Metal



### Press-over

- Modelage complet en cire
- Une large variété de systèmes de préforme en cire est disponible sur le marché pour vous permettre de gagner du temps.
- Pour obtenir une parfaite adaptation marginale, enduisez les limites cervicales de cire et pressez.
- Les lingotins offrent une reproductibilité de la teinte... pour moins de retouches.

#### Press-over-Zircon



Après les cuissons des Opaques, la restauration est totalement recouverte de cire (système de préforme). L'épaisseur minimale doit être de 0.8 mm pour obtenir un résultat final esthétique correct.



Résultat après pressée.

#### Press-over-Metal



## Etape 3 : Finition avec les GC Lustre Pastes NF

Les GC Initial IQ Lustre Pastes NF sont des maquillants céramiques en 3 dimensions conçus pour apporter profondeur et vitalité aux systèmes pressés Initial (Press-over) et monocouche stratifié (Layering-over). Les Lustre Paste NF peuvent être utilisées avec toute la gamme initial du fait de leur parfaite adaptation aux divers CET « bas » et « élevé ». Disponibles en pots prêts à l'emploi, les Lustre Pastes NF sont composées de fines particules de céramique et peuvent être appliquées en couche épaisse, offrant une vitalité inégalée et une apparence naturelle glacées à toutes vos restaurations.



## Conditionnement



### Coffret GC Initial IQ – One Body, Layering-over-Zircon

Contenu :  
7 x Light Reflective Liners 3 g (1-6, BL), Liner Thinner, 5 x IQ/L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D, BL), liquide de modelage (modeling liquid), manuel technique



### Coffret GC Initial IQ – One Body, Layering-over-Metal

Contenu :  
5 x MC/Paste Opaque 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), liquide de modelage (modelling liquid), plaque de verre, pinceau, manuel technique



### Coffret GC Initial IQ – One Body, Press-over-Zircon

Contenu :  
4 x Power Frame Modifier (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x lingotins (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), 10 x Correction Powders (poudres de correction : A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), liquide de modelage (modelling liquid), base de cylindre Medium (200 g) + cylindre silicone, 10 x pistons de pressée à usage unique pour plots de 2 g



### Coffret GC Initial IQ – One Body, Press-over-Metal

Contenu :  
Fluo Crystals, IQ/lingotins: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/Effect Ingots Bleach: AO-M, BO-M, BOO-M, IQ/Correction Powder (poudres de correction) A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/Correction Powder Bleach: AOM, BO-M, BOO-M, LF/ liquide de modelage (modelling liquid), base de cylindre Medium, cylindre silicone, piston de pressée à usage unique pour plots de 2 g



### Coffret GC Initial IQ – Lustre Pastes NF

Contenu :  
1x Neutral (4 g), 1 x Value (4 g), 4 x Body Shades (4 x 4 g), 8 x Enamel effect shades (8 x 4 g), Diluting Liquid (8 ml), Refreshing Liquid, (8 ml), 1 palette de mélange, 2 pincesaux, mode d'emploi illustré

Pour en savoir plus, contactez votre représentant local GC.

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

#### GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin  
94370 Sucy en Brie Cedex  
Tél. +33.1.49.80.37.91  
Fax. +33.1.45.76.32.68  
info.france@gc.dental  
<http://france.gceurope.com>

#### GC Europe NV

**Benelux Sales Department**  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 13  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16 74.18.60  
info.benelux@gc.dental  
<http://benelux.gceurope.com>

#### GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office  
Bergstrasse 31c  
CH-8890 Flums  
Tel. +41.81.734.02.70  
Fax. +41.81.734.02.71  
info.switzerland@gc.dental  
<http://switzerland.gceurope.com>

